



Hillrom™

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™



Manuel d'entretien

Versions du logiciel 2.0X – 2.4X

© 2023 Welch Allyn. Tous droits réservés. L'acheteur est autorisé à copier la présente publication, en vue d'une distribution interne uniquement, en utilisant le support fourni par Welch Allyn. Aucune autre utilisation, reproduction ou distribution de la présente publication ou de toute partie de celle-ci n'est autorisée sans l'accord écrit de Welch Allyn.

Mentions légales. Welch Allyn, Inc. (« Welch Allyn ») décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages causés à des tiers susceptibles de découler (i) d'une utilisation du produit non conforme aux instructions, précautions et avertissements ou aux indications d'utilisation publiées dans ce manuel, ou (ii) de toute utilisation illégale ou inappropriée du produit.

Welch Allyn, Connex, SureTemp et SureBP sont des marques déposées de Welch Allyn.

Integrated Pulmonary Index, Oridion et Microstream sont des marques commerciales de la société Medtronic. Aucune licence implicite. La détention ou l'achat de cet appareil n'implique aucune autorisation expresse ou implicite dans l'utilisation de l'appareil avec des produits d'échantillonnage du CO2 non autorisés qui sont susceptibles, seuls ou en combinaison avec cet appareil, de relever d'un ou de plusieurs brevets concernant cet appareil et/ou les produits d'échantillonnage du CO2.

Radical-7R, Pulse CO-Oximeter, rainbow Acoustic Monitoring, RRa, et ReSposable sont des marques commerciales, et SET, LNCS, SpHb, rainbow et Masimo sont des marques déposées de Masimo Corporation. La détention ou l'achat d'un appareil équipé de Masimo n'implique aucune autorisation expresse ou implicite dans l'utilisation de l'appareil avec des câbles ou capteurs non autorisés susceptibles, seuls ou en combinaison avec cet appareil, de relever d'un ou de plusieurs brevets concernant cet appareil. Pour plus d'informations sur les brevets Masimo, veuillez consulter le site www.masimo.com/patents.htm.

Le système de monitoring patient SpO2 Nellcor avec la technologie OxiMax et la technologie Nellcor SpO2 OxiMax sont des marques déposées d'une société de Medtronic. Pour plus d'informations sur les brevets Nellcor, veuillez consulter le site <https://www.masimo.com/company/masimo/patents/>.

Braunet ThermoScan sont des marques déposées de Braun GmbH.

Nonin est une marque déposée de Nonin Medical, Inc.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG.

Welch Allyn a fourni à Clinical Dynamics of CT, LLC les tableaux d'étalonnage (tableaux CAL) à utiliser dans les simulateurs de PNI AccuPulse et AccuSim. Pour plus d'informations, consultez <https://www.clinicaldynamics.com/contact>.

Les logiciels de ce produit sont protégés par la loi sur le copyright 2023 de Welch Allyn ou de ses fournisseurs. Tous droits réservés. Le logiciel est protégé par les lois des États-Unis d'Amérique relatives aux droits d'auteur, ainsi que par les dispositions des traités internationaux applicables dans le monde entier. En vertu de ces lois, le détenteur de la licence est autorisé à utiliser la copie du logiciel livrée avec cet appareil pour le fonctionnement du produit avec lequel il est fourni. La copie, la décompilation, l'ingénierie inverse, le désassemblage ou la réduction à toute forme perceptible par l'homme sur le logiciel sont interdits. Il ne s'agit pas d'une vente du logiciel ou d'une copie de celui-ci. Welch Allyn et ses distributeurs restent titulaires des droits, titres et propriétés relatifs au logiciel.

Ce produit peut contenir un logiciel dit « libre » ou à « code source ouvert » (FOSS). Hillrom utilise et prend en charge l'utilisation des logiciels FOSS. Nous considérons que les logiciels FOSS rendent nos produits plus fiables et sûrs et offrent davantage de flexibilité à nos clients. Pour en savoir plus sur les logiciels FOSS susceptibles d'être utilisés dans ce produit, consultez notre site Web FOSS à l'adresse hillrom.com/opensource. Si nécessaire, une copie du code source FOSS est disponible sur notre site Web FOSS.

BREVETS/BREVET hillrom.com/patents.

Peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Voir l'adresse Internet ci-dessus. Les sociétés Hillrom sont propriétaires de brevets européens, américains et d'autres brevets dont certains en instance.

Pour plus d'informations sur un produit, contactez l'assistance technique Hillrom : hillrom.com/en-us/about-us/locations/.



80026026 Ver. B

Date de révision : 01/2023



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road Skaneateles Falls,
NY 13153, États-Unis

Welch Allyn, Inc. est une filiale de Hill-Rom Holdings, Inc.

hillrom.com



Hillrom™



BRAUN

EarlySense

Table des matières

Symboles	1
Sécurité	5
Avertissements et mises en garde	5
Considérations générales en matière de sécurité	6
Décharge électrostatique (DES)	6
Présentation	9
Objectif et champ d'application	9
Services d'assistance technique	10
Périodicité d'entretien recommandée	14
L'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool	16
Performances de la batterie	17
Commandes, indicateurs et connecteurs	19
Paramètres avancés	23
Général	23
Paramètres	30
Gestion des données	40
Réseau	45
Service	52
Séquence de mise sous tension	61
Dépannage	63
Symptômes et solutions	63
Messages d'alarmes techniques	80
Démontage et réparation	101
Outils et équipements requis	104
Présentation du démontage	105
Section A	107
Mise hors tension de l'appareil	107
Retrait de la batterie	108
Retrait du boîtier arrière	109
Retrait de la porte de communication	111
Démontage du boîtier arrière	114
Démontage du châssis principal	123
Démontage du boîtier frontal	150

Section B	165
Mise hors tension de l'appareil	166
Retrait de la batterie	167
Retrait du boîtier arrière	168
Retrait de la porte de communication	171
Démontage du boîtier arrière	174
Démontage du châssis principal	184
Démontage du boîtier frontal	211
Vérification fonctionnelle et étalonnage	225
Tests de vérification fonctionnelle	225
Vérifications fonctionnelles de base	230
Test de sécurité électrique	249
Connecteur de la tige de terre	250
Options, mises à niveau et licences	253
Options, mises à niveau et licences disponibles	254
Options d'installation	258
Configuration requise du micrologiciel de l'hôte	261
Mises à niveau de paramètres Masimo	261
Configuration des options	262
Polices de caractères chinois et tables (IME) d'éditeur de méthode de saisie	263
Unités remplaçables sur site	265
Tableau des kits d'entretien	265
Licences	272
Services SmartCare pour la maintenance et la réparation	273
Formation sur l'entretien et la réparation	275
Outils d'entretien	275
Annexe	277
Conditions de décontamination et de nettoyage en cas de retour	277
Identification du moniteur et des sous-systèmes	280
Valeurs d'usine par défaut	284
Référence au démontage et à la réparation	307
Schéma d'interconnexion	317
Trousse à outils d'entretien et de maintenance	320
Connex Direct	325
Introduction	325
Configuration d'Active Directory	329
Flux de travail du projet	354
Dépannage	355
Fiche d'entretien	363

Symboles

Pour obtenir des informations concernant l'origine de ces symboles, consulter le glossaire des symboles Welch Allyn : <https://www.hillrom.com/content/dam/hillrom-aem/us/en/sap-documents/LIT/80022/80022945LITPDF.pdf>.

Symboles figurant dans la documentation



AVERTISSEMENT Les messages d'avertissement dans ce manuel indiquent des conditions ou des pratiques qui pourraient entraîner des blessures, des maladies ou la mort.



ATTENTION Les mises en garde de ce manuel décrivent des situations ou des pratiques pouvant endommager l'équipement ou tout autre appareil, ou entraîner la perte de données.



AVERTISSEMENT Surface chaude. Ne pas toucher.



Suivre le mode d'emploi — action obligatoire.

Une copie du mode d'emploi est disponible sur ce site Web.

Une version imprimée du mode d'emploi peut être commandée auprès de Hillrom et sera livrée dans un délai de 7 jours.

Symboles d'alimentation



Mise sous tension / Économiseur d'écran
[modèles récents]













Borne équipotentielle







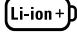


Mise sous tension / Économiseur d'écran
[anciens modèles]





2 Symboles













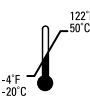




	(À l'écran) Le moniteur est branché à une prise de courant alternatif		Batterie absente ou défectueuse
	(Sur le moniteur, indicateur vert) Présence de courant alternatif, batterie pleine		Niveau de charge de la batterie
	(Sur le moniteur, indicateur orange) Présence de courant alternatif, batterie en charge		Couvercle de la batterie
	Courant alternatif (CA)		Batterie rechargeable
	Batterie lithium-ion		Alimentation d'entrée CA

Symboles relatifs à la connectivité

	USB		Ethernet RJ-45
	<p>Puissance du signal du réseau sans fil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéal (4 barres) • Bien (3 barres) • Acceptable (2 barres) • Faible (1 barre) • Pas de signal (pas de barres) • Pas de connexion (vide) 		Appel infirmier [modèles récents]
			Appel infirmier [anciens modèles]
	Connecté à la station centrale		Déconnecté de la station centrale

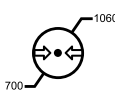Symboles divers




	Entrée de l'échantillonnage de CO2		Sortie/évacuation de l'échantillonnage de CO2
	Fabricant		Rotation limitée/Tourner complètement vers la droite

	Référence pour commander		Numéro de série
	Ne pas réutiliser		Indications RoHS de la Chine pour le contrôle de la pollution des produits électroniques de l'industrie de l'information. XX indique la période d'utilisation écologique en années.
	Radiation électromagnétique non ionisante		Recycler ce produit séparément des autres produits jetables
	Restrictions d'emploi d'appareil sans fil en Europe. Équipement radio de classe 2 de la Communauté européenne.		Appel de maintenance
	Pièces appliquées de type BF protégées en cas de défibrillation		Pièces appliquées de type CF protégées en cas de défibrillation
	Plage de pression atmosphérique		Ne pas injecter
	Plage de température de transport et de stockage		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Recycler	IPX2 (Moniteur de signes vitaux)	IP = marquage de protection international X = absence d'indice de protection contre la pénétration d'objet 2 = Protection contre les gouttes d'eau tombant à la verticale lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15°
		IPX0 (Système mural intégré)	Niveau de protection fourni par le boîtier en termes d'infiltration dangereuse de liquides
	Ne pas exposer à une flamme non protégée		Identifiant du produit

4 Symboles

	Limite d'empilement par chiffre		Tenir au sec
---	---------------------------------	--	--------------

Symboles figurant sur le support mobile

	Charge de travail de sécurité maximale (valeurs spécifiques présentées par le symbole)		Masse en kilogrammes (kg)
	ATTENTION Les mises en garde de ce manuel décrivent des situations ou des pratiques pouvant endommager l'équipement ou tout autre appareil, ou entraîner la perte de données.		

Sécurité

Tous les utilisateurs du moniteur doivent lire et comprendre toutes les informations de sécurité figurant dans ce manuel avant d'utiliser ou de réparer le moniteur.

En vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu, distribué ou utilisé que par un médecin autorisé, ou sur prescription médicale.

Avertissements et mises en garde



AVERTISSEMENT Risque lié à la sécurité. Procédez fréquemment aux contrôles visuels et électriques des câbles, capteurs et fils des électrodes. Tous les câbles, capteurs et fils des électrodes doivent être inspectés et entretenus convenablement, et gardés en bon état, pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement et la protection des patients.



AVERTISSEMENT Risque lié à la sécurité. Placez le système et les accessoires à un endroit où ils ne risquent pas de blesser le patient en cas de chute d'une étagère ou d'un support.



AVERTISSEMENT Risque d'incendie et d'explosion. Ne pas utiliser le système à proximité d'un mélange anesthésique inflammable au contact de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote, dans des environnements enrichis en oxygène ou dans tout autre environnement potentiellement explosif.



AVERTISSEMENT Risque de mesure imprécise. L'infiltration de poussières et de particules dans l'appareil peut affecter la précision des mesures de pression artérielle. Utilisez le système dans des environnements propres pour garantir la précision des mesures. En cas de présence ou d'accumulation de poussières au niveau des orifices de ventilation du système, il convient de faire inspecter et nettoyer le système par un technicien qualifié.



AVERTISSEMENT Des batteries défectueuses peuvent endommager l'appareil. Si la batterie semble endommagée ou craquelée, remplacez-la immédiatement par une batterie approuvée par Welch Allyn.



MISE EN GARDE Avant de démonter l'appareil ou d'installer des options, débranchez le patient du système, mettez l'appareil hors tension et débranchez l'alimentation et tous les accessoires annexes (par exemple, les capteurs de SpO₂, les tuyaux et brassards du tensiomètre et les sondes de température) de l'appareil.



MISE EN GARDE Pour vous assurer que le système est conforme à ses spécifications de performance, stockez-le et utilisez-le dans un environnement capable de respecter les plages spécifiées de température et d'humidité.



MISE EN GARDE Le système risque de ne pas fonctionner normalement en cas de chute ou d'endommagement. Protégez-le contre tout choc ou impact violent. N'utilisez pas le système s'il semble être détérioré.



MISE EN GARDE Ne raccordez pas plusieurs patients à un système ou ne connectez pas plusieurs systèmes à un patient.



MISE EN GARDE Ne faites pas fonctionner le système en cas d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou avec une chambre hyperbare.



MISE EN GARDE Ne stérilisez pas en autoclave le système. Stérilisez en autoclave les accessoires uniquement si les instructions du fabricant l'autorisent explicitement.




MISE EN GARDE Ne dépassez pas les limites de poids maximal de votre support mobile avec paniers ou corbeilles remplis. Reportez-vous à la section « Caractéristiques » du *Mode d'emploi* de l'appareil pour connaître les limites de poids maximales du panier/de la corbeille et du support mobile.

Considérations générales en matière de sécurité

- Si le moniteur détecte un problème irrécupérable, il affiche un message d'erreur. Pour plus d'informations, consultez la section « Dépannage ».
- Pour garantir la sécurité du patient, utilisez exclusivement les accessoires recommandés ou fournis par Welch Allyn. (Consultez la liste des accessoires dans la documentation utilisateur ou sur <https://parts.hillrom.com/hillromUS/en/>.) Utilisez systématiquement des accessoires conformes aux normes en vigueur dans votre établissement et conformes aux recommandations et aux instructions du fabricant. Suivez systématiquement le mode d'emploi du fabricant.
- Welch Allyn recommande le recours exclusif au personnel d'entretien Welch Allyn ou à un centre de réparation agréé pour les tâches d'entretien sous garantie. Tout entretien par un personnel non agréé peut se solder par l'annulation de la garantie.

Décharge électrostatique (DES)

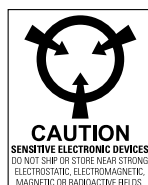

MISE EN GARDE Une décharge électrostatique (DES) peut endommager ou détruire des composants électroniques. Manipulez les composants sensibles à l'électricité statique uniquement sur une station de travail antistatique.



MISE EN GARDE Il convient de supposer que tous les composants électriques et électroniques du moniteur sont sensibles à l'électricité statique.

Une décharge électrostatique est le brusque passage du courant électrique d'un objet chargé à un autre objet ou à la terre. Les charges électrostatiques peuvent s'accumuler sur des éléments courants tels que les gobelets en mousse, les rubans adhésifs, les vêtements synthétiques, les matériaux d'emballage en mousse non traitée, les sacs en plastique non traité et les dossiers, pour n'en citer que quelques-uns.

Les composants et les assemblages électroniques, s'ils ne sont pas correctement protégés contre les décharges électrostatiques, peuvent être irrémédiablement endommagés ou détruits lorsqu'ils se trouvent à proximité ou entrent en contact avec des objets chargés en électricité statique. Si vous manipulez des composants ou des assemblages qui ne sont pas rangés dans des emballages de protection et si vous ne savez pas si ces éléments sont sensibles à l'électricité statique, partez du principe qu'ils sont sensibles à l'électricité statique et manipulez-les conformément aux instructions.

- Procédez à la maintenance dans un environnement protégé contre les décharges d'électricité statique. Utilisez systématiquement les techniques et les équipements destinés à protéger le personnel et les équipements contre toute décharge électrostatique.
- Retirez les composants et les assemblages sensibles à l'électricité statique de leurs sacs de protection électrostatique, uniquement aux postes de travail antistatiques ; à savoir une table et un tapis correctement mis à la terre, et uniquement lorsque vous portez un bracelet de mise à la terre (avec une résistance d'au moins 1 mégohm en série) ou tout autre dispositif de mise à la terre.
- Utilisez uniquement les outils de mise à la terre lors de l'insertion, de l'ajustement ou de la suppression des composants et des assemblages sensibles à l'électricité statique.
- Retirez ou insérez des composants et des assemblages sensibles à l'électricité statique uniquement lorsque le moniteur est mis hors tension.
- Insérez et scellez les composants et les assemblages sensibles à l'électricité statique dans leurs sacs de protection électrostatique d'origine avant de les retirer des zones protégées contre les décharges d'électricité statique.
- Testez systématiquement votre bracelet de mise à la terre, le tapis, la surface de travail conductrice et le cordon mis à la terre avant de retirer les composants et les assemblages de leurs sacs de protection électrostatique et avant de commencer toute procédure de démontage ou de montage.

Présentation

Objectif et champ d'application

Ce manuel décrit les procédures relatives à la maintenance préventive périodique et à l'entretien correctif pour Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series, versions du micrologiciel 2.0X-2.4X. Il a été conçu pour être utilisé uniquement par du personnel compétent et qualifié.

Ce manuel décrit les procédures relatives à la maintenance préventive périodique et à l'entretien correctif pour Welch Allyn Connex Integrated Wall System, version du micrologiciel 2.3X-2.4X. Il a été conçu pour être utilisé uniquement par du personnel compétent et qualifié.

L'entretien correctif porte sur les unités remplaçables sur site. Il s'agit des assemblages de circuits imprimés et de certains sous-assemblages, des pièces du boîtier et d'autres pièces.



MISE EN GARDE Les réparations de composants de circuits imprimés et de sous-ensembles ne sont pas prises en charge. Suivez uniquement les procédures de réparation décrites dans ce manuel.



AVERTISSEMENT Lors d'une procédure d'entretien, suivez scrupuleusement les instructions telles que décrites dans ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil, annuler la garantie du produit et causer de graves blessures.

Vous trouverez dans les fichiers d'aide Outil d'entretien Welch Allyn des instructions pour les tests fonctionnels et le contrôle des performances.

Ce manuel s'applique uniquement à cet appareil. Pour la maintenance de tout autre appareil, consultez le manuel de maintenance de l'appareil en question.

Il incombe à un technicien qualifié en usine ou à un centre de maintenance agréé Welch Allyn de réaliser les tâches d'entretien non décrites dans ce manuel.

Documents associés

Lors de l'utilisation de ce manuel, consultez ce qui suit :

- *Mode d'emploi Welch Allyn Connex® Devices, version 2.4X du logiciel*
- Outil d'entretien Welch Allyn
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- *Guide de configuration et d'installation de l'outil d'entretien Welch Allyn*
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- *Manuel d'entretien du thermomètre auriculaire Welch Allyn Braun ThermoScan® PRO 6000*

[cliquez ici pour télécharger le fichier PDF](#)

- *Mode d'emploi du testeur d'étalonnage Welch Allyn 9600 plus* [cliquez ici pour télécharger le PDF](#)
- Site Web Hillrom : hillrom.com

Services d'assistance technique

Welch Allyn offre les services d'assistance technique suivants :

- Assistance téléphonique
- Prêt d'appareil
- Contrats d'entretien
- Formation sur l'entretien technique
- Pièces de rechange
- Service produits

Pour plus d'informations sur l'un de ces services, contacter l'assistance technique Hillrom : hillrom.com/en-us/about-us/locations/.

Prêts d'appareil

Pour les réparations sous garantie ou hors garantie non couvertes par un contrat d'assistance, des prêts sont disponibles à un coût nominal, sous réserve de disponibilité. Un paiement est requis avant toute expédition et pour tous les prêts non couverts par un contrat d'assistance.

Les centres de maintenance Welch Allyn, qui offrent un service de réparation pour ce produit, peuvent prêter un appareil pendant que l'appareil est en réparation, à la demande du client. Les appareils prêtés sont gratuits pour les produits en cours de réparation, dans le cadre d'un contrat d'assistance qui inclut une clause de prêt gratuit.

Le prêt d'équipement pour les modules de composants individuels n'est pas disponible.

Options d'entretien

Services *SmartCare*™ pour la maintenance et la réparation

Bien que les garanties des produits fournissent une assurance fondamentale de la qualité du matériel Welch Allyn, elles n'englobent pas toute la gamme de services et d'assistance dont vous avez besoin. Welch Allyn offre un entretien et une assistance Premium dans le cadre de son programme *SmartCare*. Que vous entreteniez vos appareils et ayez besoin d'une assistance minimum ou bien que vous souhaitiez que vos appareils fassent l'objet d'un entretien par nos soins, Welch Allyn propose un programme adapté à vos besoins. La liste des contrats d'entretien et d'assistance est présentée dans la section « Unités remplaçables sur site » de ce manuel.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial ou visitez notre site Web :

<https://www.hillrom.com/en/services/>.

Gestion à distance *SmartCare*

La gestion à distance *SmartCare* est un portail sécurisé basé sur le cloud qui offre aux biologistes médicaux un accès permettant de gérer leurs appareils connectés Hillrom à distance dans un portail centralisé.

Pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une liste complète des informations de compatibilité, reportez-vous au Manuel d'utilisation de la gestion à distance SmartCare.

Service de garantie

Toutes les réparations sur des produits sous garantie doivent être effectuées ou approuvées par Welch Allyn. Consultez tous les services de garantie rendus par le service produits Welch Allyn ou un autre centre de maintenance agréé Welch Allyn. Obtenez un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) pour tous les retours au service produits Welch Allyn en cliquant sur ce lien :

<http://www.welchallyn.com/en/service-support/submit-a-repair.html>.



MISE EN GARDE Toute réparation non autorisée annulera la garantie du produit.

Service hors garantie

Le service produits et les centres de maintenance agréés Welch Allyn prennent en charge les réparations hors garantie. Contactez un centre de maintenance régional Welch Allyn pour connaître les prix et les services offerts.

Welch Allyn vend des pièces de rechange modulaires pour le service hors garantie. Seuls des ingénieurs biomédicaux / cliniques qualifiés doivent assurer ce service en suivant les consignes de ce manuel d'entretien.

Welch Allyn met à la disposition des ingénieurs biomédicaux / cliniques une formation sur l'entretien technique. Cliquez sur ce [lien](#) pour plus d'informations.

Réparations

Un centre de maintenance Welch Allyn doit effectuer toutes les réparations sur les produits sous garantie, sauf en cas de contrat de partenariat de soins Biomed Welch Allyn, qui vous autorise à réaliser des entretiens de l'appareil sous garantie.



MISE EN GARDE Toute réparation non autorisée annulera la garantie du produit.

Un technicien qualifié ou un centre de maintenance Welch Allyn doit réparer les produits hors garantie.

Si Welch Allyn vous demande de lui retourner un produit pour le faire réparer ou pour un entretien de routine, prenez rendez-vous avec le centre de maintenance le plus proche de chez vous.

Assistance technique Welch Allyn

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème avec l'appareil, appelez le centre d'assistance technique Welch Allyn le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide. Un représentant vous aidera à identifier le problème et s'efforcera de le résoudre par téléphone pour éviter tout retour inutile.

Pour accélérer le délai de réponse à votre question, soyez prêt à préciser les circonstances (étapes exécutées) ainsi que la date et l'heure de la survenue du problème. En outre, les fichiers journaux et les fichiers de configuration enregistrés sur l'appareil peuvent contribuer au diagnostic et au dépannage. Vous pouvez facilement enregistrer ces fichiers depuis l'appareil sur une clé USB à l'aide des commandes de l'onglet Service (Entretien). Consultez la section « Menu Service (Entretien) » de ce manuel pour plus de détails.

Si votre produit nécessite une garantie, une garantie prolongée ou un service de réparation hors garantie, un représentant de l'assistance technique Welch Allyn enregistrera toutes les informations


nécessaires pour créer un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA). Le représentant de l'assistance technique vous indiquera l'adresse du centre de maintenance Welch Allyn à laquelle lui envoyer l'appareil en question.

L'assistance technique est disponible pendant les heures de bureaux locales.


Retour des produits

En cas de retour d'un produit à Welch Allyn à des fins de maintenance, veuillez à déterminer les informations suivantes :

- Nom du produit, numéro du modèle et numéro de série. Vous pouvez trouver ces informations sur les étiquettes du produit et du numéro de série, sur la partie inférieure de l'appareil.

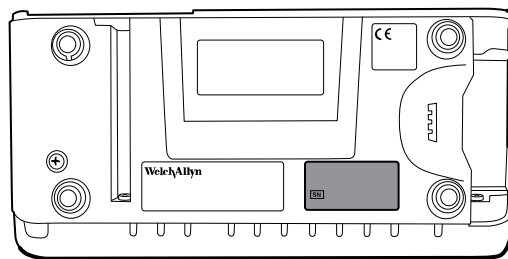

- Adresse complète pour l'expédition du retour.
- Nom et numéro de téléphone du contact.
- Instructions spéciales d'expédition.
- Bon de commande ou numéro de carte de paiement si le produit n'est pas sous garantie.
- Numéro du contrat SmartCare si le produit bénéficie d'un contrat d'entretien.
- Description complète du problème ou de la demande d'entretien.
- Nom du produit, numéro du modèle et numéro de série. Vous pouvez trouver ces informations sur les étiquettes du produit et du numéro de série, sur la partie inférieure de l'appareil.

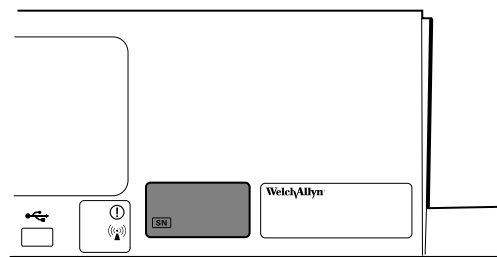

- Adresse complète pour l'expédition du retour.
- Nom et numéro de téléphone du contact.
- Instructions spéciales d'expédition.
- Bon de commande ou numéro de carte de paiement si le produit n'est pas sous garantie.
- Numéro du contrat SmartCare si le produit bénéficie d'un contrat d'entretien.
- Description complète du problème ou de la demande d'entretien.

1. Obtenez un numéro RMA :

- Consultez notre site Web à l'adresse <https://www.welchallyn.com/en/service-support/submit-a-repair/>, ou
- Contactez Welch Allyn pour formuler votre demande.



REMARQUE Welch Allyn n'accepte pas les produits retournés sans numéro RMA.

2. Expédiez l'appareil à Welch Allyn en respectant les règles suivantes :
 - a. Retirez de l'emballage les éléments ci-après : la batterie, tous les tuyaux, les connecteurs, les câbles, les capteurs, les cordons d'alimentation ainsi que tout autre produit et équipement auxiliaires, à l'exception des éléments qui pourraient être associés au problème.
 - b. Respectez les exigences en matière d'expédition et de manutention pour les batteries lithium-ion afin de vous conformer aux nouvelles réglementations de l'IATA.

Conditions de retour des batteries lithium-ion

- Retirez la batterie lithium-ion de l'appareil. Vous ne pouvez pas expédier ces appareils sans avoir retiré leurs batteries.
- Respectez les conditions d'emballage (comme décrit ultérieurement dans cette section).
- N'expédiez pas des batteries endommagées ou présentant une fuite.
- N'expédiez pas des batteries rappelées par le fournisseur ou le fabricant.
- N'expédiez pas des batteries usagées à recycler ou à mettre au rebut.
- N'expédiez pas plusieurs batteries à la fois.
- Choisissez uniquement un transport terrestre pour expédier les batteries lithium-ion.

Conditions d'emballage des batteries lithium-ion et appareils associés

- Utilisez l'emballage fourni par Welch Allyn ou le fabricant de la batterie pour emballer la batterie. Scellez la batterie dans un sac antistatique et placez-la dans la boîte d'expédition. Les expéditions de retour sans matériaux d'emballage approuvés ne seront pas acceptées.



REMARQUE Si le carton d'origine ou la boîte d'expédition n'est pas disponible, consultez le site Web du fabricant pour obtenir plus d'informations sur l'expédition des batteries lithium-ion :

<http://www.iata.org/lithiumbatteries>

- Si vous renvoyez la batterie et l'appareil, emballez-les séparément.
 - Si vous renvoyez plusieurs batteries, emballez et expédiez chaque batterie séparément. Ne regroupez pas plusieurs batteries dans un seul emballage.
- c. Nettoyez l'appareil.



REMARQUE Afin d'assurer la bonne réception de votre appareil par le centre de maintenance et d'accélérer le traitement et le retour de l'appareil, **veillez à nettoyer minutieusement tous les résidus de l'appareil avant de l'expédier à Welch Allyn.** Pour en savoir plus sur les exigences en matière de décontamination et de nettoyage, reportez-vous aux annexes.

Si un appareil renvoyé est contaminé par des liquides corporels, il sera retourné aux frais de son propriétaire. Les réglementations fédérales des États-Unis interdisent le traitement de tout appareil contaminé par des agents pathogènes à diffusion hémato-gène. Welch Allyn nettoie minutieusement tout appareil retourné à la réception. Toutefois, tout appareil ne pouvant être nettoyé de façon appropriée ne sera pas réparé.

- d. Emballez l'appareil. Placez l'appareil dans un sac en plastique **avec un bordereau d'expédition**, insérez-le dans le carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine ou dans une autre boîte d'expédition, et scellez le tout minutieusement avant l'expédition. N'oubliez pas que les batteries doivent être retirées des appareils avant l'emballage et l'expédition de retour.
- e. Inscrivez le numéro RMA Welch Allyn avec l'adresse Welch Allyn à l'extérieur de la boîte d'expédition.



AVERTISSEMENT Risque lié à la sécurité. N'expédiez pas une batterie physiquement endommagée ou présentant des signes de fuite, sauf si vous recevez des instructions spécifiques qui respectent les exigences relatives à l'expédition des batteries au lithium. Éliminez les batteries endommagées ou qui fuient selon une méthode sans danger pour l'environnement, conformément aux réglementations locales en vigueur.



AVERTISSEMENT Risque lié à la sécurité. En cas de transport aérien, n'emballez pas une batterie défectueuse dans des bagages enregistrés ou des bagages à main.



REMARQUE Aux États-Unis, la réglementation en vigueur se trouve dans le Code des règlements fédéraux (CFR - Code of Federal Regulations). Reportez-vous à la directive 49 CFR 173.185 relative à l'expédition de batteries au lithium par voie aérienne ou terrestre. Les dispositions particulières applicables à l'expédition de batteries au lithium se trouvent dans les sections 29, 188, 189, A54, A55, A100, A101, A103 et A104 de la directive 49 CFR 172.102.

Périodicité d'entretien recommandée

Pour vérifier le fonctionnement de l'appareil conformément aux spécifications conceptuelles, procédez à un entretien périodique, comme illustré dans le tableau suivant. Les clients équipés de l'édition sans licence standard de l'outil d'entretien Welch Allyn peuvent procéder à la vérification fonctionnelle de base et à l'étalonnage, comme indiqué dans le tableau, en suivant les instructions de ce manuel. Si vous disposez de l'édition sous licence Gold de l'outil d'entretien, utilisez-la pour effectuer une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil plutôt que de réaliser les tests de base.

Composant	Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
Module PNI	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Module SpO2	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Paramètre SpHb	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
SureTemp Plus	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
ECG	S/O	S/O
Braun ThermoScan PRO 6000	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Batterie	300 cycles de charge	Remplacement de la batterie
Boîtier	Une fois par an	Nettoyage des aérations pour éviter l'accumulation de poussière

Composant	Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
Module PNI	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Module SpO2	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Paramètre SpHb	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Module Capteur EarlySense	S/O	S/O
Paramètre FR	S/O	S/O
Module CO2 ¹	Une fois par an ou 1 200 heures (selon la première éventualité)	Étalonnage (la première fois seulement)
	Une fois par an ou 4 000 heures (selon la première éventualité)	Étalonnage
	30 000 heures	Remplacement du module
SureTemp Plus	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
ECG	S/O	S/O
Braun ThermoScan PRO 6000	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Batterie	300 cycles de charge	Remplacement de la batterie
Boîtier	Une fois par an	Nettoyage des aérations pour éviter l'accumulation de poussière

¹Étalonnez d'abord le module après 1 200 heures d'utilisation, puis une fois par an ou après 4 000 heures d'utilisation, selon la première éventualité. L'étalonnage initial ne doit pas avoir lieu avant 720 heures d'utilisation. Si l'étalonnage initial est réalisé avant 720 heures d'utilisation, le module est réinitialisé pour imposer le prochain étalonnage après 1 200 heures, au lieu de 4 000 heures.

L'outil d'entretien, édition sous licence Gold, permet d'effectuer une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil à chaque fois que l'une des conditions suivantes est remplie :

- D'après la vérification fonctionnelle de base, l'appareil n'est pas conforme aux spécifications.
- L'appareil est tombé ou a été endommagé.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Le boîtier a été ouvert.
- Une partie interne a été remplacée (hormis la batterie).



REMARQUE Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'édition sous licence Gold, consultez les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien.

Entretien

Pour plus d'informations sur la maintenance de l'appareil, consultez la section « Maintenance et entretien » dans le mode d'emploi de cet appareil. Les sujets abordés sont les suivants :

- Remplacement du papier d'imprimante (Connex VSM uniquement)
- Inspection et nettoyage de l'appareil et de ses accessoires
- Remplacement de la batterie

L'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool

L'Outil d'entretien Welch Allyn est disponible dans les éditions suivantes :

- **Sans licence standard** : accompagne votre appareil. Téléchargez sur le site Web <https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>.
- **Gold** : requise pour effectuer une vérification fonctionnelle et un étalonnage complets. Cette édition nécessite une licence supplémentaire. Pour plus d'informations sur l'obtention de cette licence, contactez Welch Allyn.



REMARQUE Pour pouvoir acquérir l'édition avec licence Gold, vous devez participer au cours de formation technique Welch Allyn ou suivre une formation en ligne sur l'appareil.

Les médecins et les techniciens de maintenance peuvent utiliser l'outil d'entretien pour gérer et entretenir les produits Welch Allyn pris en charge. Vous pouvez utiliser l'outil d'entretien pour :

- **Examiner les informations sur l'appareil.** Lorsque l'outil d'entretien est connecté à l'appareil, il répertorie les modules installés, les versions installées du micrologiciel et du matériel, les informations sur la garantie et la réparation, l'état et l'historique de l'utilisation.
- **Recevoir des notifications si une maintenance périodique est requise.** L'outil d'entretien peut vous aider à gérer et à tenir à jour votre inventaire complet de produits Welch Allyn pris en charge. Grâce à la fonction d'entretien à distance, l'outil d'entretien peut se connecter au service clientèle Welch Allyn. Ainsi, vous pouvez recevoir automatiquement des mises à niveau de micrologiciel et de fonctionnalités pour vos produits pris en charge, y compris des mises à niveau logicielles pour l'outil d'entretien.
- **Installer les mises à jour et les mises à niveau.** L'outil d'entretien peut lire la version du micrologiciel pour chaque module et vérifier les mises à jour ou les mises à niveau disponibles.



REMARQUE Pour que l'Outil d'entretien Welch Allyn prenne en charge les mises à jour et les mises à niveau, ajustez les paramètres de votre pare-feu pour permettre l'accès à l'adresse IP 169.254.10.10 (le serveur d'alimentation local pour le processus de mise à niveau logicielle).

- **Créer une liste de travail.** La liste de travail procure des informations sur les tâches d'entretien, aussi appelées « ordres d'exécution », à réaliser sur vos appareils. Les ordres d'exécution peuvent concerner des étalonnages périodiques, des mises à niveau ou des installations de licence.
- **Planifier une maintenance périodique.** Vous pouvez utiliser l'outil d'entretien pour définir la périodicité de l'entretien de chaque appareil faisant l'objet d'une maintenance.
- **Afficher et enregistrer des journaux.** Vous pouvez télécharger et enregistrer des fichiers journaux depuis l'appareil à des fins d'analyse pour contribuer au diagnostic et à l'identification des problèmes signalés.
- **Créer des comptes utilisateur.** Les administrateurs peuvent créer des comptes utilisateur et définir des niveaux d'autorisation pour contrôler l'accès aux fonctionnalités. Ainsi, ils peuvent permettre à un groupe d'effectuer des tâches administratives et à un autre groupe de réaliser des tâches d'entretien. La restriction des droits d'accès empêche le recours à l'outil d'entretien pour apporter des modifications non autorisées sur un appareil connecté.
- **Effectuer une vérification fonctionnelle et un étalonnage.** L'outil d'entretien peut contrôler tous les appareils nécessitant un étalonnage et les étalonner en fonction des spécifications conceptuelles, le cas échéant. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour tous les produits et nécessite l'outil d'entretien, édition Gold, pour chaque produit concerné.
- **Récupérer les données des appareils.** Dans les rares cas où un appareil ne peut plus démarrer à cause d'un micrologiciel corrompu, l'outil d'entretien peut connecter l'appareil à l'assistance technique Welch Allyn pour réinstaller le micrologiciel.
- **Extensible.** Le logiciel de l'outil d'entretien accepte les nouveaux plug-ins pour prendre en charge les futurs produits Welch Allyn.

Certaines fonctionnalités sont activées pour n'importe quel utilisateur (édition sans licence standard). D'autres fonctionnalités nécessitent des privilèges ou un contrat de maintenance Welch Allyn (édition Gold). Si vous avez besoin d'assistance Gold pour un produit Welch Allyn, veuillez contacter l'assistance technique Welch Allyn.

Performances de la batterie

À propos de la batterie



REMARQUE La batterie dans le système mural fournit une alimentation de secours en cas de coupure d'alimentation et ne doit pas être utilisée dans le cadre d'une utilisation normale. Le système mural doit toujours rester connecté à l'alimentation secteur, sauf pendant les activités de nettoyage et de maintenance.

L'appareil utilise une batterie intelligente lithium-ion rechargeable. Le circuit interne permet à la batterie de signaler son état à l'appareil. L'appareil affiche l'état de la batterie via le témoin d'alimentation, les icônes à l'écran et les messages d'état figurant dans la zone d'état de l'appareil. Les informations sur la batterie peuvent être recueillies avec l'outil d'entretien.

Les batteries neuves sont expédiées par le fabricant. Elles sont chargées à 30 % pour prolonger leur durée de vie. Lors de l'installation d'une nouvelle batterie dans l'appareil, vous devez brancher

l'appareil sur une prise d'alimentation C.A. pour activer la batterie. Si l'appareil n'est pas mis sous tension, la nouvelle batterie se déchargera.

La zone d'état de l'appareil indique que la batterie est faible lorsqu'il ne reste que 30 minutes de puissance. Un second message similaire s'affiche lorsqu'il ne reste plus que 5 minutes de puissance.

La charge de la batterie est assurée par le bloc d'alimentation interne de l'appareil.

Pour consulter une liste complète des spécifications de la batterie, consultez le *Mode d'emploi* de l'appareil.

Suivez les meilleures pratiques pour prolonger la durée de vie de la batterie

Les pratiques suivantes permettent de prolonger la durée de vie de la batterie et de l'appareil.



AVERTISSEMENT Risque lié à la sécurité. Manipulation et stockage des batteries lithium : évitez les abus mécaniques ou électriques. Les batteries peuvent exploser ou occasionner des brûlures en cas de démontage, d'écrasement ou d'exposition au feu ou à des températures élevées. N'inversez pas les pôles ou ne créez pas de court-circuit.

- Gardez le moniteur branché pour charger la batterie, dans la mesure du possible.
- Retirez la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé longtemps.
- Remplacez les batteries susceptibles de déclencher un message d'état de batterie faible lorsqu'elles sont complètement chargées.
- N'utilisez pas des batteries endommagées ou qui coulent.
- Stockez les batteries chargées entre 30 à 50 %.
- Stockez les batteries dans la plage de températures indiquée pour chaque période :
 - Stockage inférieur à 30 jours : maintenez la température entre -20 °C et 50 °C.
 - Stockage entre 30 et 90 jours : maintenez la température entre -20 °C et 40 °C.
 - Stockage supérieur à 90 jours jusqu'à 2 ans : maintenez la température entre -20 °C et 35 °C.
- Recyclez les batteries dans la mesure du possible. Aux États-Unis, appelez le 1-877-723-1297 pour plus d'informations sur le recyclage des batteries lithium-ion ou accédez au site Web de Call2Recycle <http://www.call2recycle.org> pour plus d'informations.
- Lorsque le recyclage est impossible, mettez les batteries au rebut conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

Facteurs influant sur l'autonomie des batteries


Les conditions et les paramètres suivants affectent la durée d'autonomie des batteries :

- Réglage de la luminosité de l'écran
- Réglage de l'économiseur d'écran
- Réglage de la mise hors tension de l'appareil
- Fréquence et durée des alarmes et des alertes
- Quantité des artefacts de mouvements lors des mesures de la PNI
- Radio à la recherche d'un point d'accès



Commandes, indicateurs et connecteurs

Les schémas suivants représentent un moniteur entièrement équipé. Selon sa taille ou sa configuration, le moniteur utilisé peut ne pas proposer l'ensemble de ces fonctionnalités.

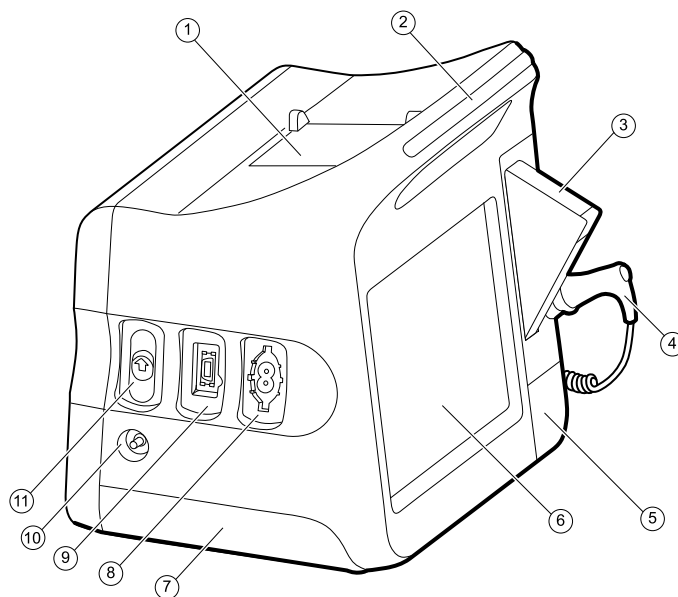
Vue du dessus, de l'avant, de la gauche



N°	Fonction	Description
1	Imprimante	L'imprimante permet d'imprimer les informations relatives aux patients et aux périphériques.
2	Barre des voyants DEL	Offre un aperçu visuel des alarmes grâce à des voyants rouge et orange.
3	Thermométrie	Boîte d'embouts de sonde de température.
4	Thermométrie	Sonde de température.
5	Thermométrie (connecteur protégé par un capot)	Sécurise la connexion entre la sonde et le moniteur.


N°	Fonction	Description
6	Écran LCD	Écran tactile couleur 1024 x 600 pixels doté d'une interface utilisateur graphique.
7	Logement de la batterie (avec capot)	Renferme la batterie lithium-ion.
8	Pression artérielle	Prend en charge les cathéters simple et double lumière.
9	Oxymétrie de pouls	<p>Module Nellcor ou Masimo rainbow SET.</p> <p>Le module Nellcor mesure la SpO2 et la fréquence de pouls.</p> <p>Le module Masimo mesure la SpO2, la fréquence de pouls, la SpHb et la FR.</p> <p> REMARQUE La SpHb et la RRa sont des paramètres facultatifs, qui ne sont pas configurables en simultané.</p> <p> REMARQUE Les moniteurs configurés avec la FR ne peuvent pas être configurés avec le CO2.</p>
10	CO2	Port d'évacuation de l'échantillonnage de CO2.
11	CO2	Connecteur d'entrée de l'échantillonnage de CO2 (protégé par un capot).

Vue du dessous, de l'arrière, de la droite

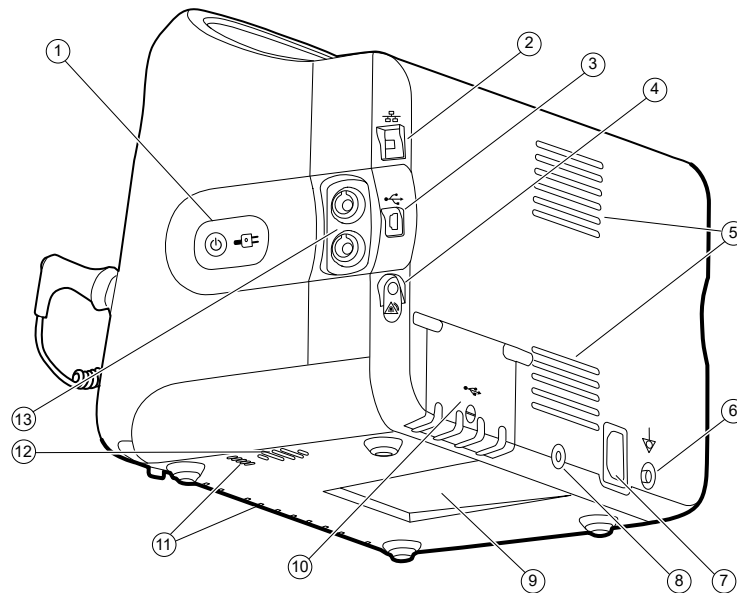

N°	Fonction	Description
1	Interrupteur d'alimentation et voyant	Bouton de mise sous tension / économiseur d'écran. Le voyant indique l'état de charge lorsque le moniteur est connecté à l'alimentation C.A. : <ul style="list-style-type: none"> • Vert : La batterie est chargée. • Orange : La batterie est en cours de charge.
2	Ethernet RJ-45	Permet une connexion câblée au réseau informatique.
3	Client USB	Permet la connexion à un ordinateur externe à des fins de test et de mises à niveau logicielles.
4	Appel de l'infirmier	Offre une connexion au système d'appel infirmier de l'hôpital. (Cette fonction n'est pas disponible sur le modèle 6300.)
5	Sortie ventilateur	
6	Borne de mise à la terre (borne équipotentielle)	Permet de contrôler la sécurité au niveau électrique et permet la connexion d'une barre d'équipotentialité.
7	Prise d'alimentation	Permet la connexion à une prise de courant CA externe.
8	Fixation pour socle mobile	Sécurise la fixation du support au moniteur.
9	Encoche pour la plaque de montage	Sécurise le moniteur lorsqu'il est monté sur socle mobile ou au mur.
10	Capot du connecteur USB	Donne accès aux connexions USB hôtes pour des accessoires supplémentaires.

22 Commandes, indicateurs et connecteurs

N°	Fonction	Description
11	Prise d'air du ventilateur	
12	Haut-parleur	Émet différentes tonalités.
13	Mouvement du patient	<p>Le module EarlySense surveille les mouvements du patient, la fréquence respiratoire (FR) et la fréquence de pouls.</p> <p> REMARQUE Les moniteurs configurés avec la FR et le CO2 ne sont pas configurables avec EarlySense.</p>

Paramètres avancés

L'onglet Advanced (Avancé) offre un accès protégé par mot de passe à la fonction Advanced settings (Paramètres avancés) du moniteur (ou mode Admin) et permet aux administrateurs infirmiers, aux ingénieurs biomédicaux et/ou aux techniciens de maintenance de configurer des fonctions spécifiques. L'onglet Advanced (Avancé) propose également des informations en lecture seule sur le moniteur.



REMARQUE Vous ne pouvez pas accéder à Advanced settings (Paramètres avancés) lorsque des capteurs ou des alarmes physiologiques sont actifs ou lorsque des mesures de signes vitaux sont affichées.



REMARQUE Si vous perdez le mot de passe des paramètres avancés, consultez les instructions de réinitialisation des mots de passe.

Setup	Device	Clinician	Advanced
Advanced settings access			
<input type="button" value="Enter password"/>			
<input type="button" value="Lost password"/>			
SN 100001692510 Model VSM 6000 Series Asset tag AssetTag3		Hardware version P5 Software version 2.43.00 E0001 MAC address Ethernet 00:1A:FA:21:05:AF Radio 00:17:23:E3:02:D0 IP address Ethernet 0.0.0.0 Radio 172.18.26.131	
Configuration NIBP Pulse rate SpO2 Temperature SpHbv			
Home	Patients	Review	Settings

Général

Spécification de la langue

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche, contenant l'onglet Language (Langue).

2. Sélectionnez une langue.
3. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres de date et heure

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Saisir le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Dans l'onglet General (Général), appuyez sur l'onglet **Date / Heure**.
3. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Date format (Format de date)	Sélectionnez le format de date pour l'affichage.
Time zone (Fuseau horaire)	Sélectionnez votre fuseau horaire par rapport au temps universel coordonné (UTC).
Automatically adjust clock for daylight saving time, reported by host (Passage automatique à l'heure d'été, rapporté par l'hôte)	Sélectionnez cette option pour régler l'heure affichée de +/- une heure lorsque l'hôte connecté signale l'heure d'été.
Allow users to change date and time (Autoriser l'utilisateur à modifier la date et l'heure)	Sélectionnez cette option pour permettre aux médecins de régler la date et l'heure dans l'onglet Settings (Paramètres).
Display date and time (Afficher la date et l'heure)	Sélectionnez cette option pour afficher la date et l'heure dans l'onglet Home (Accueil) de la zone d'état de l'appareil.
Enable NTP (Activer NTP)	Sélectionnez cette option pour utiliser le serveur NTP pour la synchronisation de l'heure plutôt que l'hôte épisodique.
Host name or IP address (Nom d'hôte ou adresse IP)	Saisissez le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur NTP.
Test	Appuyez sur Test pour tester la connexion au serveur NTP. Les messages d'information indiquent qu'un test est en cours, puis le résultat du test (réussite ou échec).

4. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

Spécification des paramètres avancés d'alarme

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).

- a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
- b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
- c. Appuyez sur **Enter password**.
- d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Alarms**.
3. Spécifier les paramètres.

Option

Description

General

(onglet vertical)

Autoriser l'utilisateur à désactiver les alarmes

Sélectionnez cette option pour permettre aux médecins d'activer ou de désactiver tous les seuils d'alarme pour chaque signe vital. Cette commande est disponible dans chaque onglet spécifique à un paramètre de l'onglet Alarms (Alarmes).

Nurse call threshold (Seuil d'appel infirmier)

Sélectionner l'alarme de priorité minimale qui active un relais de l'appel de l'infirmier. Si vous sélectionnez **High** (Élevé), seules les alarmes de priorité élevée activent un relais de l'appel de l'infirmier. Si vous sélectionnez **Medium** (Moyen), les alarmes de priorité élevée ou moyenne activent un relais de l'appel de l'infirmier. Si vous sélectionnez **Low** (Bas), les alarmes de priorité élevée, moyenne et basse activent un relais de l'appel de l'infirmier.

Audio

(onglet vertical)

Autoriser l'utilisateur à désactiver le son général

Sélectionnez cette option pour permettre aux médecins de désactiver toutes les notifications sonores d'alarme. Cette commande est disponible dans l'onglet Alarms (Alarmes) (sous l'onglet General [General]).

Minimum alarm volume (Volume d'alarme minimum)

Sélectionner le volume d'alarme minimum disponible. Si vous sélectionnez **High** (Élevé), le médecin ne peut pas utiliser les options **Medium** (Moyen) et **Low** (Bas).

Durée de pause du son

Spécifiez le temps de pause ajouté à la pause de 60 secondes. Lorsqu'un médecin met en pause la tonalité d'une alarme sonore, la tonalité s'interrompt pendant le délai des deux temps associés.

Enable audio for low priority alarms (Activer audio pour alarmes de priorité faible)

Sélectionner cette option pour activer le son de l'alarme pour les alarmes de priorité faible. Si ce paramètre est désactivé, le son des alarmes de priorité très faible est automatiquement désactivé.

Enable audio for very low priority alarms (Activer audio pour alarmes de priorité très faible)

Sélectionner cette option pour activer le son de l'alarme pour les alarmes de priorité très faible. Ce paramètre est disponible uniquement lorsque l'option « Enable audio for very low priority alarms (Activer audio pour alarmes de priorité très faible) » est sélectionnée.

Allow user to turn on patient rest mode (Permettre à l'utilisateur d'activer le mode repos du patient)

Sélectionner cette option pour permettre à l'utilisateur de désactiver ou d'activer cette option dans l'onglet Alarms (Alarmes). Cette option n'est disponible que dans le profil Continuous Monitoring (Monitoring continu) et lorsque l'utilisateur a activé le mode nuit.

Allow host to turn on patient rest mode (Permettre à l'hôte d'activer le mode repos du patient)

Sélectionner cette option pour permettre à l'hôte de désactiver ou d'activer cette option dans l'onglet Alarms (Alarmes). Cette option n'est disponible que dans le profil Continuous Monitoring (Monitoring continu) et lorsque l'appareil est connecté à la Station centrale.

Enable cardiac high priority tone (Activer tonalité cardiaque de priorité élevée)

Sélectionner cette option pour activer une autre tonalité d'alarme pour les alarmes ECG LTA.

Retards

(onglet vertical)



REMARQUE Les délais d'alarme sont disponibles uniquement pour les paramètres pris en charge par votre configuration.

SpO2- Retard de condition d'alarme

Spécifiez le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme SpO2 avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.

SatSeconds est disponible avec les capteurs Nellcor de SpO2. Si vous sélectionnez Off (Désactivé) ou un délai de 10, 15 ou 30 secondes, SatSeconds est désactivé et retiré de l'onglet SpO2 dans l'onglet Alarms (Alarmes).

SpO2 pulse rate alarm condition delay (Délai condition alarme pouls SpO2)

Spécifier le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme de fréquence de pouls mesurée par le capteur de SpO2 avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.

Motion pulse rate alarm condition delay (Délai condition alarme fréquence de pouls mouvement)

Spécifier le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme de fréquence de pouls mesurée par le capteur de mouvement du patient avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.

SpHb- Retard de condition d'alarme

Spécifiez le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme de SpHb avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.

Motion respiration alarm condition delay (Délai condition alarme respiration mouvement)

Spécifier le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme de respiration avant le déclenchement des signaux sonores et visuels (configuration du Capteur EarlySense).

Motion pulse rate low confidence alarm delay (Délai alarme peu fiable fréquence de pouls mouvement)

Spécifier le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme peu fiable de fréquence de pouls avant le déclenchement des signaux sonores et visuels (configuration du Capteur EarlySense).

Motion respiration low confidence alarm delay (Délai alarme peu fiable respiration mouvement)

Spécifier le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme peu fiable de respiration avant le déclenchement des signaux sonores et visuels (configuration du Capteur EarlySense).

Délai condition de l'alarme etCO2

Spécifiez le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme d'etCO2 avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.

Délai condition alarme respiration

Spécifiez le temps minimum d'activité d'une condition d'alarme de FR avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.

Délai alarme absence de souffle

Si elle est configurée avec un module de CO2, indiquez le temps d'attente de l'appareil après la réception d'un message de souffle valide avant l'activation de l'alarme physiologique « Aucun souffle détecté ».

	Si elle est configurée pour la RRA, indiquez le temps d'attente du module Masimo avant l'envoi d'un événement de pause respiratoire, qui déclenchera une alarme physiologique « Aucun souffle détecté ».
Adult no breath detected alarm delay (Délai alarme absence de respiration adulte)	Spécifier le temps d'activité d'une condition d'alarme d'absence de respiration d'adulte dans une configuration Oridion CO2 avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.
Pediatric no breath detected alarm delay (Délai alarme absence de respiration enfant)	Spécifier le temps d'activité d'une condition d'alarme d'absence de respiration d'enfant dans une configuration Oridion CO2 avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.
Neonate no breath detected alarm delay (Délai alarme absence de respiration nouveau-né)	Spécifier le temps d'activité d'une condition d'alarme d'absence de respiration d'un nouveau-né dans une configuration Oridion CO2 avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.
ECG HR alarm delay (Délai alarme FC ECG)	Spécifier le temps d'activité d'une condition d'alarme de fréquence cardiaque ECG avant le déclenchement des signaux sonores et visuels.
4. Effectuer l'une des opérations suivantes :	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet. • Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Sortie. 	

Spécification des paramètres avancés d'affichage

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Afficher**.
3. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Display power saver (Économiseur d'écran)	Spécifiez la période requise d'inactivité du moniteur avant que l'affichage se désactive. Les interactions du médecin, les nouveaux relevés des signes vitaux ou les conditions d'alarme activent automatiquement l'affichage.
Device power down (Mise hors tension de l'appareil)	Spécifiez la période requise d'inactivité du moniteur avant que le moniteur s'éteigne.
Display lock (Verrouillage de l'affichage)	Spécifiez la période requise d'inactivité du moniteur avant que l'écran tactile se verrouille.



REMARQUE Si la fonction SSO (Single Sign-on, authentification unique) a été activée sur cet appareil, la période d'inactivité du verrouillage de l'affichage est définie par défaut sur 2 minutes, mais reste configurable. En outre, toutes les autres commandes décrites dans cette section (à l'exception de Enable continue without login [Activer l'option Continuer sans se connecter]) disparaissent de l'affichage, mais la commande Require clinician authentication (Demander l'authentification du médecin) reste active dans le cadre de la fonction SSO.

Require device access code (Demander le code d'accès de l'appareil)

Permet d'exiger la saisie d'un code pour déverrouiller l'affichage.

Device access code (Code d'accès de l'appareil)

Entrez le code à 4 chiffres pour déverrouiller l'affichage.



REMARQUE Vous devez activer Require device access code (Demander le code d'accès de l'appareil) pour activer cette option.

Require clinician authentication (Demander l'authentification du médecin)

Permet d'exiger une authentification du médecin (en scannant le badge ou en saisissant son ID) pour déverrouiller l'affichage.



REMARQUE Vous devez activer Search by clinician ID (Rechercher par ID de médecin) pour activer cette option.

Enable continue without login (Activer l'option Continuer hors connexion)

Sélectionnez cette option pour activer le bouton « Continue without login » (Continuer hors connexion) dans la boîte de dialogue d'authentification afin de déverrouiller l'affichage.



REMARQUE Vous devez activer Enable single sign-on (Activer l'authentification unique) ou Search by clinician ID (Rechercher par ID de médecin), puis activer Require clinician ID match to view patient data (Exiger la correspondance de l'ID du médecin pour afficher les données patient) pour activer le mode Patient Protection (Protection patient) exigé avec cette option.



REMARQUE De plus, si la fonction Search by clinician ID (Rechercher par ID de médecin) a été activée sur cet appareil, il est nécessaire d'activer la fonction Require clinician authentication (Demander l'authentification du médecin) pour activer la configuration de Enable continue without login (Activer l'option Continuer hors connexion).

4. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter les Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **(Sortie)**.

Spécification des paramètres avancés de l'appareil

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Device** (Médecin).
3. Spécifier les paramètres.

Option

ID empl.

Activer enreg. comme valeur par défaut

Délai du mode pause

Fréquence de la ligne électrique

Profils disponibles

Autoriser la modification du profil

Description

Appuyez sur  et entrez jusqu'à 20 caractères alphanumériques.

Sélectionnez cette option pour activer l'affichage de la commande Enreg. en val. p. déf.

Indiquez le délai d'attente par défaut utilisé lors de l'activation du mode Pause dans le profil Monitoring continu.

Indiquez la fréquence de la ligne électrique pour l'alimentation CA de l'appareil.

Indiquez les profils sélectionnables.

Sélectionnez cette option pour activer la sélection manuelle des différents profils et le passage automatique au profil Monitoring continu lorsqu'un capteur continu est connecté à un patient.

Lorsque cette option est désactivée, la sélection actuelle du profil dans l'onglet Paramètres est verrouillée. Aucun autre bouton de sélection du profil n'est disponible et l'appareil ne passe pas automatiquement dans le profil Monitoring

- | | |
|-------------------|--|
| | continu lorsqu'un capteur continu est connecté à un patient. |
| Profil par défaut | Spécifiez le profil par défaut à utiliser au démarrage. |
4. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Définition et démarrage du mode démo

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Général**.
3. Appuyez sur l'onglet **Démo**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Action/Description

Type

Sélectionnez un type de mode de démonstration.

Dém.

Appuyez sur **Start** (Démarrer) pour activer le mode de démonstration du moniteur. Accédez à l'onglet Home (Accueil) pour démarrer le mode démo.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Paramètres

Spécification des paramètres avancés d'IPI

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **IPI**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Display IPI (Écran IPI)	Sélectionnez cette option pour afficher le volet IPI dans l'onglet Home (Accueil).
Default view (Vue par défaut)	Sélectionnez un affichage numérique ou sous forme de graphique de tendance comme affichage principal de l'IPI dans l'onglet Home (Accueil).
Trend period default (Période tendances par défaut)	Sélectionnez une période par défaut pour l'affichage sous forme de graphique de tendance de l'IPI.
5. Effectuer l'une des opérations suivantes :	
• Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.	
• Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Sortie .	

Spécification des paramètres avancés de FR

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **RRa**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Calcul de la moyenne de FR	Sélectionnez l'option de calcul de la moyenne par défaut qui indique la visibilité voulue des variations subtiles des mesures de RRa.
Délai de reprise	Sélectionnez le délai qui doit s'écouler avant que l'appareil déclenche une alarme lorsqu'il tente d'obtenir une mesure valide de RRa.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres avancés de SpO2

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **SpO2**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Vue par défaut	Sélectionnez un affichage numérique ou sous forme de courbe comme affichage principal par défaut de la SpO2 dans l'onglet Home (Accueil).
Réponse par défaut	Sélectionnez la vitesse de réponse par défaut aux variations dans les mesures de SpO2.
Sweep speed default (Vit. balayage par défaut)	Sélectionnez la vitesse de balayage par défaut pour l'affichage de la courbe de la SpO2 dans l'onglet Home (Accueil).
Permettre alarme faible perfusion	Sélectionner cette option pour activer l'alarme de faible perfusion Masimo.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres avancés de FC/FP

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **HR/PR** (Fréq pouls).
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Afficher la source	Sélectionnez cette option pour afficher la source des mesures de fréquence de pouls (PNI ou SpO2) dans l'onglet Home (Accueil).

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres avancés d'etCO2

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).

d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **etCO2**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Action/Description

Default view (Vue par défaut)

Sélectionnez un affichage numérique ou sous forme de courbe comme affichage principal de l'etCO2 dans l'onglet Home (Accueil).

Ecran FiCO2

Sélectionnez cette option pour afficher la FiCO2 dans l'onglet Home (Accueil).

Waveform scale default (Échelle courbes par défaut)

Sélectionnez l'échelle par défaut des courbes dans les mesures d'etCO2.

Unité de mesure

Sélectionnez les unités de mesure principales pour l'affichage de l'etCO2 dans l'onglet Home (Accueil).

Vérifier calibration

Sélectionnez cette option pour lancer le contrôle de la calibration du CO2.

Étalonner

Sélectionnez cette option pour lancer la calibration du CO2.

Sweep speed default (Vit. balayage par défaut)

Sélectionnez la vitesse de balayage par défaut pour l'affichage de la courbe du CO2 dans l'onglet Home (Accueil).

Activer boîte dial. ligne échant.

Sélectionnez cette option pour activer l'affichage de la boîte de dialogue de la ligne d'échantillonnage lors de la connexion de cette ligne d'échantillonnage à l'appareil.

Compensation BTPS

Sélectionnez cette option pour activer les réglages automatiquement de BTPS (température corporelle saturée de vapeur d'eau, pression) afin d'optimiser les mesures du CO2.

Calibration requise (en heures)

Cette option affiche le temps restant jusqu'à ce que la calibration du capteur de CO2 soit requise.

Maintenance requise (en heures)

Cette option affiche le temps restant jusqu'à ce que la maintenance régulière du capteur de CO2 soit requise.

Dernière calibration

Cette option affiche la date (XX/XX/XXXX) et l'heure (00:00:00) de la dernière calibration.

Calibration annuelle

Cette option affiche la date anniversaire (XX/XX) de la calibration annuelle.

- Pour plus d'informations sur la calibration, reportez-vous au manuel d'entretien.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres avancés de SpHb

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.

- b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
- c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
- d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **SpHb**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Default view (Vue par défaut)	Sélectionnez un affichage numérique ou sous forme de graphique de tendance comme affichage principal de la SpHb dans l'onglet Home (Accueil).
Unit of measure (Unité de mesure)	Sélectionnez l'unité de mesure principale pour l'affichage de la SpHb dans l'onglet Home (Accueil).
Default averaging (Calcul de la moyenne par défaut)	Sélectionnez l'intervalle par défaut utilisé par le paramètre pour calculer la valeur SpHb et mettre à jour l'affichage : court (environ 1 minute), moyen (environ 3 minutes) ou long (environ 6 minutes).
Reference (Référence)	Sélectionnez la source de référence étalonnée Artériel ou Veineux.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.


Spécification des paramètres avancés de PNI

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **NIBP**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Vue par défaut	Sélectionnez les affichages principal et secondaire. Sélectionnez Display MAP (Afficher la PAM) pour afficher la pression artérielle moyenne (PAM) dans le volet NIBP (PNI) de l'onglet Home (Accueil). Si l'option Display MAP (Afficher la PAM) est sélectionnée, spécifiez les valeurs numériques principales du volet NIBP (PNI). Dans l'onglet Home (Accueil), les médecins peuvent toucher le volet NIBP (PNI) pour basculer entre les affichages.
Unit of measure (Unité de mesure)	Sélectionnez l'unité de mesure PNI pour l'affichage.

- | | |
|---|---|
| Tube type (Type de tube) | Sélectionnez le nombre de tubes reliés au brassard de PNI utilisé avec ce moniteur. Si vous sélectionnez 1 tube , le seul algorithme disponible est Step (Par palier). |
| Algorithm default (Algorithme par défaut) | Sélectionnez l'algorithme par défaut utilisé pour déterminer les mesures de PNI. |
| Cuff inflation target (Seuil de gonflage du brassard) | Si vous sélectionnez l'algorithme Step (Par palier), appuyez sur  et entrez un seuil de gonflage du brassard par défaut pour chaque type de patient. Les médecins peuvent choisir d'autres seuils de gonflage du brassard que ceux par défaut définis ici dans l'onglet Settings (Paramètres) > Configuration > NIBP (PNI) . |
| Allow interval program changes (Autoriser les modifications du programme d'intervalles) | Sélectionnez cette option pour modifier les sélections du programme d'intervalles dans l'onglet Settings (Paramètres) > Configuration > Intervalles . |
5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
- Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Configuration d'un programme de moyennage de la PNI


Dans Advanced settings (Paramètres avancés), configurez les programmes de moyennage de la PNI de manière à pouvoir les utiliser.

Pour configurer un programme :

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres** (Notations personnalisées).
3. Appuyez sur l'onglet **Programs** (Notations personnalisées).
4. Appuyez sur la touche du programme à configurer.

L'icône du clavier apparaît dans la touche.

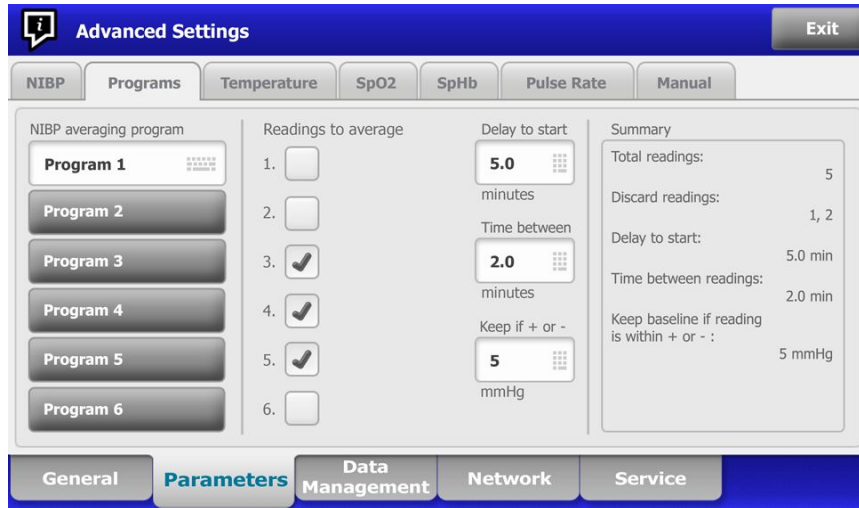

5. (Facultatif) Changer le nom du programme :
 - a. Appuyer sur l'icône du clavier.
 - b. Saisissez le nom du programme et appuyez sur la touche **OK**.
6. Indiquer les paramètres de ce programme.

Paramètre

Action/Description

Readings to average (Mesures à moyenner)

Sélectionner les mesures à inclure dans la moyenne. Sélectionner au moins deux mesures.

La dernière mesure sélectionnée correspond à la mesure finale du programme. Par exemple, si les mesures 3, 4 et 5 sont sélectionnées, le programme prend cinq mesures.

Les mesures non sélectionnées, dans ce cas les mesures 1 et 2, sont exclues (« éliminées ») de la moyenne.

Delay to start (Retard au démarrage)

Entrer le délai écoulé entre le démarrage du programme (le moment où la touche « Dém. interv. » est sélectionnée) et le démarrage de la première mesure.

Time between (Délai entre)

Entrer le délai écoulé entre la fin d'une mesure et le démarrage de la mesure suivante.

Conservez si + ou -

Entrez la plage utilisée par le programme pour établir la mesure de la ligne de base. Pour en savoir plus sur la façon dont ce paramètre affecte le programme, reportez-vous à « Mesures exclues » de la section « Programme de moyennage de la PNI » de ce manuel.

Les paramètres sélectionnés apparaissent dans la zone Summary (Résumé).

7. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Le programme est désormais prêt à l'emploi.

Spécification des paramètres avancés de température

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **Temperature**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Unit of measure (Unité de mesure)	Sélectionnez les unités de mesure principales pour l'affichage de la température dans l'onglet Home (Accueil)
Afficher la conversion de température	Sélectionnez cette option pour afficher les unités de mesure principales et secondaires pour l'affichage de la température dans l'onglet Home (Accueil).
Site SureTemp Plus par défaut	Sélectionnez le site par défaut pour les mesures SureTemp. Le site par défaut s'applique lorsque les médecins démarrent le moniteur et chaque fois qu'ils retirent la sonde de température du puits. Sélectionnez Last site (Dernier site) pour définir par défaut le site sélectionné pour la dernière mesure.
Interruption anti-vol	Sélectionner « Désactivé » ou une valeur de délai en heures au bout duquel le Braun 6000 se verrouille après son retrait de la base-support.
Mode	Sélectionnez None (Aucun), Technique Compensation ou Unadjusted (Non réglé) comme mode de compensation Braun 6000. Le mode technique compensation améliore la précision de la mesure en détectant le positionnement de la sonde dans le conduit auditif. Le mode non réglé permet au thermomètre de détecter uniquement la température auriculaire brute.
Activer minuterie d'impulsions	Sélectionner cette option pour activer la minuterie d'impulsions sur la poignée Braun 6000.
Activer sélection Celsius uniquement	Sélectionner cette option pour activer le mode Celsius et désactiver donc la touche C/F sur la poignée Braun 6000, ainsi que sur l'interrupteur du matériel.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres avancés d'ECG

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **ECG**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Action/Description

Sélection du câble

Sélectionner une option de câble 3 ou 5 dérivations. La sélection actuelle s'affiche sous forme d'étiquette secondaire dans l'onglet vertical ECG.

Configuration de l'électrode

Sélectionnez **AHA** ou **IEC** (CEI).

Autoriser l'impédance respiratoire

Sélectionner cette option pour activer la sélection de l'impédance respiratoire comme source de la respiration dans l'onglet Réglages ECG. Si cette option n'est pas sélectionnée, elle est désactivée et l'impédance respiratoire ne s'affiche pas comme une option de l'onglet Réglages ECG.

Activer la détection TV, FV, Asystolie

Sélectionner cette option pour activer la détection des alarmes LTA.

Impression automatique à l'alarme ECG

Sélectionner cette option pour activer l'impression automatique d'une courbe ECG en cas d'alarme LTA.

Dérivation par défaut

Sélectionner la dérivation à afficher lorsque l'appareil est sous tension.

Seuil TV

Utiliser le pavé numérique pour entrer le seuil de TV utilisé par le module ECG (plage : 100-150 bpm).

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres manuels


Le volet Manual Parameters (Paramètres manuels) se trouve dans le coin inférieur droit de l'onglet Home (Accueil). Vous pouvez entrer manuellement les valeurs des paramètres dans ce volet. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), vous pouvez indiquer les paramètres à afficher dans le volet et activer les annulations manuelles des autres mesures de paramètres affichées sur l'appareil.

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Saisir le mot de passe).

d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **Manuel**.

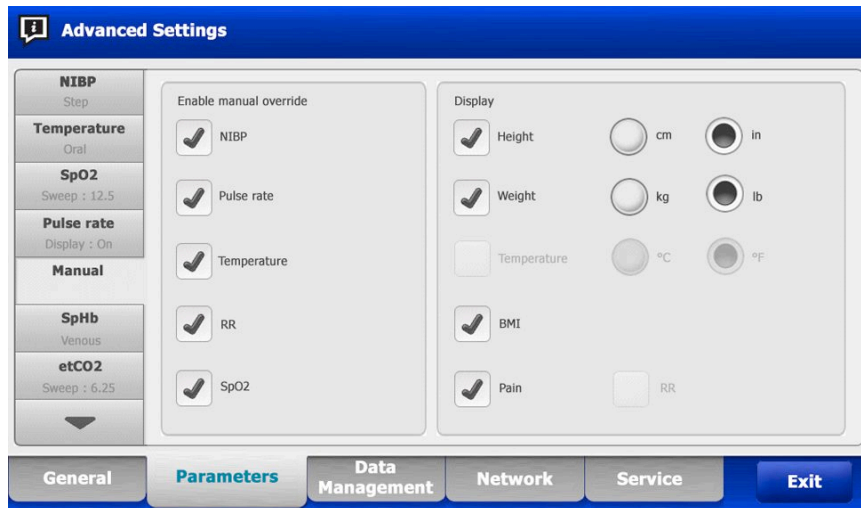

4. Sélectionnez jusqu'à quatre paramètres et unités de mesure associées à afficher dans le volet Paramètres manuels.



REMARQUE Si le moniteur est équipé du module de température SureTemp Plus, le paramètre Temperature (Température) n'est pas disponible dans le volet d'affichage, ni dans le volet Manual Parameters (Paramètres manuels).



REMARQUE Si le moniteur est configuré avec la fonction de CO2 ou de RRa et que vous sélectionnez le profil Continuous Monitoring (Monitoring continu) avant d'accéder à Advanced settings (Paramètres avancés), le paramètre de fréquence respiratoire (FR) n'est pas disponible ici, ni dans le volet Manual Parameters (Paramètres manuels). Si un autre profil est sélectionné lorsque vous accédez à Advanced settings (Paramètres avancés), le paramètre de fréquence respiratoire (FR) reste sélectionnable dans cet écran et peut être affiché dans le volet Manual parameters (Paramètres manuels).

5. Activez les annulations manuelles des mesures de paramètres sélectionnées et affichées sur l'appareil, comme il convient.
6. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

Spécifiez les paramètres avancés des notations personnalisées

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.

- c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
- d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'onglet **Custom scores**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Default score summary view (Vue récapitulative de la notation par défaut)

Incomplete score save options (Options de sauvegarde d'une notation incomplète)

Action/Description

Sélectionnez l'affichage **Condensed** (Condensé) ou **Expanded** (Étendu) des informations de notations personnalisées à afficher après l'enregistrement d'un dossier patient.

Sélectionnez la réponse souhaitée lorsqu'un utilisateur appuie sur Save (Enregistrer) avant la fin de la notation totale :

Allow: l'appareil enregistre l'enregistrement avec des notations incomplètes.

Warn user: l'appareil affiche un message indiquant que la notation est incomplète et vous invite à enregistrer le dossier incomplet ou à annuler.

Block: l'appareil affiche un message indiquant que la notation est incomplète et que les valeurs de tous les paramètres requis doivent être saisies avant l'enregistrement.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Gestion des données

Spécification des paramètres du patient

Les informations d'identification du patient s'affichent dans l'onglet Home (Accueil), sous le volet Patient, mais aussi dans différents onglets, notamment Patient et Review (Consulter).

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password**.
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Gestion des données**.
3. Appuyez sur l'onglet **Patients**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Default patient type (Type de patient par défaut)	<p>Sélectionner un type de patient par défaut pour le moniteur. Le type de patient s'affiche dans le volet Patient de l'onglet Home (Accueil).</p> <p>Dans l'onglet Summary (Résumé) de l'onglet Patients, les médecins peuvent choisir d'afficher un autre type de patient que celui par défaut défini ici.</p>
Enable local patient creation (Activer la création locale du patient)	<p>Sélectionner cette option pour activer l'ajout de nouveaux patients sur l'appareil. Si cette option est activée, vous pouvez ajouter des patients à l'onglet Patient List (Liste des patients) ou à l'onglet Patient Summary (Résumé des patients).</p> <p>Si cette option est désactivée, le bouton Add (Ajouter) n'apparaît pas sur l'écran List (Liste) et vous pouvez uniquement modifier le champ Patient ID (ID du patient) dans l'onglet Summary (Résumé). La désactivation de la création locale de patient efface également le patient actif et la liste de patients locale de l'appareil.</p>
Name format (Format Nom)	<p>Choisissez un format pour tous les noms de patient affichés : Full name (Nom complet) ou Abbreviation (Abréviation).</p>
Primary label (Étiquette principale)	<p>Sélectionnez l'étiquette d'identification principale pour tous les patients affichés.</p>
Secondary label (Étiquette secondaire)	<p>Sélectionner une étiquette d'identification secondaire pour les patients. L'étiquette secondaire s'affiche uniquement dans l'onglet Home (Accueil) après l'étiquette principale.</p>
Printout label (Étiquette d'impression)	<p>Sélectionner le ou les identificateurs patients qui apparaissent sur les impressions : Name and patient ID (Nom et ID patient), Name (Nom), Patient ID (ID patient), None (Aucun).</p>
Require patient ID to save readings (Demander l'ID du patient pour enregistrer les mesures)	<p>Rendre la saisie de l'ID du patient obligatoire lors de l'enregistrement des relevés. Si le médecin n'entre pas d'identifiant, le moniteur l'invite à le faire lorsqu'il essaie d'enregistrer des données.</p>
Search by patient ID (Rechercher par ID patient)	<p>Permettre aux médecins d'entrer un ID de patient pour rechercher les informations de ce patient. Si un médecin scanne l'ID dans l'onglet Home (Accueil) ou Summary (Résumé), le moniteur effectue une recherche dans la liste des patients et sur le réseau. Les informations du patient renvoyées sont utilisées pour renseigner le volet Patient de l'onglet Home (Accueil) et les champs de l'onglet Summary (Résumé).</p> <p>Sélectionner Require patient ID match to save measurements (Demander l'ID du patient pour enregistrer les mesures) pour demander que l'ID du patient sélectionné corresponde à un ID patient de la liste des patients de l'appareil ou à celui d'un système hôte externe avant d'enregistrer les mesures.</p>
Clear patient information on manual save (Effacer les informations du patient en cas d'enregistrement manuel)	<p>Configurer le moniteur pour qu'il efface le patient sélectionné après qu'un médecin a enregistré manuellement des mesures à partir de l'onglet Home (Accueil). Les informations du patient sont</p>

effacées du volet Patient et de l'onglet Summary (Résumé).



REMARQUE ce paramètre n'a aucun effet lorsque des intervalles sont en cours.

Retrieve list (Extraire la liste)

Permettre au moniteur de récupérer la liste des patients sur le réseau. Lorsque cette option est sélectionnée, le bouton **Retrieve list** (Extraire la liste) remplace le bouton **Add** (Ajouter) dans l'onglet List (Liste). Les informations issues du réseau sont renseignées dans l'onglet List (Liste) lorsqu'un médecin effleure le bouton **Retrieve list** (Extraire la liste). Le bouton **Add** (Ajouter) n'étant pas disponible, le médecin ne peut pas ajouter de patient à la liste des patients.

La connexion directe au DME n'est pas compatible avec le paramètre Retrieve list (Extraire la liste). Le paramètre Retrieve List (Extraire la liste) est désactivé et ne peut pas être sélectionné lorsque vous activez la connexion directe au DME.

La configuration du serveur sur l'hôte Welch Allyn restaure l'état précédent du paramètre Retrieve List (Extraire la liste) et le rend sélectionnable.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres du médecin

Les informations d'identification du médecin s'affichent en regard du bâton d'Asclépios dans la zone d'état de l'appareil de l'onglet Home (Accueil).

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Gestion des données**.
3. Appuyez sur l'onglet **Clinician** (Médecin).
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Label (Étiquette)

Action/Description

Sélectionnez le type d'étiquette d'identification du médecin devant s'afficher dans l'onglet Home (Accueil) : **Full name** (Nom complet), **Abbreviation** (Abréviation), **Clinician ID** (ID du médecin), **Masked Clinician ID** (ID du médecin masqué) ou **Symbol only** (Symbole uniquement).

Enable single sign-on (Activer l'authentification unique)

Sélectionnez cette option pour activer la fonction SSO (Single Sign-On, authentification unique) sur le dispositif.



REMARQUE Lorsque SSO est activé, la plupart des commandes restantes décrites dans cette section sont supprimées de l'affichage. Toutefois, Clear clinician information on manual save (Effacer les informations du médecin en cas d'enregistrement manuel) et Require clinician ID match to view patient data (Exiger la correspondance de l'ID du médecin pour afficher les données patient) restent configurables lorsque Enable single sign-on (Activer l'authentification unique) est activée. En outre, Display lock (Verrouillage de l'affichage) est défini par défaut sur 2 minutes, trois commandes de l'onglet Display (Affichage) disparaissent de l'affichage (consultez la section « Specify advanced display settings » (Spécification des paramètres avancés d'affichage pour plus de détails) et le profil Office (Consultation) est désactivé.

Require clinician ID to save readings (Demander l'ID du médecin pour enregistrer les mesures)

Rendez la saisie de l'ID du médecin obligatoire lors de l'enregistrement des mesures. Si aucun ID n'est entré, le moniteur affiche une invite à l'utilisateur lors de l'enregistrement des mesures. Les médecins peuvent entrer leur ID de médecin dans l'onglet Clinician (Médecin).

Clear clinician information on manual save (Effacer les informations du médecin en cas d'enregistrement manuel)

Configurez le moniteur pour qu'il efface le médecin sélectionné après qu'un médecin a enregistré manuellement des mesures dans l'onglet Home (Accueil). Les informations du médecin sont effacées de l'onglet Clinician (Médecin) et de la zone d'état de l'appareil.

Require clinician ID match to view patient data (Exiger la correspondance de l'ID du médecin pour afficher les données patient)

Sélectionnez cette option pour activer le mode Patient Protection (Protection patient), qui empêche l'affichage des onglets Patients List (Liste des patients) et Review (Relire) ou la modification des profils sans qu'un médecin authentifié ne soit connecté.

Search by clinician ID (Rechercher par ID de médecin)

Permet au moniteur de rechercher sur le réseau des informations sur le médecin en fonction de l'ID. Le moniteur lance la recherche lorsque le médecin entre ou scanne son ID dans l'onglet Clinician (Médecin). Les informations du médecin renvoyées sont utilisées pour renseigner la zone d'état de

l'appareil et les champs de l'onglet Clinician (Médecin).

Sélectionnez **Require password** (Demander le mot de passe) pour que le médecin entre son mot de passe en plus de son ID dans l'onglet Clinician (Médecin). Le moniteur utilise la combinaison ID/mot de passe pour rechercher sur le réseau des informations sur le médecin.

Sélectionnez **Require clinician ID match to save measurements** (Demander l'ID du médecin pour enregistrer les mesures) pour demander que l'ID du médecin sélectionné corresponde à celui d'un système hôte externe avant d'enregistrer les mesures.

Enregistrer les informations du médecin pendant ___ heures

Sélectionnez cette option pour activer un cache local des informations de connexion des médecins afin d'accélérer et de simplifier les futures connexions des cliniciens. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre d'heures de stockage de ce cache clinicien.

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **(Sortie)**.

Spécification des paramètres de données cliniques

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password**.
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Gestion des données**.
3. Appuyez sur l'onglet Clinical Data (**Données clin.**).
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Envoyer automatiquement en cas d'enregistrement manuel

Action/Description

Sélectionner cette option pour spécifier l'envoi des mesures sur le réseau lorsqu'un médecin enregistre des mesures dans l'onglet Home (Accueil).



REMARQUE Lorsque l'appareil est dans le profil Continuous Monitoring (Monitoring continu), ce paramètre est grisé.



REMARQUE Lorsque le moniteur n'est pas connecté au réseau, les mesures enregistrées sur le moniteur sont envoyées au réseau avec le premier envoi réussi après la reconnexion au réseau.

Supprimer les lectures après leur envoi	Sélectionnez cette option pour spécifier la suppression des relevés du moniteur après leur envoi réussi sur le réseau. Les mesures envoyées ne s'affichent pas dans l'onglet Review (Relire).
Émuler Spot Vital Signs LXI	Sélectionnez cette option pour spécifier que les données cliniques envoyées sur le réseau apparaissent dans les données Spot Vital Signs LXI sur le réseau.
Connexion CS	Sélectionnez cette option pour activer la connexion à la station centrale Connex. La connexion directe au DME n'est pas compatible avec le paramètre Connect to CS (Connexion CS). Le paramètre Connect to CS (Connexion CS) est désactivé et ne peut pas être sélectionné lorsque vous activez la connexion directe au DME. La configuration du serveur sur l'hôte Welch Allyn restaure l'état précédent du paramètre Connect to CS (Connexion CS) et le rend sélectionnable.
Enable clear button on Home tab (Activer bouton effacer sur l'onglet Accueil)	Sélectionner cette option pour activer le bouton Clear (Effacer) de l'onglet Home (Accueil) dans les profils Intervals Monitoring (Monitoring par intervalles), Office (Consultation) et Spot Check (Vérification ponctuelle). Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée (désactivée), le bouton Clear (Effacer) n'apparaît pas dans l'onglet Home (Accueil).

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Réseau

Affichage des informations avancées du moniteur

L'onglet Status (État) affiche les informations relatives à la version du logiciel du moniteur, aux adresses MAC et IP, au réseau, au serveur et au point d'accès, les informations de la session, etc.

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Réseau**.
3. Appuyez sur l'onglet **État**.
4. Affichez les informations.
5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

Spécification des paramètres de radio (Newmar)

Cette tâche s'applique uniquement aux appareils équipés d'une carte radio Newmar. Les appareils équipés de cette carte radio comprennent les caractéristiques suivantes :

- Dans Advanced settings (Paramètres avancés), le cadre Session dans l'onglet **Réseau > État** inclut **Tx packets dropped**, **Rx packets dropped**, et **Rx multicast packets**.
- Dans Advanced settings (Paramètres avancés), le volet de gauche dans l'onglet **Réseau > Radio** inclut une option *Enable dynamic frequency* (Activez la fréquence dynamique).

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Réseau**.
3. Appuyez sur l'onglet **Radio**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Enable radio (Activer radio)

Enable radio network alarms (Activer les alarmes réseau radio)

Enable dynamic frequency (Activer la fréquence dynamique)

SSID

Radio band (Bande radio)

Authentication type (Type d'authentification)

Action/Description

Activer la radio pour permettre la communication entre les périphériques. Lorsque cette option est désactivée, la radio n'est pas disponible.



Activez les alarmes réseau radio en cas de condition d'alarme. Lorsque cette option est désactivée, les alarmes réseau radio ne sont pas disponibles.

Active la sélection de fréquence dynamique lorsque la radio est activée. Cela peut être nécessaire pour éviter de perturber d'autres technologies et services qui partagent la même fréquence.

Appuyez sur  et entrez l'identifiant de réseau sans fil (SSID). Les SSID de plus de 16 caractères peuvent être tronqués à la vue utilisateur. Entrez un maximum de 32 caractères.

Sélectionnez la bande radio.

Sélectionnez un schéma d'authentification. Spécifiez ensuite les paramètres supplémentaires qui s'affichent.

Method (Méthode)	Sélectionnez une méthode. Appuyez ensuite sur  et entrez les caractères suivants : Network key (Clé du réseau) (64 caractères) ou Passphrase (Phrase secrète) (8 à 63 caractères).
	 REMARQUE Les caractères entrés pour la Network key (Clé de réseau) et la Passphrase (Phrase secrète) apparaissent sous forme d'astérisques sur le clavier puis dans le volet Radio.
Security protocol (Protocole de sécurité)	Sélectionnez le protocole de sécurité souhaité.
EAP type (Type EAP)	Sélectionnez le type EAP souhaité.
Identity (Identité)	Entrez l'identité EAP (32 caractères maximum).
Password (Mot de passe)	Entrez le mot de passe EAP (32 caractères maximum).
Key number (N° de clé)	Sélectionnez le numéro de clé WEP.
Key (Clé)	Entrez la clé WEP (10 caractères pour WEP 64 ou 26 caractères pour WEP 128).
Type d'itinérance	Sélectionner le type d'itinérance.
Server validation (Validation du serveur)	Sélectionner cette option pour activer la validation du serveur.
Inner EAP setting (Paramètre EAP interne)	Sélectionner le paramètre EAP interne.
Allow anonymous identity (Autoriser anonyme)	Sélectionnez cette option pour activer l'utilisation d'un anonyme.
Fourniture PAC	Sélectionner l'option de fourniture PAC.
Configure radio (Configurer radio)	Appuyez sur Configure radio (Configurer radio) pour activer tous les nouveaux paramètres radio non sélectionnés auparavant.



REMARQUE Aucun des paramètres de radio modifiés n'est effectif tant que vous n'avez pas appuyé sur **Configure radio**. (Configurer radio).

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur (**Sortie**).

Spécification des paramètres de radio (Lamarr)

Cette tâche s'applique uniquement aux appareils équipés d'une carte radio Lamarr. Les appareils équipés de cette carte radio comprennent les caractéristiques suivantes :

- Dans Advanced settings (Paramètres avancés), le cadre Session de l'onglet **Réseau > État** inclut **Dir. Rx packets**, (Packets Rx) **Dir. Tx packets** (Packets Tx) et **Signal-to-noise ratio** (Ratio signal/bruit).

- Dans Advanced settings (Paramètres avancés), le volet de gauche dans l'onglet **Réseau** > **Radio** comprend uniquement les options *Enable radio* (Activer radio) et *Enable radio network alarms* (Activer les alarmes réseau radio). (L'option *Enable dynamic frequency* [Activer la fréquence dynamique] n'est pas disponible).
1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet **Réseau**.
3. Appuyez sur l'onglet **Radio**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre

Enable radio (Activer radio)

Enable radio network alarms (Activer les alarmes réseau radio)

SSID

Radio band (Bande radio)

Authentication type (Type d'authentification)

Method (Méthode)

Security protocol (Protocole de sécurité)

EAP type (Type EAP)

Identity (Identité)

Password (Mot de passe)


Key number (N° de clé)

Key (Clé)

Action/Description


Activer la radio pour permettre la communication entre les périphériques. Lorsque cette option est désactivée, la radio n'est pas disponible.

Activez les alarmes réseau radio en cas de condition d'alarme. Lorsque cette option est désactivée, les alarmes réseau radio ne sont pas disponibles.

Appuyez sur  et entrez l'identifiant de réseau sans fil (SSID). Les SSID de plus de 16 caractères peuvent être tronqués à la vue utilisateur. Entrez un maximum de 32 caractères.

Sélectionnez la bande radio.

Sélectionnez un schéma d'authentification. Spécifiez ensuite les paramètres supplémentaires qui s'affichent.

Sélectionnez une méthode. Appuyez ensuite sur  et entrez les caractères : Network key (Clé du réseau) (64 caractères) ou Passphrase (Phrase secrète) (8 à 63 caractères).



REMARQUE Les caractères entrés pour la Network key (Clé de réseau) et la Passphrase (Phrase secrète) apparaissent sous forme d'astérisques sur le clavier puis dans le volet Radio.

Sélectionnez le protocole de sécurité souhaité.

Sélectionnez le type EAP souhaité.

Entrez l'identité EAP (32 caractères maximum).

Entrez le mot de passe EAP (32 caractères maximum).

Sélectionnez le numéro de clé WEP.

Entrez la clé WEP (10 caractères pour WEP 64 ou 26 caractères pour WEP 128).

Configure radio (Configurer radio)

Appuyez sur **Configure radio** (Configurer radio) pour activer tous les nouveaux paramètres radio non sélectionnés auparavant.

Appuyez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation vous invitant à mettre le moniteur hors tension.

Appuyez sur l'onglet **Settings** (Paramètres). Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil). Appuyez sur **Power down** (Mettre hors tension).

La radio redémarre.



REMARQUE Aucun des paramètres de radio modifiés n'est effectif tant que vous n'avez pas appuyé sur **Configure radio**. (Configurer radio).

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur (**Sortie**).

Spécification des paramètres du serveur

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Entrer le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Réseau**.
3. Appuyez sur l'onglet **Serveur**.
4. Sélectionnez la méthode utilisée pour identifier l'adresse IP du serveur avec lequel l'appareil communiquera.
5. Spécifier les paramètres.

Paramètre de connectivité

Manual entry (Entrée manuelle)

Action/Description

Permet à l'appareil de se connecter à un serveur continu, ponctuel ou de service à une adresse IP fixe ou avec un nom DNS spécifié. Appuyez sur le champ du serveur souhaité et entrez le nom de l'adresse IP hôte. Appuyez sur le champ de saisie Port et entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535.

Cette option prend en charge l'authentification du serveur sur l'hôte Welch Allyn (NCE et Connex CS) ou une connexion directe à l'EMR via HL-7. Appuyez sur le menu déroulant Server (Serveur) pour sélectionner le type de serveur. L'option Authentication (Authentification) est désactivée par défaut et ne s'applique que pour les serveurs ponctuels. L'authentification n'est pas disponible lorsque le cryptage des données est désactivé.

	<p>La connexion directe au DME n'est pas compatible avec les paramètres Connect to CS (Connexion CS) ou Retrieve List (Extraire la liste). Les deux paramètres sont désactivés et ne peuvent pas être sélectionnés lorsque vous activez la connexion directe au DME.</p> <p>La configuration du serveur sur l'hôte Welch Allyn restaure l'état précédent des paramètres Connect to CS (Connexion CS) ou Retrieve List (Extraire la liste) et les rend sélectionnables.</p>
NRS IP (IP NRS)	<p>Permet à l'appareil de se connecter à un service Network Rendezvous Service (NRS) à une adresse IP fixe. Touchez le clavier numérique dans les champs Network rendezvous service IP address (Adresse IP du Network Rendezvous Service) et entrez l'adresse IP. Touchez le clavier numérique dans le champ Port et entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535. L'appareil utilisera toujours cette adresse IP pour communiquer avec le serveur NRS.</p>
Nom DNS	<p>Permet à l'appareil de se connecter au Network Rendezvous Service (NRS) en saisissant un nom d'hôte à envoyer à un serveur de nom de domaine (DNS) afin de récupérer l'adresse IP du NRS. Touchez le clavier numérique dans le champ Network rendezvous service DNS name (Nom DNS du Network Rendezvous Service) et entrez le nom DNS. Touchez le clavier numérique dans le champ Port et entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535.</p> <p>L'appareil affiche l'adresse IP du NRS ainsi que l'adresse et le port du serveur Connex renvoyés par le DNS.</p> <p>Activez le chiffrement des données pour le serveur continu, ponctuel ou de service</p> <p>L'option du nom DNS est disponible uniquement dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> – La radio est désactivée – Aucune radio n'est installée
DHCP	<p>Permet à l'appareil de se connecter à Network Rendezvous Service (NRS) en saisissant un numéro de port puis en vous connectant à une adresse fournie par la réponse DHCP43. Touchez le clavier numérique dans le champ Port et entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535.</p> <p>Après avoir appuyé sur Test et vous être connecté au serveur, l'appareil affiche les adresses IP du NSR.</p>
Data encryption (Cryptage des données)	<p>Activez le chiffrement des données pour le serveur continu, ponctuel ou de service pour les types de connectivité suivants : entrée manuelle, IP NRS, Nom DNS et DHCP</p>
Authentication (Authentification)	<p>Activez l'authentification avec le serveur continu ou ponctuel. Cette option est désactivée par défaut et n'est disponible que lorsque le cryptage des données est activé et pour le type de connectivité manuelle.</p>

Restore defaults (Restaurer les valeurs par défaut)	Appuyez sur Restore defaults (Restaurer les valeurs par défaut) pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de l'option sélectionnée.
Test	Effleurez Test pour tester la connexion au serveur configuré.

6. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur (**Sortie**).

Spécification des paramètres d'Active Directory

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password** (Saisir le mot de passe).
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.

L'onglet General (Général) s'affiche.

2. Appuyez sur l'onglet Network (**Réseau**).
3. Appuyez sur l'onglet **Active Directory**.
4. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Enable Active Directory (Activer Active Directory)	Sélectionnez cette option comme première étape pour vous connecter à un serveur Active Directory (une autre façon d'effectuer des recherches de médecin). Lorsque vous activez cette commande, vous activez toutes les autres commandes de cet onglet.
Host or IP address (Adresse IP ou hôte)	Appuyez sur le clavier numérique dans le champ Host or IP address (Adresse IP ou hôte) et saisissez le nom d'hôte (nom de domaine complet) ou l'adresse IP du serveur Active Directory. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique d'une longueur maximale de 121 caractères.
Group (Groupe)	Appuyez sur le clavier numérique dans le champ Group (Groupe) et saisissez l'adresse du groupe de domaines. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique d'une longueur maximale de 121 caractères.
Clinician ID type (Type d'ID de médecin)	Appuyez sur le menu déroulant Clinician ID type (Type d'ID de médecin) pour sélectionner l'identifiant du médecin. Cette sélection n'a aucun effet sur l'affichage des informations du médecin. Elle affecte uniquement la communication de la requête au serveur Active Directory.
Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification)	Appuyez sur le clavier numérique dans le champ Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification) et saisissez le nom d'utilisateur. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique d'une longueur maximale de 100 caractères.

Authentication password (Mot de passe d'authentification)

Appuyez sur le clavier numérique dans le champ Authentication password (Mot de passe d'authentification) et saisissez le mot de passe de l'utilisateur. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique d'une longueur maximale de 20 caractères.

Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence)

Appuyez sur le clavier numérique dans le champ Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence) et saisissez ce que vous souhaitez rechercher dans Active Directory. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique d'une longueur maximale de 121 caractères.

Test

Appuyez sur **Test** pour tester la connexion au serveur Active Directory.

Les messages d'information indiquent qu'un test est en cours, puis le résultat du test (réussite ou échec).

5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
 - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

Service


Paramètres avancés et onglets d'entretien

L'onglet Advanced (Avancé) offre un accès protégé par mot de passe à la fonction Advanced settings (Paramètres avancés) du moniteur (ou mode Admin) et permet aux administrateurs d'infirmiers, aux ingénieurs biomédicaux et/ou aux techniciens de maintenance de configurer des fonctions spécifiques. L'onglet Advanced (Avancé) propose également des informations en lecture seule sur le moniteur.

Le mot de passe à saisir pour accéder aux paramètres avancés est configurable et il est également possible de lui attribuer une date d'expiration. Voir la rubrique « Mot de passe » à la fin de cette section pour plus de détails.



REMARQUE Vous ne pouvez pas accéder à Advanced settings (Paramètres avancés) lorsque des capteurs ou des alarmes physiologiques sont actifs ou lorsque des mesures de signes vitaux sont affichées.

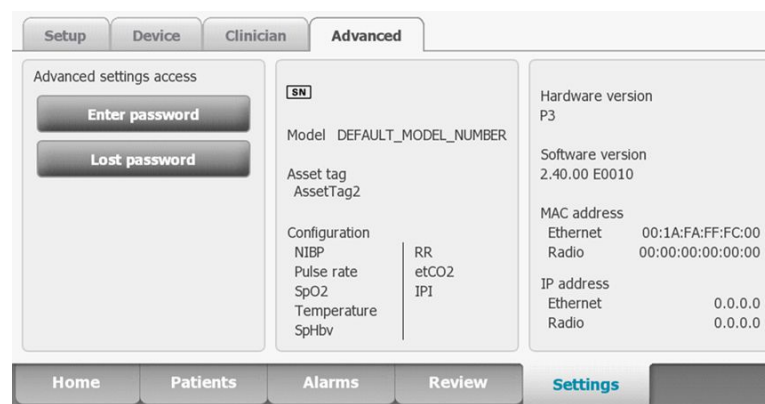

Accès aux onglets d'entretien



REMARQUE Vous ne pouvez pas accéder aux onglets d'entretien lorsque des capteurs ou des alarmes physiologiques sont actifs ou lorsque des mesures de signes vitaux sont affichées.


1. Dans l'onglet **Home** (Accueil), appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
3. Appuyez sur **Enter password**.
4. Saisissez **6345** ou le mot de passe personnalisé de l'appareil en tant que code d'accès, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur l'onglet **Service**.
L'écran **General** (Général) apparaît.
6. Effectuez des tâches d'entretien en sélectionnant d'autres onglets ou en appuyant dessus.



REMARQUE Les tâches d'entretien et les instructions correspondantes sont détaillées dans cette section.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sortie**.
L'onglet **Home** (Accueil) s'affiche.

Onglet General (Général)

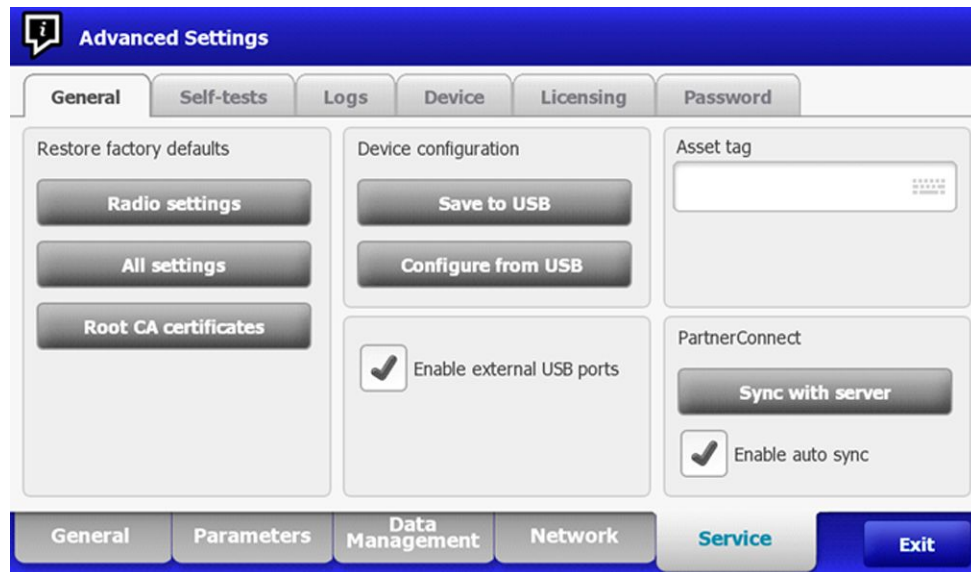

Restauration des paramètres d'usine par défaut



REMARQUE Ce processus supprime le fichier de données personnalisées. Toutes les données personnalisées seront perdues.



REMARQUE La restauration des paramètres par défaut de la radio sur un appareil équipé d'une radio Newmar supprimera tous les certificats sans fil installés.

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».

2. Appuyez sur l'onglet **General** (Général).
3. Restaurez les paramètres d'usine par défaut :
 - Pour rétablir les valeurs d'usine par défaut des paramètres radio, appuyez sur **Radio settings** (Paramètres de la radio).
 - Pour rétablir les valeurs d'usine par défaut de tous les paramètres actuels, appuyez sur **All settings** (Tous les paramètres).
 - Pour supprimer tous les certificats racines actuellement installés, sélectionnez **Root CA certificates** (Certificats racines CA).

Une fenêtre de confirmation apparaît.

4. Appuyez sur **OK**.

Les paramètres d'usine par défaut sont restaurés.

Si vous avez sélectionné **Radio settings** (Paramètres de la radio), la radio est réinitialisée et l'appareil reste sous tension.

Si vous avez sélectionné **All settings** (Tous les paramètres) ou **Root CA certificates** (Certificats racines CA), l'appareil redémarre.

Enregistrement de la configuration de l'appareil ou des données personnalisées sur un lecteur

Vous pouvez enregistrer la configuration de l'appareil ou les données personnalisées (modificateurs personnalisés et notation personnalisée) sur une clé USB. Vous pouvez utiliser la configuration enregistrée pour restaurer la configuration de l'appareil ou copier cette configuration pour l'utiliser sur d'autres appareils. Vous pouvez utiliser les données personnalisées enregistrées pour restaurer les modificateurs personnalisés ou les notations personnalisées, ou vous pouvez les copier sur un autre appareil.



REMARQUE Toutes les clés USB ne sont pas prises en charge.



REMARQUE Lors de l'enregistrement de la configuration de l'appareil, l'ID emplacement et le numéro d'inventaire ne sont pas inclus dans le fichier de configuration.



REMARQUE Save to USB ne prend pas en charge l'enregistrement des certificats racines CA et des certificats sans fil.

1. Connectez une clé USB au port USB.
2. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
3. Appuyez sur l'onglet **General** (Général).
4. Appuyez sur **Save to USB** (Enregistrer sur USB).

Une fenêtre de confirmation apparaît. Vous pouvez enregistrer la configuration de l'appareil ou les données personnalisées en cas de notations ou de modificateurs personnalisés.

5. Appuyez sur **OK**.

Si les fichiers sélectionnés existent déjà sur la clé USB, une boîte de dialogue contextuelle apparaît avec le message suivant : « Device configuration file already exists. Select OK to continue with save and overwrite existing file or cancel. » (Le fichier de configuration de l'appareil existe déjà. Sélectionnez OK pour continuer à enregistrer et remplacer le fichier existant ou annulez).

6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les données sur la clé USB ou appuyez sur **Non** pour quitter la page sans enregistrer.

Un message de confirmation apparaît.



REMARQUE Si la clé USB n'est pas compatible, le message « Unable to save configuration to USB » (Impossible d'enregistrer la configuration sur la clé USB) s'affiche. Appuyez sur **OK** pour continuer.



REMARQUE Le fichier de configuration est enregistré sous le nom CONFIG.PMP. Le fichier des données personnalisées est enregistré sous le nom CUSTOMDATA.XML.

Charger la configuration du dispositif, les données personnalisées ou les certificats racines CA

Vous pouvez charger une configuration depuis une clé USB vers l'appareil.



REMARQUE Toutes les clés USB ne sont pas prises en charge.



REMARQUE Si la configuration comprend des paramètres radio, assurez-vous que la radio est activée. La radio doit être activée avant que vous ne puissiez importer les paramètres correspondants.



REMARQUE Si un paramètre n'est pas disponible dans le fichier de configuration, la valeur d'usine par défaut est utilisée. Il peut en être ainsi lorsque le fichier de configuration a été enregistré depuis un appareil avec une autre version du micrologiciel.



REMARQUE Il est impossible de cloner les fichiers de configuration entre plusieurs appareils avec un logiciel hôte différent, sauf si le changement de version est minime.

1. Connectez une clé USB au port USB.
2. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
3. Appuyez sur l'onglet **General** (Général).
4. Appuyez sur **Configure from USB** (Configurer depuis USB).

Une fenêtre de confirmation apparaît.

5. Sélectionnez **Device configuration** (Configuration de l'appareil), **Custom data XML** (XML données personnalisées) ou **Root CA certificates** (Certificats racines CA).

Une boîte de confirmation apparaît pour confirmer le remplacement de la configuration existante.

6. Sélectionnez **OK** pour continuer, ou **Non** pour arrêter le processus.

La configuration de la clé USB remplace la configuration sur l'appareil, et l'appareil redémarre.



REMARQUE Si des données de configuration de l'appareil manquent sur la clé USB, cette option sera désactivée.



REMARQUE Si les modificateurs personnalisés manquent sur la clé USB, cette option sera désactivée.



REMARQUE Si les certificats racines CA manquent sur la clé USB, cette option sera désactivée.



REMARQUE Si le fichier de configuration est incompatible, le message « Unable to read configuration from USB » (Impossible de lire la configuration à partir de la clé USB) apparaît. Il peut en être ainsi lorsque le fichier de configuration a été cloné depuis un appareil avec une autre version du logiciel.



REMARQUE Les fichiers de configuration peuvent être modifiés ou corrigés en chargeant le fichier de configuration sur l'appareil, en apportant les modifications à la configuration via l'interface utilisateur, puis en enregistrant le fichier de configuration.



REMARQUE Les configurations radio Lamarr ne remplacent pas les configurations radio Newmar, et vice versa. Un seul fichier de configuration peut stocker des configurations radio Lamarr et Newmar. Pour créer ce fichier, créez d'abord le fichier de configuration sur un appareil avec un type de radio et enregistrez-le. Puis chargez le fichier de configuration sur un deuxième appareil avec l'autre type de radio, configurez la radio et enregistrez le fichier. Le nouveau fichier de configuration enregistré contient à la fois les configurations radio Newmar et Lamar, mais l'appareil active uniquement la configuration correspondant au type de radio de l'appareil.

Suppression des données personnalisées

Pour supprimer des données personnalisées, vous devez restaurer les valeurs d'usine par défaut du moniteur. La restauration des valeurs d'usine par défaut du moniteur entraîne également la suppression de tous les paramètres de configuration.

Pour restaurer les paramètres de configuration personnalisés et/ou les données personnalisées, enregistrez le fichier de configuration et/ou les données personnalisées sur une clé USB et rechargez le ou les fichiers après la restauration des valeurs d'usine par défaut.


Pour déterminer si les données personnalisées sont chargées dans l'appareil, procédez comme suit :

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil).

Une ligne de fichier personnalisé affiche le nom de configuration et le contrôle de redondance cyclique (CRC) dans la colonne relative à la version du micrologiciel.

Saisie d'un numéro d'inventaire

Vous pouvez saisir un identifiant alphanumérique dans le champ de données. C'est un numéro d'inventaire qui sert à identifier l'appareil.

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **General** (Général).
3. Appuyez sur  et entrez jusqu'à 20 caractères.
4. Appuyez sur **OK**.



REMARQUE Si vous souhaitez changer la langue de l'appareil, le numéro d'inventaire reste inchangé.

Activer/désactiver les ports USB externes

Les ports USB externes sont activés par défaut. Désactiver (décocher) cette option coupe l'alimentation et la transmission des données vers les ports USB externes, les rendant indisponibles pour les connexions et le stockage externe.

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **General** (Général).
3. Si les ports USB externes ont été désactivés, appuyez sur **Enable external USB ports** (Activer les ports USB externes) pour alimenter ces ports.

Une marque apparaît alors dans la case à cocher.

4. Pour désactiver les ports, appuyez sur **Enable external USB ports** (Activer les ports USB externes).

La case à cocher est maintenant vide.

Envoi des informations sur l'appareil à PartnerConnect

L'appareil envoie régulièrement des informations techniques, comme des fichiers journaux, à PartnerConnect. Vous pouvez aussi envoyer ces informations manuellement et à tout moment en procédant comme suit :

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **General**.
3. Appuyez sur **Sync with server**.
4. Si l'option Activer la synchronisation automatique a été précédemment désactivée, appuyez sur **Enable auto sync** (Activer la synchronisation automatique) pour effectuer une synchronisation automatique avec le serveur.

Une marque apparaît alors dans la case à cocher.

Onglet Self-tests (Autotests)

Étalonnage de l'écran tactile

Cet onglet permet d'étalonner l'écran tactile, le cas échéant.

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **Self-tests** (Autotests).
3. Appuyez sur **Start** (Démarrer).
 - a. Appuyez sur l'emplacement indiqué par l'appareil. L'appareil vérifie l'étalonnage actuel. Si les coordonnées et l'emplacement correspondent, une fenêtre de confirmation de l'étalonnage apparaît. Appuyez sur **OK** pour terminer.
 - b. Si les emplacements ne correspondent pas, une boîte de dialogue sur l'échec de l'étalonnage apparaît. Appuyez sur **Calibrate** (Étalonner), puis appuyez sur l'écran comme indiqué. Lorsque l'étalonnage est terminé, une fenêtre de confirmation de l'étalonnage apparaît. Appuyez sur **OK** pour terminer.

Onglet Logs (Journaux)

Affichage d'un journal d'erreurs et d'événements

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **Logs** (Journaux).
3. Affichez un rapport de journal.
 - Pour afficher un journal d'erreurs, sélectionnez **Error**. (Erreur).
 - Pour afficher un journal d'événements, sélectionnez **Event**. (Événement).

Enregistrement des journaux d'erreurs et d'événements sur une clé USB

Cette fonctionnalité est disponible dans les versions logicielles 1.71.03 et ultérieures.

Vous pouvez enregistrer une copie des journaux d'erreurs et d'événements sur une clé USB.



REMARQUE Toutes les clés USB ne sont pas prises en charge.

1. Connectez une clé USB au port USB.
2. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
3. Appuyez sur l'onglet **Logs** (Journaux).
4. Appuyez sur **Save to USB** (Enregistrer sur USB).
Une fenêtre de confirmation apparaît.
5. Appuyez sur **OK**.
Des copies des deux fichiers journaux sont enregistrées sur le disque.

Onglet Device (Appareil)

Affichage des informations sur l'appareil et le module

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil).
Les informations sur l'appareil et le module s'affichent à des fins de consultation.

Onglet Licensing (Octroi de licence)

Affichage des licences de l'appareil



REMARQUE Après avoir activé une nouvelle licence, redémarrez l'appareil pour terminer le processus d'activation.

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **Licensing** (Octroi de licence).
Une liste de licences disponibles apparaît. Les coches indiquent les licences installées.

Onglet Password (Mot de passe)

Paramètres avancés Mot de passe et réinitialisation du mot de passe



REMARQUE Vous ne pouvez pas accéder aux onglets d'entretien lorsque des capteurs ou des alarmes physiologiques sont actifs ou lorsque des mesures de signes vitaux sont affichées.

1. Dans l'onglet **Home** (Accueil), appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
3. Appuyez sur **Enter password**.
4. Saisissez **6345** ou le mot de passe personnalisé de l'appareil en tant que code d'accès, puis appuyez sur **OK**.

Configurer les mots de passe



REMARQUE Le clavier pour l'onglet Password (Mot de passe) est le clavier anglais, quelle que soit la langue configurée sur l'appareil.



REMARQUE Les nouveaux mots de passe doivent respecter des critères de longueur pour être validés.



REMARQUE Le clavier pour l'onglet Password (Mot de passe) n'applique pas la majuscule au premier caractère.



REMARQUE Si vous oubliez ou perdez votre mot de passe, vous ne pouvez pas accéder à l'onglet Password (Mot de passe). Appuyez sur **Lost password** (Mot de passe oublié), puis contactez l'assistance technique Hillrom : hillrom.com/en-us/about-us/locations/ et fournissez le code qui s'affiche à l'écran. Saisissez votre mot de passe à l'aide du clavier et appuyez sur **OK**.

1. Accédez aux onglets d'entretien, comme décrit dans la section « Accès aux onglets d'entretien ».
2. Appuyez sur l'onglet **Mot de passe**.
3. Pour modifier le mot de passe actuel, appuyez sur **Change password** (Modifier le mot de passe).
 - a. Entrez un nouveau mot de passe.



REMARQUE Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères.

La boîte de dialogue « Re-enter password » (Saisir à nouveau le mot de passe) apparaît.

- b. Appuyez sur **OK** et saisissez à nouveau le nouveau mot de passe pour confirmer la modification.

Une des deux boîtes de dialogue suivantes apparaît : « Successful password change » (Changement de mot de passe réussi) ou « Failed password change » (Échec du changement de mot de passe).
 - c. Appuyez sur **OK** et suivez les étapes suivantes, si nécessaire. Dans le cas d'un échec du changement de mot de passe, essayez de nouveau ou annulez l'opération.
4. Pour bloquer un utilisateur après 10 mots de passe incorrects consécutifs, appuyez sur **Enable failed attempt lockout** (Activer le blocage après un échec de tentative de connexion).



REMARQUE La période de blocage dure 5 minutes.

5. Pour définir une date d'expiration pour le mot de passe actuel, sélectionnez **Enable password expiration** (Activer l'expiration du mot de passe), puis entrez le nombre de jours au bout duquel le mot de passe expirera après sa création.

Une fois un mot de passe valide saisi, l'onglet **Avancé** apparaît.

Séquence de mise sous tension

Le système effectue un autotest de mise sous tension (POST) à chaque mise sous tension de l'appareil. Lors de la mise sous tension, l'appareil effectue un autotest complet du logiciel. Si les tests du logiciel sont concluants, l'appareil vérifie ensuite le matériel interne. Si tous les tests sont concluants, le système est mis sous tension et l'onglet Home (Accueil) apparaît.

Pour effectuer le POST :

1. Débranchez les câbles patient connectés à l'appareil.
2. Insérez une batterie complètement chargée dans l'appareil.
3. À chaque mise sous tension, vérifiez les éléments suivants :
 - a. La barre des voyants clignote en orange.
 - b. L'écran de démarrage apparaît.
 - c. Un bip sonore retentit, suivi d'une seule sonnerie.



REMARQUE Si vous n'entendez aucune sonnerie, remplacez le haut-parleur comme décrit dans la section « Retrait du haut-parleur ».



REMARQUE Si vous n'entendez aucune sonnerie, remplacez le haut-parleur comme décrit dans la section « Remplacement du haut-parleur ».


- d. Le logo de la gamme des produits apparaît en bas de l'écran.
- e. Si une imprimante est installée, le papier placé dedans avance légèrement.
- f. L'onglet Home (Accueil) apparaît.



AVERTISSEMENT Risque de défaillance du matériel. L'appareil est équipé d'un ventilateur qui fait circuler l'air à l'intérieur. Si le ventilateur ne démarre pas à la mise sous tension de l'appareil, mettez-le hors service et informez-en immédiatement un technicien qualifié. N'utilisez pas l'appareil tant que le problème n'est pas résolu.

Si la vérification automatique interne a réussi, l'appareil affiche ses fonctions standard avec toutes les valeurs remises à zéro. L'appareil est prêt à fonctionner. Si la vérification automatique interne a échoué, un message d'erreur apparaît dans la zone d'état de l'appareil, en haut de l'écran. Si le système a détecté une défaillance susceptible d'endommager le produit, l'appareil bascule en mode sans échec et interrompt le monitoring des patients. L'appareil reste en mode sans échec jusqu'à sa mise hors tension ou son arrêt automatique après une période d'inactivité.

En cas d'erreur système, l'appareil devient inactif jusqu'à l'activation du bouton  ou l'arrêt automatique de l'appareil. L'appareil affiche un message d'erreur système contenant une icône de

clé à molette () et un code d'erreur système pour aider le service de dépannage et les techniciens à diagnostiquer le problème.

En mode sans échec, la barre des voyants rouges et le vibreur piézoélectrique passe alternativement du mode marche au mode arrêt.

Dépannage

Cette section explique comment dépanner l'appareil dans les tableaux suivants.

- **Symptômes et solutions** : ces tableaux répertorient les symptômes que vous pourriez observer, indiquent les causes possibles et proposent des actions pour éliminer le problème.
- **Messages d'alarmes techniques** : ces tableaux répertorient les messages générés par le logiciel de l'appareil lorsqu'un problème est détecté. Ces tableaux expliquent les causes possibles et proposent des solutions pour résoudre le problème.

Ils peuvent contribuer au diagnostic et à la résolution d'un problème. Ils ne se substituent pas aux compétences de dépannage de base. Vous devez toujours remonter à la source du problème dans la carte ou le module pour décider de la meilleure voie à suivre. Welch Allyn ne prend pas en charge la réparation des composants de la carte ou du module. Pour connaître la liste des pièces de rechange disponibles, consultez la section « Unités remplaçables sur site ».



AVERTISSEMENT Ne procédez pas au dépannage d'un appareil qui émet de la fumée ou qui affiche d'autres signes de surchauffe excessive. Mettez l'appareil hors tension et appelez l'assistance technique Welch Allyn immédiatement.



MISE EN GARDE Remplacez les pièces, les composants ou les accessoires uniquement par des pièces fournies ou approuvées par Welch Allyn. L'utilisation d'autres pièces peut entraver le bon fonctionnement de l'appareil et annuler la garantie du produit.

Symptômes et solutions

Alimentation électrique


Symptôme	Cause possible	Action recommandée
L'appareil ne s'allume pas	Une nouvelle batterie a été installée	Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation C.A. pour activer la batterie.
	Le courant électrique est coupé	Brancher l'alimentation C.A.
	Le cordon d'alimentation est défectueux	Remplacer le cordon d'alimentation.
	La batterie est déchargée	Charger la batterie.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	Le bouton de mise sous tension est défectueux	Remplacer le bouton de mise sous tension.
	Une connexion interne est défectueuse	<p>Contrôler la connexion du câble flexible au J6 sur la carte mère.</p> <p>Vérifier les connexions de faisceau d'alimentation C.A. depuis le connecteur CEI.</p> <p>Vérifier le faisceau d'alimentation du bloc d'alimentation J2 au J30 sur la carte mère.</p> <p>Vérifier le faisceau d'alimentation de batterie du J2 sur la carte du connecteur de la batterie au J29 sur la carte mère.</p>
	L'alimentation électrique est défectueuse	Vérifier la tension de sortie du bloc d'alimentation. La tension doit être de 15 V \pm 0,45 V C.C. Si ce n'est pas le cas, remplacer le bloc d'alimentation.
	La batterie est défectueuse	Charger la batterie pendant 5 heures. Si l'icône de la batterie affiche encore le symbole d'une batterie épuisée, remplacer la batterie.
	La carte mère est défectueuse	Remplacer la carte mère.
La batterie ne charge pas ou son temps de service est faible	La batterie est défectueuse	Charger la batterie pendant 5 heures. Si l'icône de la batterie affiche encore le symbole d'une batterie épuisée, remplacer la batterie.
	La carte du connecteur de la batterie est défectueuse	Vérifier la carte du connecteur de la batterie pour détecter tout circuit ouvert ou endommagé. Remplacer, le cas échéant.
	La batterie a atteint la fin de sa vie utile	Utiliser l'outil d'entretien pour vérifier le nombre de cycles. Si le nombre de cycles dépasse 300, remplacer la batterie.

Matériel

Symptôme mécanique	Cause possible	Action recommandée
Ventilateur bruyant	Accumulation de poussière	Utiliser de l'air comprimé pour dépoussiérer le ventilateur.
	Le ventilateur est déséquilibré	Remplacer le ventilateur.
Fissures dans le boîtier	Agents nettoyants non approuvés	Remplacer le boîtier en plastique, le cas échéant.
		Utiliser exclusivement des agents nettoyants approuvés.

Écran

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
L'écran tactile ne répond pas	Erreur de logiciel	Redémarrer l'appareil. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé jusqu'à l'arrêt de l'appareil. Remarque Les paramètres de configuration non enregistrés par défaut seront perdus. Appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour redémarrer.
L'écran tactile n'est plus étalonné		Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets Service > Self-tests (Entretien > Autotests), puis étalonner l'écran une nouvelle fois.
Le verrouillage de l'écran tactile est activé		Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyer sur  en bas de l'écran. Pour désactiver le verrouillage de l'écran tactile, appuyer sur les onglets Settings > Device (Paramètres > Appareil), puis décocher la case Allow display lock timeout (Autoriser le délai de verrouillage de l'affichage).
Une connexion interne est défectueuse		Vérifier le branchement au J48 sur la carte mère avec le câble flexible d'affichage.
Un câble flexible d'affichage est cassé		Remplacer l'écran tactile et l'afficheur.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	Un contrôleur d'écran tactile de la carte mère est défectueux	Remplacer la carte mère.
	Force excessive ou frottement prolongé dans une zone de l'écran tactile	Remplacer l'écran tactile.
L'affichage est vide lors de la mise sous tension	L'appareil est réglé sur l'économiseur d'écran	Réactiver l'affichage en touchant l'écran ou en appuyant sur le bouton d'alimentation.
	L'appareil s'éteint après une période d'inactivité	Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets General > Display (Général > Affichage), puis définir Device power down (Mise hors tension de l'appareil) sur l'intervalle souhaité.
	Une connexion interne est défectueuse	Vérifier les connexions du faisceau d'affichage à l'écran et au J19 sur la carte mère. Remplacer le câble en cas d'endommagement.
	Un câble est endommagé	Remplacer le câble.
L'affichage est pâle	Le réglage de la luminosité est trop faible	Augmenter le réglage de la luminosité. Appuyer sur les onglets Settings > Device (Paramètres > Appareil), appuyer sur Defaults (Valeurs par défaut), puis définir Display brightness (Luminosité de l'écran) sur le niveau souhaité.
	L'affichage a atteint la fin de sa vie utile	Remplacer l'écran.

Interface utilisateur

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Impossible d'accéder aux paramètres avancés ou d'entrer le code des paramètres avancés	Le monitoring du patient est actif ou en cours de simulation	Interrompre le monitoring du patient ou arrêter la simulation.
	L'alarme du paramètre est activée	Annuler l'alarme.
	Les intervalles sont activés	Arrêter les intervalles.
Le profil souhaité n'apparaît pas dans l'onglet Profiles (Profils)	La licence du profil n'est pas installée	Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		Service > Licensing (Entretien > Octroi de licence). Vérifier que la case pour la licence du profil est cochée. Dans le cas contraire, acheter la licence et l'installer en utilisant l'outil d'entretien.
	Le profil n'est pas activé	Dans les paramètres avancés, appuyer sur l'onglet Device (Appareil), puis vérifier le(s) profil(s) que vous souhaitez activer.

Communication

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Impossible de communiquer via la connexion client USB	L'autonomie de la batterie est faible	Mettre l'appareil sous tension et laisser la batterie se recharger complètement.
	La carte de communication n'est pas alimentée en électricité	Vérifier la tension du J49 sur la carte mère pour +5,0, ± 0,5 V CC. Remplacer la carte mère, le cas échéant.
	Le client USB est défectueux	Tester la connexion en raccordant un PC qui exécute l'outil d'entretien. Vérifier que l'outil d'entretien est configuré correctement sur le PC pour communiquer avec l'appareil. Voir les fichiers d'aide de l'outil d'entretien. Repositionner le câble d'alimentation sur la carte de communication.
Les accessoires USB ne communiquent pas avec le moniteur	L'accessoire est défectueux	Remplacer par un accessoire approprié connu.
	La carte de communication n'est pas alimentée en électricité	Vérifier la tension du J49 sur la carte mère pour +5,0, ± 0,5 V CC. Remplacer la carte mère, le cas échéant.
	Une ou plusieurs connexions de l'hôte USB sont défectueuses	Tester la connexion avec une clé USB. Si aucune alimentation ou énumération n'est détectée, notamment un voyant sur une clé, remplacer la carte de communication.
	Une connexion USB est défectueuse entre la carte de communication et la carte mère	Vérifier que les câbles USB sont connectés correctement. Remplacer les câbles USB.
L'appareil ne communique pas via Ethernet avec le réseau informatique	L'appareil n'est pas configuré correctement	Vérifier les paramètres avec votre administrateur réseau.
	La carte de communication n'est pas alimentée en électricité	Vérifier la tension du J49 sur la carte mère pour +5,0, ± 0,5 V CC. Remplacer la carte mère, le cas échéant.
	La connexion Ethernet est défectueuse depuis la carte mère	Tester le câble Ethernet interne. Remplacer, le cas échéant. Vérifier que la cale est installée sur le connecteur du câble

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		Ethernet au J11, le cas échéant. Voir les notes concernant le remontage pour la carte mère.
	Les commutateurs Ethernet du réseau ne sont pas définis sur la bonne vitesse pour utiliser l'appareil	Régler les commutateurs en duplex intégral à 10 Mb/s.
	La longueur de câble jusqu'au commutateur est trop grande	Utiliser un cordon de raccordement plus court.
La radio n'a pas pu se connecter au réseau	L'appareil est en dehors du point d'accès	Vérifier la valeur RSSI pour l'écran de l'état du réseau.
	L'appareil n'est pas configuré correctement	Vérifier les paramètres avec votre administrateur réseau.
	L'antenne est défectueuse	Vérifier le câble et la connexion de l'antenne. Remplacer le câble et l'antenne, le cas échéant.
	La carte de communication n'est pas alimentée en électricité	Vérifier la tension du J49 sur la carte mère pour +5,0, ± 0,5 V CC. Remplacer la carte mère, le cas échéant.

Alarmes

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
La barre des voyants ne s'allume pas	Aucune alarme déclenchée	Vérifier que la barre des voyants clignote au démarrage du système. Vérifier que l'alarme est déclenchée par un indicateur visuel dans la zone d'état des messages et qu'une alarme sonore retentit.
	Connexion défectueuse	Vérifier le faisceau et les connexions de la barre des voyants, ainsi que le J46 sur la carte mère. Remplacer le câble défectueux, le cas échéant.
	La carte de la barre des voyants est défectueuse	Appliquer +3,3 V à la broche 1 du faisceau et relier le câble de mise à la terre à la broche 2. Vérifier que les voyants ambrés s'allument. Relier le câble de mise à la terre à la broche 3. Vérifier que

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		les voyants rouges s'allument. Si un ou deux voyants ne s'allument pas, remplacer la barre des voyants.
	La carte mère est défectueuse	Vérifier que +3,3 V ont été appliqués à la broche 1 du J46 sur la carte mère.
Aucune alarme sonore	Aucune alarme déclenchée	Vérifier que l'alarme est déclenchée par un indicateur visuel dans la zone d'état des messages et la barre des voyants. Identifier des sons audibles au démarrage.
	L'alarme sonore est désactivée	Appuyer sur l'onglet Alarms > General (Alarmes > Général), puis sélectionner Alarm audio on (Son de l'alarme activé). Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets General > Alarms (Général > Alarmes), puis désélectionner l'option Allow user to turn off general audio (Autoriser l'utilisateur à désactiver le son général).
	L'alarme sonore est trop faible	Appuyer sur l'onglet Alarms > General (Alarmes > Général), puis régler le volume en fonction des besoins. Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets General > Alarms (Général > Alarmes), puis régler l'option Minimum alarm volume (Volume d'alarme minimum) en fonction des besoins.
	Connexion défectueuse	Vérifier les connexions et le faisceau du haut-parleur, ainsi que le J12 sur la carte mère. Remplacer le câble défectueux, le cas échéant.
	Le haut-parleur est défectueux	Remplacer le haut-parleur.
	La carte mère est défectueuse	Tester la sortie du haut-parleur à l'aide d'un oscilloscope sur le J12.

PNI

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Le volet de la PNI est vide sur l'écran	Le câble USB est défectueux	Remplacer le câble USB.
	Le module PNI n'est pas connecté	Vérifier la connexion USB interne.
	Le module PNI ne fonctionne pas	Consulter les fichiers journaux des erreurs pour identifier les erreurs de PNI, le cas échéant. Voir les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien pour plus de détails sur les erreurs spécifiques et les actions suggérées.
		Vérifier sur le Welch Allyn si des mises à jour logicielles sont disponibles.
	Si aucune erreur de PNI n'est enregistrée, la carte mère peut être défectueuse	Remplacer la carte mère, le cas échéant.

SpO2

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Le volet de la SpO2 est vide sur l'écran	Le câble USB est défectueux	Remplacer le câble USB.
	Le module SpO2 n'est pas connecté	Vérifier la connexion USB interne.
	Le module SpO2 ne fonctionne pas	Consulter les fichiers journaux des erreurs pour identifier les erreurs de SpO2, le cas échéant. Voir les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien pour plus de détails sur les erreurs spécifiques et les actions suggérées. Vérifier sur le Welch Allyn si des mises à jour logicielles sont disponibles.
	Si aucune erreur de SpO2 n'est enregistrée, la carte mère peut être défectueuse	Remplacer la carte mère, le cas échéant.

SpHb

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Le volet de la SpHb est vide sur l'écran	La licence de l'interface utilisateur n'est pas installée	Acheter une licence et l'installer à l'aide de l'outil d'entretien.
	Le mauvais capteur est connecté.	Utiliser un capteur qui prend en charge le paramètre SpHb.
	Le capteur ou le câble a expiré.	Remplacer le capteur ou le câble.
	Le capteur ou le câble est défectueux	Remplacer le capteur ou le câble.
	Le paramètre SpHb n'est pas activé dans le module Masimo SpO2.	Acheter le paramètre et l'installer en utilisant l'outil d'entretien.
Le volet SpHb n'est pas disponible	Le profil sélectionné ne prend pas en charge le paramètre SpHb.	Modifier le profil sur un monitoring par intervalles ou un monitoring continu.

ECG

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Aucune alarme d'arythmie létale (LTA) n'est associée à une blessure ou au décès du patient	Licence LTA non installée	Mettre l'appareil hors service, contacter l'assistance technique sur le Welch Allyn et renvoyer l'appareil à Welch Allyn à des fins de maintenance.
	Détection de la TV, de la FV, de l'asystolie désactivée	
	Données non valides	
Aucune vignette de LTA ou ECG n'indique que la détection de l'arythmie est désactivée	Alarmes désactivées dans les paramètres avancés	Activer les alarmes.
	Aucune licence	Installer la licence.
	Impossible pour le module ECG de détecter les arythmies	Contactez l'assistance technique sur le Welch Allyn. Remplacer le module, le cas échéant.
Aucun volet ECG	Module non connecté	Vérifier le voyant du module ECG.
	Câble patient défectueux	Vérifier le câble.
	Câble de module défectueux	
	Le logiciel CVSM ne prend pas en charge l'ECG	Mettre à jour le logiciel.
	Profil non défini sur le monitoring continu	Régler le profil sur le monitoring continu.
Vignette ECG désactivée	Le type de patient est défini sur Neonate (Nouveau-né)	Modifier le type de patient sur Adult (Adulte) ou Pediatric (Enfant).
Aucune courbe	Bouton de démarrage non activé	Appuyer sur Start (Démarrer) sur la vignette ECG pour lancer la diffusion d'ondes.
	Gain ECG trop élevé	Réduire le gain ECG.
	Le type de patient est défini sur Neonate (Nouveau-né)	Modifier le type de patient sur Adult (Adulte) ou Pediatric (Enfant).
Onde bruyante	Filtre de 50 ou 60 Hz désactivé	Activer le filtre.
	La valeur sélectionnée du filtre secteur est incorrecte (50 Hz ou 60 Hz)	Régler le filtre sur la fréquence secteur requise en fonction de l'emplacement.
	Positionnement des électrodes insatisfaisant	Voir le mode d'emploi pour savoir comment bien positionner les électrodes.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Aucune vignette de stimulateur ou ECG n'indique que la détection du stimulateur est désactivée	Détection du stimulateur désactivée	Appuyer sur les onglets Settings > Setup (Paramètres > Configuration), puis sur l'onglet vertical ECG . Activer l'option Patient has a pacemaker (Le patient porte un stimulateur cardiaque).
	Impossible pour le module ECG de détecter le stimulateur	Contactez l'assistance technique sur le Welch Allyn. Remplacer le module, le cas échéant.
Aucun instantané alarmant n'a été imprimé automatiquement	L'appareil ne dispose pas d'une imprimante	Aucune. Le Connex IWS n'a pas d'imprimante.
La courbe imprimée est trop petite	Le gain ECG et/ou la vitesse de balayage sont réglés à un niveau trop bas	Augmenter le gain et/ou la vitesse de balayage et réimprimer.
Le bouton Snapshot (Instantané) est désactivé	Un instantané alarmant est en cours	Attendre une minute pour que le bouton soit activé.
	Moins d'une minute s'est écoulée entre les instantanés	
Voyant du module désactivé	Le module n'est pas alimenté en électricité	Remplacer le câble.
Voyant jaune du module	Erreur interne	Allumer l'appareil ou déconnecter, puis rebrancher le câble.
Le voyant du module s'allume en vert et en continu	Le module est mis sous tension	Fonctionne comme prévu.
Le voyant du module clignote en vert	Envoi des données	Fonctionne comme prévu.

Pèse-personne

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Le poids n'apparaît pas dans la zone des paramètres manuels	Le poids n'a pas été sélectionné dans les paramètres avancés	Dans les paramètres avancés, appuyer sur l'onglet Parameters (Paramètres), puis sélectionner Weight (Poids). Remarque Vous pouvez sélectionner uniquement quatre paramètres manuels.
	Le pèse-personne n'a pas de licence	Acheter une licence et l'installer à l'aide de l'outil d'entretien.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	Le pèse-personne n'est pas connecté	Vérifier les câbles et les connexions. Utiliser l'outil d'entretien pour tester la connectivité. Remplacer les câbles.
	Le pèse-personne n'est pas configuré	Consulter le mode d'emploi sur le pèse-personne

Température

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Le volet Température est vide sur l'affichage	Le câble USB est défectueux	Remplacer le câble USB.
	Le module de température n'est pas connecté	Vérifier la connexion USB interne.
	Le module de température ne fonctionne pas	Consulter les journaux d'erreurs pour identifier les erreurs de température. Voir les fichiers d'aide de l'outil d'entretien pour plus de détails sur les erreurs spécifiques et les actions suggérées.
	Si aucune erreur de température n'est enregistrée, la carte mère peut être défectueuse	Remplacer la carte mère, le cas échéant.




Thermomètre Braun ThermoScan PRO 4000





Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Les piles du thermomètre ne se rechargent pas	Le bloc de piles rechargeables ne permet plus la recharge	Remplacer le bloc de piles rechargeables.
	Les piles AA principales sont installées dans le thermomètre	Remplacer les piles par un bloc de piles rechargeables.
Le voyant de la base-support est vert, mais la pile est faible ou épuisée	Les piles AA principales sont installées dans le thermomètre	Remplacer les piles par un bloc de piles rechargeables.
	La base-support est défectueuse	Remplacer la base-support.
Les mesures du thermomètre ne sont transférées à l'appareil	Le câble USB externe est débranché	Vérifier la connexion USB externe.
	Le bus USB a cessé de communiquer avec la base-support Braun. (L'appareil affiche l'erreur #00000014.)	Redémarrer l'appareil hôte.



REMARQUE Pour obtenir d'autres conseils de dépannage pour le thermomètre, consultez la documentation des produits du fabricant.

Thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000

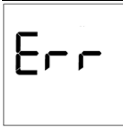Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Les mesures du thermomètre Braun sont inexactes	La lentille de la sonde est déplacée	Vérifier si la lentille a été déplacée. Si un espace est constaté dans le joint entre la monture et la lentille, remplacer le thermomètre.
	Non-respect du mode d'emploi	Voir le mode d'emploi pour assurer un bon fonctionnement. Effectuer le test de vérification fonctionnelle Braun en utilisant l'outil d'entretien ou le test manuel, comme décrit dans ce manuel. Remplacer, le cas échéant.
	L'infiltration des solutions de nettoyage a corrodé les composants électroniques	Remplacer le thermomètre. Revoir les procédures de nettoyage dans le mode d'emploi.
La vignette de température affiche ++ Le thermomètre Braun affiche une température élevée (HI)	La température mesurée se situe en dehors de la plage de températures habituelle pour le corps humain. La température élevée (HI) s'affiche lorsque la température est supérieure à 42,2 °C.	Changer l'embout de la sonde pour réinitialiser. S'assurer que le thermomètre est inséré correctement et reprendre la température.
		
La vignette de température affiche - Le thermomètre Braun affiche une température basse (LO)	La température mesurée se situe en dehors de la plage de températures habituelle pour le corps humain. La température basse (LO) s'affiche lorsque la température est inférieure à 20 °C.	
		
Le thermomètre Braun affiche l'erreur de position (POS)	Le moniteur infrarouge ne peut pas stabiliser la température, ce qui empêche toute mesure.	Changer l'embout de la sonde pour réinitialiser. Limiter les mouvements du patient et s'assurer que le positionnement de la sonde est correct et reste stable pendant la nouvelle mesure de température.
		
Le thermomètre Braun affiche un message d'erreur (Err)	La température ambiante se situe en dehors de la plage de	Patienter 20 secondes pour que le thermomètre s'éteigne

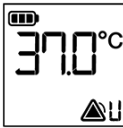Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	fonctionnement autorisée (10 à 40 °C) ou varie trop vite.	automatiquement, puis le remettre sous tension. S'assurer que le thermomètre et le patient se trouvent pendant 30 minutes dans un environnement où la température se situe entre 10 °C et 40 °C.
<p>L'écran Braun affiche toutes les icônes ou est vide</p> 	Erreur système	<p>Patienter 20 secondes pour que le thermomètre s'éteigne automatiquement, puis le remettre sous tension. Si l'erreur persiste, réinitialiser le thermomètre en retirant les piles et en les réinsérant.</p> <p>Si l'erreur persiste, les piles sont déchargées. Insérer de nouvelles piles .</p> <p>Si l'erreur persiste, contacter le centre de maintenance local Welch Allyn ou un représentant.</p>
<p>Le thermomètre Braun affiche une icône d'alerte avec « 1 » dans le coin inférieur droit</p> 	Le mode Technique Compensation (PerfecTemp) ne fonctionne pas ou est désactivé	Ouvrir l'onglet de température dans les paramètres avancés pour configurer PerfecTemp*.
<p>Le thermomètre Braun affiche une icône d'alerte avec « U » dans le coin inférieur droit</p> 	Le mode de fonctionnement Unadjusted (Non réglé) est activé	Ouvrir l'onglet de température dans les paramètres avancés pour configurer le mode de fonctionnement Unadjusted*.
La touche C/F ne fonctionne pas	Celsius activé uniquement	Ouvrir l'onglet de température dans les paramètres avancés pour désactiver la sélection Celsius uniquement*.
Le bouton de minuterie d'impulsions ne fonctionne pas	Minuterie d'impulsions désactivée	Ouvrir l'onglet de température dans les paramètres avancés pour activer la minuterie d'impulsions*.
Le thermomètre Braun affiche l'icône de verrouillage et ne répond pas	Le mode de sécurité est activé et le minuteur anti-voil est arrivé à expiration	Reposer le thermomètre Braun sur la base-support pour le déverrouiller. Le mode de sécurité est réglé sur l'onglet de température dans les paramètres avancés.
L'affichage Braun est vide après la mise à niveau	La mise à niveau logicielle a été interrompue	Retirer et remplacer la batterie tout en maintenant le bouton C/F

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		enfoncé ou reposer le thermomètre sur la base-support tout en maintenant le même bouton C/F enfoncé. Réessayer la mise à niveau.
*Les paramètres de l'appareil hôte Braun 6000 remplacent les paramètres de configuration de l'outil d'entretien Welch Allyn.		



REMARQUE Pour obtenir d'autres conseils de dépannage pour le thermomètre, consultez la documentation des produits du fabricant.

Paramètres manuels

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
La zone des paramètres manuels n'apparaît pas dans l'onglet d'accueil	Aucun manuel paramètre n'a été sélectionné dans les paramètres avancés	Dans les paramètres avancés, appuyer sur l'onglet Parameters (Paramètres), puis sélectionner les paramètres manuels souhaités. Remarque Vous pouvez sélectionner uniquement quatre paramètres manuels.
L'IMC n'est pas affiché	Le paramètre de l'IMC n'est pas sélectionné	Sélectionner le paramètre de l'IMC dans les paramètres avancés.
	La taille ou le poids ont été modifiés.	Le réglage de la taille ou du poids efface l'IMC.
	Le pèse-personne n'est pas connecté	L'IMC est disponible uniquement sur un pèse-personne qui indique aussi la taille.

Imprimante

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
L'imprimante n'imprime pas	Le côté réactif du papier thermique n'est pas face à la tête d'impression	Retourner le papier d'imprimante.
	Le papier thermique est humide	Nettoyer et sécher l'intérieur du boîtier de l'imprimante et remplacer le papier d'imprimante.
	Le câble USB est défectueux	Remplacer le câble USB.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	Le module de l'imprimante n'est pas connecté	Vérifier le câble USB et le branchement du faisceau.
	L'imprimante n'est pas alimentée en électricité	Vérifier le J17 sur la carte mère. Pour plus d'informations, voir « Schéma d'interconnexion ».
	Le module de l'imprimante ne fonctionne pas	Remplacer le module de l'imprimante.
	Le faisceau d'alimentation est défectueux	Tester le faisceau d'alimentation. Remplacer, le cas échéant.
	Si aucune erreur d'imprimante n'est enregistrée, la carte mère peut être défectueuse	Consulter les fichiers journaux des erreurs pour identifier les erreurs de l'imprimante, le cas échéant. Remplacer la carte mère, le cas échéant.
	Le fusible de l'imprimante a sauté ; vérifier le fusible F5 de l'imprimante MCE	Remplacer la plate-forme PCBA de MCE.

Lecteur de codes-barres

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Le lecteur de codes-barres est mis sous tension mais ne transfère pas de données	Aucune licence installée	Acheter une licence et l'installer à l'aide de l'outil d'entretien.
	Le lecteur de codes-barres n'est pas programmé pour utiliser le mode d'émulation de port COM USB	Consulter la documentation du fabricant pour programmer le lecteur de code-barres sur le mode Emulation port COM USB.
	Le lecteur de code-barres n'est pas pris en charge	Pour les lecteurs de code-barres Honeywell 4600g, vérifier que le PID est réglé sur 020A.
	Le lecteur de code-barres ne compte pas correctement	Mettre l'appareil Connex sous tension.
L'ID patient ou l'ID médecin ne correspond pas	Le lecteur de code-barres n'est pas programmé pour interpréter correctement les code-barres	Programmer le lecteur de code-barres pour activer les symboles requis et pour ajouter ou supprimer des caractères afin de constituer l'ID correct.

Erreurs

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
#000000001	Erreur logicielle interne	Mettre l'appareil hors tension et le redémarrer. Si l'erreur persiste, contacter l'assistance technique sur le Welch Allyn pour obtenir de l'aide.
#000000002	Erreur matérielle non classée	
#000000003	POST RAM graphique	
#000000004	POST RAM système	
#000000005	POST surveillance	
#000000006	Échec d'initiation FLASH	
#000000007	Erreur système d'affichage	
#000000008	Erreur de l'horloge en temps réel	
#000000009	Erreur système audio	
#000000010	Erreur système Ethernet	
#000000011	Échec du contrôleur de l'écran tactile	
#000000012	Au moins cinq erreurs SMBUS sur une 1 minute	
#000000013	Échec du module de communication ou de la carte mère	
#000000014	Échec du concentrateur USB sur la carte mère	
#000000015	Réinitialisation du minuteur de surveillance logicielle	

Messages d'alarmes techniques

Cette section propose les tableaux des messages relatifs aux alarmes techniques et des messages d'informations pour vous aider à résoudre les problèmes liés à l'appareil. Pour plus d'informations sur les messages physiologiques, les messages de boîte de dialogue ou les messages d'information, consultez le mode d'emploi de l'appareil.

Lorsque l'appareil détecte certains événements, un message apparaît dans la zone d'état de l'appareil, en haut de l'écran. Les types de message sont les suivants :

- Les **messages d'information** s'affichent sur un fond bleu.
- Les **alarmes de priorité très faible** s'affichent sur un fond cyan.
- Les **alarmes de priorité faible ou moyenne** s'affichent sur un fond orange.
- Les **alarmes de priorité élevée** s'affichent sur un fond rouge.

Les messages d'alarmes techniques sont de faible ou très faible priorité, sauf mention contraire dans la colonne Message.

Il est possible d'ignorer un message en effleurant celui-ci sur l'écran ou, pour certains messages, en attendant qu'il disparaisse.

Pour utiliser ces tableaux, localisez le message qui s'affiche sur l'appareil dans la colonne gauche du tableau. Le reste de la ligne explique les causes possibles et propose des solutions pour résoudre le problème.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, utilisez l'outil d'entretien pour lire les fichiers journaux des erreurs ou effectuer un test fonctionnel¹ dans le module signalant le message.

Messages relatifs à la PNI

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
NIBP air leak; check cuff and tubing connections (Fuite d'air PNI ; vérifier le brassard et les connexions de la tubulure).	Le module PNI présente une fuite d'air	Vérifier l'absence de fuite sur le brassard, les tubulures et les connexions. Si aucune fuite n'est constatée, recommencer la mesure. Si le message réapparaît, remplacer le module PNI.
NIBP not functional. Call for service. (PNI non opérationnelle. Appeler un technicien.)	Erreurs internes ou erreurs de messagerie	Consulter les journaux d'erreurs pour identifier les erreurs de PNI. Voir les fichiers d'aide de l'outil d'entretien pour plus de détails sur les erreurs spécifiques et les actions suggérées. Vérifier sur le Welch Allyn si des mises à jour logicielles sont disponibles.
	La température ambiante est hors plage	Utiliser le moniteur dans la plage de températures spécifiée.
Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement. (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les connexions ; limiter les mouvements du patient.)	La pression dépasse la limite maximale pour ce mode patient	Vérifier les connexions ; limiter les mouvements du patient. Annuler l'alarme et effectuer une nouvelle mesure de PNI.
Unable to determine NIBP; check connections and tubing for kinks. (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier que les connexions et les tubulures ne sont pas entortillées.)	La tubulure de la PNI est entortillée à l'extérieur de l'appareil	Vérifier que les connexions et les tubulures ne sont pas entortillées. Annuler l'alarme et effectuer une nouvelle mesure de PNI.
	Le module de PNI doit être étalonné	Étalonner la PNI.
	La tubulure est entortillée à l'intérieur du module PNI	Remplacer le module PNI.

¹ Nécessite l'outil d'entretien, version sous licence Gold.

Message	Cause possible	Action recommandée
Incorrect NIBP cuff size; check patient type. (Taille de brassard PNI incorrecte ; vérifier le type de patient.)	Un brassard pour nouveau-né est utilisé avec le moniteur en mode adulte ou enfant	Vérifier le type de patient et la taille du brassard. Annuler l'alarme et effectuer une nouvelle mesure de PNI.
Inflation too quick; check NIBP cuff and tubing connections. (Gonflage trop rapide ; vérifier les connexions du brassard du tensiomètre et des tubulures.)	Le gonflage du tensiomètre est trop rapide	Vérifier que les connexions et les tubulures ne sont pas entortillées. Annuler l'alarme et effectuer une nouvelle mesure de PNI.
Unable to determine NIBP; check inflation settings. (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les paramètres de gonflage.)	La pression cible était trop faible	Vérifier les paramètres de gonflage et les modifier si besoin. Annuler l'alarme et effectuer une nouvelle mesure de PNI.
		Modifier le réglage du gonflage.
	Trop de tentatives	Modifier le réglage du gonflage.
Informations		
User cancelled NIBP reading. (Mesure de la PNI annulée par l'utilisateur.)	Mesure de la pression artérielle annulée par l'utilisateur	Appuyer sur OK pour annuler. Appuyer sur le bouton de démarrage de la PNI pour annuler et redémarrer la mesure de la PNI.
Tube type does not match device configuration. (Le type de tubulure ne correspond pas à la configuration de l'appareil.) (le relevé PNI est disponible)	Le type de tubulure connecté au moniteur ne correspond pas à la configuration de la PNI	Appuyer sur OK pour annuler. Configurer les paramètres avancés de la PNI pour les faire correspondre au type de tubulure, au type de patient et à l'algorithme.
	Le commutateur à lumière unique est bloqué sur la connexion de la PNI	Utiliser un petit tournevis pour appuyer sur ce commutateur, puis le relâcher afin que le ressort réinitialise le commutateur à lumière double.
Mouvement du patient excessif.	La mesure de la PNI a été jugée imprécise	Appuyer sur OK pour annuler. Limiter les mouvements du patient et redémarrer la mesure de la PNI.

Messages relatifs aux paramètres SpO2 et SpHb

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Fonction SpO2 inopérante. Demander une réparation.	Le capteur est défectueux	Remplacer le capteur SpO2 par un capteur en bon état.
	Une erreur interne s'est produite	Mettre à jour le logiciel de l'hôte vers la version actuelle. Consulter les fichiers journaux des erreurs pour identifier les erreurs de SpO2, le cas échéant. Voir les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien pour plus de détails sur les erreurs spécifiques et les actions suggérées. Vérifier sur le Welch Allyn si des mises à jour logicielles sont disponibles.
Connecter le capteur SpO2 au moniteur.	Le capteur n'a pas été détecté	Vérifiez la connexion du capteur.
		Remplacez le capteur.
Remplacez le capteur SpO2.	Le capteur est défectueux	Remplacer le capteur.
	Le capteur a expiré (applicable uniquement aux capteurs SpO2 / SpHb)	Remplacez le capteur.
	Aucun capteur n'est connecté	Connecter le capteur.
	Le câble patient est défectueux	Remplacez le câble.
	Le module SpO2 est défectueux	Vérifier la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de la SpO2 approprié. Si le message persiste après que vous avez installé le testeur de la SpO2, remplacer le module.
Searching for SpO2. (Recherche de la SpO2.) (Alarme de priorité élevée)	Le capteur SpO2 n'est pas attaché au doigt du patient	Appuyer sur l'icône d'alarme ou le volet SpO2 pour ignorer l'alarme. Définir les seuils d'alarmes de la SpO2 sur Off (Désactivé). Attacher à nouveau le capteur SpO2 au doigt du patient.

Message	Cause possible	Action recommandée
Low SpO2 signal quality. Check sensor. (Qualité du signal de SpO2 faible. Vérifier le capteur.)	Position du capteur inadéquate sur le patient	Retirez le capteur du patient et repositionnez-le.
Low SpHb signal quality. Check sensor. (Qualité du signal de SpO2 faible. Vérifier le capteur.)	Câble patient ou capteur défectueux	Remplacer le câble patient ou le capteur.
Low perfusion. Check sensor. (Perfusion faible. Vérifier le capteur.)	Le module SpO2 est défectueux	Vérifier la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de la SpO2 approprié. Si le message persiste après que vous avez installé le testeur de la SpO2, remplacer le module.
SpO2- Mode uniquement. Vérifier le capteur ou le câble.	Le capteur fonctionne tel un capteur SpO2 uniquement, car son étalonnage a échoué	Rebranchez le câble au moniteur. Retirez le capteur du patient et repositionnez-le.
SpO2 sensor expires in... (Le capteur de SpO2 expire dans...)	Le capteur arrive bientôt à expiration	Remplacez le capteur.
Remarque Ce message s'affiche uniquement sur les appareils configurés avec la SpHb.		
Remplacer le câble SpO2.	Le câble ne fonctionne pas correctement	Remplacez le câble.
	Le module SpO2 est défectueux	Vérifier la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de la SpO2 approprié. Si le message persiste après que vous avez installé le testeur de la SpO2, remplacer le module.

Messages relatifs à la température (SureTemp)

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Connecter la sonde de température.	Aucune sonde n'est connectée	Connecter une sonde de température et réessayer.
	La sonde est défectueuse	Remplacer la sonde de température.
	Le module de température a renvoyé un message de connexion de sonde	Connecter une sonde de température et réessayer. Si une sonde est déjà connectée, la remplacer.

Message	Cause possible	Action recommandée
	Le module de température SureTemp est défectueux	Vérifier la fonctionnalité du module en remplaçant la sonde de température par la clé d'étalonnage. Si le message persiste après que vous avez installé la clé d'étalonnage, remplacer le module.
Insert correct color-coded probe well. (Insérer le puits de sonde de la bonne couleur.)	Le puits de sonde est absent	Insérer un puits de sonde de température.
	Le module de température SureTemp est défectueux	Vérifier que le bras du levier à l'arrière du boîtier à puits de la sonde actionne le commutateur SW1 sur la plate-forme PCBA de température. Si le problème persiste, remplacer le module.
Replace temperature probe. (Remplacer la sonde de température.)	La sonde est défectueuse	Remplacer la sonde de température.
	Le module de température SureTemp est défectueux	Vérifier la fonctionnalité du module en remplaçant la sonde de température par la clé d'étalonnage. Si le message persiste après que vous avez installé la clé d'étalonnage, remplacer le module.
<p>Retry temperature measurement. (Essayer à nouveau de mesurer la température.)</p> <p>Remarque Ce message est souvent accompagné d'autres messages relatifs à la température.</p>	Une erreur de chauffe de la sonde ou de données s'est produite	Effectuer un nouveau relevé de température. Si le problème persiste, remplacer la sonde.
	Les réglages utilisateur doivent être ajustés	Ajuster les réglages utilisateur et réessayer.
	La température ambiante est hors plage	Utilisez le moniteur dans la plage de températures spécifiée. Effectuez une nouvelle mesure de température sur le patient.
	Le module de température SureTemp est défectueux	Vérifier la fonctionnalité du module en remplaçant la sonde de température par la clé d'étalonnage. Si le message persiste après que vous avez installé la clé d'étalonnage, remplacer le module.
Limite température/temps dépassée. Essayer à nouveau de relever la température.	Le délai du mode direct est dépassé	Déposer la sonde de température dans le puits de la sonde et recommencer la mesure.

Message	Cause possible	Action recommandée
Informations		
Perte de contact avec les tissus.	Perte de contact avec les tissus lors de la tentative d'acquisition d'une mesure de température ou la mesure acquise a été obtenue avec un contact limité avec les tissus	Appuyer sur OK pour annuler le message. Reprendre une mesure de la température.

Messages relatifs à la température (Braun ThermoScan PRO)

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Unable to detect temperature. Retry measurement. (Impossible de détecter la température. Réessayer).	La mesure n'a pas été prise	Réessayer.
	Mesure rappelée depuis la mémoire	
	Câble USB desserré ou endommagé	Vérifier la connexion et le câble USB. Remplacer, le cas échéant.
	Batterie déchargée L'affichage Braun est vide ou le niveau de la batterie indique une barre	Recharger ou remplacer la batterie.
	Le thermomètre Braun affiche l'erreur de position (POS)	Changer l'embout de la sonde pour réinitialiser. Limiter les mouvements du patient et s'assurer que le positionnement de la sonde est correct et reste stable pendant la nouvelle mesure de température.
	Le thermomètre Braun affiche un message d'erreur (Err) La température ambiante se situe en dehors de la plage de fonctionnement autorisée (10 à 40 °C) ou varie trop vite.	Patienter 20 secondes pour que le thermomètre s'éteigne automatiquement, puis le remettre sous tension. S'assurer que le thermomètre et le patient se trouvent pendant 30 minutes dans un environnement où la température se situe entre 10 °C et 40 °C.
Thermometer might be docked improperly. (Le thermomètre est peut-être mal enclenché.)	Le thermomètre n'est pas enclenché correctement	Ré-enclencher le thermomètre.
	Le thermomètre a des contacts sales	Nettoyer les contacts de la base-support et du thermomètre avec de l'alcool isopropylique à 70 %. Voir les instructions de nettoyage pour le thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000.
Braun temperature not functional.	Expiration du délai de communication Le transfert BDD a pris plus de temps que	Retirer et remplacer la batterie pour réinitialiser, puis reposer

Message	Cause possible	Action recommandée
Call for service. (Température Braun non fonctionnelle. Appeler un technicien.)	prévu L'autotest de mise sous tension (POST) n'est pas terminé ou a échoué dans le délai prévu	le thermomètre sur la base-support. Si l'erreur persiste, appeler un technicien.
	Échec du POST L'affichage Braun affiche toutes les icônes ou est vide	
	Paramètre non pris en charge Erreur de définition des données du capteur (lorsque le proxy n'est pas en mesure de définir les paramètres à l'aide du DDS local)	
	Échec de sérialisation WACP	
	Tension maximale de la batterie Braun dépassée La tension de la batterie est trop élevée	
	Compatibilité BDD Braun	
	Compatibilité BDD Braun inattendue	
	Échec d'envoi des messages Braun Échec de communication Braun	
Temperature not functional. Call for service. (Température non fonctionnelle. Appeler un technicien.)	Une erreur interne s'est produite	Consulter les fichiers journaux des erreurs pour identifier les erreurs de température, le cas échéant. Voir les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien pour plus de détails sur les erreurs spécifiques et les actions suggérées. Vérifier auprès de Welch Allyn si des mises à jour logicielles sont disponibles.
	Le câble USB est déconnecté	Vérifier le câble USB.
	La batterie est déchargée ou manquante	Remplacer les batteries.

Messages ECG

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Électrodes Off :	L'appareil est configuré pour 5 dérivation, mais vous en utilisez 3	S'assurer que l'appareil est configuré pour le nombre approprié de dérivation dans les paramètres avancés.
Électrodes CEI (N, F, R, L, C)	(N, F, R, L, C) débranchées	Connecter la dérivation (N, F, R, L, C).
Électrodes AHA (RA, LA, LL, V)	(RA, LA, LL, V) déconnectées	Connectez les dérivation (RA, LA, LL, V).
Electrode x off. (Électrode x débranchée.)	Une dérivation est débranchée	Vérifier les connexions de toutes les dérivation.
ECG not functional. (ECG non opérationnel.)	Erreur module ECG, erreur WACP, échec de données	Vérifier le câble USB et les connexions. Effectuer le test fonctionnel. Si le test échoue, contacter le service client et remplacer le module ECG, le cas échéant.
	Le module ECG n'a pas transmis les données de l'ECG au cours des 30 dernières secondes	Vérifier le câble USB et les connexions. Effectuer le test fonctionnel. Si le test échoue, contacter le service client et remplacer le module ECG, le cas échéant.
	Le module ECG est déconnecté	Vérifier la connexion du module ECG à l'appareil Connex.
	Bits de compatibilité d'alarme inattendus	Redémarrer l'appareil Connex et le module ECG ; si l'erreur persiste, contacter le service client. Effectuer le test fonctionnel. Si le test échoue, contacter le service client et remplacer le module ECG, le cas échéant.

Message	Cause possible	Action recommandée
Cannot analyze ECG. (Impossible d'analyser l'ECG.)	Impossible pour le module d'analyser le signal ECG pour la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire et/ou l'asystolie	Vérifier les électrodes et les dérivations, et les remplacer, le cas échéant.
		Vérifier la connexion du câble patient au module ECG.
		Effectuer le test fonctionnel. Si le test échoue, contacter le service client et remplacer le module ECG, le cas échéant.
Cannot measure ECG. (Impossible de mesurer l'ECG.)	Impossible pour le module ECG de détecter une courbe ECG au cours des 30 dernières secondes	Vérifier les électrodes et les dérivations, et les remplacer, le cas échéant.
		Vérifier la connexion du câble patient au module ECG.
		Effectuer le test fonctionnel. Si le test échoue, contacter le service client et remplacer le module ECG, le cas échéant.
Searching for respiration. (Recherche de respiration en cours.)	Impossible pour l'ECG de mesurer les respirations du patient	Vérifier les électrodes et les dérivations, et les remplacer, le cas échéant.
		Vérifier la connexion du câble patient au module ECG.
		Effectuer le test fonctionnel. Si le test échoue, contacter le service client et remplacer le module ECG, le cas échéant.
	Vous n'utilisez pas la dérivation II pour observer la respiration	Veiller à consulter la dérivation II pour observer la respiration.
	Tentative d'acquisition de l'ECG/impédance respiratoire	Vérifier les électrodes et les dérivations, et les remplacer, le cas échéant.

Message	Cause possible	Action recommandée
		Vérifier la connexion du câble patient au module ECG.
		Effectuer le test fonctionnel. Si le test échoue, contacter le service client et remplacer le module ECG, le cas échéant.
Respiration alarm limits changed. (Seuils d'alarme respiration modifiés.)	Les seuils d'alarme physiologique de la respiration ont été modifiés, car la source de la respiration a changé	Réinitialisez les limites d'alarme.

Messages liés au pèse-personne

Message	Cause possible	Action recommandée
Weight scale not functional. Call for service. (Balance non fonctionnelle. Appeler un technicien.)	La balance ne fonctionne pas correctement	Vérifier la balance.
		Utiliser l'outil d'entretien pour vérifier la connectivité avec l'adaptateur.
		Remplacer les câbles.
		Remplacer l'adaptateur.

Messages relatifs au module de communication

Message	Cause possible	Action recommandée
Communications module did not power on properly. (Mise sous tension incorrecte du module de communication.) Power down the device. (Mettre le dispositif hors tension.) (Alarme de priorité élevée)	La carte de communication n'est pas connectée correctement à la carte mère	Vérifier la connexion USB au J4. Vérifier la connexion électrique au J50. Vérifier la tension à partir du J49 de la carte mère pour +5 V \pm 0,5 V C.C. Remplacer la carte mère, le cas échéant.
	Dysfonctionnement de la carte de communication	Remplacer la carte de communication.

Messages radio (Lamarr)

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		

Message	Cause possible	Action recommandée
Radio not functional. Call for service. (Radio non fonctionnelle. Appeler un technicien.)	Dysfonctionnement matériel	Remplacer la radio.
	Le logiciel de la radio n'est pas correct	Mettre à jour le logiciel radio.
Erreur radio. Mettre l'appareil hors tension et le redémarrer.	Le moniteur et la radio ne sont pas parvenus à établir une communication	Mettre le moniteur hors tension, puis le redémarrer.
		<p>Si le problème persiste, vérifier ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connexions USB et électriques entre la carte mère et la carte de communication. • Connexion entre la carte radio et la carte de communication. • Compatibilité logicielle entre le moniteur et la radio. <p>Remplacer la radio, le cas échéant.</p>
Unable to establish network communications. Radio out of network range. (Impossible d'établir des communications réseau. Radio hors de portée du réseau.)	La radio ne communique plus avec le point d'accès	Vérifier que le moniteur se trouve dans la zone de couverture de la radio. Veiller à la bonne configuration de la radio sur le réseau. Si ce message apparaît de manière intermittente, vérifier la valeur RSSI.
Unable to establish network communications. Call for service. (Impossible d'établir des communications réseau. Appeler un technicien.)	Impossible d'obtenir une adresse IP depuis le serveur DHCP	Vérifier qu'un serveur DHCP est disponible sur le réseau. Le moniteur requiert une adresse IP sur un serveur DHCP.
Radio Software upgrade failed. (Échec de la mise à niveau du logiciel radio.)	La connexion avec l'hôte a été interrompue	Rétablir la connexion et réessayer.
	La radio n'a pas été configurée correctement	Rétablir les valeurs d'usine par défaut de la radio et réessayer.
	Erreur matérielle	Remplacer la radio.
Informations		
Radio software upgrade in progress. Do not shut down. (Mise à niveau du logiciel de la radio en cours. Ne pas arrêter l'appareil.)	Le logiciel radio est gravé sur la radio	Ne pas interrompre la mise à niveau avant la fin.
Radio card rebooting; please wait. (Redémarrage de la carte radio ; veuillez patienter.)	La radio redémarre lors de la mise à niveau logicielle	Ne pas interrompre la mise à niveau avant la fin.

Messages radio (Newmar)

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Radio non fonctionnelle. Demander une réparation.	Erreur de communication/radio interne	Redémarrer la radio. Si l'erreur persiste, réinstaller le logiciel. Si l'erreur persiste après avoir réinstallé le logiciel, vérifier si une mise à jour logicielle est disponible et l'installer. Si l'erreur persiste après la mise à jour du logiciel, remplacer la radio.
Unable to establish network communications. (Impossible d'établir des communications réseau.)	Association impossible avec le point d'accès après 30 secondes	Vérifiez la configuration de la radio. Contacter le service informatique et vérifier le réseau.
	Authentification impossible après 30 secondes	Vérifiez la configuration de la radio. Contacter le service informatique et vérifier le réseau. En cas d'utilisation du programme FIPS, vérifier que les types d'authentification sont compatibles avec le programme FIPS.
Radio card DHCP timeout. (Délai d'attente du DHCP de la carte radio dépassé.)	Impossible d'établir des communications entre la radio et le serveur DHCP (réseau) Demande DHCP expirée avant d'obtenir l'adresse DHCP	Vérifier le serveur DHCP. Vérifier les paramètres de configuration de la radio.
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.)	Erreur de configuration de la radio	Contacter le service informatique pour vérifier que les paramètres de la radio sans fil correspondent aux paramètres du réseau. En cas d'utilisation du programme FIPS, vérifier que les types d'authentification sont compatibles avec le programme FIPS. Si le problème persiste, rétablir les valeurs d'usine par défaut.

Message	Cause possible	Action recommandée
		<p>Si le problème persiste après une réinitialisation usine, vérifier si une mise à jour logicielle est disponible et l'installer.</p> <p>Si le problème persiste après la mise à jour du logiciel, remplacer la radio.</p>
<p>Lost network communications. Radio out of network range. (Perte de communication réseau. Radio hors de portée du réseau.)</p>	<p>La radio communiquait mais elle est hors de portée, elle n'est plus alimentée ou, pour d'autres raisons, elle n'est plus en mesure de continuer à communiquer avec le point d'accès</p>	<p>Déplacer l'appareil dans la zone de couverture du réseau.</p> <p>Vérifier le point d'accès et s'assurer qu'il est sous tension.</p> <p>Vérifier que la valeur RSSI est supérieure à -65 dbi.</p> <p>Vérifier les paramètres de la radio sans fil.</p> <p>Vérifier la configuration du réseau.</p>
<p>Configuration invalid without certificates. Install certificates and try again. (Configuration invalide sans certificats. Installer les certificats et réessayer.)</p>	<p>Erreur de certificat pour la configuration radio</p>	<p>Vérifier que les paramètres de certificat sont corrects et qu'ils n'ont pas expiré.</p> <p>Charger les certificats.</p> <p>Vérifier les paramètres de configuration radio et les types d'authentification.</p> <p>Si le problème persiste, rétablir les valeurs d'usine par défaut et recharger les certificats.</p> <p>Si le problème persiste après une réinitialisation usine, vérifier si une mise à jour logicielle est disponible et l'installer.</p> <p>Si le problème persiste après la mise à jour du logiciel, remplacer la radio.</p>
Informations		
<p>Certificate load failed. (Échec de chargement du certificat.)</p>	<p>Le certificat client de la radio ne s'est pas chargé</p>	<p>Vérifier que le certificat comprend tous les éléments requis.</p> <p>Vérifier le journal du serveur de certificats.</p>

Message	Cause possible	Action recommandée
Certificate load successful. (Chargement du certificat réussi.)	Certificats client de la radio chargés avec succès depuis l'hôte	Aucune action requise.

Messages relatifs à Ethernet

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Réseau introuvable ; vérifier la connexion du câble réseau.	Un câble réseau est débranché	Vérifier la connexion du câble réseau.
	Une connexion réseau est rompue ailleurs	Vérifier le câblage du réseau.

Messages relatifs à USB

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
External device not recognized. (Appareil externe non reconnu.)	Un appareil externe non reconnu est connecté	Reconfigurer l'appareil externe.
		Remplacer l'appareil externe.
		Déconnecter l'appareil non pris en charge
USB Communication failure. (Échec de communication USB.) Call for service. (Appeler un technicien.)	Un appareil interne ou externe est connecté, mais l'énumération a échoué	Mettez l'appareil hors tension et redémarrez-le.
		Vérifier l'appareil externe.
		Vérifier les connexions USB externes et internes.
Informations		
Dispositif externe non enregistré sous licence pour utilisation.	Un appareil nécessitant une licence a été connecté à la clé USB	Obtenir un code d'autorisation auprès de Welch Allyn pour activer la licence.
Unable to save configuration to USB. (Impossible d'enregistrer la configuration sur la clé USB.)	Un problème est survenu lors de l'écriture sur le fichier de configuration sur la clé USB	Utiliser une clé USB approuvée par Welch Allyn.
		Vérifier que la clé USB n'est pas verrouillée.

Message	Cause possible	Action recommandée
		Vérifier qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur la clé USB.
Unable to read configuration from USB. (Impossible de lire la configuration sur la clé USB.)	Un problème est survenu lors de la lecture du fichier de configuration sur la clé USB	Redémarrer et réessayer.
Accessoire USB déconnecté.	Le câble USB entre un appareil externe et le moniteur est débranché	Vérifiez que le câble USB est connecté à l'appareil et au moniteur.

Messages système

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Définir la date et l'heure.	La date ou l'heure n'est pas réglée	Réglez la date et l'heure.
	La date ou l'heure n'est pas réglée correctement	Réinitialisez la date ou l'heure.
Incompatible Welch Allyn device. (Appareil Welch Allyn incompatible.)	Un appareil USB connu procède à l'énumération mais échoue	L'appareil peut être défectueux. Tester un bon appareil connu.
Redémarrage inattendu est survenu. Demander une réparation.	Une erreur système a provoqué le redémarrage du moniteur	Vérifier les fichiers journaux des erreurs et des événements. Exécuter le test de vérification avec l'outil d'entretien.
Informations		
Device shutdown is not available at this time. (Impossible d'arrêter l'appareil à ce stade.)	L'appareil ne peut pas être mis hors tension immédiatement	Appuyer sur OK pour annuler le message. Si une opération est en cours, attendre sa fin avant de tenter l'arrêt. Si l'appareil ne répond pas, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Remarque Toutes les modifications de configuration non enregistrées par défaut sont perdues.

Messages relatifs au gestionnaire de capacité de la batterie

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Batterie faible : autonomie limitée à plus ou moins 5 minutes. (Alarme de priorité élevée)	La capacité de la batterie est très faible	Brancher le moniteur sur l'alimentation C.A. S'il n'est pas branché, le moniteur s'éteint automatiquement.
La batterie est absente ou défectueuse.	Aucune batterie insérée dans le moniteur	Insérer une batterie.
Battery is absent or faulty. (Batterie non installée ou défectueuse.) Call for service. (Appeler un technicien.)	La batterie est défectueuse	Remplacez la batterie.
Batterie faible : autonomie limitée à plus ou moins 30 minutes.	L'autonomie de la batterie est faible	Appuyer sur l'icône d'alarme pour ignorer le message ou brancher le moniteur sur l'alimentation C.A.
Informations		
L'appareil fonctionne sur la batterie.	Le cordon d'alimentation CA est débranché	Appuyer sur l'icône d'alarme pour ignorer le message ou brancher le moniteur sur l'alimentation C.A.

Messages relatifs au gestionnaire de configuration

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Imposs. charger config.; utilisation param. usine.	Une erreur de chargement de la configuration s'est produite	Restaurer les valeurs d'usine par défaut. Si le problème persiste, remplacer la carte mère.
Erreur fonctionnelle. Demandez une réparation.	Une erreur critique de chargement de la configuration s'est produite	Remplacer la carte mère.
Informations		
Aucune connexion pour l'envoi.	Le moniteur n'est pas configuré sur le réseau	Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets Data Management > Clinical Data (Gestion de données > Données cliniques), puis désactiver l'option Automatically send on manual save (Envoyer automatiquement en cas

Message	Cause possible	Action recommandée
		d'enregistrement manuel) si vous souhaitez uniquement conserver les mesures sur l'appareil.
		Si vous souhaitez envoyer des mesures, configurer l'appareil sur le réseau.

Messages relatifs à la gestion des données du patient

Message	Cause possible	Action recommandée
Alarme		
Nombre maximum de dossiers de patient enregistrés. Le dossier le plus ancien a été écrasé.	Le nombre maximum de dossiers de patient a été enregistré sur l'appareil	Dans l'onglet Review (Relire), supprimer les dossiers obsolètes afin d'éviter le déclenchement de l'alarme lors de l'enregistrement de nouveaux dossiers.
Informations		
Aucune donnée enregistrée.	Aucune donnée de patient n'est disponible.	Effectuer un relevé ou entrer des signes vitaux avant d'enregistrer.
ID du patient obligatoire pour l'envoi des données.	La configuration nécessite l'ID du patient pour procéder à l'enregistrement des données.	Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets Data management > Patient (Gestion des données > Patient), puis désactiver le paramètre Require patient ID to save readings (Demander l'ID patient pour enregistrer les mesures).
ID du médecin obligatoire pour l'enregistrement des données.	La configuration nécessite l'ID du médecin pour procéder à l'enregistrement des données	Dans les paramètres avancés, appuyer sur les onglets Data management > Clinician (Gestion des données > Médecin), désactiver le paramètre Require clinician ID to save readings (Demander l'ID médecin pour enregistrer les mesures).
ID du patient nécessaire pour procéder à l'envoi de données.	La configuration nécessite l'ID du patient pour procéder à l'envoi des données.	Ajouter un ID de patient.
La liste des patients est complète. Supprimer quelques patients pour en ajouter d'autres.	Le nombre maximal de patients a été dépassé	Supprimer un patient de la liste avant d'ajouter un nouveau patient.

Message	Cause possible	Action recommandée
Arrêter les intervalles pour sélectionner le nouveau patient.	Le moniteur est configuré pour effectuer des mesures à intervalles	Arrêter les intervalles avant de changer de patient.
No connection for send. (Aucune connexion pour l'envoi.)	Aucune connexion n'est disponible pour envoyer des données manuellement ou pour envoyer des données automatiquement lors d'un enregistrement manuel	Vérifier la connexion du réseau. Vérifier les paramètres de configuration de la radio.
Impossible d'identifier le médecin.	L'ID ou le mot de passe du médecin est incorrect	Vérifier l'ID et le mot de passe du médecin (le cas échéant), puis réessayer.
Unable to retrieve list. (Impossible d'extraire la liste.)	Impossible pour l'appareil d'extraire la liste de patients sur le réseau	Vérifier la connexion du réseau. Vérifier les paramètres de configuration de la radio. Vérifier que le serveur est disponible.

Messages relatifs au réseau

Message	Cause possible	Action recommandée
Perte connectivité avec hôte.	La station centrale ou une autre application hôte s'est arrêtée ou ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que l'application hôte fonctionne correctement.
Failed to authenticate to server. (Échec de l'authentification du serveur.)	<p>L'appareil est configuré pour une authentification de serveur, mais l'authentification du serveur a échoué pour l'une des raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le nom de domaine du serveur ne correspond pas à celui indiqué dans le certificat du serveur Le certificat a expiré (hors durée de validité) Le certificat n'a pas été vérifié Le certificat a été révoqué 	<p>Vérifier que les certificats de serveur sont valides.</p> <p>Vérifier que le bon fichier de certificat de l'AC existe sur l'appareil pour authentifier le certificat de serveur.</p> <p>Vérifier la configuration du serveur. Vérifier que l'authentification est configurée correctement.</p>
	Le serveur n'est pas configuré pour l'authentification	Désactiver l'option d'authentification du serveur sur l'appareil.

Démontage et réparation

Ce chapitre est réparti en deux grandes sous-sections, comme présenté dans le tableau suivant.

Section A	Section B (Conforme à la norme CEI 60601, 3e et 4e édition)
<p>Appareils remplissant ces critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication avant 11/2017* • Matériel MCE version P3 ou antérieure <p>(Voir le volet de droite dans l'onglet Advanced Settings [Paramètres avancés])</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication avant le numéro de série* 100043244817 	<p>Appareils de la 3e édition remplissant ces critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication après 11/2017* • Matériel MCE version P5 ou ultérieure <p>(Voir le volet de droite dans l'onglet Advanced Settings [Paramètres avancés])</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication après le numéro de série* 100043244817 <p>Appareils de la 4e édition remplissant ces critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication après 12/2018**

* Reportez-vous à la section « Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur » dans l'annexe pour connaître le format et la signification du numéro de série.

** Reportez-vous au bulletin du service client 80022414 CSB – CVSM/CIWS CEI 60601 4e édition pour connaître les dates exactes de début et de fin de fabrication ainsi que le numéro de série du premier appareil de la 4e édition.

Section A	Section B (Conforme à la norme CEI 60601, 3e et 4e édition)
<p>Appareils remplissant ces critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication avant 11/2017* • Matériel MCE version P3 ou antérieure <p>(Voir le volet de droite dans l'onglet Settings [Paramètres])</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication avant le numéro de série* 100023374817 	<p>Appareils de la 3e édition remplissant ces critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication après 11/2017* • Matériel MCE version P5 ou ultérieure <p>(Voir le volet de droite dans l'onglet Settings [Paramètres])</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrication après le numéro de série* 100023374817 <p>Appareils de la 4e édition remplissant ces critères :</p>

Section A**Section B****(Conforme à la norme CEI 60601, 3e et 4e édition)**

- Fabrication après 12/2018**

* Reportez-vous à la section « Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur » dans l'annexe pour connaître le format et la signification du numéro de série.

** Reportez-vous au bulletin du service client 80022414 CSB – CVSM/CIWS CEI 60601 4e édition pour connaître les dates exactes de début et de fin de fabrication ainsi que le numéro de série du premier appareil de la 4e édition.

Examinez votre appareil pour déterminer la sous-section à suivre pour effectuer les procédures de démontage et de réparation.

Cette présentation comprend des vues éclatées du boîtier arrière et du châssis principal avec des légendes associées à chaque pièce. Ces vues éclatées s'appliquent à la section A et à la section B, bien que certaines pièces soient propres à une section ou à un ensemble d'appareils et pas à l'autre. Dans les instructions, les numéros entre parenthèses correspondent aux légendes des vues éclatées. Sauf mention contraire, la procédure de remontage est l'inverse de la procédure de démontage.

Cette présentation comprend des vues éclatées du boîtier frontal et de la partie intérieure arrière avec des légendes associées à chaque pièce. Ces vues éclatées s'appliquent à la section A et à la section B, bien que certaines pièces soient propres à une section ou à un ensemble d'appareils et pas à l'autre. Dans les instructions, les numéros entre parenthèses correspondent aux légendes des vues éclatées. Sauf mention contraire, la procédure de remontage est l'inverse de la procédure de démontage.

Les instructions de démontage pour chaque pièce peuvent inclure une sous-section, voire les deux sous-sections suivantes :

- **Notes concernant le remontage** : cette section comprend des informations propres au remontage, qui ne figurent pas dans les instructions de démontage, en particulier lorsque le remontage ne se limite pas à l'opération inverse du démontage.
- **Remplacement du composant** : cette section comprend des informations propres à l'installation d'une nouvelle option ou d'une pièce de rechange.



AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Débranchez l'alimentation C.A. avant d'ouvrir l'appareil. Débranchez et retirez la batterie avant de procéder au démontage. Le non-respect de cette consigne peut causer de graves blessures et endommager l'appareil.



AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Débranchez l'alimentation C.A. avant d'ouvrir l'appareil. Débranchez et retirez la batterie avant d'ouvrir le châssis principal. Le non-respect de cette consigne peut causer de graves blessures et endommager l'appareil.



AVERTISSEMENT Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Veuillez ne pas mettre en court-circuit, écraser, incinérer, ni démonter le bloc-batterie.



AVERTISSEMENT Risque lié à la sécurité. Ne procédez pas à l'entretien de l'appareil lorsque celui-ci est connecté à un patient.



MISE EN GARDE Avant de démonter l'appareil ou d'installer des options, débranchez le patient du moniteur, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation et tous les accessoires annexes (capteurs de SpO₂, tuyaux et brassards du tensiomètre, sondes de température, modules ECG, bases-supports Braun et lecteurs de code-barres) de l'appareil.



MISE EN GARDE Avant de démonter l'appareil ou d'installer des options, débranchez le patient du moniteur, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation et tous les accessoires annexes (capteurs de SpO₂, tuyaux et brassards du tensiomètre, sondes de température, bases-supports Braun et lecteurs de code-barres) de l'appareil.



MISE EN GARDE Retirez le puits de la sonde du module de température avant le démontage.



MISE EN GARDE Effectuez toutes les procédures de réparation sur une station de travail protégée contre les décharges électrostatiques.



MISE EN GARDE Lorsque le boîtier de l'appareil est ouvert, manipulez toutes les pièces avec le plus grand soin. Exécutez toutes les étapes de la procédure avec soin et précision.



MISE EN GARDE Respectez les spécifications des couples de serrage, en particulier avec des vis qui se fixent directement dans les entretoises en plastique.



MISE EN GARDE Pour éviter de mélanger les vis et les orifices, associez les vis à chaque élément au fur et à mesure du retrait des modules et des assemblages de circuits imprimés. Vous pouvez installer les vis de la machine de manière erronée, aux endroits prévus pour les vis plastite. Les vis plastite de cet appareil ont une tête cylindrique Torx.



MISE EN GARDE Après avoir effectué ces procédures et avant de retourner l'appareil pour un entretien, vous devez utiliser l'outil d'entretien (édition sous licence Gold) pour réaliser tous les tests fonctionnels et vous assurer ainsi que tous les systèmes fonctionnent dans les spécifications conceptuelles prévues. Pour plus d'informations sur ces tests et l'outil d'entretien, consultez la section « Vérification fonctionnelle et étalonnage ».

Si vous n'avez pas l'outil d'entretien, contactez l'assistance technique Welch Allyn.



REMARQUE Le module Capteur EarlySense et le module CO₂ ne peuvent être installés que sur le châssis étendu.

Pour plus d'informations sur les vis ou les connecteurs utilisés dans l'appareil, consultez l'annexe.

Outils et équipements requis

- Embout Phillips n° 1
- Embout Phillips n° 2
- Embout Torx n° 10
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 2,9 kg-cm \pm 0,29 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 6,9 kg-cm \pm 1,15 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 8,6 kg-cm \pm 0,57 kg-cm
- Tournevis pour écrous à fente
- Pincette
- Pince à long bec
- Spudger
- Outil pour attache
- Pince coupante pour attache
- Lingettes nettoyantes douces pour optique
- Ciseaux ou autre outil de coupe
- Air comprimé
- Ruban adhésif
- Bande Pro Gaff


Pour plus d'informations sur les vis et les connecteurs utilisés dans l'appareil, consultez l'annexe.

- Embout Phillips n° 1
- Embout Phillips n° 2
- Embout Torx n° 10
- Douille de 8 mm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 2,9 kg-cm \pm 0,29 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 6,9 kg-cm \pm 1,15 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 8,6 kg-cm \pm 0,57 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 13,8 kg-cm \pm 1,15 kg-cm
- Tournevis pour écrous à fente
- Pincette
- Pince à long bec
- Spudger
- Outil pour attache
- Pince coupante pour attache
- Lingettes nettoyantes douces pour optique
- Ciseaux ou autre outil de coupe
- Air comprimé
- Pièce de monnaie pour ouvrir la trappe de la batterie (choisir un format parfaitement adapté à la fente)
- Bande Pro Gaff

Pour plus d'informations sur les vis et les connecteurs utilisés dans l'appareil, consultez l'annexe.

Présentation du démontage

Le tableau suivant décrit le démontage complet de l'appareil. La plupart des activités de démontage nécessitent l'exécution des étapes détaillées ci-dessous. Le diagramme illustre les étapes à suivre dans l'ordre pour retirer un composant donné. Dans la mesure où il peut être nécessaire de changer l'ordre des étapes préliminaires pour retirer certains composants, vous devez vous reporter à ce diagramme au début de chaque procédure de démontage et de remplacement des composants. Une liste des étapes préliminaires présentées au début de chaque rubrique de démontage fournit les conditions préalables pour réussir le démontage. (Certaines tâches du diagramme sont facultatives en fonction du type de démontage.)

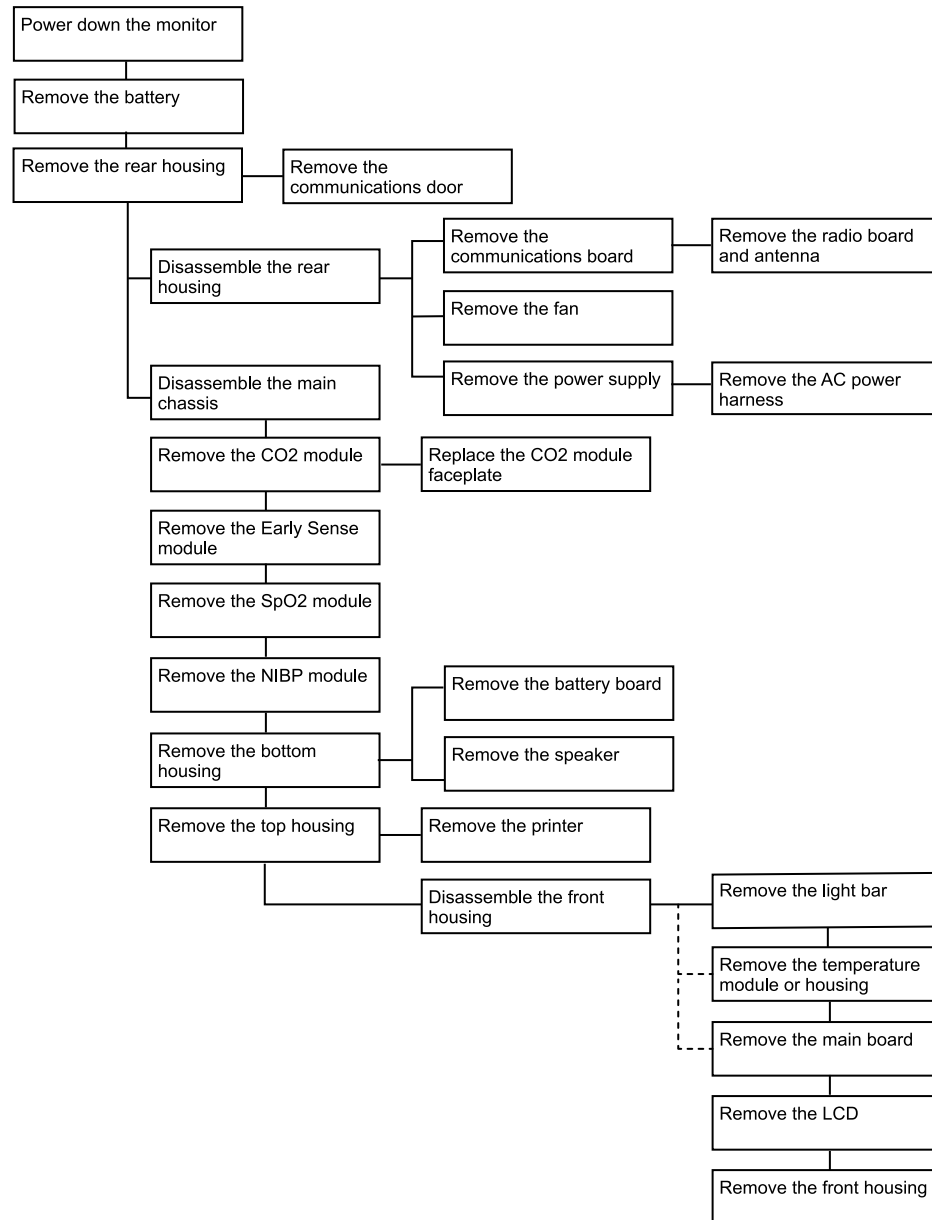

Section A

Cette section concerne les appareils fabriqués avant novembre 2017, les numéros de série antérieurs à 100043244817 et le matériel MCE version P3 ou antérieure.



REMARQUE Si votre appareil ne respecte pas ces critères, consultez la section B pour obtenir les instructions de démontage et de réparation.



REMARQUE Voir « Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur » dans l'annexe pour savoir comment déterminer la date de fabrication à partir du numéro de série.

Si le matériel MCE a pour version P2 ou P3, NE remplacez PAS les composants par les kits d'entretien au suffixe « 3e éd. ». Les kits d'entretien CEI de l'édition 3 ne sont pas compatibles avec les versions P2 et P3 pour les équipements.

Les kits d'entretien avec le suffixe « 4e édition » peuvent être utilisés sur tous les appareils exécutant le logiciel de l'hôte version 1.71.03 ou 2.20.00 et ultérieure, *à l'exception du 107124* (KIT D'ENTRETIEN, CVSM, MODULE SpO2, NELLCOR 4e édition). Utilisez uniquement le 107124 sur les appareils exécutant le logiciel de l'hôte version 2.41.xx ou ultérieure.

Cette section concerne les appareils fabriqués avant novembre 2017, les numéros de série antérieurs à 100023374817 et le matériel MCE version P3 ou antérieure.



REMARQUE Si votre appareil ne respecte pas ces critères, consultez la section B pour obtenir les instructions de démontage et de réparation.



REMARQUE Voir « Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur » dans l'annexe pour savoir comment déterminer la date de fabrication à partir du numéro de série.

Si le matériel MCE a pour version P2 ou P3, NE remplacez PAS les composants par les kits d'entretien au suffixe « 3e éd. ». Les kits d'entretien CEI de l'édition 3 ne sont pas compatibles avec les versions P2 et P3 pour les équipements.

Les kits d'entretien avec le suffixe « 4e édition » peuvent être utilisés sur tous les appareils exécutant le logiciel de l'hôte version 1.71.03 ou 2.20.00 et ultérieure, *à l'exception du 107124* (KIT D'ENTRETIEN, CVSM, MODULE SpO2, NELLCOR 4e édition). Utilisez uniquement le 107124 sur les appareils exécutant le logiciel de l'hôte version 2.41.xx ou ultérieure.

Mise hors tension de l'appareil

Vous pouvez éteindre l'appareil comme suit : 1) sur les appareils dotés du logiciel 2.x, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation situé sur le boîtier, puis suivez les instructions à l'écran, ou 2) sur tous les appareils, utilisez uniquement les commandes à l'écran.

Option 1. Après la mise sous tension de l'appareil, une brève pression sur le bouton d'alimentation permet d'ouvrir une boîte de dialogue avec les options suivantes :

- **Mettre hors tension.** Le comportement de l'appareil varie en fonction du profil actif, de l'enregistrement ou non des données de tendances patient et de l'établissement ou non du contexte du patient. Lors de l'entretien de l'appareil, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ces détails. Ces détails sont destinés aux médecins, qui surveillent les patients et stockent leurs données.
- **Veille.** Le bouton de mise en veille efface le contenu de l'écran et fait basculer l'appareil en mode d'économiseur d'écran.
- **Non.** Le bouton Cancel (Annuler) permet de fermer la boîte de dialogue.

Appuyez sur **Mettre hors tension** et terminez la procédure de mise hors tension.

Option 2. Pour utiliser uniquement les commandes affichées pour mettre l'appareil hors tension, procédez comme suit :


1. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur l'onglet **Device (Appareil)**.
3. Appuyez sur **Mettre hors tension**.




REMARQUE Les trois sections suivantes abordent les procédures de démontage et de réparation que vous pouvez effectuer sans retirer l'appareil du mur ou sans enlever la batterie. Toutes les étapes de la section relative au retrait du système du mur et au retrait de la batterie nécessitent une mise hors tension, ainsi que le retrait de l'appareil du mur et le retrait de la batterie.


Retrait de la batterie

Avant de retirer la batterie, mettez le moniteur hors tension, comme décrit dans ce manuel et débranchez le cordon d'alimentation C.A.


1. Retourner le moniteur pour avoir accès au capot du logement de la batterie.
2. Localisez le capot du compartiment de la batterie, signalé par .
3. Insérez une pièce dans la fente et poussez pour ouvrir. Choisissez une pièce dont le format est parfaitement adapté à la fente.

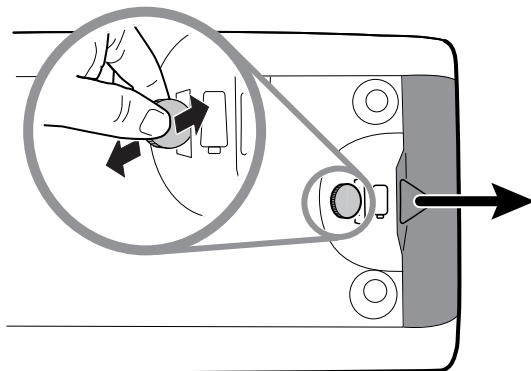

4. Retirez la batterie en tirant sur l'étiquette visible lorsque vous ouvrez le capot du compartiment de la batterie.

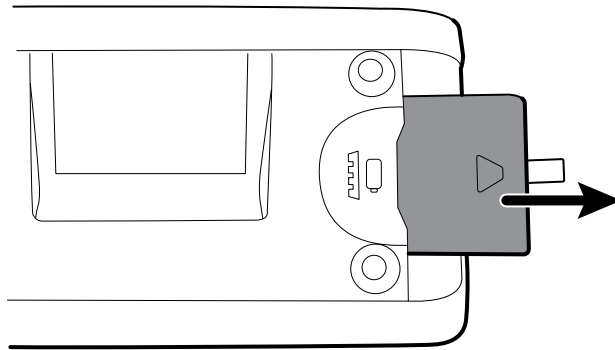

Retrait du boîtier arrière

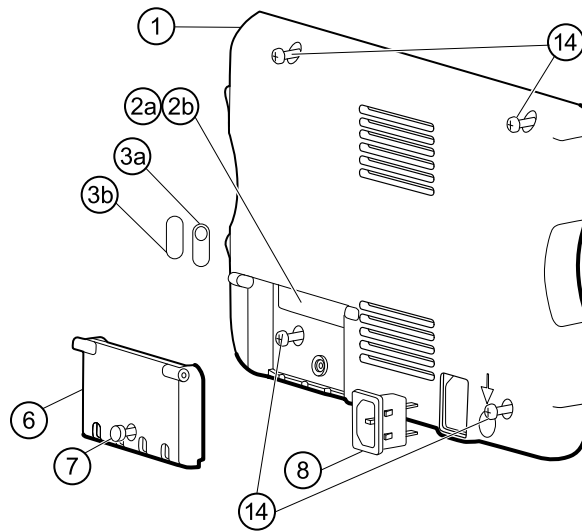


N°	Élément	N°	Élément
1	Boîtier arrière	6	Porte de communication
2a	Étiquette USB 4 hôtes USB	7	Vis captive de la porte de communication
2b	Étiquette USB 1 hôte USB (modèle 6300 uniquement)	8	Connecteur CEI
3a	Étiquette d'appel infirmier	14	Vis, M4 x 10, tête cylindrique avec NYLOC
3b	Aucune étiquette d'appel infirmier (modèle 6300 uniquement)		


Avant de commencer, mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation C.A. et retirez la batterie, comme décrit dans ce manuel.

1. Déposez la face du moniteur vers le bas, sur le tapis antistatique.
2. Desserrez la vis (7) pour ouvrir la porte de communication (6).
3. Ouvrez la porte de communication (6) pour accéder à la vis du boîtier arrière.

4. Retirez les quatre vis du boîtier arrière (14).
5. Dressez le moniteur sur ses pieds en orientant l'écran loin de vous.
6. Soulevez le haut du boîtier arrière en l'éloignant du moniteur pour accéder aux connexions câblées du boîtier arrière.
7. Débranchez les pièces suivantes du module de communication tout en tenant le boîtier arrière :

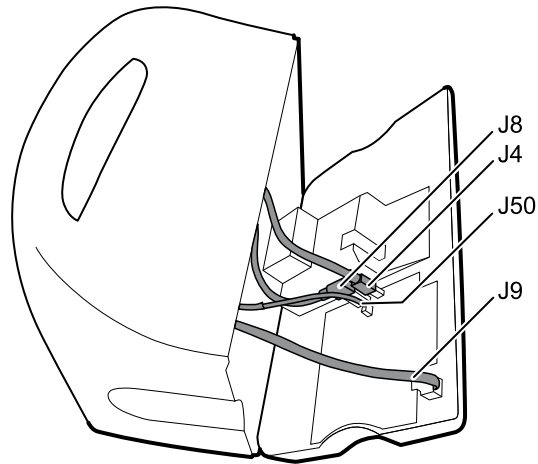

- a. Câble Ethernet du J9
 - b. Petit connecteur USB du J4
 - c. Grand connecteur USB du J8
 - d. Câble de communication du J50
8. Procédez comme suit avec le capot du bloc d'alimentation tout en tenant le boîtier arrière :
 - a. Dégagez les câbles d'alimentation et du ventilateur du guide-fil sur le côté du capot du bloc d'alimentation.
 - b. Débranchez le câble d'alimentation de la carte d'alimentation sur le J2.

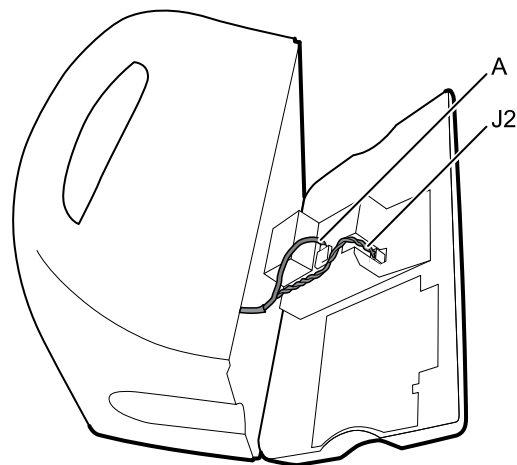

- c. Débranchez le câble du ventilateur (A) du faisceau principal.
- d. Séparez le boîtier arrière (1) du moniteur.

Après le retrait du boîtier arrière, choisissez la partie du moniteur à utiliser :

- Composants du boîtier arrière. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section « Démontage du boîtier arrière ».

- Châssis principal. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section « Démontage du châssis principal ».

Notes concernant le remontage

- Acheminez le câble d'alimentation et les câbles du faisceau du ventilateur dans le canal sur le côté du capot du bloc d'alimentation.
- Certaines cartes de communication comportent deux grands connecteurs USB. Le grand connecteur USB J8 est le plus proche du connecteur mini USB J4. À titre indicatif, consultez le schéma relatif à la carte de communication dans les annexes.
- Lors de la fermeture du boîtier, vérifiez qu'aucun fil n'est écrasé ou pincé avant de resserrer les vis. Après le serrage des vis, examinez le joint entre le boîtier arrière et le châssis principal pour vérifier l'absence de renflement. Un renflement indique que la fermeture des surfaces d'e contact est entravée.

Remplacement du boîtier arrière



REMARQUE Le kit d'entretien de rechange pour le boîtier arrière est assemblé avec la porte de communication, la tige de terre, la plaque de la borne de mise à la terre, le connecteur CEI et le faisceau d'alimentation C.A. Il est inutile de récupérer ces composants dans l'ancien boîtier arrière.

1. Suivez les procédures nécessaires pour démonter le boîtier arrière et retirez tous les composants à transférer vers le boîtier de rechange.
2. Branchez le faisceau d'alimentation au connecteur CEI (8). Consultez les notes concernant le remontage pour le bloc d'alimentation.
3. Installez le joint du boîtier arrière (15), inclus dans le kit d'entretien pour le boîtier arrière, dans la fente du bord extérieur du boîtier arrière. Pour une installation aisée, utilisez un petit tournevis à tête plate pour insérer le joint dans le canal plus facilement.
4. Installez les composants récupérés de l'ancien boîtier arrière dans l'ordre inverse des instructions de démontage.
5. Après le remontage du boîtier arrière, installez le cache du client USB (40) comme suit :
 - a. Placez le cache du client USB sur un câble USB mini B en orientant la bande vers l'extérieur.
 - b. Décollez la bande pour exposer l'adhésif.
 - c. Insérez le câble USB dans la connexion USB client, appuyez sur le câble et retirez-le pour coller le cache au boîtier arrière.
6. Installez ces étiquettes :
 - Étiquette USB (2a pour les modèles 6400, 6500, 6700 et 6800 ; 2b pour le modèle 6300) dans l'ouverture de la porte de communication.
 - Étiquette d'appel infirmier (3a pour les modèles 6400, 6500, 6700 et 6800 ; 3b pour le modèle 6300) sur la connexion du système d'appel infirmier.

Retrait de la porte de communication




REMARQUE Si la porte de communication est manquante ou déjà retirée de l'appareil, passez à la section « Remplacement de la porte de communication ».




AVERTISSEMENT Risque de blessure. Dans la mesure où le retrait de la porte peut propulser la broche et le ressort dans les airs, portez des lunettes de sécurité pour réaliser ces étapes.

Avant de retirer la porte de communication, mettez le moniteur hors tension, retirez la batterie et le boîtier arrière conformément aux consignes.

1. Positionnez le boîtier arrière en orientant la connexion Ethernet vers le bas sur un tapis antistatique.
2. Ouvrez la porte de communication perpendiculairement au boîtier arrière.

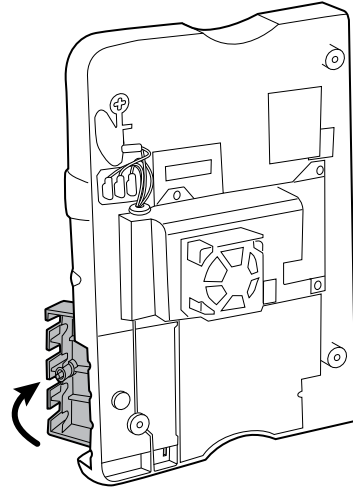

3. Utilisez un spudger pour pousser la broche vers le haut et libérer la charnière.

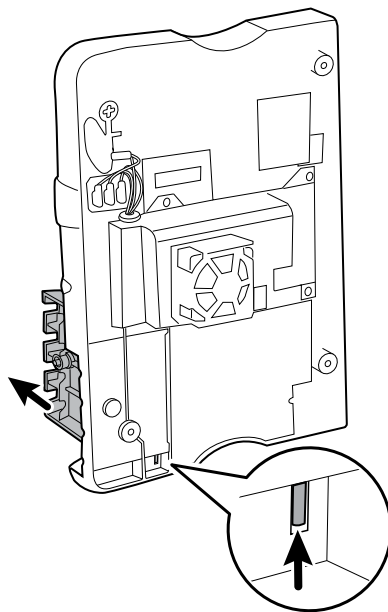


4. Retirez la porte du boîtier arrière avec précaution.

Remplacement de la porte de communication




AVERTISSEMENT Risque de blessure. Dans la mesure où la fixation de la porte peut propulser la broche et le ressort dans les airs, portez des lunettes de sécurité pour réaliser ces étapes.


1. Insérez un ressort et deux broches dans la porte de communication, comme illustré ci-dessous.

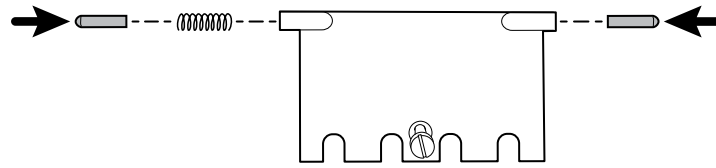


2. Le bas de la porte se trouve sur le tapis antistatique. Insérez la broche sur le côté droit de la porte dans la charnière du boîtier arrière.

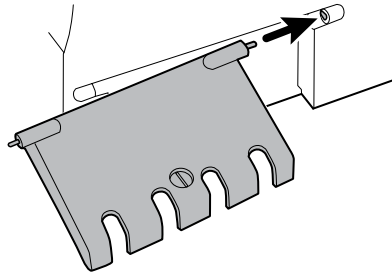

3. Appuyez sur la broche à gauche de la porte et faites glisser la porte dans la charnière du boîtier arrière jusqu'à entendre un déclic.

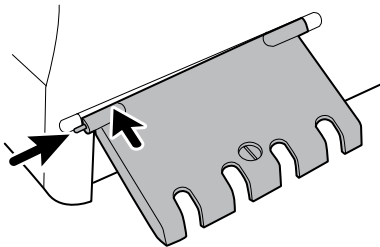

Démontage du boîtier arrière

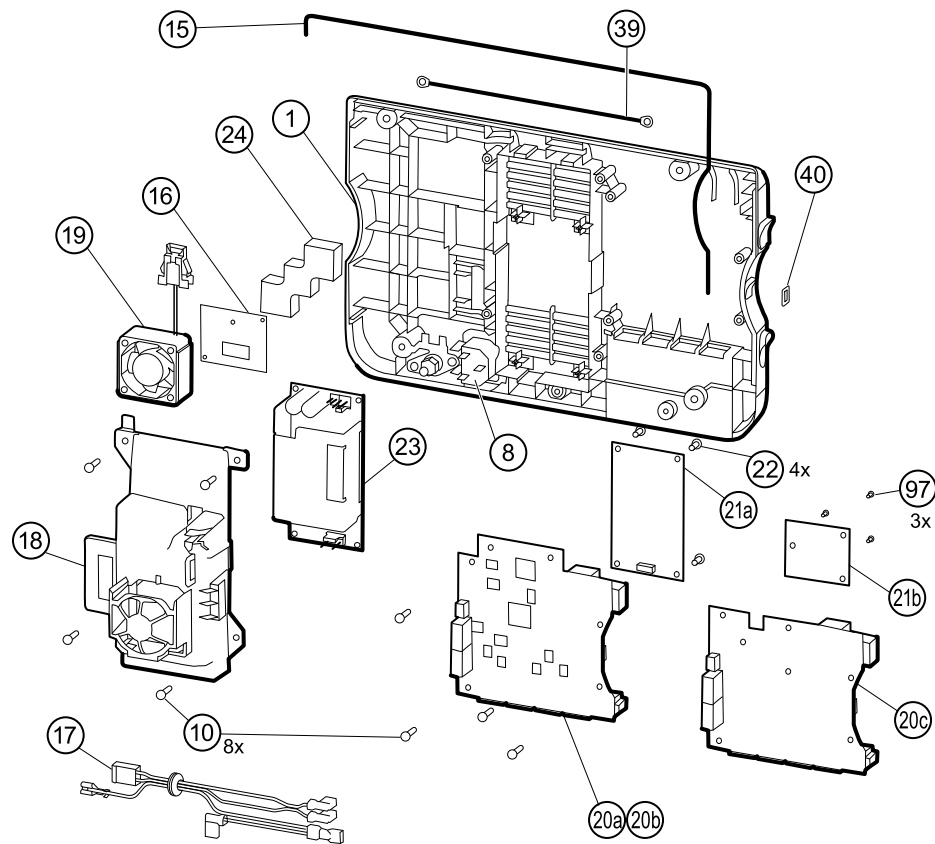

N°	Élément	N°	Élément
1	Boîtier arrière	20c	Carte de communication pour radio Newmar (modèles 6400, 6500, 6700 et 6800)
8	Connecteur CEI	21a	Carte radio, Lamarr, 802.11a/b/g
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	21b	Carte radio, Newmar, 802.11a/b/g/n
15	Joint du boîtier arrière (tubulure Norprene)	22	Vis, M3 x 0,5, tête cylindrique Phillips
16	Carte de l'antenne	23	Carte alimentation
17	Faisceau d'alimentation C.A.	24	Bloc en mousse de montage de l'antenne
18	Capot du bloc d'alimentation	39	Câble de l'antenne
19	Ventilateur	40	Cache du client USB
20a	Carte de communication (modèle 6300)	97	Vis, M3 x 0,5 x 8, tête cylindrique Phillips (Vis Phillips petit format)

N°	Élément	N°	Élément
20b	Carte de communication (modèles 6400, 6500, 6700 et 6800)		

Retrait de la carte de communication

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Déposez le boîtier arrière sur sa face arrière, sur le tapis antistatique.
 2. Retirez les quatre vis Torx (10) qui fixent la carte de communication (20a ou 20b) au boîtier arrière.
 3. Retirez la carte de communication en procédant comme suit :
 - a. Soulevez le bord intérieur de la carte jusqu'à ce que le connecteur USB dégage le canal filaire sur le capot du bloc d'alimentation.
 - b. Faites glisser légèrement la carte vers le bloc d'alimentation et soulevez-la jusqu'à ce qu'elle touche le canal filaire sur le capot du bloc d'alimentation.
 - c. Soulevez le bord extérieur de la carte jusqu'à ce que les connecteurs latéraux dégagent le boîtier arrière.
 - d. Pour les moniteurs équipés d'une radio : faites tourner légèrement la carte (sans tirer sur le câble de l'antenne) dans le sens antihoraire, en pivotant sur le coin supérieur gauche. Retournez la carte et positionnez-la à l'extérieur du boîtier supérieur.
 4. Si vous remplacez la carte de communication, retirez la carte radio (21) comme décrit dans la section « Retrait de la carte et de l'antenne radio ».

Notes concernant le remontage

- Si la carte radio a été retirée, réinstallez-la avant de réinstaller la carte de communication.
- Pour installer la carte de communication, procédez comme suit :
 1. Positionnez la carte sur les entretoises avec le bord intérieur sous le canal filaire sur le capot de l'alimentation électrique, jusqu'à ce que le bord extérieur se retrouve dans le boîtier arrière.
 2. Alignez le connecteur externe mini USB avec l'ouverture sur le côté du boîtier arrière.
 3. Faites glisser le connecteur mini USB dans l'ouverture pour que la carte repose sur les entretoises.

Remplacement de la carte de communication

Installez la carte radio sur la nouvelle carte de communication avant d'installer la carte de communication sur le boîtier arrière.

Retrait de la carte et de l'antenne radio




MISE EN GARDE Ne retirez pas l'antenne radio du boîtier arrière à moins de remplacer la radio et l'antenne ou le boîtier arrière.


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Carte de communication
1. Si le moniteur est équipé d'une radio :
 - a. Retournez la carte de communication pour accéder à la carte radio, en évitant de surtendre le câble de l'antenne.
 - b. Si la radio Lamarr d'origine (bande a/b/g) est installée, retirez les quatre petites vis Phillips (machine) fixant la carte radio à la carte de communication, comme indiqué sur la gauche. Si la radio Newmar d'origine (bande a/b/g/n) est installée, retirez les trois petites vis Phillips (machine) fixant la carte radio à la carte de communication, comme indiqué sur la droite.


Lamarr

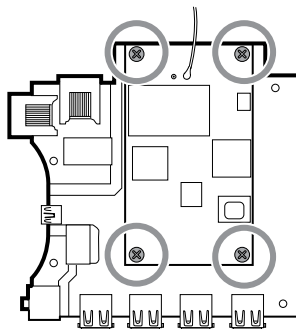

Newmar

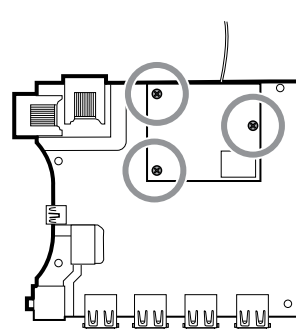


- c. Tenez la carte de communication d'une main, tout en saisissant la carte radio à l'autre extrémité de la connexion de l'antenne, et retirez sur la carte radio de la carte de communication.
2. (Effectuez cette étape uniquement si vous remplacez la radio ou l'antenne.) Débranchez le câble de l'antenne radio de la carte radio.
3. Retirez les quatre vis Torx (10) qui fixent le capot du bloc d'alimentation.

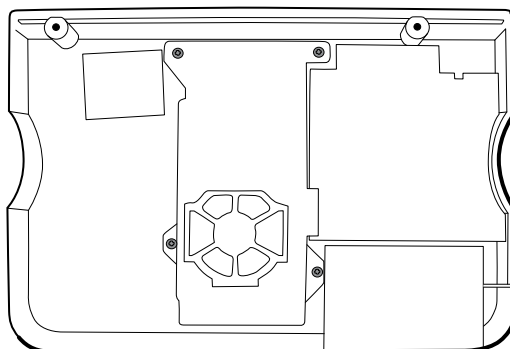

4. Retirez le capot du bloc d'alimentation (18).
5. Utilisez un outil comme un spudger pour séparer le bloc de mousse (24) et l'intérieur du boîtier arrière.

Notes concernant le remontage


Acheminez le câble de l'antenne dans le canal en haut du boîtier arrière.

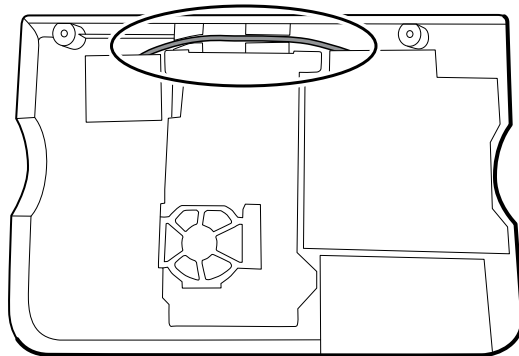


Remplacement de la carte radio et de l'antenne

1. Si l'antenne est retirée, nettoyez le boîtier arrière et la surface de montage avec de l'alcool isopropylique.
2. L'illustration suivante montre à la fois les radios Lamarr et Newmar et les cartes de l'antenne. Connectez le câble de l'antenne à la borne G de la carte radio. Connectez l'autre extrémité du câble à l'antenne sur la borne PG.


Lamarr

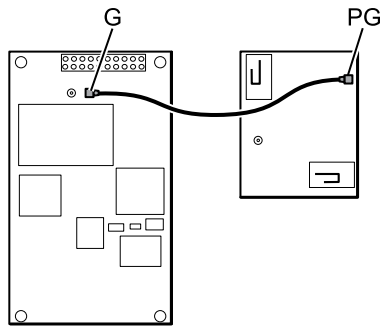


Newmar

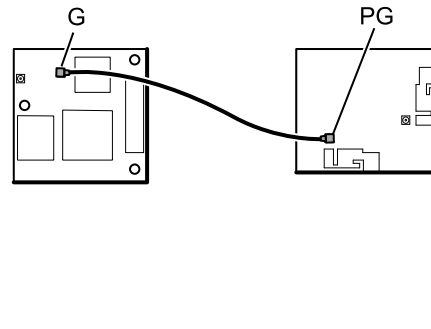

3. Retirez la pellicule de protection du bloc de mousse (24) et collez le bloc de mousse au boîtier arrière.

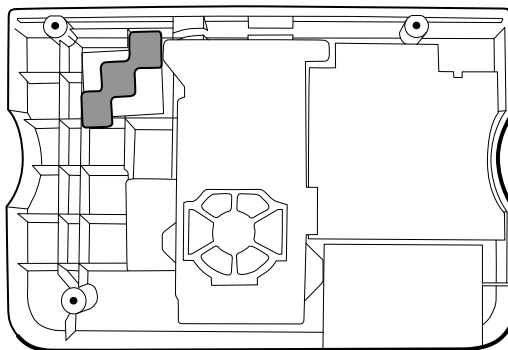


4. Exposez l'adhésif sur le bloc de mousse. Installez l'antenne (16) sur le bloc de mousse avec le câble de l'antenne (39) orienté en dessous de la carte, et dans le canal filaire au-dessus du bloc d'alimentation.
5. Acheminez le câble de l'antenne dans le canal en haut du boîtier arrière.

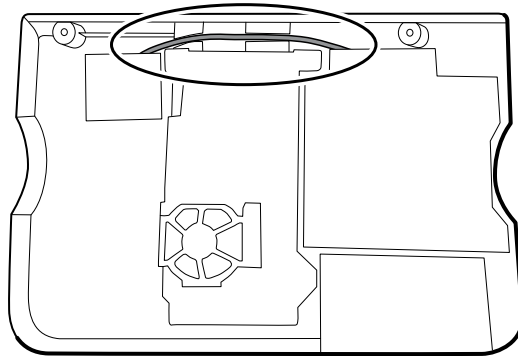

Retrait du ventilateur

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Appuyez sur les brides sur les côtés du connecteur du faisceau du ventilateur et séparez le connecteur du capot du bloc d'alimentation (18).

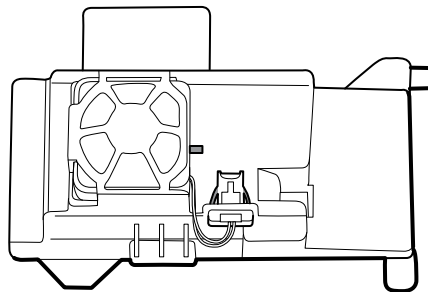

2. Appuyez sur la languette située sur le capot du bloc d'alimentation et faites glisser le ventilateur (19) sur la languette et à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage




MISE EN GARDE Veillez à la bonne orientation du ventilateur. L'air doit s'écouler vers l'alimentation électrique.



REMARQUE Si le ventilateur est sale, utilisez de l'air comprimé pour supprimer la poussière. Ne pliez pas les aubes au risque d'endommager le ventilateur. Si le ventilateur est bruyant, et que le nettoyage n'atténue pas le bruit, remplacez-le.


- En veillant à orienter l'étiquette vers le bas, faites glisser le ventilateur dans le boîtier sur le capot du bloc d'alimentation jusqu'à ce que la languette sur le capot le maintienne en place.
- Attachez le faisceau du ventilateur au capot du bloc d'alimentation de manière que le connecteur soit orienté vers le ventilateur, comme illustré dans la figure suivante.

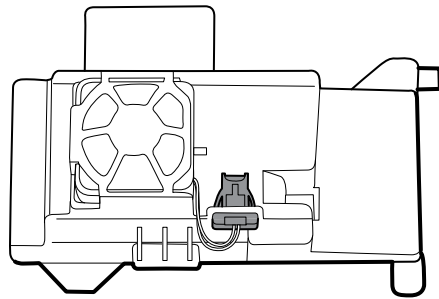

Retrait du bloc d'alimentation

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :


- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Retirez les quatre vis Torx (10) qui fixent le capot du bloc d'alimentation.

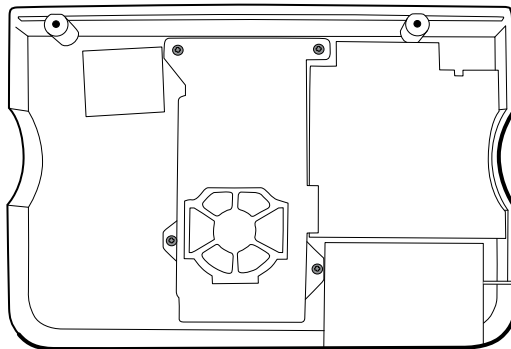

2. Retirez le capot du bloc d'alimentation (18).
3. Débranchez les pièces suivantes du bloc d'alimentation :
 - Câble de terre (vert)
 - Faisceau d'alimentation C.A. (17)



REMARQUE Consultez la section « Retrait du faisceau d'alimentation C.A. » pour plus d'informations.

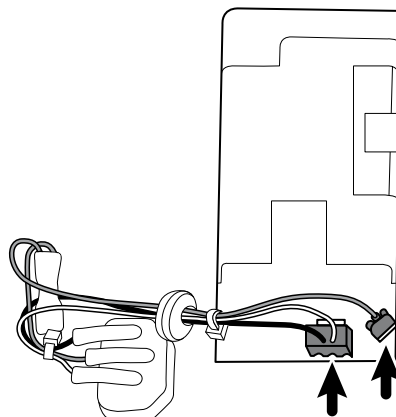

4. Retirez le bloc d'alimentation.

Retrait du faisceau d'alimentation C.A.



REMARQUE Ne débranchez pas le faisceau d'alimentation C.A. du connecteur CEI à moins de vouloir le remplacer. Après avoir débranché le faisceau d'alimentation C.A., vous ne pouvez plus le réutiliser.

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :


- Batterie
- Boîtier arrière
- Bloc d'alimentation électrique

Débranchez le faisceau d'alimentation C.A. du connecteur CEI et de la plaque de terre.

Notes concernant le remontage

Lorsque vous remplacez le boîtier arrière ou le faisceau d'alimentation C.A., acheminez le câblage comme suit :

- Connectez le fil bleu au neutre (N), le fil vert à la terre (GND) et le fil marron à la phase (L).

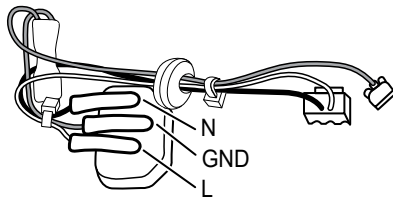


REMARQUE Le faisceau d'alimentation pour le connecteur CEI est conçu pour une seule connexion. Remplacez le faisceau d'alimentation s'il a été déconnecté du connecteur CEI.



REMARQUE Dans les anciens appareils, le codage couleur des fils du neutre et de la phase est inversé. La couleur du fil n'a aucune incidence sur la fonctionnalité de l'appareil et ne nécessite donc pas d'inverser le branchement au connecteur CEI. Inverser la connexion au faisceau CEI nécessiterait aussi de remplacer le faisceau d'alimentation.


Le non-remplacement du faisceau pose un risque minime étant donné que le manuel contient un avertissement indiquant de déconnecter l'appareil de l'alimentation C.A. avant d'ouvrir le boîtier.

- Branchez le câble de terre du connecteur CEI sur la plaque de terre le plus près possible du connecteur CEI.

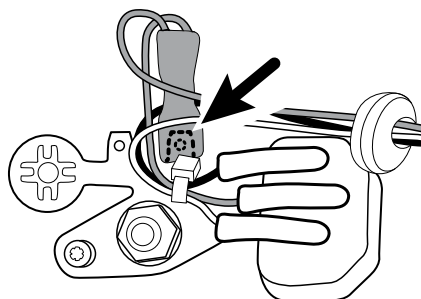


- Veillez à acheminer les fils de terre verts sur les fils bleus et marron.
- Veillez à insérer le passe-câble sur le faisceau d'alimentation C.A. dans la fente du capot du bloc d'alimentation.

- Lorsque vous remplacez le capot du bloc d'alimentation, veillez à acheminer le câble de l'antenne dans le canal situé en haut du boîtier arrière.

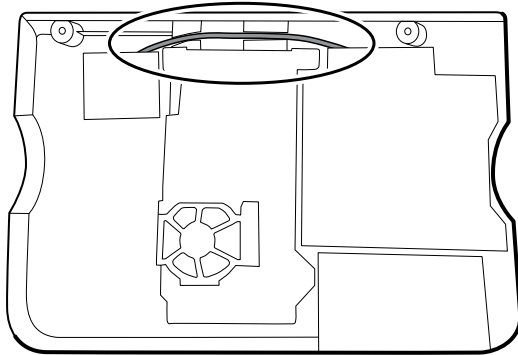

- Veillez à ce que les fils de terre verts se trouvent sous le capot du bloc d'alimentation, comme illustré dans la figure suivante.

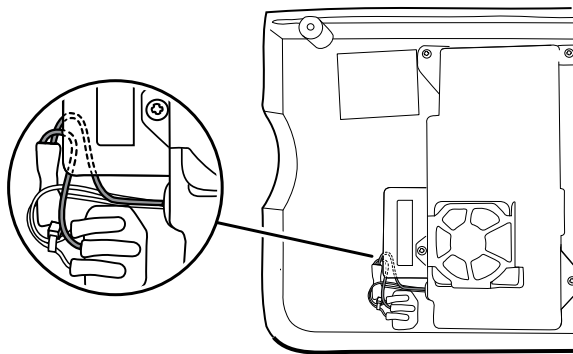

Démontage du châssis principal

Les procédures de démontage et de remontage sont identiques pour le châssis standard et le châssis étendu, sauf avis contraire.


Options de configuration

Châssis standard (côté gauche)

Prend en charge deux modules maximum

Châssis étendu (côté droit)

Prend en charge trois modules maximum

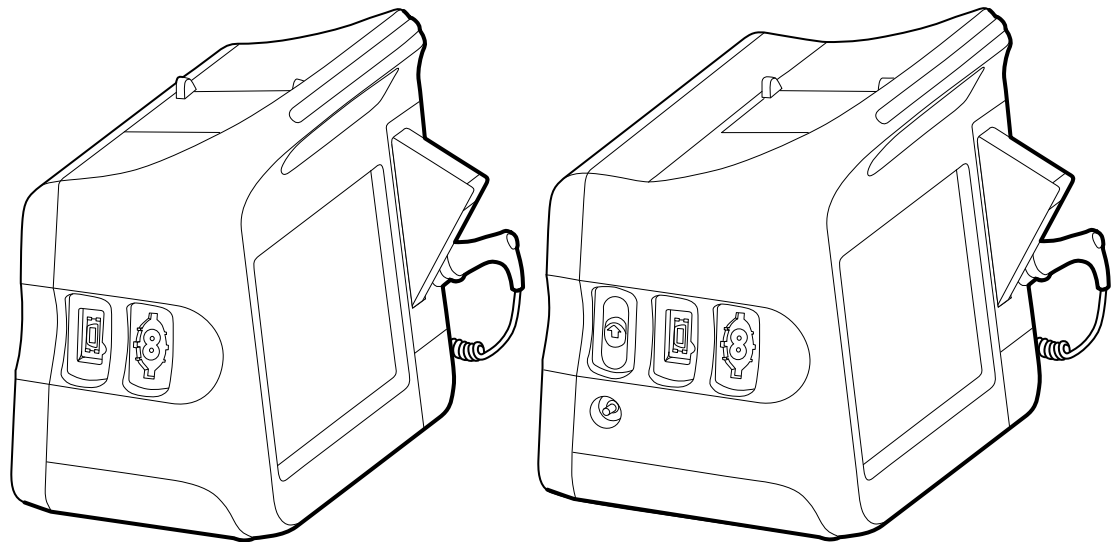

Composants (de l'arrière vers l'avant) :

SpO2, PNI

Cache, PNI (6300, 6400 et 6500 uniquement)

Composants (de l'arrière vers l'avant) :


CO2, SpO2, PNI

Cache, SpO2, PNI

Châssis étendu (côté droit) Prend en charge un module maximum



REMARQUE Le châssis standard est identique au châssis étendu, hormis l'espace prévu pour un module EarlySense. C'est pourquoi, il n'est pas présenté ici.

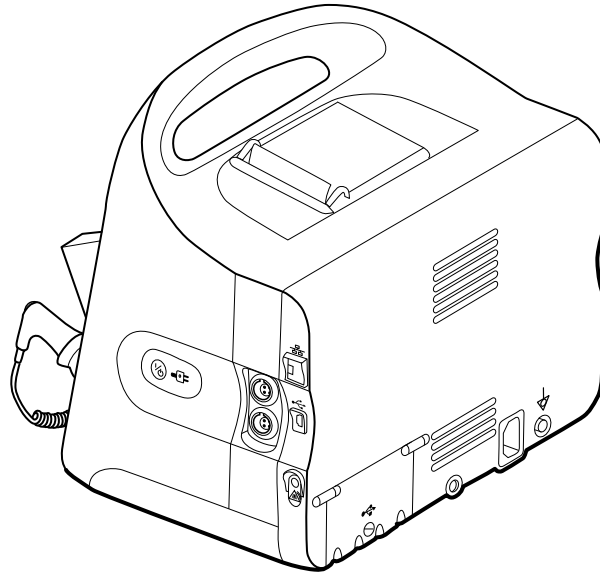

Composants (de l'avant vers l'arrière) :

Bouton d'alimentation, EarlySense, Ethernet RJ-45, client USB, appel infirmier

Bouton d'alimentation, cache, Ethernet RJ-45, client USB, appel infirmier




REMARQUE Les moniteurs configurés avec la RRa, la SpHb ou le CO2 ne sont pas configurables avec EarlySense.



REMARQUE Le port Ethernet RJ-45 offre une connexion filaire au réseau informatique. Le port client USB offre une connexion à un ordinateur externe à des fins de tests et de mises à niveau logicielles. L'appel infirmier offre une connexion au système d'appel infirmier de l'hôpital. (Non disponible pour le modèle 6300.)

Vue éclatée du châssis principal

Vous trouverez d'autres vues détaillées des composants du châssis principal, ainsi que des tableaux avec des pièces spécifiques, plus loin dans cette section, avant les instructions de démontage et de réparation correspondantes.

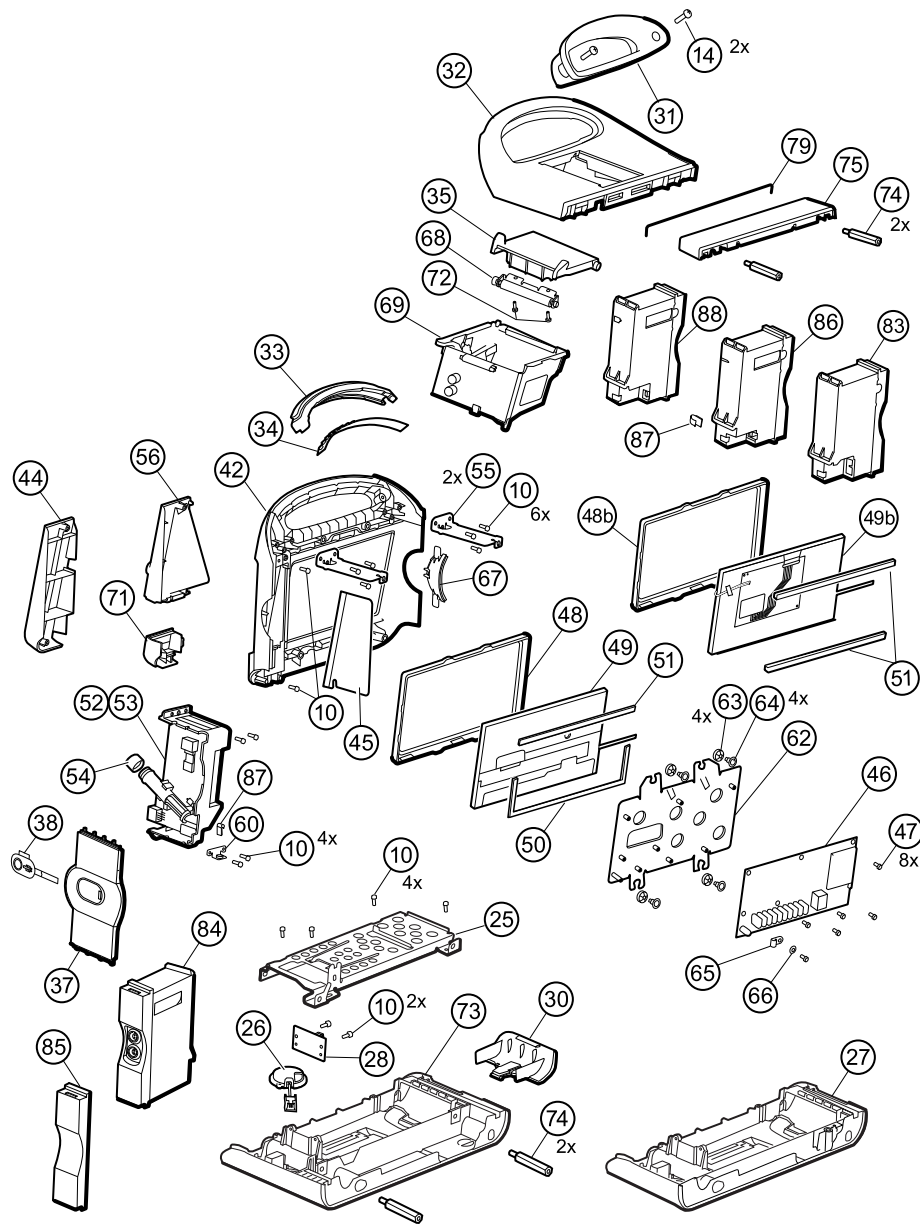

N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	53	Boîtier du module de température
14	Vis, M4 x 10, tête cylindrique avec NYLOC	54	Joint du puits de sonde


N°	Élément	N°	Élément
25	Châssis métallique du boîtier inférieur	55	Traverses horizontales
26	Haut-parleur	56	Couvercle de fixation du module de température
27	Boîtier inférieur	60	Bride de fixation du boîtier
28	Carte du connecteur de la batterie	62	Châssis LCD
30	Trappe de la batterie	63	Passe-câble, à oreilles - G411-1
31	Insert de poignée	64	Vis épaulée, à oreilles G-411-1 métrique
32	Boîtier supérieur	65	Collier, pour câble 3/16 x 3/8 de largeur x 3/4 de longueur
33	Barre des voyants	66	Rondelle, M3
34	Carte de la barre des voyants	67	Insert gauche
35	Capot de l'imprimante	68	Rouleau d'alimentation papier
37	Panneau latéral droit	69	Imprimante
38	Bouton d'alimentation et câble flexible	71	Couvercle d'accès à la connexion du module de température
42	Boîtier frontal	72	Vis, M2,2 x 8, taraudeuse, PNH, TRX
44	Volet d'obturation du module de température	73	Boîtier inférieur étendu
45	Bouclier thermique	74	Entretoise M4
46	Carte mère	75	Extension du boîtier supérieur
47	Vis, M3 x 5, tête cylindrique	79	Joint du boîtier supérieur
48	Monture LCD (écrans de 1re génération)	83	Module CO2
48b	Monture LCD (écrans de 2e génération)	84	Module EarlySense

N°	Élément	N°	Élément
49	LCD avec écran tactile (écrans de 1re génération)	85	Façade d'obturation
49b	LCD avec écran tactile (écrans de 2e génération)	86	Module SpO2
50	Bande de mousse	87	Clip de retenue pour câble USB
51	Bande de mousse	88	Module PNI
52	Module de température		

Retrait du module CO2

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Débranchez les deux câbles USB du module CO2.

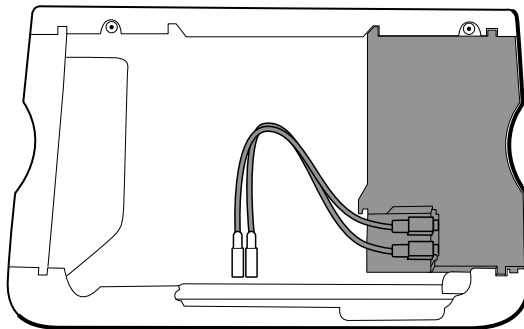


2. Faites glisser le module CO2 à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage

- Procédez comme suit avant d'installer le module CO2 :
 - Installez le module PNI (module le plus proche de l'écran).
 - Installez le module SpO2.
- Insérez le module CO2 dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.
- Connectez les deux câbles USB au module CO2.




REMARQUE Vous pouvez connecter les câbles USB du module CO2 dans n'importe quel ordre dans la prise USB FSS CO2.

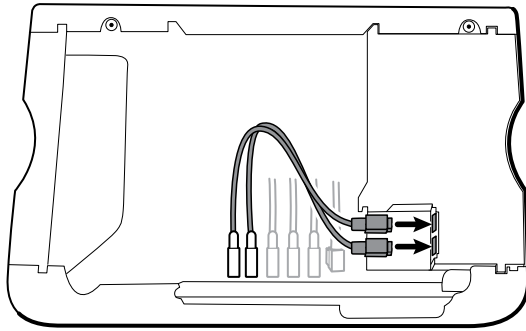


Remplacement de la façade du module CO2

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :


- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Module CO2
1. Déposez les deux étiquettes vierges qui fixent le couvercle transparent du boîtier au boîtier du module.
 2. À l'aide d'un tournevis pour écrous à fente, libérez les trois clips en plastique du boîtier arrière du module, puis retirez le couvercle transparent du boîtier.

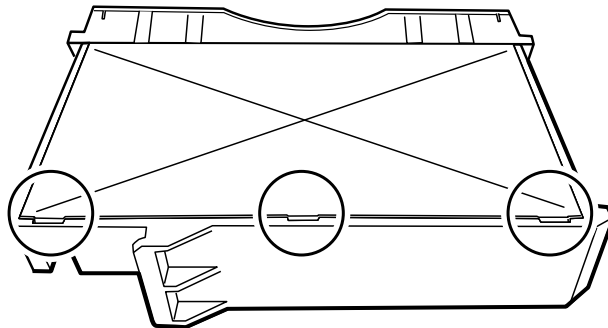


3. Débranchez le tuyau d'évacuation du port d'évacuation sur la façade.

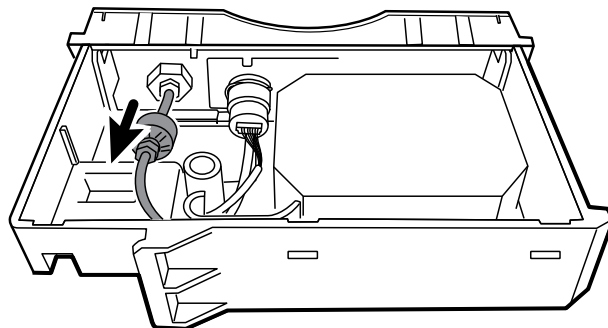

4. Retirez le clip à ressort du port d'entrée, puis faites glisser ce dernier en l'éloignant de la façade.

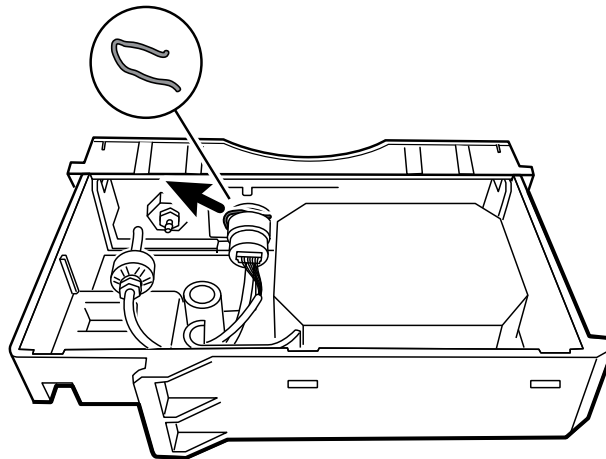


5. Retirez la façade :
 - a. Désengagez de la façade un clip en plastique sur le boîtier arrière du module à partir.
 - b. Retirez la façade en la faisant pivoter tout en l'éloignant du boîtier arrière.

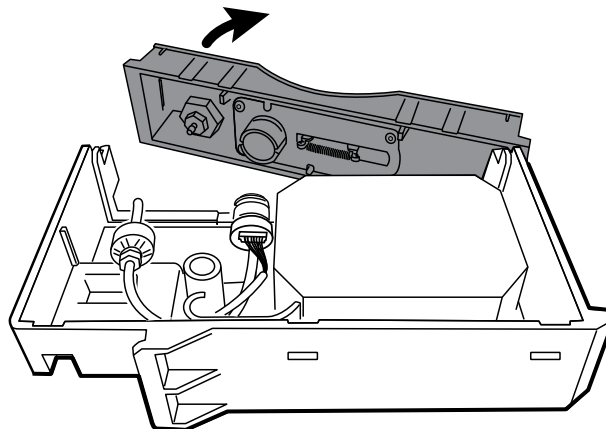


6. Inspectez la nouvelle façade avant de l'installer :
 - a. Vérifiez que le ressort est fixé sur le loquet de la porte.
 - b. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme librement.
7. Faites glisser la nouvelle façade dans le boîtier arrière du module jusqu'à ce que le verrou des deux clips en plastique s'enclenche.
8. Installez le port d'entrée et le clip à ressort :
 - a. Faites glisser le port d'entrée dans le compartiment de la façade pour aligner le port et la façade.
 - b. Tout en maintenant le port en place, installez le clip à ressort sur le port et le compartiment, comme illustré dans la figure ci-dessous. Le clip à ressort est fixé en poussant dessus depuis la tubulure d'évacuation vers la porte de la façade. Assurez-vous qu'il est parfaitement en place.



REMARQUE Ne réutilisez pas le clip à ressort. Remplacez-le par un nouveau clip fourni dans le kit.

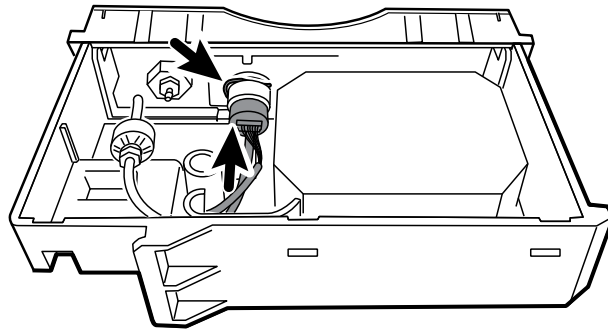


9. Branchez le tuyau d'évacuation sur le port d'évacuation.
10. Vérifiez que tous les tuyaux et câbles sont acheminés, comme illustré dans la figure ci-dessous. Vérifiez également que la tubulure n'est pas emmêlée.

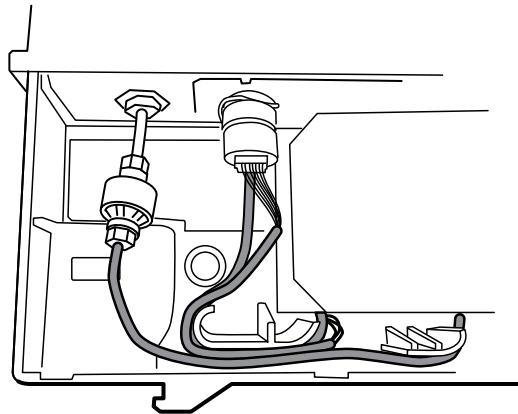

REMARQUE Le tuyau d'évacuation longe l'arrière du module et se plie progressivement vers la tubulure d'évacuation. Le tube d'admission et le chemin de câbles contournent la partie moulée et se dirigent vers le grand connecteur.


11. Installez le couvercle transparent du boîtier sur le boîtier arrière du module et positionnez-le de manière à verrouiller les trois clips en plastique.
12. Appliquez les deux nouvelles étiquettes vierges à l'emplacement indiqué dans la figure ci-dessous.

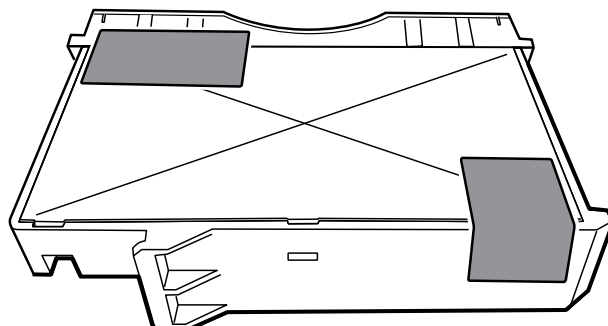

Retrait du module Capteur EarlySense

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Débranchez le câble USB du module Capteur EarlySense.

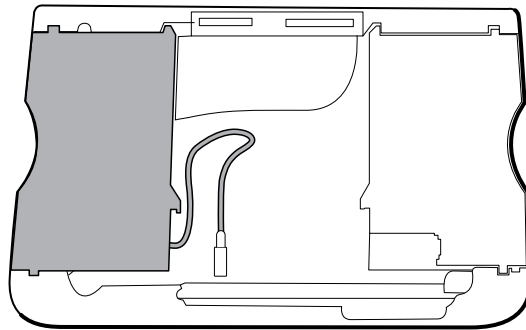

2. Faites glisser le module Capteur EarlySense à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage

Insérez le module Capteur EarlySense dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le bas.


Remplacement du module EarlySense ou ajout d'un module EarlySense

- Insérez le module Capteur EarlySense dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le bas.
- Connectez le câble USB au module Capteur EarlySense.
- Lors de l'ajout d'un module Capteur EarlySense, le boîtier inférieur et le capot SureTemp doivent avoir des trous de ventilation. Utilisez le boîtier inférieur du kit d'entretien 105504 et le capot SureTemp du kit d'entretien 103542.

Retrait du module SpO2

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Module CO2 ou façade d'obturation
 - Module EarlySense (en option)
1. Débranchez le câble USB du module SpO2.
 2. Retirez le câble USB du clip de retenue sur le module SpO2.

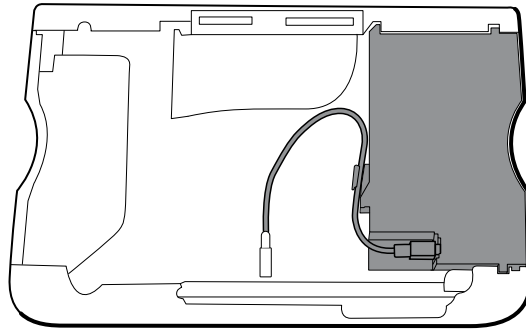

3. Faites glisser le module SpO2 à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage


- Installez le module PNI (module le plus proche de l'écran) *avant* d'installer le module SpO2.
- Insérez le module SpO2 dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.

Remplacement du module SpO2 ou ajout d'un module SpO2



MISE EN GARDE Assurez-vous que le module dispose de l'option appropriée (Masimo ou Nellcor).

- À l'arrière du module SpO2, nettoyez la surface où poser le clip de retenue (voir la figure ci-dessous) et appliquez-le.

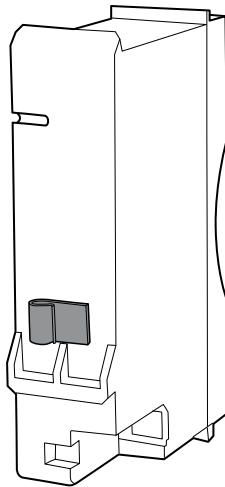


- Insérez le module SpO2 dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.
- Connectez le câble USB au module SpO2.
- Fixez le câble USB au clip de retenue sur le module SpO2.

Retrait du module PNI

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense (en option)

- Module SpO2 ou façade d'obturation
1. Débranchez le câble USB du module PNI.

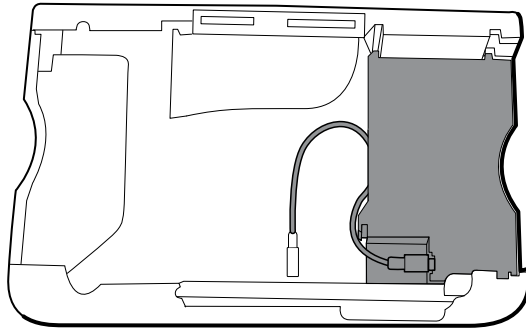


2. Faites glisser le module PNI à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage

- Installez le module de la pression artérielle non invasive ou PNI (module le plus proche de l'écran) *avant* d'installer les modules SpO2 et CO2.
- Insérez le module PNI dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.
- Connectez le câble USB au module PNI.
- En cas d'installation initiale, installez le volet d'obturation en le faisant glisser dans le boîtier.


Retrait du boîtier inférieur

Boîtier inférieur pour le châssis standard

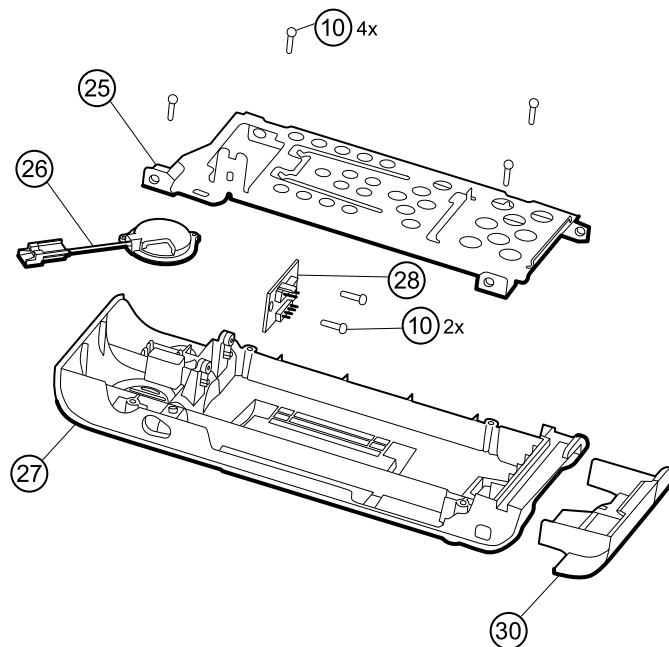

N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	27	Boîtier inférieur
25	Châssis métallique du boîtier inférieur	28	Carte du connecteur de la batterie
26	Haut-parleur	30	Trappe de batterie

Boîtier inférieur étendu pour le châssis étendu

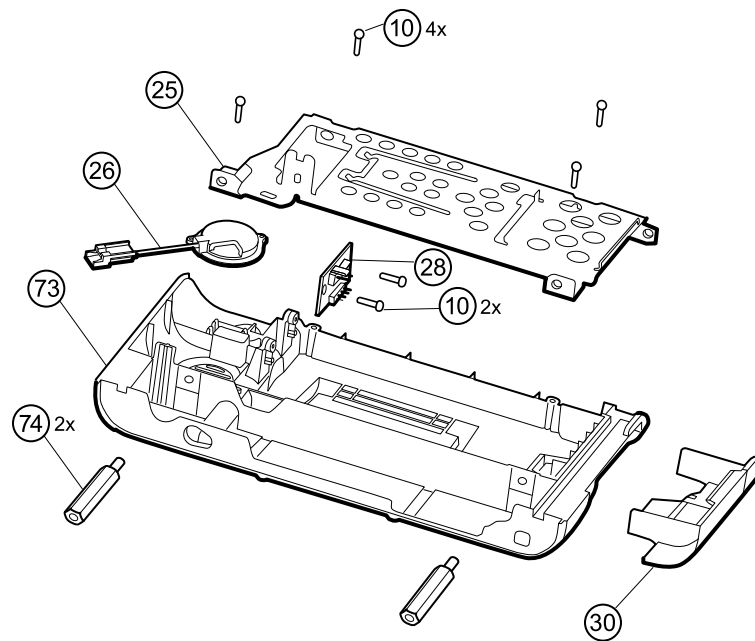


N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	30	Trappe de batterie
25	Châssis métallique du boîtier inférieur	73	Boîtier inférieur étendu
26	Haut-parleur	74	Entretoise M4
28	Carte du connecteur de la batterie		


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI


1. Retirez l'insert encerclé dans la figure ci-dessous.

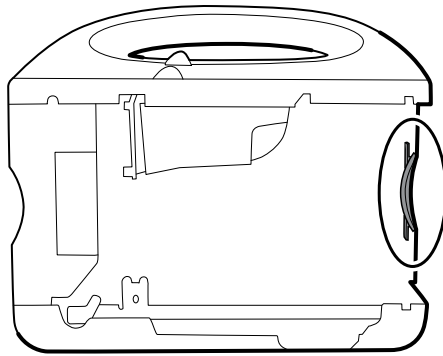


2. Si votre modèle comporte un châssis étendu, retirez l'insert, comme illustré ci-dessous.

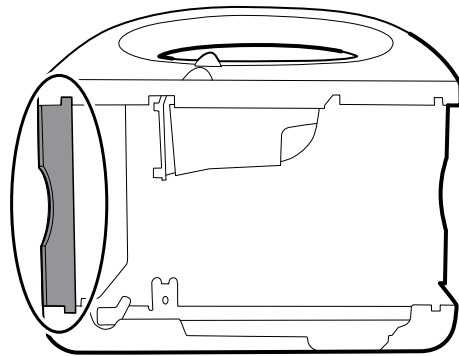


3. Si votre modèle comporte une imprimante, procédez comme suit :
 - a. Retirez le tube d'écoulement situé entre l'imprimante et la plaque inférieure.

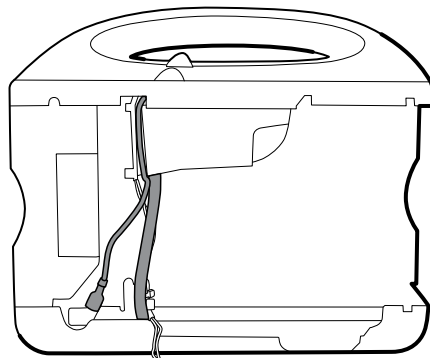


- b. Débranchez le câble de terre de l'imprimante de la borne de mise à la terre, sur la plaque inférieure.
4. Sectionnez l'attache qui maintient le faisceau principal au support inférieur. Cette attache est située juste en dessous de l'attache sur le faisceau principal.

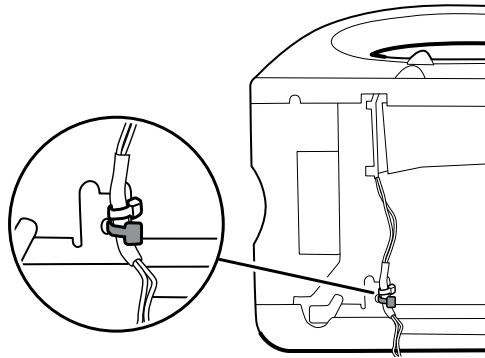

5. Retirez le fil du haut-parleur depuis l'arrière du support inférieur et déconnectez le câble du haut-parleur (26) du faisceau principal.
6. Débranchez les pièces suivantes de la carte du connecteur de la batterie :
 - a. Faisceau d'alimentation de la batterie du J2
 - b. Faisceau de la batterie intelligente du J3

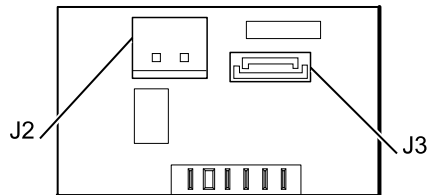

7. Retirez les vis suivantes :

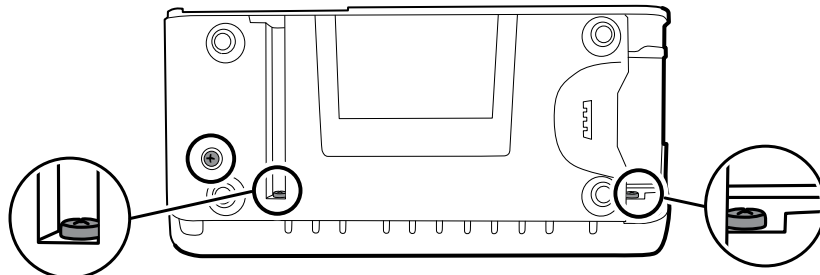

- La vis du boîtier inférieur
 - Les deux vis qui fixent tout le boîtier inférieur sur le boîtier frontal
8. Retirez le boîtier inférieur.
 9. Démontez le boîtier inférieur.




REMARQUE Démontez le boîtier inférieur uniquement si vous avez l'intention de remplacer la carte du connecteur de la batterie ou le haut-parleur. Consultez les instructions pour retirer ces composants ultérieurement dans cette section.


Notes concernant le remontage

- Lors du remontage du boîtier inférieur d'un châssis étendu, utilisez une douille de 8 mm et un tournevis dynamométrique étalonné pour $13,8 \text{ kg-cm} \pm 1,15 \text{ kg-cm}$ afin de fixer les entretoises (74).

- Branchez le câble du haut-parleur sur le câble le plus court du faisceau principal (câble le plus proche de l'attache métallique). Placez le câble derrière la tige de terre. Veillez à ce que le câble du haut-parleur soit positionné dans le canal.
- Si une imprimante est installée, acheminez le câble de terre de l'imprimante à travers le canal sur le boîtier de l'imprimante.

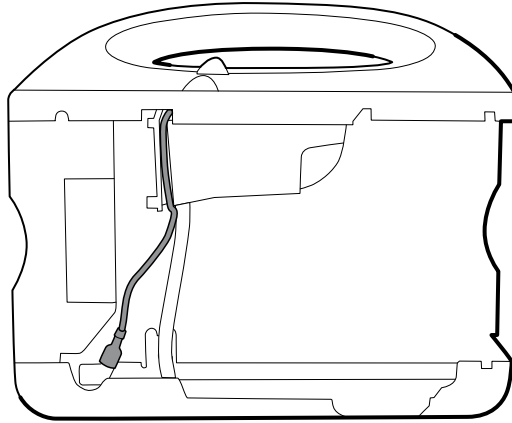

- Fixez le faisceau principal au support sur le boîtier inférieur à l'aide d'une attache. Positionnez l'attache juste en dessous de l'attache du faisceau principal. Utilisez l'outil d'attache pour fixer l'attache.

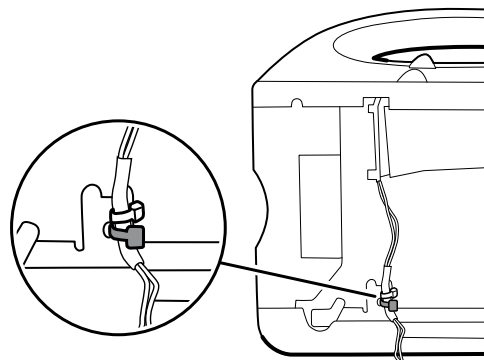

- Si le modèle comporte un châssis étendu, orientez l'insert, lorsqu'il est installé, de manière à l'aligner avec le panneau équipé du bouton d'alimentation.

Remplacement du boîtier inférieur




REMARQUE Un centre de maintenance Welch Allyn doit remplacer le boîtier inférieur, ou le boîtier inférieur étendu, pour assurer un étiquetage approprié.

Retrait du haut-parleur

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI

- Boîtier inférieur
1. Retirez le châssis métallique pour accéder plus facilement au haut-parleur.
 2. Retirez le haut-parleur (26) du boîtier inférieur.

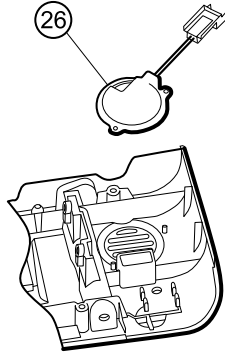

3. Retirez tout matériau d'étanchéité restant et nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique à 70 %.

Remplacement du haut-parleur

1. Retirez le papier pour exposer l'adhésif sur le joint.
2. Alignez les orifices du haut-parleur avec les broches du boîtier inférieur et sécurisez le haut-parleur.
3. Appliquez une pression sur le rayon extérieur du haut-parleur pour assurer une bonne adhésion au boîtier inférieur.

Retrait de la carte du connecteur de la batterie


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur

Retirez les deux vis Torx (10) qui fixent la carte du connecteur de la batterie (28) au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis Torx n° 10.


Retrait du boîtier supérieur

Boîtier supérieur

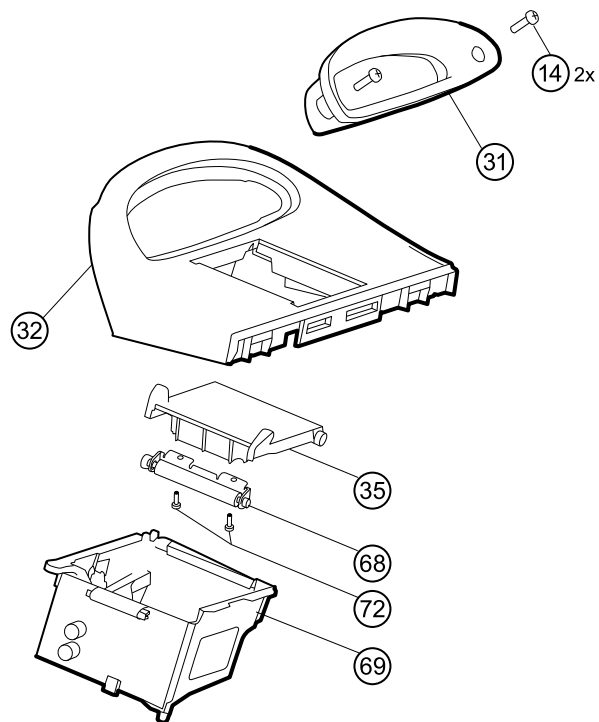

N°	Élément	N°	Élément
14	Vis, M4 x 10, tête cylindrique avec NYLOC	68	Rouleau d'alimentation papier
31	Insert de poignée	69	Boîtier de l'imprimante
32	Boîtier supérieur	72	Vis, M2,2 x 8, taraudeuse, PNH, TRX
35	Capot de l'imprimante	Non illustré	Cache du capot de l'imprimante

Extension du boîtier supérieur (châssis étendu uniquement)

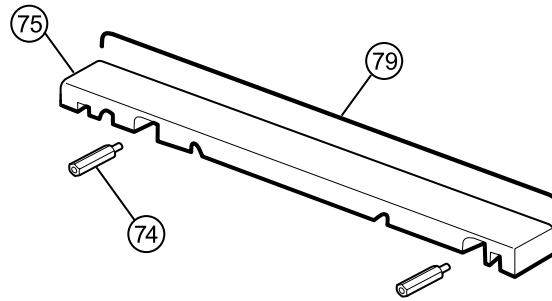

N°	Élément	N°	Élément
74	Entretoise M4	79	Joint du boîtier supérieur
75	Extension du boîtier supérieur		


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module Capteur EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur




REMARQUE Ne retirez pas le panneau latéral qui contient le bouton d'alimentation.

1. Si votre modèle comporte un châssis étendu, retirez l'extension du boîtier supérieur.
 - a. Utilisez une douille de 8 mm et un tournevis pour retirer les deux entretoises (74) qui maintiennent l'extension du boîtier supérieur (75).
 - b. Retirez l'extension du boîtier supérieur.

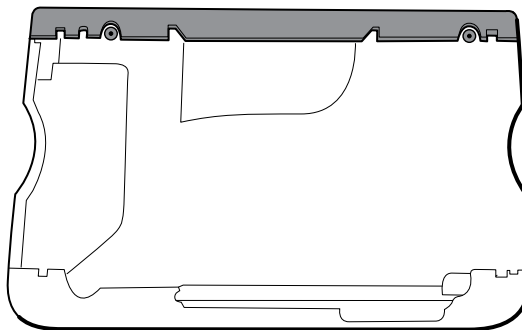

2. Déposez le faisceau principal sur l'appareil pour dégager les câbles USB.
3. Débranchez le connecteur d'alimentation sur le faisceau principal du J30 sur la carte mère.

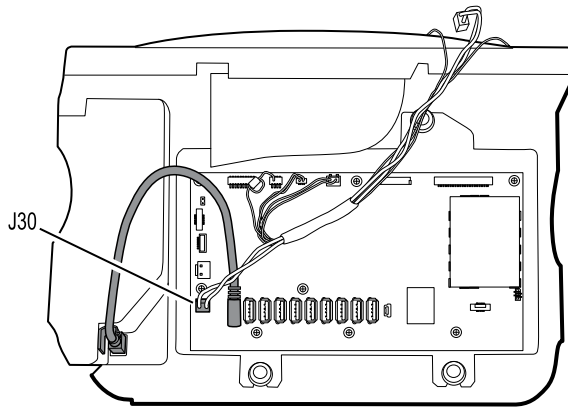


4. Pour les modèles dotés de l'option de température, débranchez le câble USB connecté au module de température du J1 sur la carte mère et dégagez le câble USB du séparateur de câbles.





REMARQUE Ne retirez pas le câble USB du module de température à moins de vouloir remplacer le module. Si vous débranchez le câble USB, le clip de retenue doit être remplacé dès le remontage.

5. Pour les modèles dotés d'une imprimante, décrochez le loquet en plastique pour débrancher le câble USB de l'imprimante.

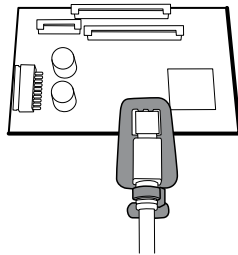

6. Débranchez les câbles USB de la carte mère.
7. Retirez les câbles USB et le séparateur de câbles.
8. Débranchez les éléments suivants avant de les retirer :

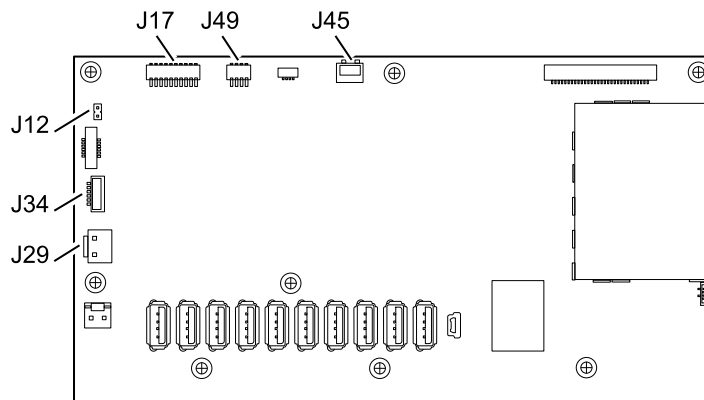

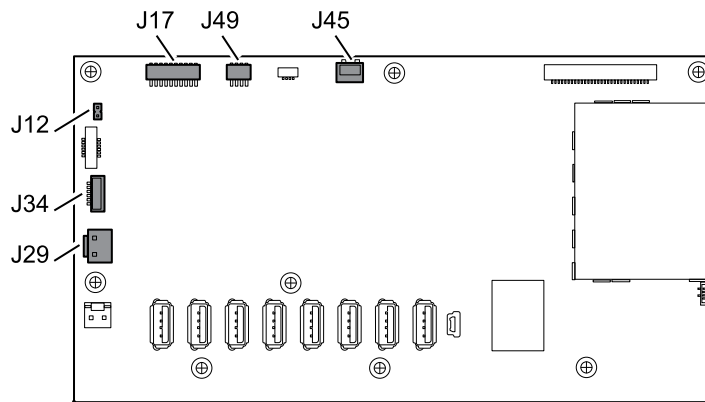


- a. Câble du ventilateur sur le faisceau principal du J45 sur la carte mère
- b. Câble de communication sur le faisceau principal du J49 sur la carte mère
- c. Faisceau d'alimentation de la batterie du J29 sur la carte mère
- d. Faisceau de la batterie intelligente du J34 sur la carte mère
- e. Faisceau de l'imprimante du J17 sur la carte mère
- f. Câble du haut-parleur sur le faisceau principal du J12 de la carte mère




REMARQUE Soyez extrêmement vigilant lorsque vous débranchez le J12 pour éviter toute chute du connecteur depuis la carte.

9. Retirez les deux vis (14) qui fixent l'insert de poignée et retirez l'insert.

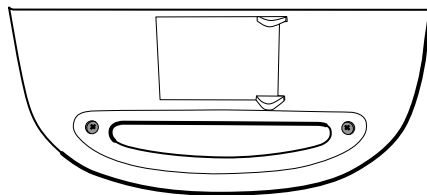

10. Retirez les quatre vis Torx qui fixent la poignée.

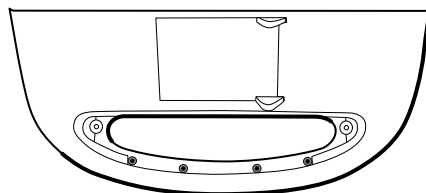

11. Retirez le boîtier supérieur.

Notes concernant le remontage

- Veillez à installer l'imprimante dans le boîtier supérieur. Consultez les notes concernant le remontage pour l'imprimante.
- Avant d'installer les câbles USB, installez ce qui suit :
 - Câble du ventilateur sur le faisceau principal au J45 sur la carte mère
 - Câble de communication sur le faisceau principal au J49 sur la carte mère, en positionnant la perle de ferrite près de la carte mère
 - Faisceau d'alimentation de la batterie au J29 sur la carte mère

- Faisceau de la batterie intelligente au J34 sur la carte mère
- Faisceau de l'imprimante au J17 sur la carte mère
- Câble du haut-parleur sur le faisceau principal au J12 de la carte mère



REMARQUE Commencez par inspecter le J12 pour détecter toute broche pliée avant d'installer le câble du haut-parleur.

- Installez les câbles USB en fonction du type de séparateur de câble (6 ou 11 trous) et des instructions ci-dessous.



REMARQUE Le séparateur à 6 trous a été supprimé, mais il pourrait se trouver dans les anciens appareils.

Emplacements du câble USB - séparateur de câble à 6 trous

- Placez les câbles USB dans le séparateur de câbles.



REMARQUE Si le câble USB n'a pas été retiré du module de température, laissez l'emplacement du J1 libre, comme illustré dans la figure ci-dessous, jusqu'à ce que le séparateur de câbles soit installé dans le boîtier et que d'autres câbles USB aient été connectés à la carte mère. Une fois que le séparateur de câbles est installé dans le boîtier, connectez le câble USB depuis le module de température au J1 sur la carte mère et installez le câble à l'emplacement du J1 dans le séparateur de câbles.




REMARQUE Le câble avec les connecteurs à angle droit aux deux extrémités est à l'emplacement du J14, comme illustré dans la figure ci-dessous.




REMARQUE Si l'option n'est pas incluse, laissez l'emplacement du séparateur vide.

- Positionnez chaque câble à environ 3,8 cm du séparateur.
- Placez le séparateur dans l'unité comme indiqué ci-dessous.

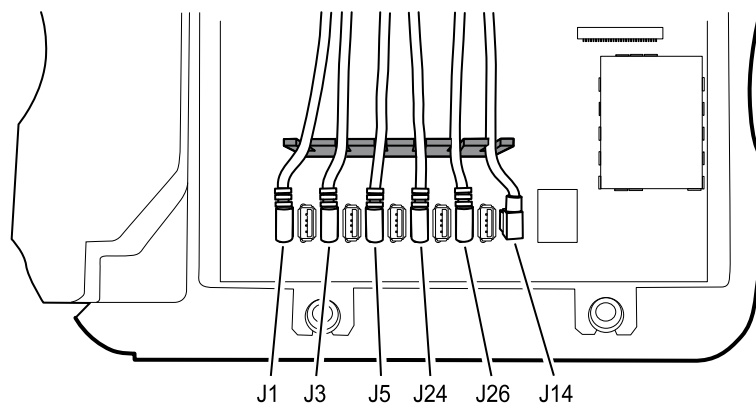

- Branchez les câbles USB sur la carte mère, comme suit :

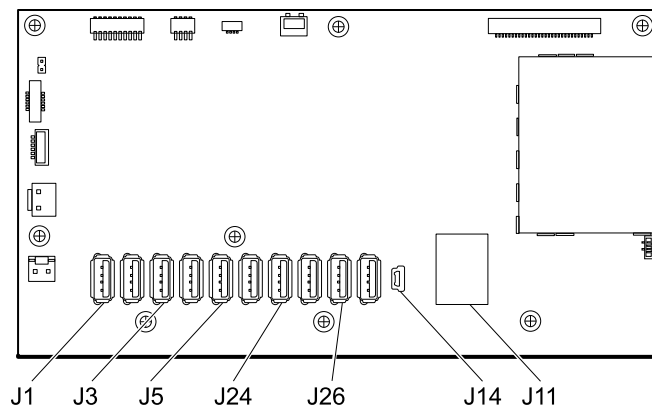

N°	Élément	N°	Élément
J1	Température	J24	PNI
J3	Imprimante	J26	COMMS J4
J5	SpO2	J14	COMMS J8

Emplacements du câble USB - séparateur de câble à 11 trous

- Placez les câbles USB dans le séparateur de câbles.



REMARQUE Si le câble USB n'a pas été retiré du module de température, laissez l'emplacement du J1 libre, comme illustré dans la figure ci-dessous, jusqu'à ce que le séparateur de câbles soit installé dans le boîtier et que d'autres câbles USB aient été connectés à la carte mère. Une fois que le séparateur de câbles est installé dans le boîtier, connectez le câble USB depuis le module de température au J1 sur la carte mère et installez le câble à l'emplacement du J1 dans le séparateur de câbles.




REMARQUE Le câble avec les connecteurs à angle droit aux deux extrémités est à l'emplacement du J14, comme illustré dans la figure ci-dessous.




REMARQUE Si l'option n'est pas incluse, laissez l'emplacement du séparateur vide.

- Positionnez chaque câble à environ 3,8 cm du séparateur.
- Placez le séparateur dans l'unité comme indiqué ci-dessous.

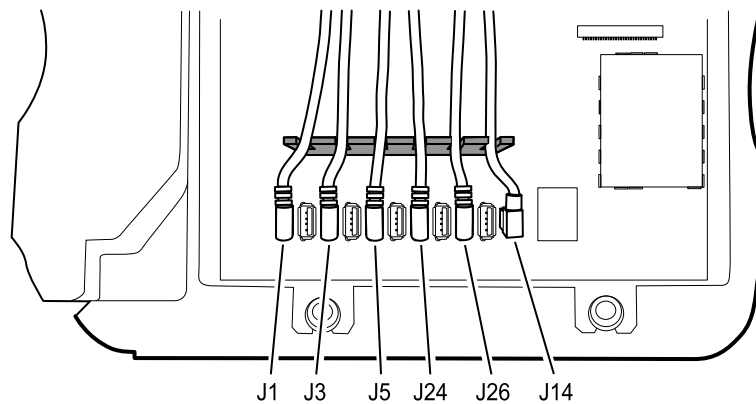

- Branchez les câbles USB sur la carte mère, comme suit :

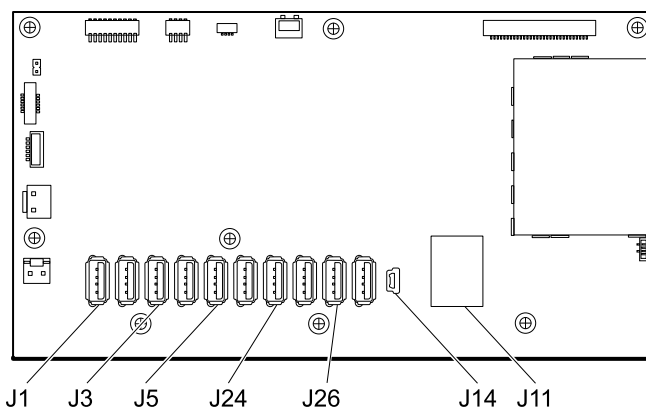

- Placez les câbles USB dans le séparateur de câbles.



REMARQUE Si le câble USB n'a pas été retiré du module de température, laissez l'emplacement du J1 libre, comme illustré dans la figure ci-dessous, jusqu'à ce que le séparateur de câbles soit installé dans le boîtier et que d'autres câbles USB aient été connectés à la carte mère. Une fois que le séparateur de câbles est installé dans le boîtier, connectez le câble USB depuis le module de température au J1 sur la carte mère et installez le câble à l'emplacement du J1 dans le séparateur de câbles.




REMARQUE Le câble avec les connecteurs à angle droit aux deux extrémités est à l'emplacement du J14, comme illustré dans la figure ci-dessous.




REMARQUE Si l'option n'est pas incluse, laissez l'emplacement du séparateur vide.

- Positionnez chaque câble à environ 3,8 cm du séparateur.
- Placez le séparateur dans l'unité comme indiqué ci-dessous.

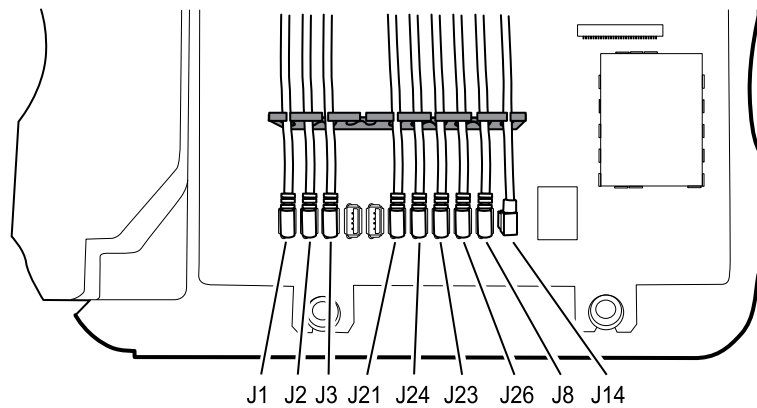


- Branchez les câbles USB sur la carte mère, comme suit :

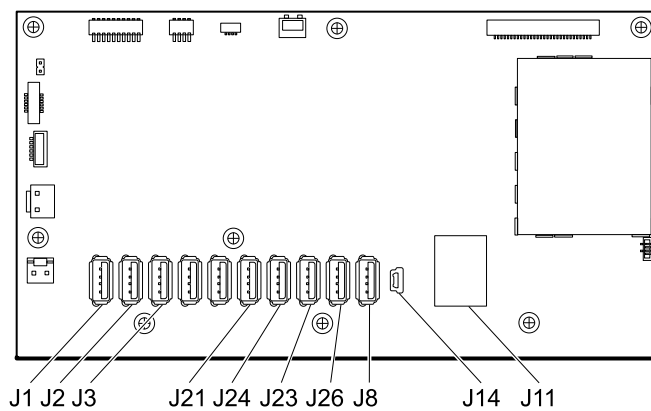


N°	Élément	N°	Élément
J1	Température	J23	SpO2
J2	Imprimante	J26	PNI
J3	EarlySense	J8	COMMS J4
J21	CO2	J14	COMMS J8
J24	CO2		

- Pour les modèles dotés d'un module de température, si vous avez débranché le câble USB du module de température lors du démontage, vous devez remplacer le clip de retenue. (Consultez la section « Remplacement du module de température » pour obtenir des instructions spécifiques.)
- Pour les modèles dotés d'une imprimante, branchez l'autre extrémité du câble USB à l'imprimante, tout en tirant sur le loquet en plastique pour l'éloigner du connecteur. Une fois que le connecteur est installé, poussez le loquet en plastique sur le connecteur pour le fixer.

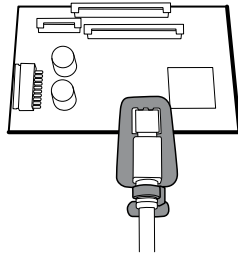

- Vérifiez que le câble Ethernet passe librement entre le boîtier de température et la carte de l'imprimante, et quitte le boîtier entre le haut du boîtier de température et sous le boîtier supérieur.
- Si le câble Ethernet a été retiré, réinstallez-le lors de la remise en place du boîtier inférieur.
- Lors de l'installation du boîtier supérieur sur le châssis, alignez les fentes du boîtier supérieur avec les extrémités des traverses horizontales sur le châssis pour assurer un bon positionnement.

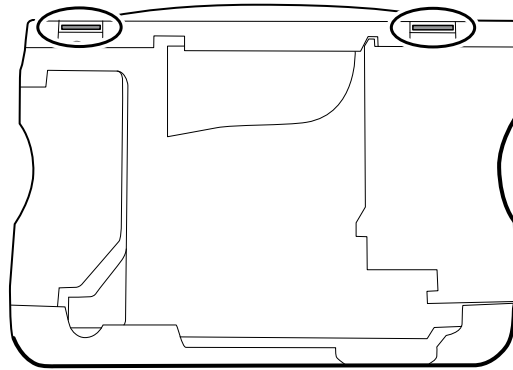

- Lors de l'installation de l'extension du boîtier supérieur (75), vérifiez que le joint du boîtier supérieur est en place. Utilisez une douille de 8 mm et un tournevis dynamométrique étalonné pour 13,8 kg-cm \pm 1,15 kg-cm afin de fixer les entretoises (74).

Remplacement du boîtier supérieur

Pour les modèles sans imprimante, installez le cache du capot de l'imprimante comme suit :


1. Retirez le papier protecteur du joint sur le cache du capot.
2. Installez le cache du capot dans le boîtier supérieur en appuyant dessus pour le fixer.

Retrait de l'imprimante

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur

1. Retirez les deux vis Torx qui fixent le boîtier de l'imprimante au boîtier supérieur.

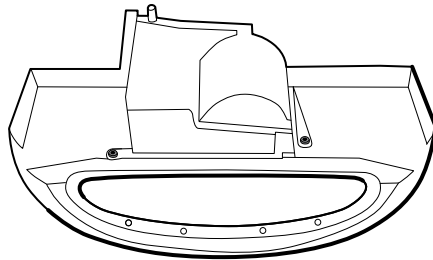


2. Retirez l'imprimante du boîtier supérieur :
 - a. Tenez le boîtier de l'imprimante lorsque vous ouvrez le capot de l'imprimante.
 - b. Éloignez l'imprimante et son capot du boîtier supérieur.

Notes concernant le remontage


1. Vérifiez que le fil de terre sort du côté opposé de la carte de l'imprimante dans la partie encochée.
2. Placez le capot de l'imprimante dans le boîtier supérieur et immobilisez-le tandis que vous exécutez l'étape suivante.
3. Installez l'imprimante dans le boîtier supérieur en faisant glisser les languettes dans les fentes.
4. Appuyez sur le capot pour le fermer et immobiliser l'imprimante, puis fixez-le au boîtier par deux vis.

Remplacement de l'imprimante ou ajout d'une imprimante


- Vérifiez si le boîtier de l'imprimante comporte une encoche, comme illustré ci-dessous. Si l'imprimante comporte une encoche, vous pouvez utiliser l'imprimante dans un châssis standard ou un châssis étendu. Si l'imprimante ne comporte pas d'encoche, vous pouvez utiliser l'imprimante uniquement dans un châssis standard.

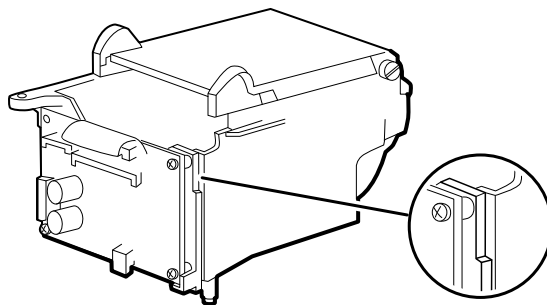

- Pour l'ajout d'une imprimante, retirez le cache du capot de l'imprimante. Retirez tout matériau d'étanchéité restant et nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique à 70 %.
1. Éloignez le capot du corps de l'imprimante.
 2. Attachez le faisceau de terre de l'imprimante à la borne de mise à la terre de l'imprimante.

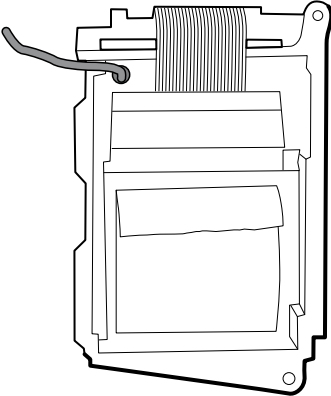

Démontage du boîtier frontal

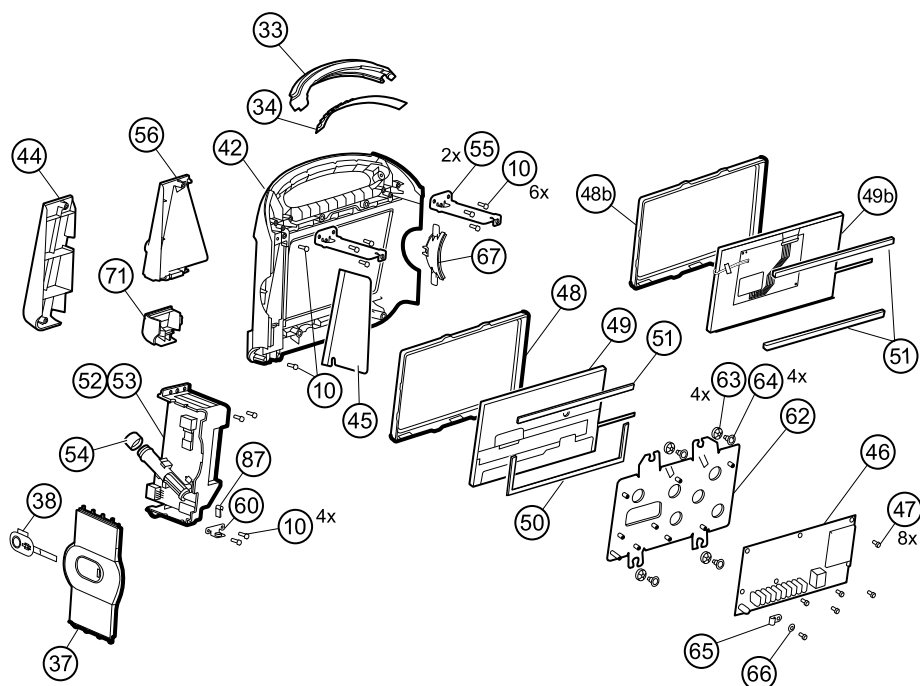


N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	51	Bande de mousse
33	Barre des voyants	52	Module de température
34	Carte de la barre des voyants	53	Boîtier du module de température
37	Panneau latéral droit	54	Joint du puits de sonde
38	Bouton d'alimentation	55	Traverses horizontales
42	Boîtier frontal	56	Couvercle de fixation du module de température
44	Volet d'obturation du module de température	60	Bride de fixation du boîtier
45	Bouclier thermique	62	Châssis LCD
46	Carte mère	63	Passe-câble, à oreilles - G411-1

N°	Élément	N°	Élément
47	Vis, M3 x 5, tête cylindrique	64	Vis épaulée, à oreilles G-411-1 métrique
48	Monture LCD (écrans de 1re génération)	65	Collier, pour câble 3/16 x 3/8 de largeur x 3/4 de longueur
48b	Monture LCD (écrans de 2e génération)	66	Rondelle, M3
49	LCD avec écran tactile (écrans de 1re génération)	67	Insert gauche
49b	LCD avec écran tactile (écrans de 2e génération)	71	Couvercle d'accès à la connexion du module de température
50	Bande de mousse		


Retrait de la barre des voyants

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Module CO2 ou façade d'obturation
 - Module EarlySense
 - Module SpO2 ou façade d'obturation
 - Module PNI
 - Boîtier inférieur
 - Boîtier supérieur
1. Retirez les trois vis (10) qui fixent la traverse horizontale (située à droite lorsque vous êtes face à l'appareil par l'arrière) sur le boîtier frontal.

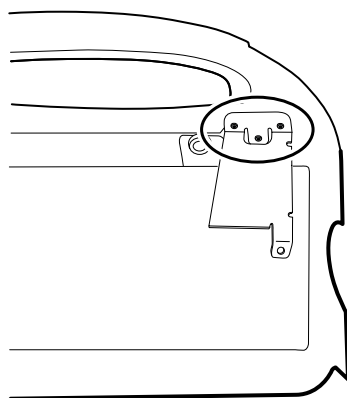

2. Retirez le support.
3. Retirez la bande qui fixe le faisceau de la barre des voyants au châssis LCD.

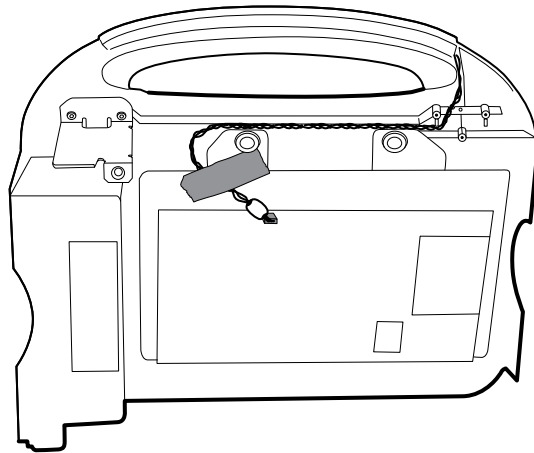

4. Débranchez le faisceau de la barre des voyants du J46 sur la carte mère.
5. Retirez la carte de la barre des voyants (34) et la barre des voyants (33) du boîtier frontal.
6. Retirez la carte de la barre des voyants de la barre.
7. Débranchez le faisceau de la barre des voyants de la carte de la barre des voyants.

Notes concernant le remontage

- Insérez la carte de la barre des voyants comme suit :
 1. Placez l'extrémité sans le connecteur dans l'extrémité fermée de la barre des voyants, avec les voyants orientés vers la barre.
 2. Veillez à glisser l'extrémité sans le connecteur de la carte de la barre des voyants à l'extrémité de la fente dans la barre.
- Utilisez l'extrémité la plus éloignée de la perle de ferrite pour brancher le faisceau de la barre des voyants sur la carte correspondante.
- Acheminez le faisceau de la barre des voyants comme suit :
 - Par la fente du boîtier frontal, sous la traverse horizontale.
 - Dans le canal et entre le haut du boîtier et les entretoises du châssis LCD.
- Fixez le faisceau de la barre des voyants avec une bande en vous assurant que la perle de ferrite se situe entre la carte mère et la bande.

Retrait du module ou du boîtier de température



REMARQUE Ces instructions s'appliquent également au retrait du boîtier de température pour les modèles sans l'option de température.



REMARQUE Ne débranchez pas le câble USB du module de température à moins de vouloir remplacer le module et/ou le câble USB. Débranchez le câble USB sur la carte mère lors du retrait du module.

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :


- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation

- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur




REMARQUE Vous pouvez retirer et remplacer le module de température sans débrancher le faisceau principal, les faisceaux de batterie, les câbles USB ou le faisceau de la barre des voyants sur la carte mère.

1. Retirez le puits de la sonde du module de température.
2. Débranchez le câble flexible du bouton d'alimentation du connecteur de verrouillage ZIF J6 sur la carte mère et retirez la bande de fixation.

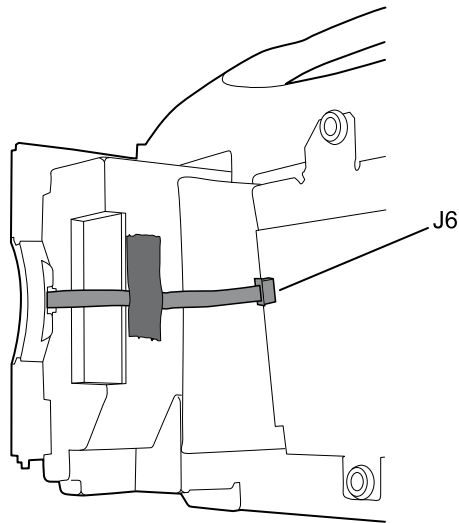

3. Retirez le panneau latéral droit (37).
4. Retirez les deux vis Torx (10) de la bride de fixation du boîtier (60).

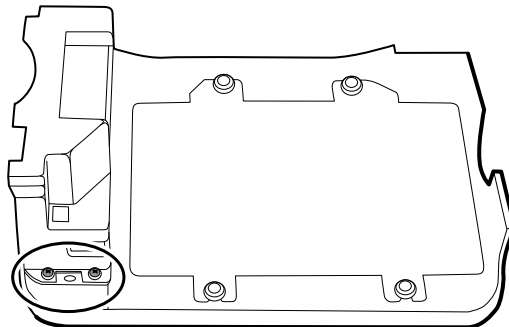


5. Retirez les deux vis Torx (10) qui fixent le haut du module de température ou du boîtier vide.
6. Retirez le module de température ou le boîtier vide.



REMARQUE Si vous remplacez uniquement le module de température sans remplacer le couvercle de fixation, arrêtez-vous ici. Installez le module de rechange dans l'ordre inverse du démontage.


7. Suivez les étapes suivantes qui s'appliquent à votre moniteur :
 - a. Si votre moniteur est équipé d'un module de température, retirez le couvercle de fixation :
 - i. Retirez la vis qui fixe le couvercle de fixation du module de température sur le boîtier frontal.

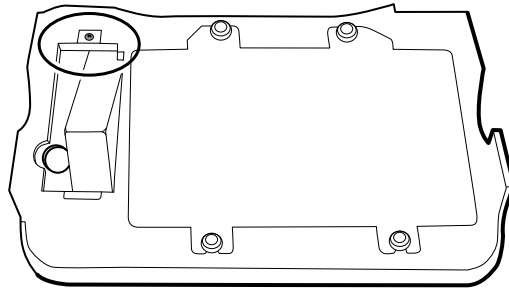

- b. Retirer le couvercle de fixation du module de température (56) du boîtier frontal.
- Si votre moniteur n'est pas équipé d'un module de température, retirez le volet d'obturation du module de température :
 - a. Retirez les deux vis qui fixent le volet d'obturation sur le boîtier frontal.
 - b. Retirez le volet d'obturation (44).

Notes concernant le remontage


- Avant d'installer le module de température sur le boîtier frontal, assurez-vous que le joint du puits de sonde est installé avec la languette le long de la fente ou de l'encoche dans le boîtier à puits de la sonde.

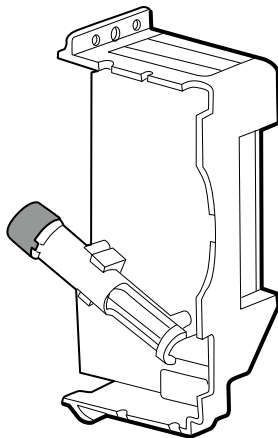


- Acheminez le câble flexible du bouton d'alimentation vers le module de température et au-dessus, puis branchez-le sur le connecteur de verrouillage ZIF J6 dans la carte mère.

Remplacement du module de température

1. Connectez le câble USB au module de température.
2. Positionnez le clip de retenue sur le câble USB contre l'épaule du connecteur mini B, avec le coussin adhésif orienté à l'opposé du module de température et orienté vers le bas.
3. Retirez la protection sur le clip de retenue pour exposer l'adhésif.
4. Faites tourner le clip sur le câble USB pour fixer le clip au boîtier du module de température.

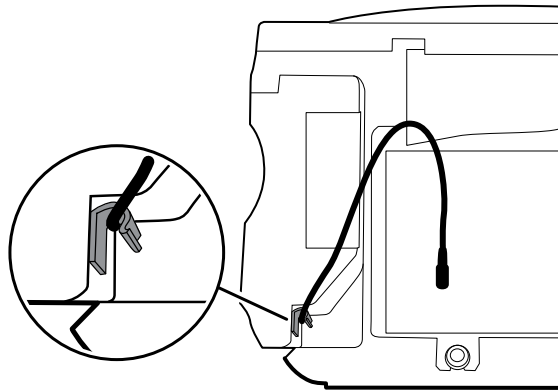


5. Fixez le câble USB avec un morceau de bande, comme illustré ci-dessous.

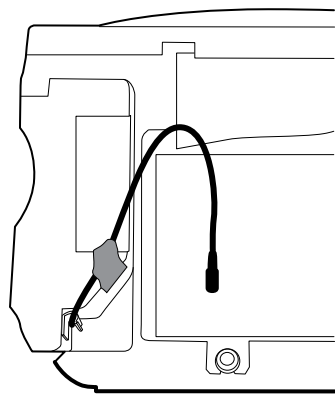

Ajout d'un module de température

1. Suivez les instructions relatives au retrait du boîtier de température, de la carte mère et du LCD.
2. Remplacez le volet d'obturation du module de température (44) par le couvercle de fixation correspondant (56).
3. Installez le bouclier thermique (45) sur le boîtier frontal en alignant l'encoche du bouclier avec le boîtier.

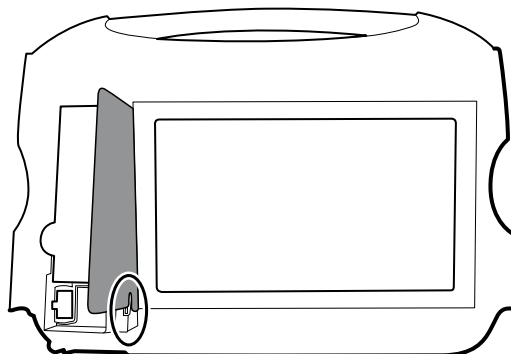

4. Réinstallez le LCD dans l'ordre inverse du démontage.
5. Réinstallez la carte mère dans l'ordre inverse du démontage.
6. Installez le joint du puits sur la sonde, comme décrit dans les notes concernant le remontage pour le module de température.
7. Insérez le module de température dans le boîtier frontal en alignant le puits de la sonde avec l'orifice d'accès dans le boîtier frontal.
8. Fixez le haut du module de température sur le boîtier frontal avec deux vis fournies avec le kit.

9. Placez la bride de fixation du boîtier en bas du module de température et fixez-la à l'aide des deux vis.
10. Connectez le câble USB au module, comme décrit dans les instructions relatives au remplacement du module de température.

Retrait de la carte mère

Cette section comporte des instructions sur les écrans de 1re génération et de 2e génération. Suivez les instructions propres à votre configuration.



REMARQUE Si vous remplacez cette carte, vous devez disposer de l'outil d'entretien, édition sous licence Gold, pour saisir à nouveau les numéros de série du moniteur et de la carte mère.




REMARQUE Si vous remplacez l'écran, vous devez aussi remplacer la monture, le LCD avec écran tactile et les bandes de mousse par les pièces de rechange comprises dans le kit d'entretien 106546. La monture et les bandes de mousse sont adaptées à l'écran.



REMARQUE Plusieurs configurations de pièces apparaissent dans les moniteurs Connex VSM en fonction de l'ancienneté de l'écran. Utilisez la configuration A ou B pour identifier les composants de votre appareil.


Configuration A- écrans de 1er génération

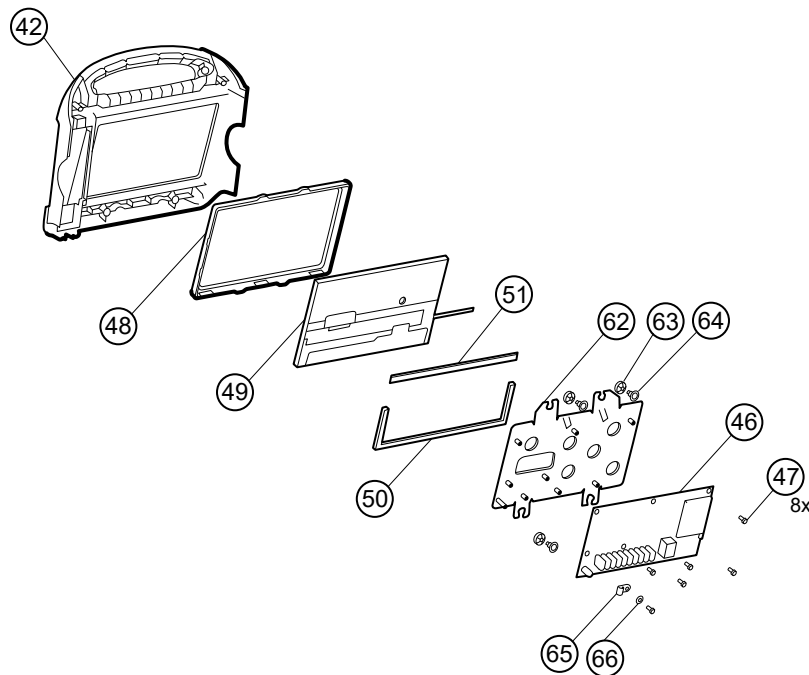

N°	Élément	N°	Élément
42	Boîtier frontal	51	Tapis de mousse, haut (modèles de 2e génération)
46	Carte mère	62	Châssis LCD
47	Vis, M3 x 5, tête cylindrique	63	Passe-câble, à oreilles - G411-1

N°	Élément	N°	Élément
48	Monture LCD	64	Vis épaulée, à oreilles G-411-1 métrique
49	LCD avec écran tactile	65	Collier, pour câble 3/16 x 3/8 de largeur x 3/4 de longueur
50	Tapis de mousse, base (écrans de 1re génération)	66	Rondelle, M3

Configuration B - écrans de 2e génération

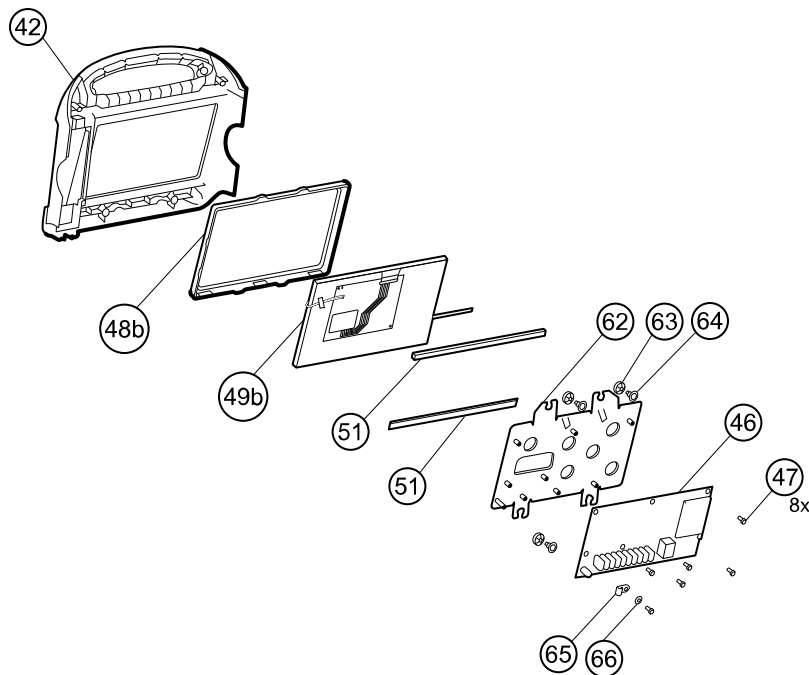

N°	Élément	N°	Élément
42	Boîtier frontal	62	Châssis LCD
46	Carte mère	63	Passe-câble, à oreilles - G411-1
47	Vis, M3 x 5, tête cylindrique	64	Vis épaulée, à oreilles G-411-1 métrique
48b	Monture LCD	65	Collier, pour câble 3/16 x 3/8 de largeur x 3/4 de longueur
49b	LCD avec écran tactile	66	Rondelle, M3
51	Bandes de mousse, haut et bas		

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière

- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur




REMARQUE Vous n'êtes pas obligé de retirer le module de température ou la barre des voyants pour retirer la carte mère ou le LCD.


1. Débranchez les pièces suivantes sur la carte mère :
 - a. Câble flexible du bouton d'alimentation du connecteur de verrouillage ZIF J6
 - b. Faisceau de la barre des voyants du J46
 - c. Faisceau LCD du J19
 - d. Câble flexible LCD du J48




MISE EN GARDE Le joint de soudure du connecteur LCD (J48) est fragile. Lorsque vous insérez ou retirez le câble flexible, n'exercez aucune pression sur le joint de soudure.

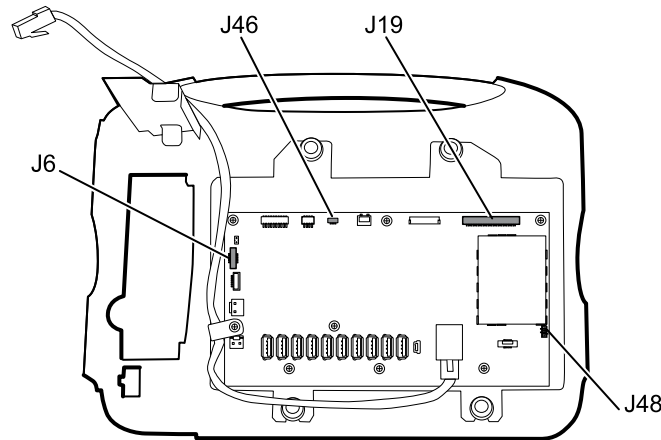

2. Retirez le câble Ethernet :
 - a. Débranchez le câble Ethernet du connecteur Ethernet (J11) sur la carte mère.

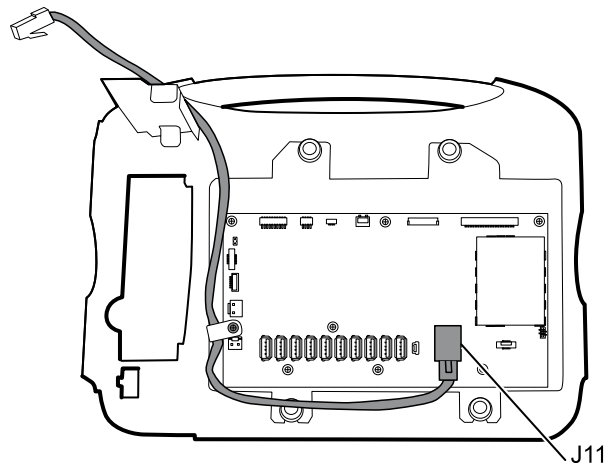

- b. Retirez la vis qui fixe la pince P du câble Ethernet à la carte mère.
3. Retirez les sept vis qui fixent la carte mère au châssis LCD.

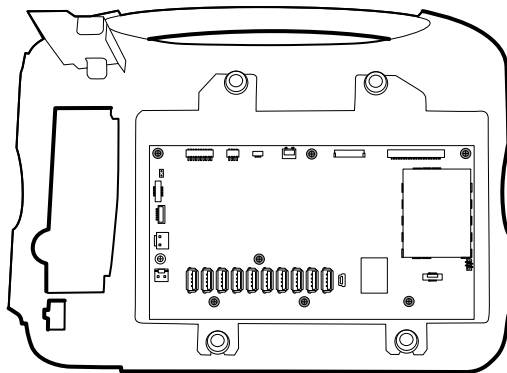

4. Retirez la carte mère.


Notes concernant le remontage

- Veillez à ce que le câble flexible LCD ne se trouve pas sous la carte mère.



MISE EN GARDE Le joint de soudure du connecteur LCD (J48) est fragile. Lorsque vous insérez ou retirez le câble flexible, n'exercez aucune pression sur le joint de soudure.

- Avant de remplacer la carte MCE, retirez le châssis LCD, comme décrit dans la section « Retrait du LCD ». Une fois le châssis LCD retiré, installez environ 7,5 cm de bande Pro Gaff (M11580) pour recouvrir le fond des deux entretoises, comme illustré (consultez la section « Remplacement du châssis LCD »). Aucune partie des grandes ouvertures ne doit être couverte. Remplacez sur le châssis LCD toute bande Pro Gaff qui affiche des signes d'usure ou qui a été retirée lors du remontage.
- Acheminez le câble Ethernet à l'extérieur de la tige PEM et non en dessous de la carte mère.
- Connectez le câble Ethernet à la carte mère :
 - Vérifiez si votre modèle contient la plate-forme PCBA 407574, révision B, C ou D. Les révisions B et C sont dépourvues de logo sur la surface supérieure du port Ethernet. La révision D comporte un logo sur la surface supérieure du port Ethernet. Consultez la figure ci-dessous.
 - Pour les révisions B et C de la plate-forme PCBA 407574, vérifiez que le câble Ethernet présente une cale sur un connecteur. Insérez le connecteur avec la cale dans le port Ethernet.
 - Pour la révision D de la plate-forme PCBA 407574, vous pouvez utiliser un câble Ethernet avec ou sans cale. Insérez le connecteur dans le port Ethernet.

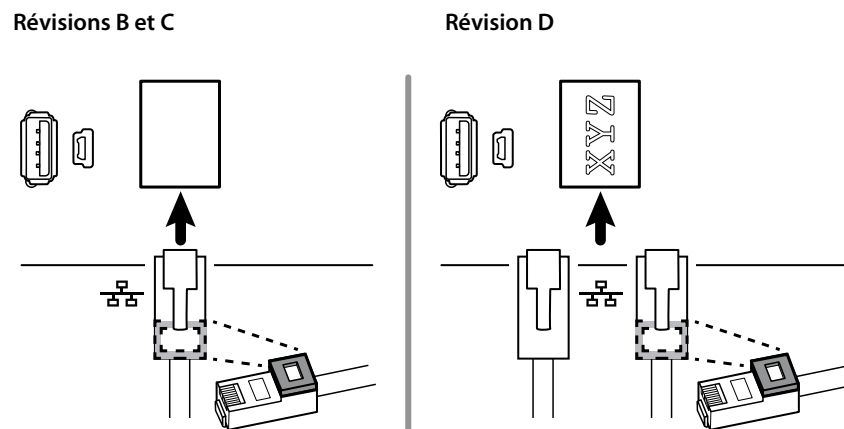

- Lors de l'installation de la carte mère, installez la vis près du J30 *après* l'installation du câble Ethernet.
- Si la barre des voyants n'est pas installée, installez le faisceau de la barre des voyants dans le boîtier en positionnant la perle de ferrite près de la carte mère.

Remplacement de la carte mère

- Lors de la commande d'une carte mère de rechange, commandez l'édition sous licence standard pour le modèle en cours de maintenance. Vous recevrez un code d'autorisation à entrer dans l'outil d'entretien afin de réactiver les licences faisant partie de la configuration d'origine.
- Après le remontage du moniteur, utilisez l'outil d'entretien pour préparer le moniteur comme suit :
 - Entrez le numéro de série du moniteur. Ce numéro figure en bas du moniteur.
 - Restaurez toutes les fonctions sous licence en entrant le code d'autorisation dans l'outil d'entretien. Utilisez les codes d'autorisation figurant dans la carte de rechange, ainsi que les autres codes d'autorisation sous licence déjà installés. Enregistrez le numéro de série de l'appareil figurant sur les cartes du code d'autorisation sous licence, reçues avec la carte de rechange, et conservez-le à des fins ultérieures. Si la licence est perdue, réutilisez le code d'autorisation sur le même appareil.
 - Mettez à jour le logiciel du contrôleur hôte vers la version actuelle. Si la version actuelle du logiciel hôte n'est pas disponible après la connexion de l'appareil à l'outil d'entretien, contactez l'assistance technique Welch Allyn.

Retrait du LCD


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur
- Carte mère



REMARQUE Vous n'êtes pas obligé de retirer le module de température ou la barre des voyants pour retirer la carte mère ou le LCD.

1. Débranchez le faisceau LCD du LCD. Pour faciliter l'accès au connecteur, vous pouvez faire glisser la perle de ferrite la plus proche du connecteur vers le faisceau.

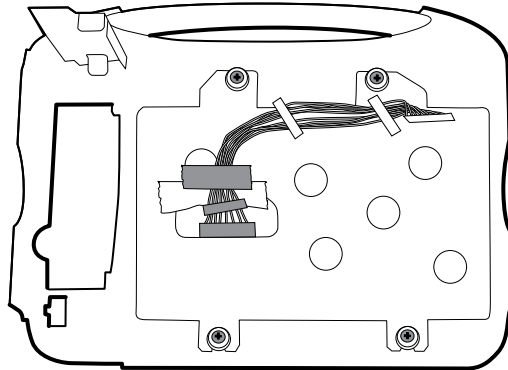

2. Retirez les quatre vis épaulées qui fixent le châssis LCD.
3. Retirez le châssis LCD.



REMARQUE Veillez à soutenir le LCD lorsque vous le retirez de son châssis. Le LCD risque de coller au châssis à cause de ses bandes de mousse.

4. Retirez le LCD.


Notes concernant le remontage




MISE EN GARDE Le joint de soudure du connecteur LCD (J48) est fragile. Lorsque vous insérez ou retirez le câble flexible, n'exercez aucune pression sur le joint de soudure.

- Vérifiez que le câble flexible LCD traverse le dégagement de la monture. Insérez le LCD dans la monture du boîtier frontal avec le câble flexible LCD dans le coin inférieur droit, comme illustré ci-dessous. (L'image de gauche s'applique aux écrans de 1^{re} génération, et celle de droite aux écrans de 2^e génération.)


Écrans de 1^{re} génération

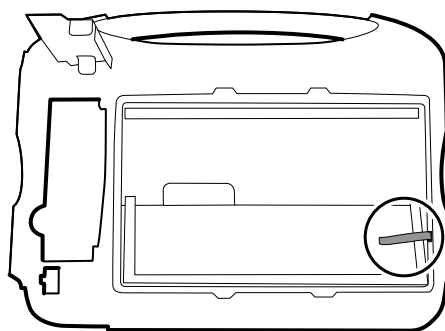

Écrans de 2^e génération

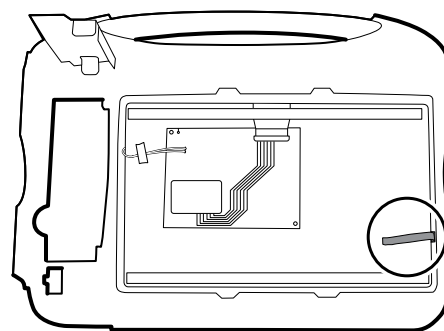


- Placez le châssis LCD sur le LCD. Vérifiez que le châssis LCD ne recouvre pas le câble flexible LCD.

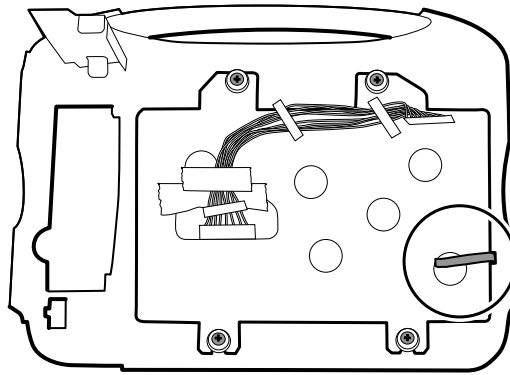

Remplacement du châssis LCD

- Installez 7,5 cm de bande Pro Gaff à l'arrière du châssis LCD pour recouvrir le fond des entretoises. Cette bande empêche des petits morceaux de métal résultant du filetage de tomber sur l'écran, car cela provoquerait un court-circuit.

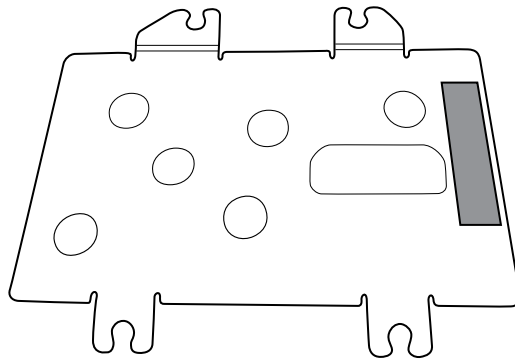

- Installez le châssis LCD avec des vis et des rondelles épaulées.
- Installez 7,5 cm de bande Pro Gaff sur le haut de l'encoche du faisceau pour protéger le faisceau LCD contre l'abrasion.
- Installez le faisceau LCD. En cas de retrait, utilisez de l'alcool isopropylique pour nettoyer la zone sur les parties découpées, où vous installerez les perles de ferrite du faisceau. Exposez la protection collante sur les perles de ferrite et montez-les dans les rectangles découpés.





REMARQUE Si les perles de ferrite ne sont pas positionnées dans les zones indiquées, elles gêneront les autres composants, comme la carte MCE.

- Collez un morceau de bande en haut du faisceau LCD pour le fixer sur le châssis.
- Fixez le fil de terre sur le châssis LCD.
-

Remplacement du LCD

- Retirez la feuille de protection du LCD.
- Vérifiez que les bandes de mousse sont installées à l'arrière du LCD près des bords supérieur et inférieur. Sur les écrans de 1^{re} génération (voir image de gauche), la bande de mousse s'étend jusqu'à la moitié supérieure, depuis le bas, des deux côtés du LCD. Sur les écrans de 2^e génération, les bandes de mousse sont uniquement en haut et en bas du LCD (voir image de droite).

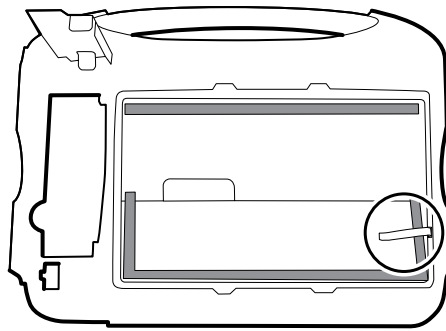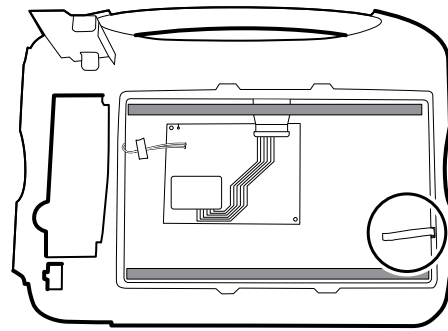Écrans de 1re génération**Écrans de 2e génération**

- Vérifiez que le câble flexible LCD traverse le dégagement de la monture.
- Ajoutez une bande de ruban adhésif de 3 cm sur le bord du châssis LCD, où débouchent le câble flexible LCD et le câble de terre.
- Insérez le LCD dans la monture du boîtier frontal avec le câble flexible LCD dans le coin inférieur droit, comme illustré ci-dessous.
- Ajoutez une bande de ruban adhésif de 3 cm sur le bord du châssis LCD traversé par le faisceau pour une connexion au LCD afin d'empêcher l'abrasion du faisceau LCD.
- Lorsqu'une perle de ferrite est ajoutée, alignez-la avec les repères sur le châssis LCD.
- Ajoutez la bande pour fixer le faisceau au châssis LCD traversé par le faisceau.

Retrait du boîtier frontal

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur
- Barre des voyants
- Module de température et couvercle de fixation
- Carte mère
- LCD

Pour terminer le démontage, retirez le support restant du boîtier frontal.

Remplacement du boîtier frontal

Remplacez le bouclier thermique (45) pour les modèles dotés de l'option de température.

Section B

Cette section concerne les appareils qui respectent tous les critères suivants :

- Fabrication après 11/2017
- Matériel MCE version P5 ou postérieure
- Numéros de série postérieurs à 100043244817



REMARQUE Voir « Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur » dans l'annexe pour savoir comment déterminer la date de fabrication à partir du numéro de série.

Cette section concerne les appareils qui respectent tous les critères suivants :

- Fabrication après 11/2017
- Matériel MCE version P5 ou postérieure
- Numéros de série postérieurs à 100023374817



REMARQUE Voir « Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur » dans l'annexe pour savoir comment déterminer la date de fabrication à partir du numéro de série.

Ces appareils sont conformes à la norme CEI 60601 3e édition. Les appareils construits après décembre 2018 sont conformes à la 4e édition.



REMARQUE Reportez-vous au bulletin du service client 80022414 CSB – CVSM/ CIWS CEI 60601 4e édition pour connaître les dates exactes de début et de fin de fabrication ainsi que le numéro de série du premier appareil de la 4e édition.



REMARQUE Si votre appareil ne respecte pas ces critères, consultez la section A pour obtenir les instructions de démontage et de réparation.

Si votre appareil est conforme à la norme CEI de la 3e ou 4e édition, utilisez uniquement les kits d'entretien au suffixe « 3e édition » ou « 4e édition » lors du remplacement des composants suivants :

- MCE (carte mère)
- LCD
- Alimentation électrique C.A.
- Faisceau d'alimentation C.A.
- Imprimante
- Câble Ethernet
- Boîtier arrière

- Étiquettes des produits
- Bouton d'alimentation
- Module SureTemp
- Module Masimo SpO2
- Module PNI
- Module EarlySense
- Module CO2

Si votre appareil est conforme à la norme CEI de la 3e ou 4e édition, utilisez uniquement les kits d'entretien au suffixe « 3e édition » ou « 4e édition » lors du remplacement des composants suivants :

- MCE (carte mère)
- LCD
- Alimentation électrique C.A.
- Faisceau d'alimentation C.A.
- Câble Ethernet
- Boîtier principal
- Étiquettes des produits
- Module SureTemp
- Module Masimo SpO2
- Module PNI



REMARQUE Pour les appareils de 4e édition, utilisez uniquement le 107124* lors du remplacement du Nellcor SpO2. Le logiciel de l'hôte doit être de version 2.40.01 ou ultérieure.



REMARQUE Les appareils qui sont compatibles avec la 4e édition ne peuvent pas être rétrogradés en dessous de la version 2.41.XX.

Mise hors tension de l'appareil

Vous pouvez éteindre l'appareil comme suit : 1) sur les appareils dotés du logiciel 2.x, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation situé sur le boîtier, puis suivez les instructions à l'écran, ou 2) sur tous les appareils, utilisez uniquement les commandes à l'écran.

Option 1. Après la mise sous tension de l'appareil, une brève pression sur le bouton d'alimentation permet d'ouvrir une boîte de dialogue avec les options suivantes :

- **Mettre hors tension.** Le comportement de l'appareil varie en fonction du profil actif, de l'enregistrement ou non des données de tendances patient et de l'établissement ou non du contexte du patient. Lors de l'entretien de l'appareil, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ces détails. Ces détails sont destinés aux médecins, qui surveillent les patients et stockent leurs données.
- **Veille.** Le bouton de mise en veille efface le contenu de l'écran et fait basculer l'appareil en mode d'économiseur d'écran.
- **Non.** Le bouton Cancel (Annuler) permet de fermer la boîte de dialogue.

Appuyez sur **Mettre hors tension** et terminez la procédure de mise hors tension.

Option 2. Pour utiliser uniquement les commandes affichées pour mettre l'appareil hors tension, procédez comme suit :


1. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur l'onglet **Device (Appareil)**.
3. Appuyez sur **Mettre hors tension**.




REMARQUE Les trois sections suivantes abordent les procédures de démontage et de réparation que vous pouvez effectuer sans retirer l'appareil du mur ou sans enlever la batterie. Toutes les étapes de la section relative au retrait du système du mur et au retrait de la batterie nécessitent une mise hors tension, ainsi que le retrait de l'appareil du mur et le retrait de la batterie.


Retrait de la batterie

Avant de retirer la batterie, mettez le moniteur hors tension, comme décrit dans ce manuel et débranchez le cordon d'alimentation C.A.


1. Retourner le moniteur pour avoir accès au capot du logement de la batterie.
2. Localisez le capot du compartiment de la batterie, signalé par .
3. Insérez une pièce dans la fente et poussez pour ouvrir. Choisissez une pièce dont le format est parfaitement adapté à la fente.

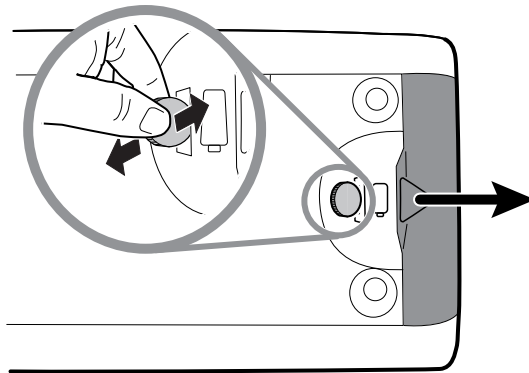

4. Retirez la batterie en tirant sur l'étiquette visible lorsque vous ouvrez le capot du compartiment de la batterie.

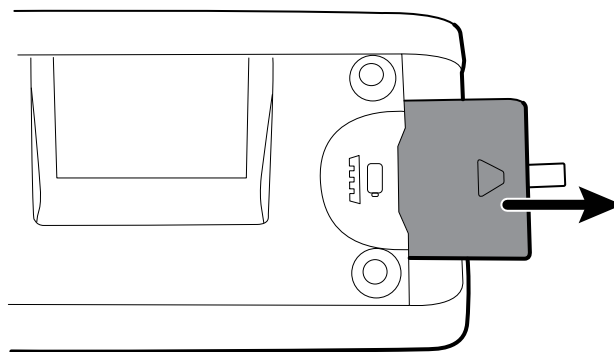


Retrait du boîtier arrière

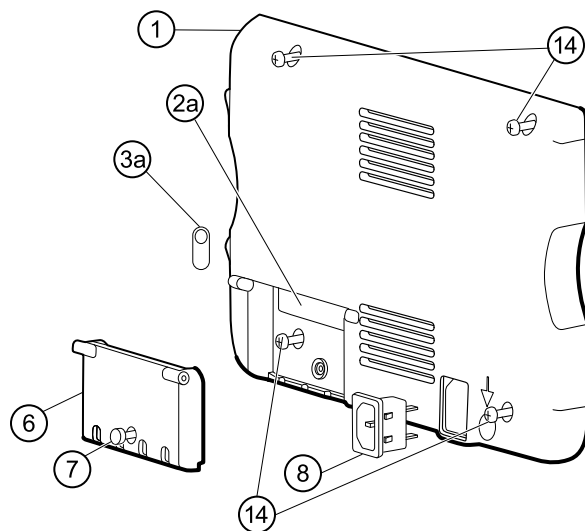


N°	Élément	N°	Élément
1	Boîtier arrière	7	Vis captive de la porte de communication
2a	Étiquette USB 4 hôtes USB	8	Connecteur CEI
3a	Étiquette d'appel infirmier	14	Vis, M4 x 10, tête cylindrique avec NYLOC
6	Porte de communication		

Avant de commencer, mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation C.A. et retirez la batterie, comme décrit dans ce manuel.


1. Déposez la face du moniteur vers le bas, sur le tapis antistatique.
2. Desserrez la vis (7) pour ouvrir la porte de communication (6).
3. Ouvrez la porte de communication (6) pour accéder à la vis du boîtier arrière.
4. Retirez les quatre vis du boîtier arrière (14).
5. Dressez le moniteur sur ses pieds en orientant l'écran loin de vous.
6. Soulevez le haut du boîtier arrière en l'éloignant du moniteur pour accéder aux connexions câblées du boîtier arrière.
7. Débranchez les pièces suivantes du module de communication tout en tenant le boîtier arrière :

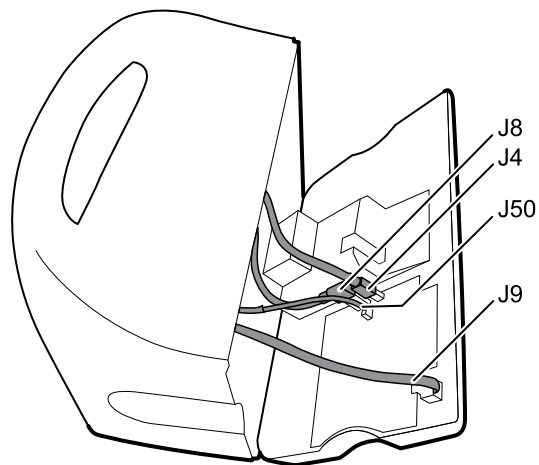

- a. Câble Ethernet du J9
 - b. Petit connecteur USB du J4
 - c. Grand connecteur USB du J8
 - d. Câble de communication du J50
8. Procédez comme suit avec le capot du bloc d'alimentation tout en tenant le boîtier arrière :
- a. Dégagez les câbles d'alimentation et du ventilateur du guide-fil sur le côté du capot du bloc d'alimentation.
 - b. Débranchez le câble d'alimentation de la carte d'alimentation sur le J2.

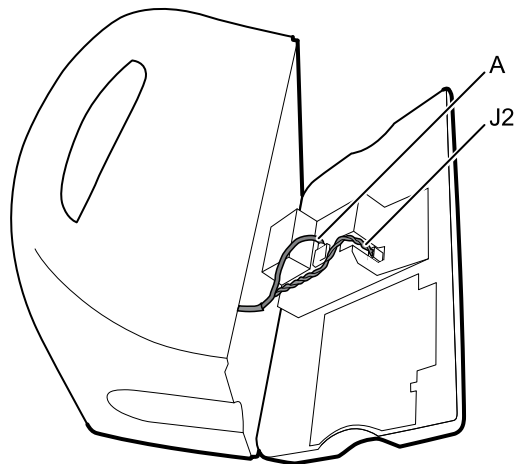

- c. Débranchez le câble du ventilateur (A) du faisceau principal.
- d. Débranchez le câble de terre LCD du faisceau d'alimentation CEI.

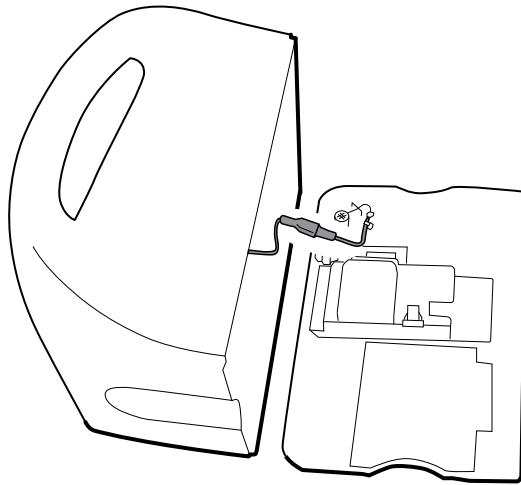

e. Séparez le boîtier arrière (1) du moniteur.

Après le retrait du boîtier arrière, choisissez la partie du moniteur à utiliser :

- Composants du boîtier arrière. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section « Démontage du boîtier arrière ».
- Châssis principal. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section « Démontage du châssis principal ».

Notes concernant le remontage

- Acheminez le câble d'alimentation et les câbles du faisceau du ventilateur dans le canal sur le côté du capot du bloc d'alimentation.
- Certaines cartes de communication comportent deux grands connecteurs USB. Le grand connecteur USB J8 est le plus proche du connecteur mini USB J4. À titre indicatif, consultez le schéma relatif à la carte de communication dans les annexes.
- Lors de la fermeture du boîtier, vérifiez qu'aucun fil n'est écrasé ou pincé avant de resserrer les vis. Après le serrage des vis, examinez le joint entre le boîtier arrière et le châssis principal pour vérifier l'absence de renflement. Un renflement indique que la fermeture des surfaces d'e contact est entravée.

Remplacement du boîtier arrière



REMARQUE Utilisez le kit d'entretien 3e édition 106840. Le kit d'entretien de rechange pour le boîtier arrière est assemblé avec la porte de communication, la tige de terre, la plaque de la borne de mise à la terre, le connecteur CEI et le faisceau d'alimentation C.A. 3e édition. Il est inutile de récupérer ces composants dans l'ancien boîtier arrière.

1. Suivez les procédures nécessaires pour démonter le boîtier arrière et retirez tous les composants à transférer vers le boîtier de rechange.
2. Branchez le faisceau d'alimentation au connecteur CEI (8). Consultez les notes concernant le remontage pour le bloc d'alimentation.
3. Installez le joint du boîtier arrière (15), inclus dans le kit d'entretien pour le boîtier arrière, dans la fente du bord extérieur du boîtier arrière. Pour une installation aisée, utilisez un petit tournevis à tête plate pour insérer le joint dans le canal plus facilement.
4. Installez les composants récupérés de l'ancien boîtier arrière dans l'ordre inverse des instructions de démontage.

5. Après le remontage du boîtier arrière, installez le cache du client USB (40) comme suit :
 - a. Placez le cache du client USB sur un câble USB mini B en orientant la bande vers l'extérieur.
 - b. Décollez la bande pour exposer l'adhésif.
 - c. Insérez le câble USB dans la connexion USB client, appuyez sur le câble et retirez-le pour coller le cache au boîtier arrière.
6. Installez ces étiquettes :
 - Étiquette USB (2a) dans l'ouverture de la porte de communication.
 - Étiquette d'appel infirmier (3a) (kit d'entretien 106837, CVSM, étiquette d'appel infirmier 3e édition) au cours de la connexion d'appel infirmier.

Retrait de la porte de communication




REMARQUE Si la porte de communication est manquante ou déjà retirée de l'appareil, passez à la section « Remplacement de la porte de communication ».




AVERTISSEMENT Risque de blessure. Dans la mesure où le retrait de la porte peut propulser la broche et le ressort dans les airs, portez des lunettes de sécurité pour réaliser ces étapes.

Avant de retirer la porte de communication, mettez le moniteur hors tension, retirez la batterie et le boîtier arrière conformément aux consignes.

1. Positionnez le boîtier arrière en orientant la connexion Ethernet vers le bas sur un tapis antistatique.
2. Ouvrez la porte de communication perpendiculairement au boîtier arrière.

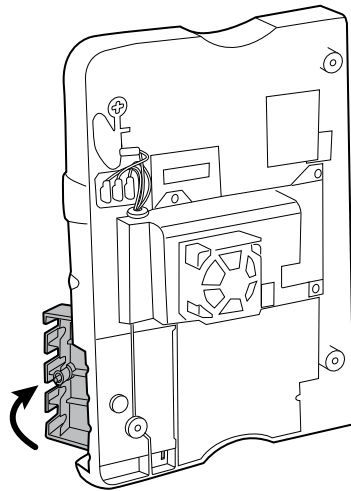

3. Utilisez un spudger pour pousser la broche vers le haut et libérer la charnière.

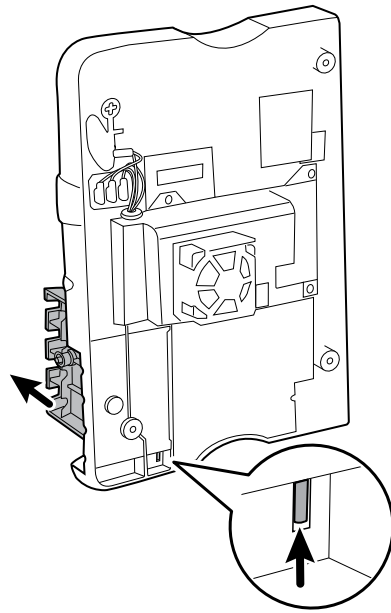


4. Retirez la porte du boîtier arrière avec précaution.

Remplacement de la porte de communication




AVERTISSEMENT Risque de blessure. Dans la mesure où la fixation de la porte peut propulser la broche et le ressort dans les airs, portez des lunettes de sécurité pour réaliser ces étapes.


1. Insérez un ressort et deux broches dans la porte de communication, comme illustré ci-dessous.

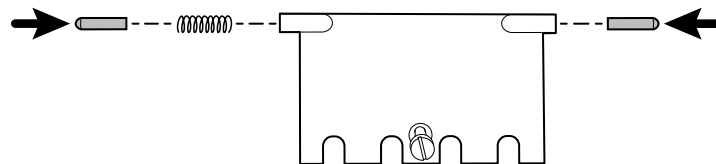


2. Le bas de la porte se trouve sur le tapis antistatique. Insérez la broche sur le côté droit de la porte dans la charnière du boîtier arrière.

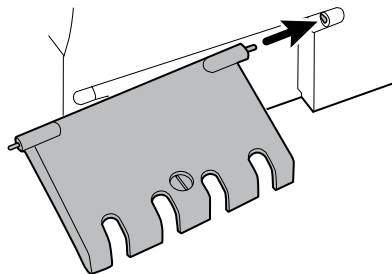

3. Appuyez sur la broche à gauche de la porte et faites glisser la porte dans la charnière du boîtier arrière jusqu'à entendre un déclic.

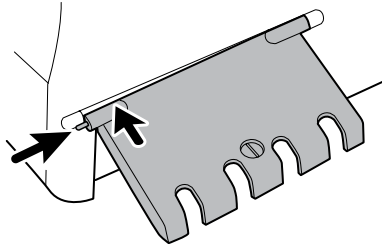

Démontage du boîtier arrière

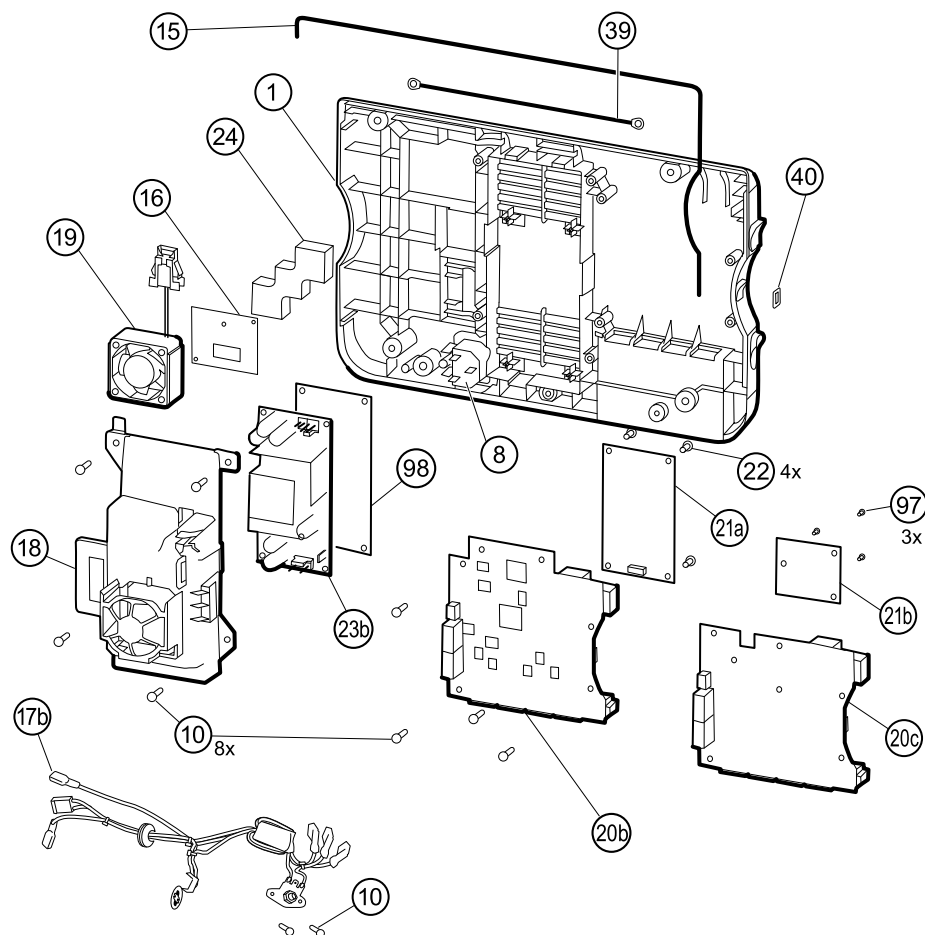

N°	Élément	N°	Élément
1	Boîtier arrière	20c	Carte de communication pour radio Newmar (modèles 6400, 6500, 6700 et 6800)
8	Connecteur CEI	21a	Carte radio, Lamarr, 802.11a/b/g
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	21b	Carte radio, Newmar, 802.11a/b/g/n
15	Joint du boîtier arrière (tubulure Norprene)	22	Vis, M3 x 0,5, tête cylindrique Phillips
16	Carte de l'antenne	23	Carte alimentation
17b	Faisceau d'alimentation C.A.	24	Bloc en mousse de montage de l'antenne
18	Capot du bloc d'alimentation	39	Câble de l'antenne
19	Ventilateur	40	Cache du client USB

N°	Élément	N°	Élément
20b	Carte de communication (modèles 6400, 6500, 6700 et 6800)	97	Vis, M3 x 0,5 x 8, tête cylindrique Phillips (petite vis Phillips)
20c	Carte de communication pour radio Newmar (modèles 6400, 6500, 6700 et 6800)	98	Bouclier Nomex ESD, alimentation CVSM (4e édition uniquement)

Retrait de la carte de communication

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Déposez le boîtier arrière sur sa face arrière, sur le tapis antistatique.
 2. Retirez les quatre vis Torx (10) qui fixent la carte de communication (20a ou 20b) au boîtier arrière.
 3. Retirez la carte de communication en procédant comme suit :
 - a. Soulevez le bord intérieur de la carte jusqu'à ce que le connecteur USB dégage le canal filaire sur le capot du bloc d'alimentation.
 - b. Faites glisser légèrement la carte vers le bloc d'alimentation et soulevez-la jusqu'à ce qu'elle touche le canal filaire sur le capot du bloc d'alimentation.
 - c. Soulevez le bord extérieur de la carte jusqu'à ce que les connecteurs latéraux dégagent le boîtier arrière.
 - d. Pour les moniteurs équipés d'une radio : faites tourner légèrement la carte (sans tirer sur le câble de l'antenne) dans le sens antihoraire, en pivotant sur le coin supérieur gauche. Retournez la carte et positionnez-la à l'extérieur du boîtier supérieur.
 4. Si vous remplacez la carte de communication, retirez la carte radio (21) comme décrit dans la section « Retrait de la carte et de l'antenne radio ».

Notes concernant le remontage

- Si la carte radio a été retirée, réinstallez-la avant de réinstaller la carte de communication.
- Pour installer la carte de communication, procédez comme suit :
 1. Positionnez la carte sur les entretoises avec le bord intérieur sous le canal filaire sur le capot de l'alimentation électrique, jusqu'à ce que le bord extérieur se retrouve dans le boîtier arrière.
 2. Alignez le connecteur externe mini USB avec l'ouverture sur le côté du boîtier arrière.
 3. Faites glisser le connecteur mini USB dans l'ouverture pour que la carte repose sur les entretoises.

Remplacement de la carte de communication

Installez la carte radio sur la nouvelle carte de communication avant d'installer la carte de communication sur le boîtier arrière.

Retrait de la carte et de l'antenne radio




MISE EN GARDE Ne retirez pas l'antenne radio du boîtier arrière à moins de remplacer la radio et l'antenne ou le boîtier arrière.


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Carte de communication
1. Si le moniteur est équipé d'une radio :
 - a. Retournez la carte de communication pour accéder à la carte radio, en évitant de surtendre le câble de l'antenne.
 - b. Si la radio Lamarr d'origine (bande a/b/g) est installée, retirez les quatre petites vis Phillips (machine) fixant la carte radio à la carte de communication, comme indiqué sur la gauche. Si la radio Newmar d'origine (bande a/b/g/n) est installée, retirez les trois petites vis Phillips (machine) fixant la carte radio à la carte de communication, comme indiqué sur la droite.


Lamarr

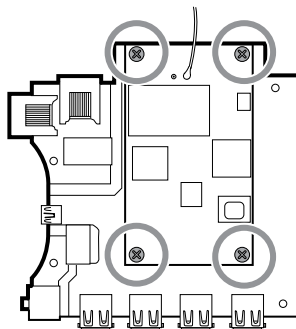

Newmar

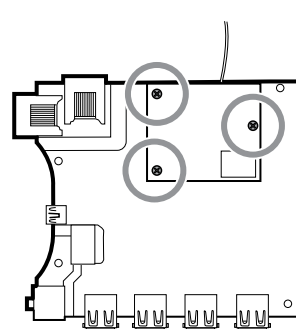


- c. Tenez la carte de communication d'une main, tout en saisissant la carte radio à l'autre extrémité de la connexion de l'antenne, et retirez sur la carte radio de la carte de communication.
2. (Effectuez cette étape uniquement si vous remplacez la radio ou l'antenne.) Débranchez le câble de l'antenne radio de la carte radio.
3. Retirez les quatre vis Torx (10) qui fixent le capot du bloc d'alimentation.

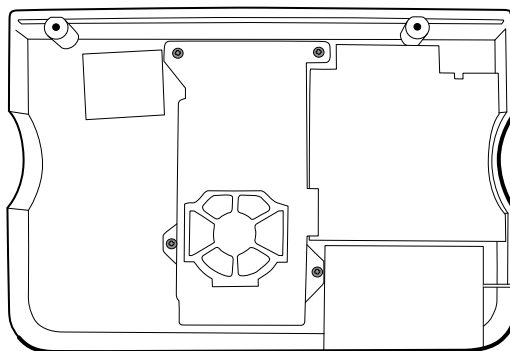

4. Retirez le capot du bloc d'alimentation (18).
5. Utilisez un outil comme un spudger pour séparer le bloc de mousse (24) et l'intérieur du boîtier arrière.


Notes concernant le remontage

Acheminez le câble de l'antenne dans le canal en haut du boîtier arrière.

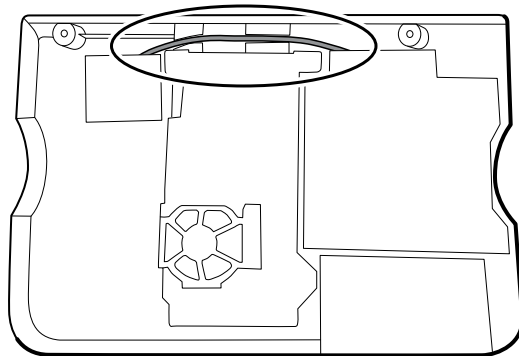


Remplacement de la carte radio et de l'antenne


1. Si l'antenne est retirée, nettoyez le boîtier arrière et la surface de montage avec de l'alcool isopropylique.
2. L'illustration suivante montre à la fois les radios Lamarr et Newmar et les cartes de l'antenne. Connectez le câble de l'antenne à la borne G de la carte radio. Connectez l'autre extrémité du câble à l'antenne sur la borne PG.

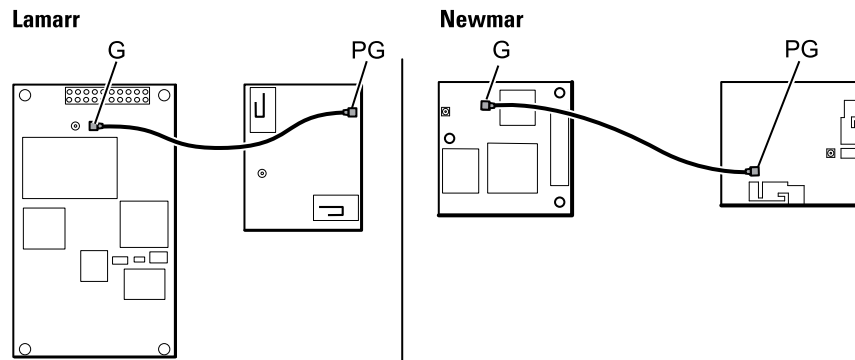

3. Retirez la pellicule de protection du bloc de mousse (24) et collez le bloc de mousse au boîtier arrière.

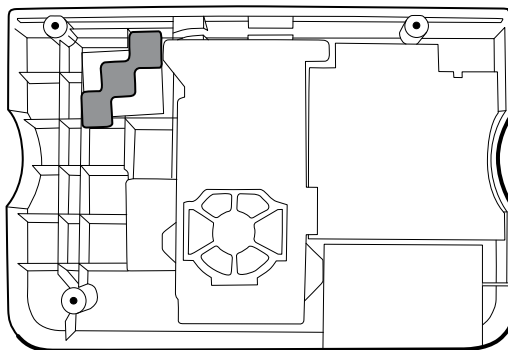


4. Exposez l'adhésif sur le bloc de mousse. Installez l'antenne (16) sur le bloc de mousse avec le câble de l'antenne (39) orienté en dessous de la carte, et dans le canal filaire au-dessus du bloc d'alimentation.
5. Acheminez le câble de l'antenne dans le canal en haut du boîtier arrière.

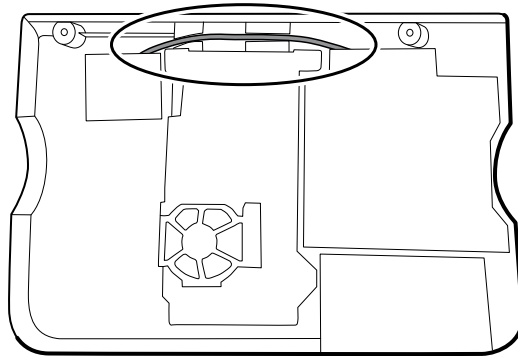

Retrait du ventilateur

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Appuyez sur les brides sur les côtés du connecteur du faisceau du ventilateur et séparez le connecteur du capot du bloc d'alimentation (18).

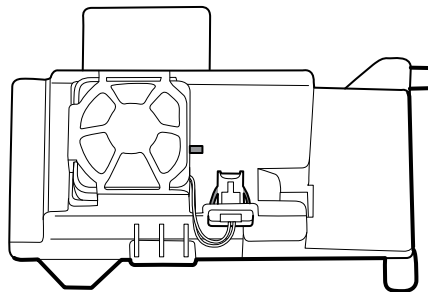

2. Appuyez sur la languette située sur le capot du bloc d'alimentation et faites glisser le ventilateur (19) sur la languette et à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage




MISE EN GARDE Veillez à la bonne orientation du ventilateur. L'air doit s'écouler vers l'alimentation électrique.



REMARQUE Si le ventilateur est sale, utilisez de l'air comprimé pour supprimer la poussière. Ne pliez pas les aubes au risque d'endommager le ventilateur. Si le ventilateur est bruyant, et que le nettoyage n'atténue pas le bruit, remplacez-le.


- En veillant à orienter l'étiquette vers le bas, faites glisser le ventilateur dans le boîtier sur le capot du bloc d'alimentation jusqu'à ce que la languette sur le capot le maintienne en place.
- Attachez le faisceau du ventilateur au capot du bloc d'alimentation de manière que le connecteur soit orienté vers le ventilateur, comme illustré dans la figure suivante.

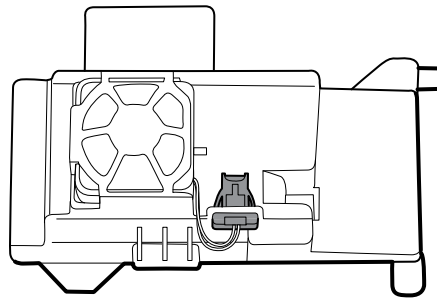

Retrait du bloc d'alimentation

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :


- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Retirez les quatre vis Torx (10) qui fixent le capot du bloc d'alimentation.

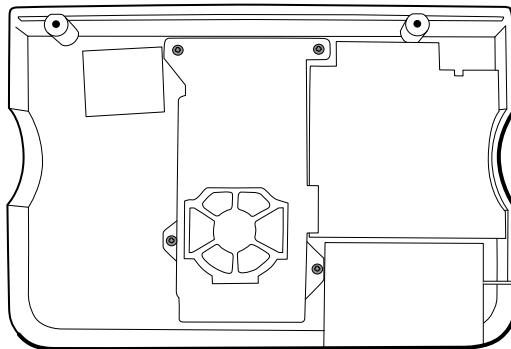

2. Retirez le capot du bloc d'alimentation (18).
3. Débranchez les pièces suivantes du bloc d'alimentation :
 - Câble de terre (vert)
 - Faisceau d'alimentation C.A. (17b)



REMARQUE Consultez la section « Retrait du faisceau d'alimentation C.A. » pour plus d'informations.

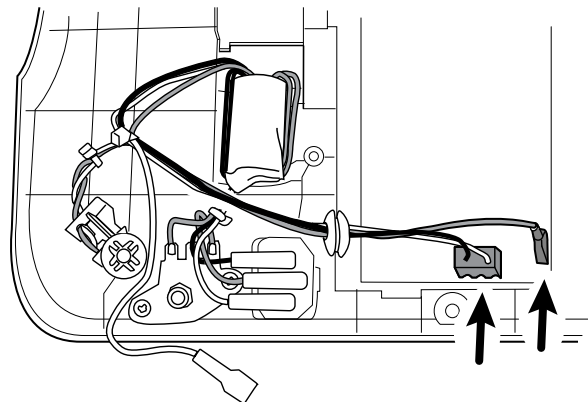

4. Retirez le bloc d'alimentation et le bouclier Nomex s'ils sont présents.


Retrait du faisceau d'alimentation C.A.




REMARQUE Ne débranchez pas le faisceau d'alimentation C.A. du connecteur CEI à moins de vouloir le remplacer. Après avoir débranché le faisceau d'alimentation C.A., vous ne pouvez plus le réutiliser.

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Bloc d'alimentation électrique
1. Débranchez le faisceau d'alimentation C.A. du connecteur CEI.
 2. Retirez la plaque de terre en métal dans la nervure du boîtier.

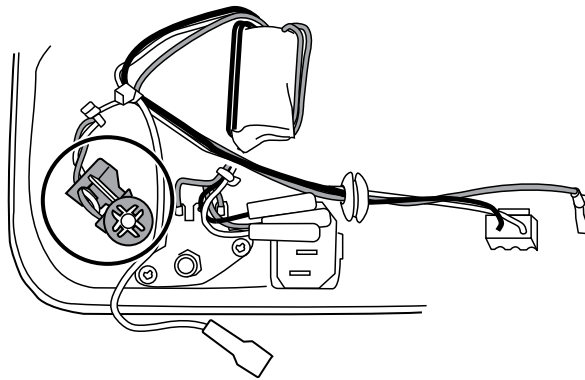

3. Retirez les deux vis qui fixent la tige de terre au boîtier arrière.

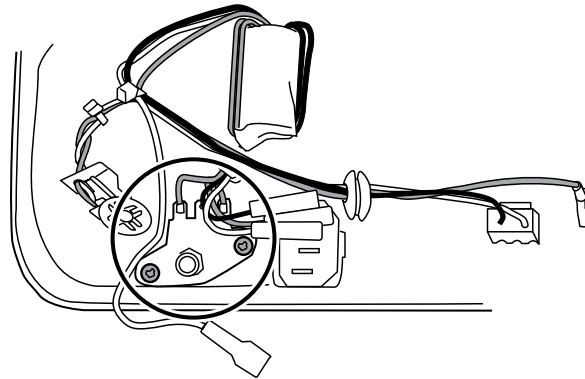


4. Retirez le faisceau d'alimentation C.A. de la tige de terre.

Notes concernant le remontage


Lorsque vous remplacez le boîtier arrière ou le faisceau d'alimentation C.A., acheminez le câblage comme suit :

- Connectez le fil bleu au neutre (N), le fil vert à la terre (GND) et le fil marron à la phase (L).

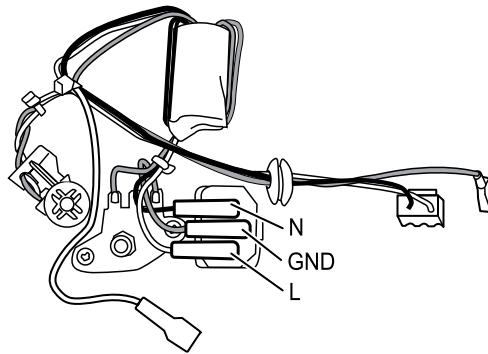


REMARQUE Le faisceau d'alimentation pour le connecteur CEI est conçu pour une seule connexion. Remplacez le faisceau d'alimentation s'il a été déconnecté du connecteur CEI.

- Veillez à insérer le passe-câble sur le faisceau d'alimentation C.A. dans la fente du capot du bloc d'alimentation.
- Placez la ferrite sur le faisceau d'alimentation C.A. dans la partie moulée sur le boîtier arrière, puis vérifiez les détails suivants :

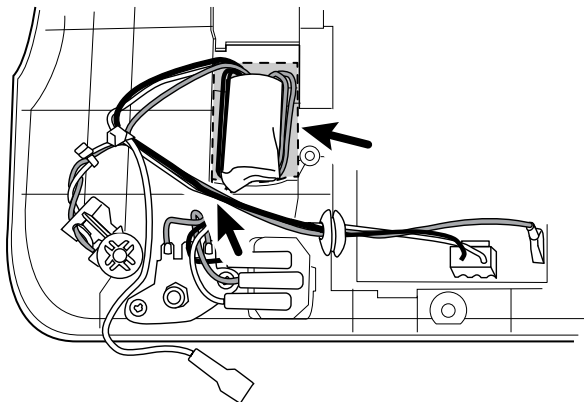

- Assurez-vous que le bord de la ferrite est à l'intérieur du bord de la partie moulée.
- Assurez-vous que les fils sur la ferrite du faisceau d'alimentation sont sur les côtés de la ferrite.
- Vérifiez que les fils pour l'alimentation et le fil de terre LCD passent par-dessus les fils vers la ferrite.
- Vérifiez que le capot du bloc d'alimentation ne pince pas les câbles d'alimentation.
- Lorsque vous remplacez le capot du bloc d'alimentation, veillez à acheminer le câble de l'antenne dans le canal situé en haut du boîtier arrière.

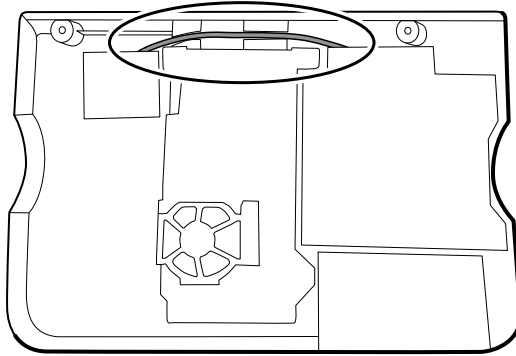

- Lors du remplacement de l'alimentation, si un bouclier Nomex ESD a été installé, inspectez le bouclier ESD et remplacez-le si nécessaire. Remplacez le bouclier si vous constatez une dégradation du matériel.

Démontage du châssis principal

Les procédures de démontage et de remontage sont identiques pour le châssis standard et le châssis étendu, sauf avis contraire.


Options de configuration

Châssis standard (côté gauche)

Prend en charge deux modules maximum

Châssis étendu (côté droit)

Prend en charge trois modules maximum

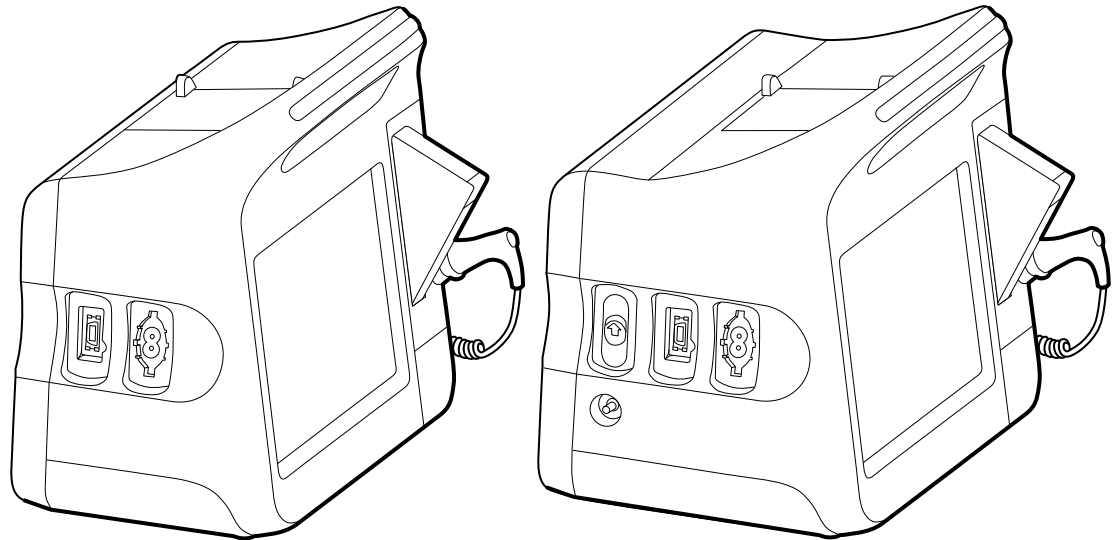

Composants (de l'arrière vers l'avant) :

SpO2, PNI

Cache, PNI (6300, 6400 et 6500 uniquement)

Composants (de l'arrière vers l'avant) :


CO2, SpO2, PNI

Cache, SpO2, PNI

Châssis étendu (côté droit) Prend en charge un module maximum



REMARQUE Le châssis standard est identique au châssis étendu, hormis l'espace prévu pour un module EarlySense. C'est pourquoi, il n'est pas présenté ici.

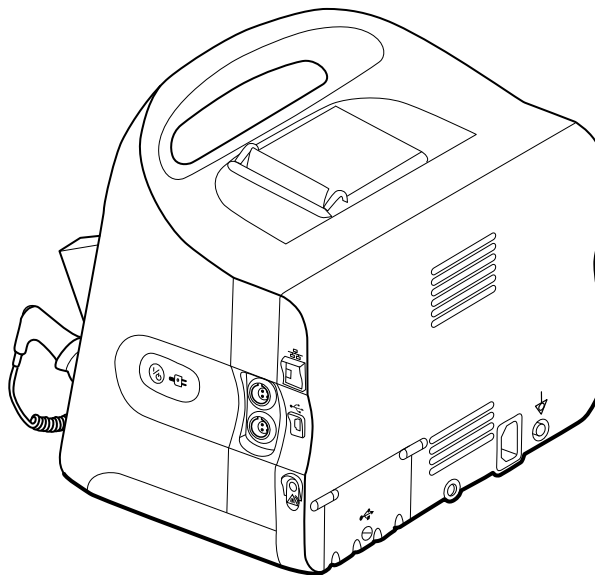

Composants (de l'avant vers l'arrière) :

Bouton d'alimentation, EarlySense, Ethernet RJ-45, client USB, appel infirmier

Bouton d'alimentation, cache, Ethernet RJ-45, client USB, appel infirmier




REMARQUE Les moniteurs configurés avec la RRa, la SpHb ou le CO2 ne sont pas configurables avec EarlySense.



REMARQUE Le port Ethernet RJ-45 offre une connexion filaire au réseau informatique. Le port client USB offre une connexion à un ordinateur externe à des fins de tests et de mises à niveau logicielles. L'appel infirmier offre une connexion au système d'appel infirmier de l'hôpital.

Vue éclatée du châssis principal

Vous trouverez d'autres vues détaillées des composants du châssis principal, ainsi que des tableaux avec des pièces spécifiques, plus loin dans cette section, avant les instructions de démontage et de réparation correspondantes.

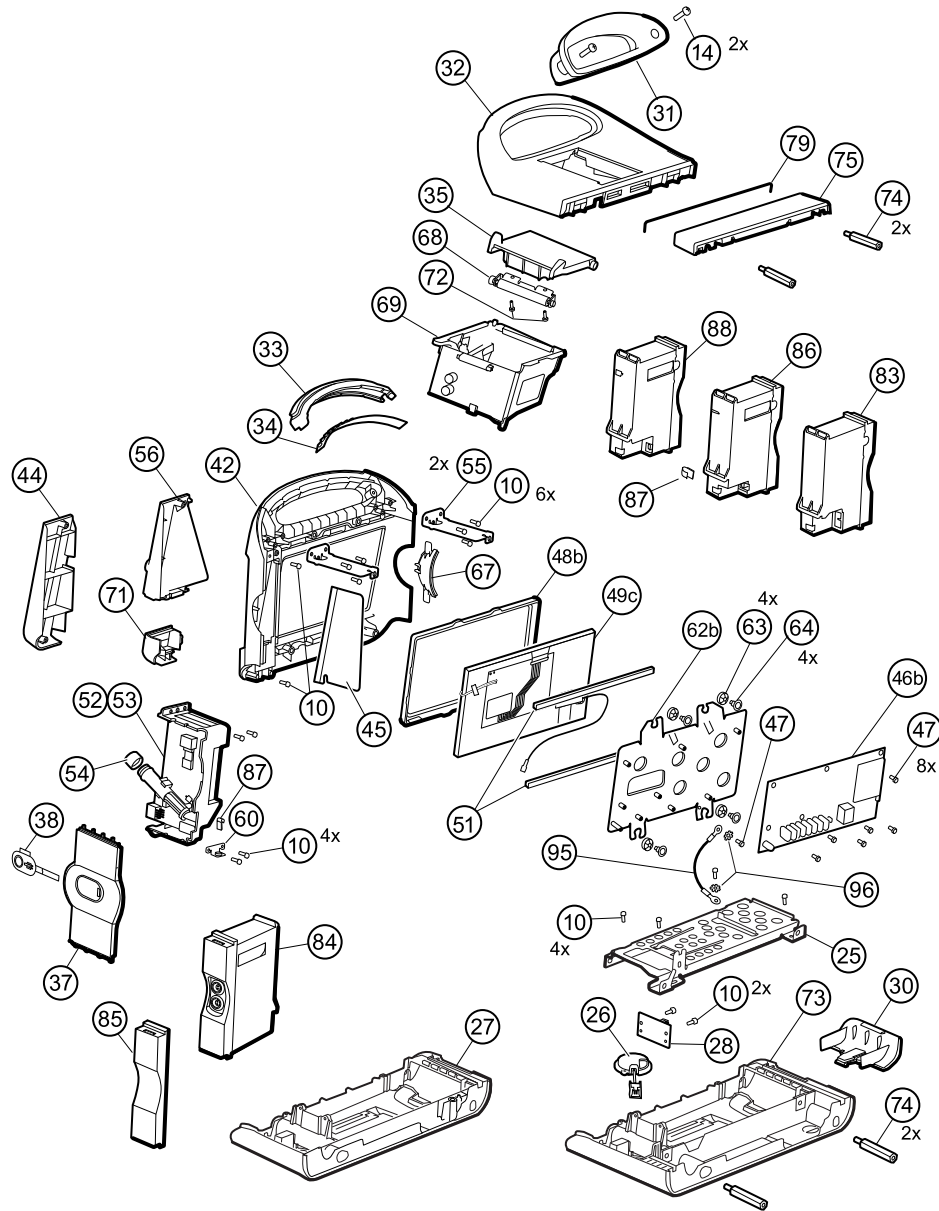

N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	54	Joint du puits de sonde
14	Vis, M4 x 10, tête cylindrique avec NYLOC	55	Traverses horizontales


N°	Élément	N°	Élément
25	Châssis métallique du boîtier inférieur	56	Couvercle de fixation du module de température
26	Haut-parleur	60	Bride de fixation du boîtier
27	Boîtier inférieur	62b	Châssis LCD
28	Carte du connecteur de la batterie	63	Passe-câble, à oreilles - G411-1
30	Trappe de la batterie	64	Vis épaulée, à oreilles G-411-1 métrique
31	Insert de poignée	67	Insert gauche
32	Boîtier supérieur	68	Rouleau d'alimentation papier
33	Barre des voyants	69	Imprimante
34	Carte de la barre des voyants	71	Couvercle d'accès à la connexion du module de température
35	Capot de l'imprimante	72	Vis, M2,2 x 8, taraudeuse, PNH, TRX
37	Panneau latéral droit	73	Boîtier inférieur étendu
38	Bouton d'alimentation et câble flexible	74	Entretoise M4
42	Boîtier frontal	75	Extension du boîtier supérieur
44	Volet d'obturation du module de température	79	Joint du boîtier supérieur
45	Bouclier thermique	83	Module CO2
46b	Carte mère	84	Module EarlySense
47	Vis, M3 x 5, tête cylindrique	85	Façade d'obturation
48b	Monture LCD	86	Module SpO2
49c	LCD avec écran tactile	87	Clip de retenue pour câble USB
51	Bande de mousse	88	Module PNI

N°	Élément	N°	Élément
52	Module de température	95	Fil de terre du châssis LCD
53	Boîtier du module de température	96	Rondelle de blocage

Retrait du module CO2

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Débranchez les deux câbles USB du module CO2.

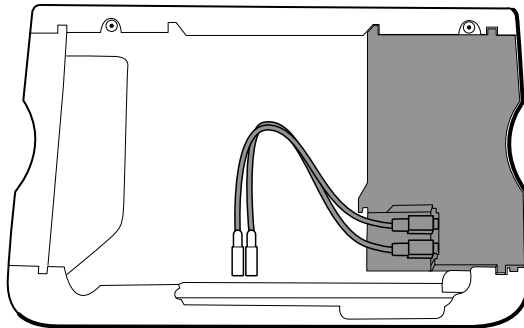


2. Faites glisser le module CO2 à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage

- Procédez comme suit avant d'installer le module CO2 :
 - Installez le module PNI (module le plus proche de l'écran).
 - Installez le module SpO2.
- Insérez le module CO2 dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.
- Connectez les deux câbles USB au module CO2.




REMARQUE Vous pouvez connecter les câbles USB du module CO2 dans n'importe quel ordre dans la prise USB FSS CO2.

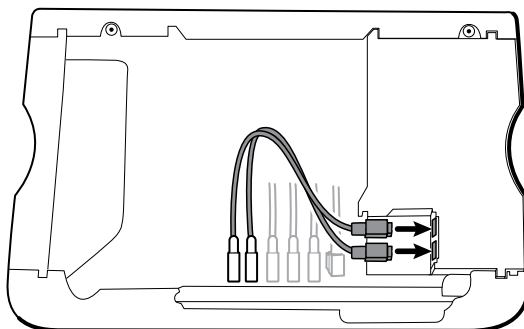


Remplacement de la façade du module CO2

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :


- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Module CO2
1. Déposez les deux étiquettes vierges qui fixent le couvercle transparent du boîtier au boîtier du module.
 2. À l'aide d'un tournevis pour écrous à fente, libérez les trois clips en plastique du boîtier arrière du module, puis retirez le couvercle transparent du boîtier.

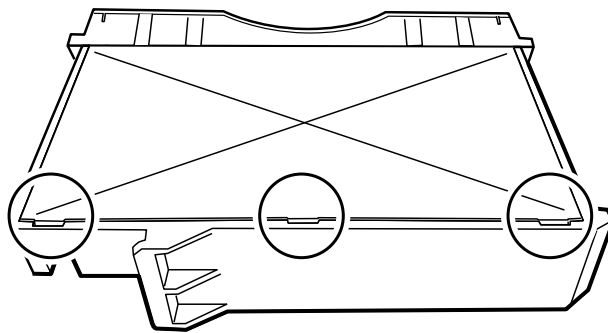


3. Débranchez le tuyau d'évacuation du port d'évacuation sur la façade.

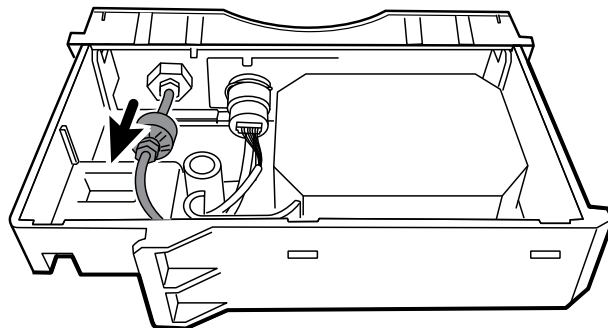

4. Retirez le clip à ressort du port d'entrée, puis faites glisser ce dernier en l'éloignant de la façade.

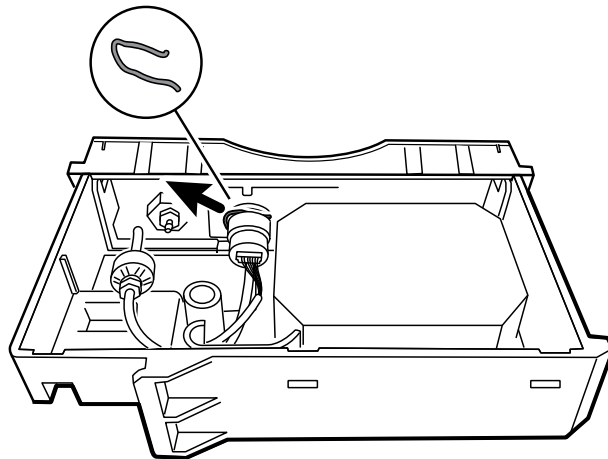


5. Retirez la façade :
 - a. Désengagez de la façade un clip en plastique sur le boîtier arrière du module à partir.
 - b. Retirez la façade en la faisant pivoter tout en l'éloignant du boîtier arrière.

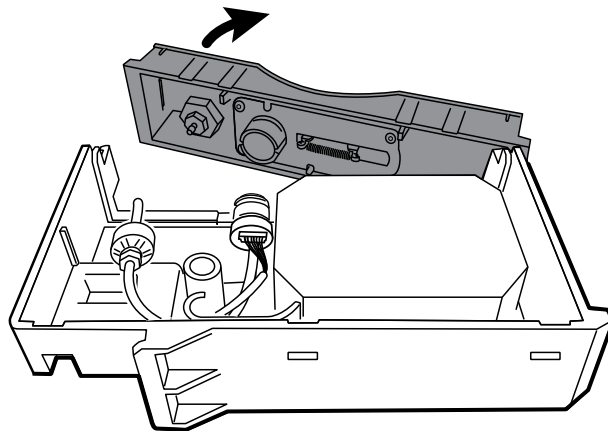


6. Inspectez la nouvelle façade avant de l'installer :
 - a. Vérifiez que le ressort est fixé sur le loquet de la porte.
 - b. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme librement.
7. Faites glisser la nouvelle façade dans le boîtier arrière du module jusqu'à ce que le verrou des deux clips en plastique s'enclenche.
8. Installez le port d'entrée et le clip à ressort :
 - a. Faites glisser le port d'entrée dans le compartiment de la façade pour aligner le port et la façade.
 - b. Tout en maintenant le port en place, installez le clip à ressort sur le port et le compartiment, comme illustré dans la figure ci-dessous. Le clip à ressort est fixé en poussant dessus depuis la tubulure d'évacuation vers la porte de la façade. Assurez-vous qu'il est parfaitement en place.



REMARQUE Ne réutilisez pas le clip à ressort. Remplacez-le par un nouveau clip fourni dans le kit.

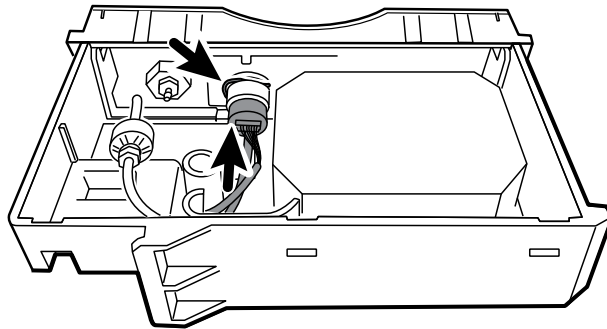


9. Branchez le tuyau d'évacuation sur le port d'évacuation.
10. Vérifiez que tous les tuyaux et câbles sont acheminés, comme illustré dans la figure ci-dessous. Vérifiez également que la tubulure n'est pas emmêlée.

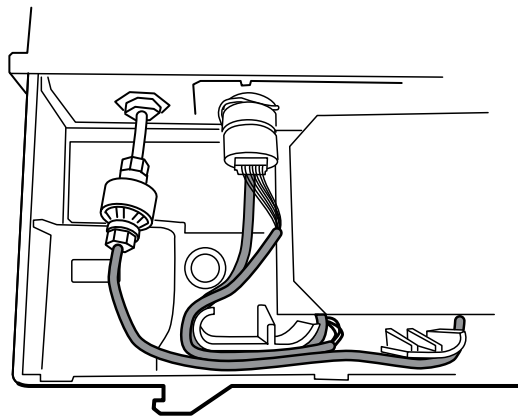

REMARQUE Le tuyau d'évacuation longe l'arrière du module et se plie progressivement vers la tubulure d'évacuation. Le tube d'admission et le chemin de câbles contournent la partie moulée et se dirigent vers le grand connecteur.


11. Installez le couvercle transparent du boîtier sur le boîtier arrière du module et positionnez-le de manière à verrouiller les trois clips en plastique.
12. Appliquez les deux nouvelles étiquettes vierges à l'emplacement indiqué dans la figure ci-dessous.

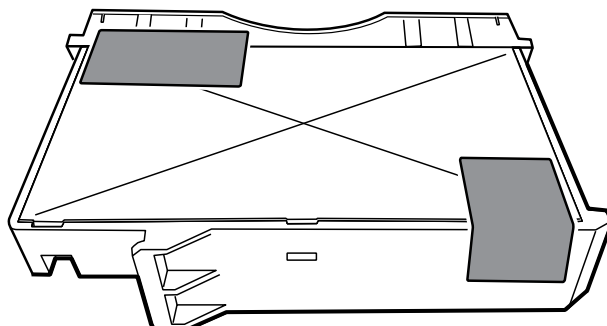

Retrait du module Capteur EarlySense

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
1. Débranchez le câble USB du module Capteur EarlySense.

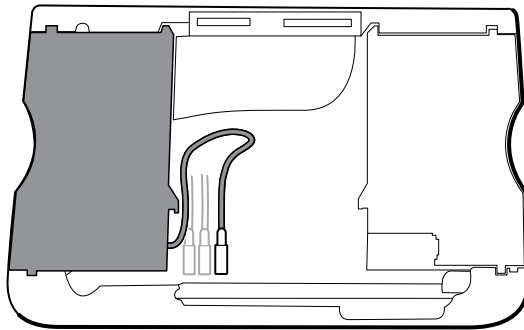

2. Faites glisser le module Capteur EarlySense à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage

Insérez le module Capteur EarlySense dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le bas.

Remplacement du module EarlySense ou ajout d'un module EarlySense


Utilisez le module CVSM EarlySense, 3e édition, du kit d'entretien 106838.

- Insérez le module Capteur EarlySense dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le bas.
- Connectez le câble USB au module Capteur EarlySense.
- Lors de l'ajout d'un module Capteur EarlySense, le boîtier inférieur et le capot SureTemp doivent avoir des trous de ventilation. Utilisez le boîtier inférieur du kit d'entretien 105504 et le capot SureTemp du kit d'entretien 103542.

Retrait du module SpO2

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Module CO2 ou façade d'obturation
 - Module EarlySense (en option)
1. Débranchez le câble USB du module SpO2.
 2. Retirez le câble USB du clip de retenue sur le module SpO2.

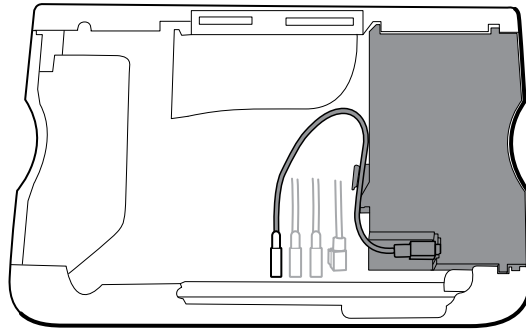

3. Faites glisser le module SpO2 à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage


- Installez le module PNI (module le plus proche de l'écran) *avant* d'installer le module SpO2.
- Insérez le module SpO2 dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.

Remplacement du module SpO2 ou ajout d'un module SpO2



MISE EN GARDE Assurez-vous que le module dispose de l'option appropriée (Masimo ou Nellcor).

- À l'arrière du module SpO2, nettoyez la surface où poser le clip de retenue (voir la figure ci-dessous) et appliquez-le.

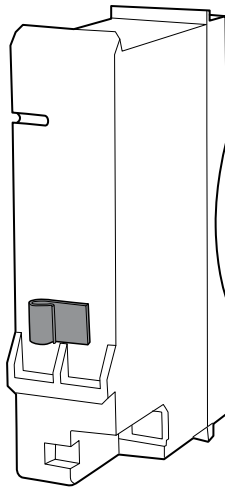


- Insérez le module SpO2 dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.
- Connectez le câble USB au module SpO2.
- Fixez le câble USB au clip de retenue sur le module SpO2.

Retrait du module PNI

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense (en option)

- Module SpO2 ou façade d'obturation
1. Débranchez le câble USB du module PNI.

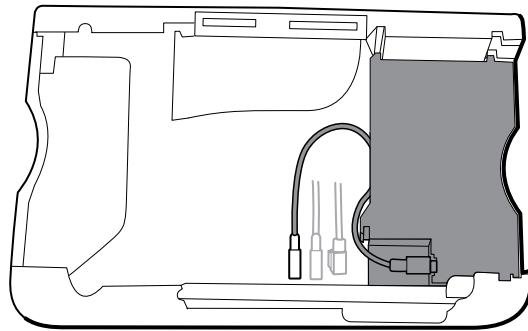


2. Faites glisser le module PNI à l'extérieur du boîtier.

Notes concernant le remontage

- Installez le module de la pression artérielle non invasive ou PNI (module le plus proche de l'écran) *avant* d'installer les modules SpO2 et CO2.
- Insérez le module PNI dans le boîtier en orientant l'étiquette du numéro de série vers le haut.
- Connectez le câble USB au module PNI.
- En cas d'installation initiale, installez le volet d'obturation en le faisant glisser dans le boîtier.


Retrait du boîtier inférieur

Boîtier inférieur pour le châssis standard

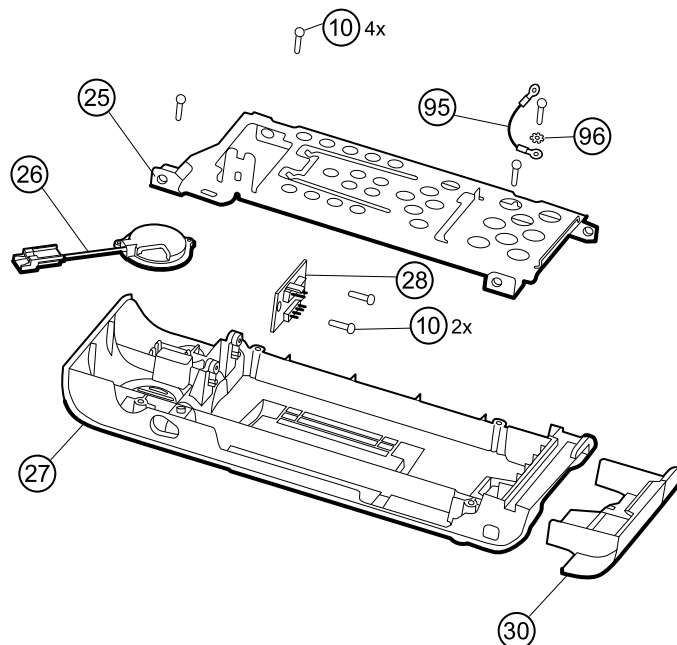

N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	30	Trappe de batterie
25	Châssis métallique du boîtier inférieur	95	Fil de terre du châssis LCD
27	Boîtier inférieur	96	Rondelle de blocage
28	Carte du connecteur de la batterie		

Boîtier inférieur étendu pour le châssis étendu

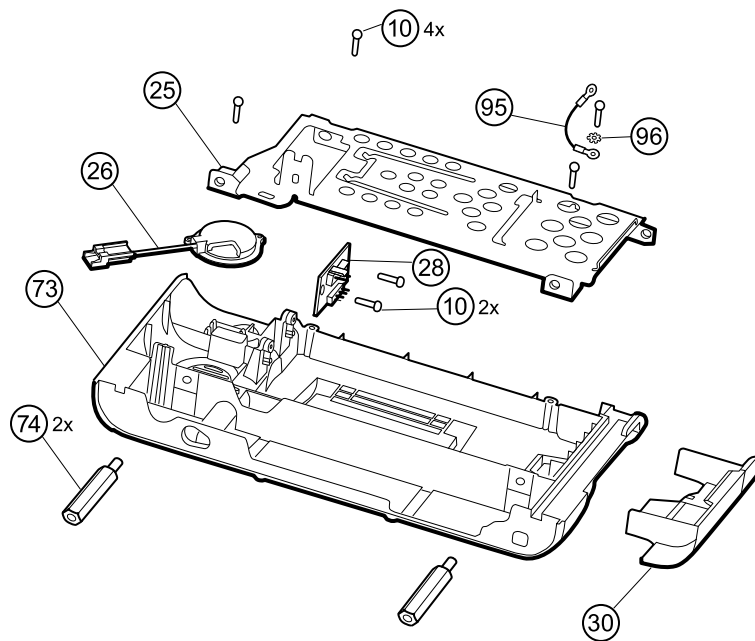


N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	73	Boîtier inférieur étendu
25	Châssis métallique du boîtier inférieur	74	Entretoise M4
26	Haut-parleur	95	Fil de terre du châssis LCD
28	Carte du connecteur de la batterie	96	Rondelle de blocage
30	Trappe de batterie		


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation


- Module EarlySense
 - Module SpO2 ou façade d'obturation
 - Module PNI
1. Retirez l'insert encerclé dans la figure ci-dessous.

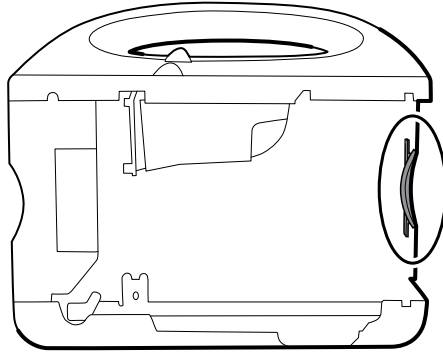


2. Si votre modèle comporte un châssis étendu, retirez l'insert, comme illustré ci-dessous.

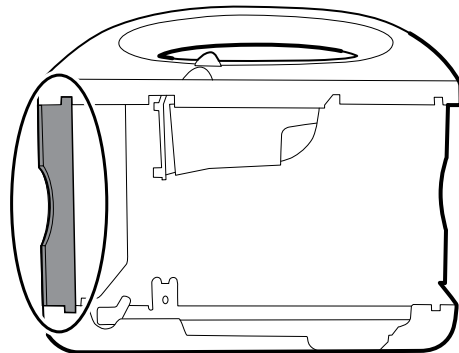


3. Si votre modèle comporte une imprimante, procédez comme suit :
 - a. Retirez le tube d'écoulement situé entre l'imprimante et la plaque inférieure.

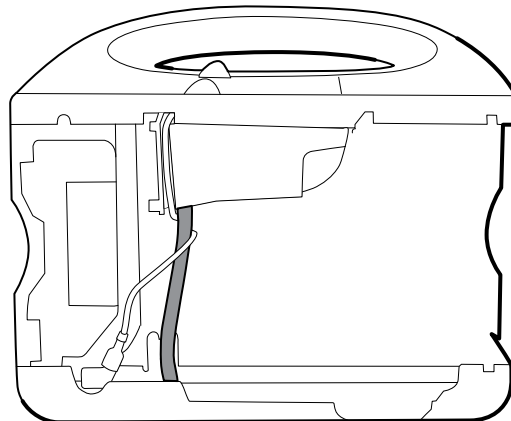


- b. Débranchez le câble de terre de l'imprimante de la borne de mise à la terre, sur la plaque inférieure.

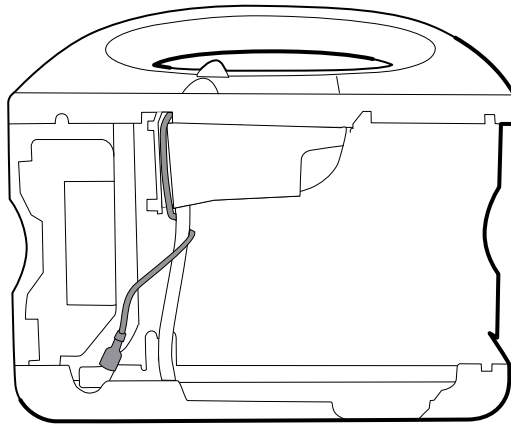

4. Sectionnez l'attache qui maintient le faisceau principal au support inférieur. Cette attache est située juste en dessous de l'attache sur le faisceau principal.

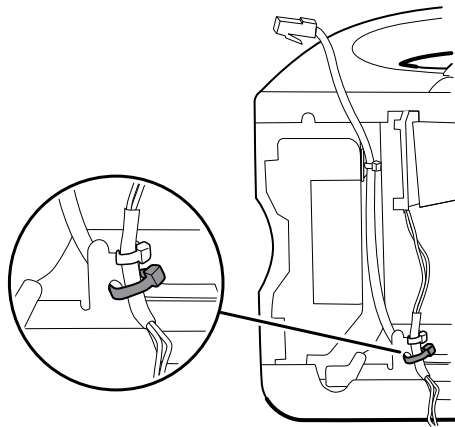


5. Retirez le fil du haut-parleur depuis l'arrière du support inférieur et déconnectez le câble du haut-parleur (26) du faisceau principal.
6. Débranchez les pièces suivantes de la carte du connecteur de la batterie :
 - a. Faisceau d'alimentation de la batterie du J2
 - b. Faisceau de la batterie intelligente du J3

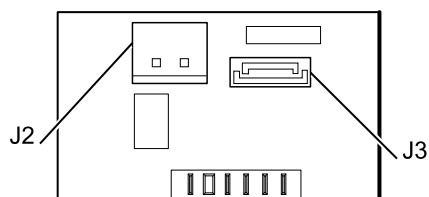


7. Retirez la bande Pro Gaff qui fixe le câble Ethernet et le fil de terre LCD au châssis métallique.



REMARQUE Notez les emplacements de la bande Pro Gaff pour pouvoir la remplacer correctement lors du remontage.

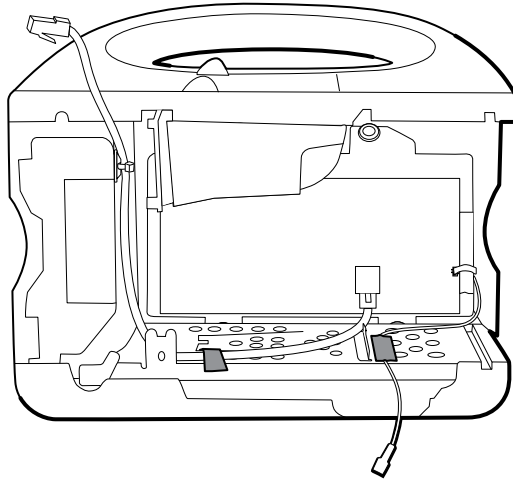


8. Retirez les vis suivantes :

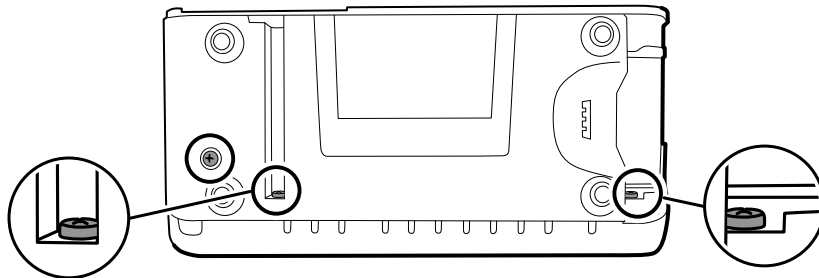


- La vis du boîtier inférieur
- Les deux vis qui fixent tout le boîtier inférieur sur le boîtier frontal

9. Retirez le boîtier inférieur.

- a. Faites pivoter le boîtier inférieur le long du bord commun avec le boîtier frontal et posez-le sur la table de travail.

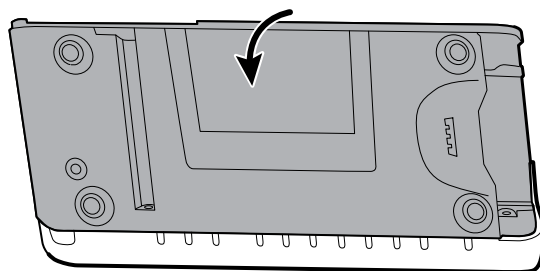

- b. Retirez la vis qui fixe le fil de terre du châssis LCD au châssis LCD.

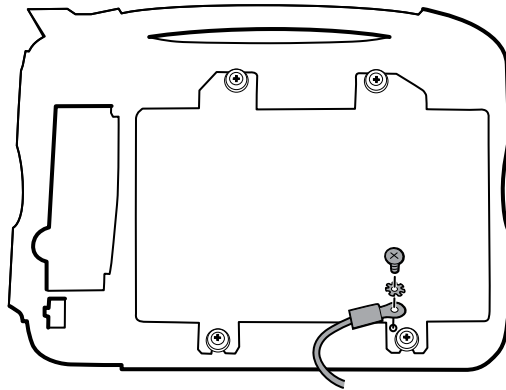


10. Démontez le boîtier inférieur :




REMARQUE Démontez le boîtier inférieur uniquement si vous avez l'intention de remplacer la carte du connecteur de la batterie ou le haut-parleur. Consultez les instructions pour retirer ces composants ultérieurement dans cette section.

Notes concernant le remontage


- Lors du remontage du boîtier inférieur d'un châssis étendu, utilisez une douille de 8 mm et un tournevis dynamométrique étalonné pour $13,8 \text{ kg-cm} \pm 1,15 \text{ kg-cm}$ afin de fixer les entretoises (74).
- Branchez le câble du haut-parleur sur le câble le plus court du faisceau principal (câble le plus proche de l'attache métallique). Placez le câble derrière la tige de terre. Veillez à ce que le câble du haut-parleur soit positionné dans le canal.
- Si une imprimante est installée, acheminez le câble de terre de l'imprimante via le canal sur le boîtier de l'imprimante et enroulez-le une fois autour du tube d'écoulement de l'imprimante.

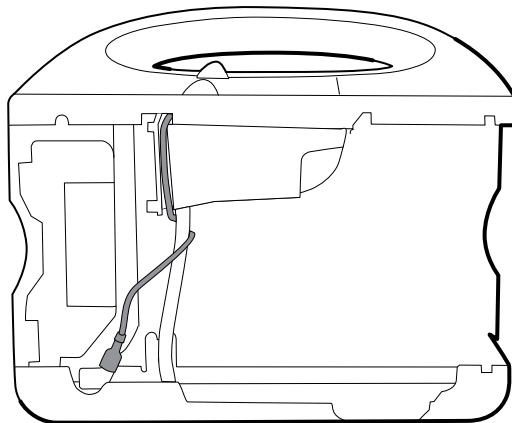


- Attachez ensemble les fils du faisceau intelligent, de la batterie et du haut-parleur.

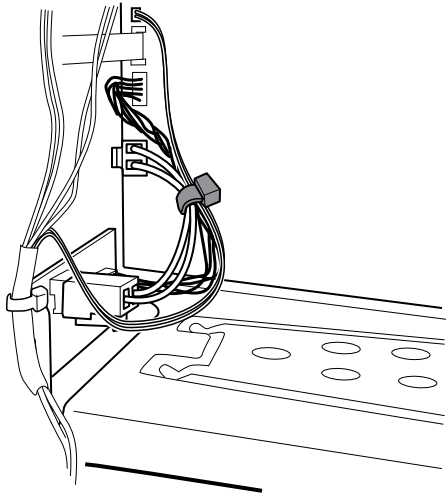


- Acheminez les fils du faisceau principal sur les câbles USB et le séparateur de câbles.

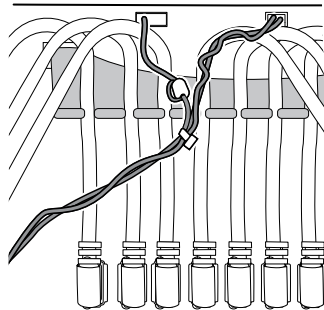

- Remplacez la bande Pro Gaff qui fixe le fil de terre LCD au cadre de la batterie. Collez le câble de terre au cadre de la batterie, entre la nervure centrale et les trous à l'extrémité droite.
- Si le câble Ethernet a été retiré, connectez-le à la carte MCE. Depuis la carte MCE, acheminez le câble Ethernet en diagonale sur le châssis métallique du boîtier inférieur vers le support métallique au-dessus de la carte de batterie, puis utilisez environ 5 cm de bande Pro Gaff pour le coller sur le bord du châssis métallique. Pliez le câble Ethernet parallèlement au côté droit du boîtier SureTemp en passant au-dessus du câble flexible du bouton d'alimentation et en dessous du câble USB SureTemp, jusqu'à l'ancrage de l'attache sur le côté supérieur droit du boîtier SureTemp.

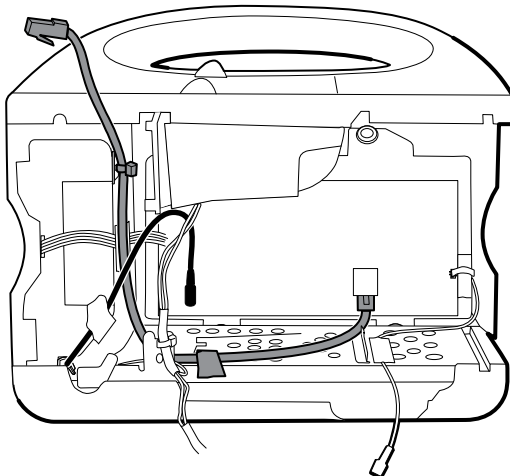

- Fixez le faisceau principal au support sur le boîtier inférieur. Positionnez le câble Ethernet derrière le support et fixez les deux avec une attache. Utilisez l'outil d'attache pour fixer l'attache.

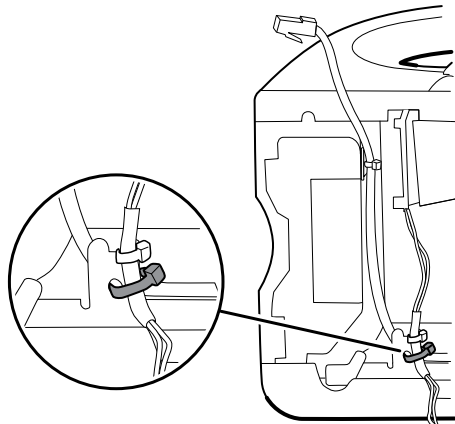

- Si l'attache de fixation du câble Ethernet à l'ancrage de l'attache sur le boîtier SureTemp a été retirée, utilisez une attache pour fixer le câble Ethernet à l'ancrage. Comme indiqué précédemment, acheminez le câble Ethernet au-dessus du câble flexible du bouton d'alimentation et en dessous du câble USB SureTemp jusqu'à l'ancrage de l'attache.

Remplacement du boîtier inférieur




REMARQUE Un centre de maintenance Welch Allyn doit remplacer le boîtier inférieur, ou le boîtier inférieur étendu, pour assurer un étiquetage approprié.

Retrait du haut-parleur

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
 - Boîtier arrière
 - Module CO2 ou façade d'obturation
 - Module EarlySense
 - Module SpO2 ou façade d'obturation
 - Module PNI
 - Boîtier inférieur
1. Retirez le châssis métallique pour accéder plus facilement au haut-parleur.
 2. Retirez le haut-parleur (26) du boîtier inférieur.

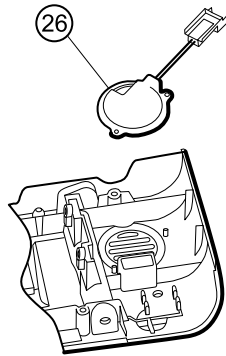

3. Retirez tout matériau d'étanchéité restant et nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique à 70 %.

Remplacement du haut-parleur

1. Retirez le papier pour exposer l'adhésif sur le joint.
2. Alignez les orifices du haut-parleur avec les broches du boîtier inférieur et sécurisez le haut-parleur.
3. Appliquez une pression sur le rayon extérieur du haut-parleur pour assurer une bonne adhésion au boîtier inférieur.

Retrait de la carte du connecteur de la batterie


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur

Retirez les deux vis Torx (10) qui fixent la carte du connecteur de la batterie (28) au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis Torx n° 10.


Retrait du boîtier supérieur

Boîtier supérieur

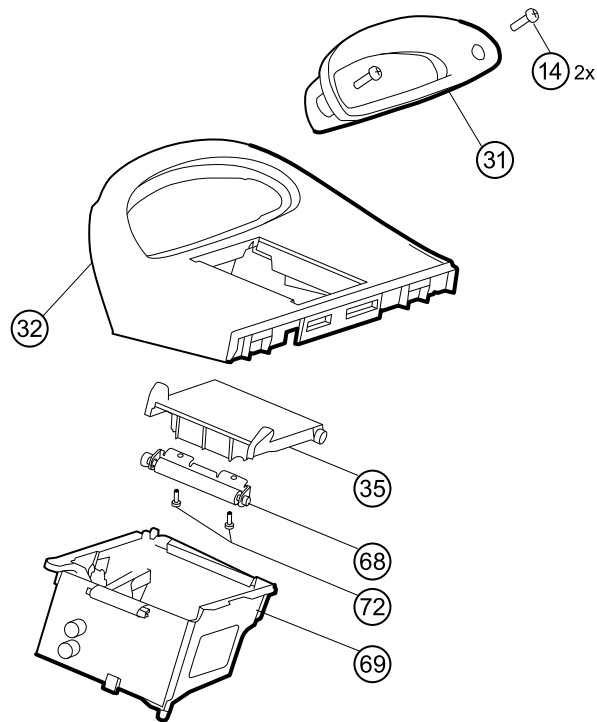

N°	Élément	N°	Élément
14	Vis, M4 x 10, tête cylindrique avec NYLOC	68	Rouleau d'alimentation papier
31	Insert de poignée	69	Boîtier de l'imprimante
32	Boîtier supérieur	72	Vis, M2,2 x 8, taraudeuse, PNH, TRX
35	Capot de l'imprimante	Non illustré	Cache du capot de l'imprimante

Extension du boîtier supérieur (châssis étendu uniquement)

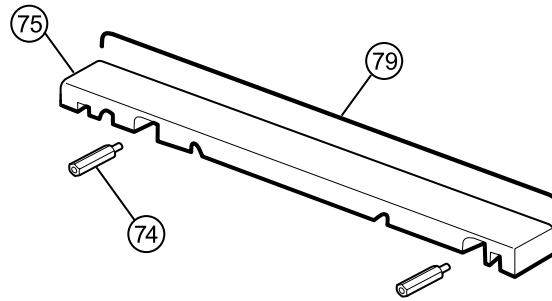

N°	Élément	N°	Élément
74	Entretoise M4	79	Joint du boîtier supérieur
75	Extension du boîtier supérieur		


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module Capteur EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur




REMARQUE Ne retirez pas le panneau latéral qui contient le bouton d'alimentation.


1. Si votre modèle comporte un châssis étendu, retirez l'extension du boîtier supérieur.
 - a. Utilisez une douille de 8 mm et un tournevis pour retirer les deux entretoises (74) qui maintiennent l'extension du boîtier supérieur (75).
 - b. Retirez l'extension du boîtier supérieur.

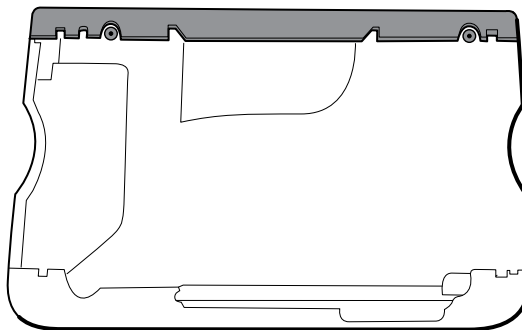

2. Sectionnez l'attache qui fixe le faisceau de la batterie intelligente au faisceau principal.

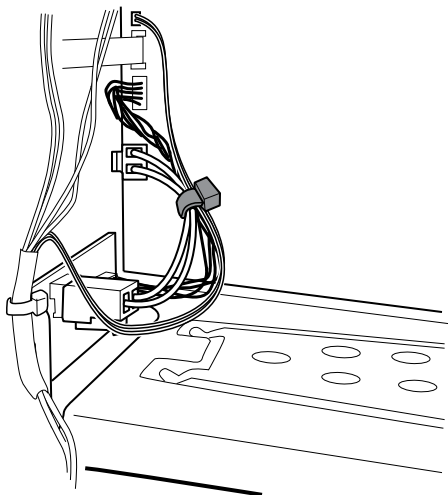

3. Déposez le faisceau principal sur l'appareil pour dégager les câbles USB.
4. Débranchez le connecteur d'alimentation sur le faisceau principal du J30 sur la carte mère.

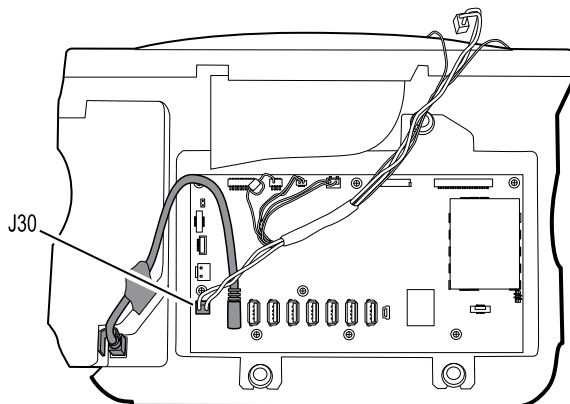


5. Pour les modèles dotés de l'option de température, débranchez le câble USB connecté au module de température du J1 sur la carte mère et dégagez le câble USB du séparateur de câbles.




REMARQUE Ne retirez pas le câble USB du module de température à moins de vouloir remplacer le module. Si vous débranchez le câble USB, le clip de retenue doit être remplacé dès le remontage.

6. Pour les modèles dotés d'une imprimante, décrochez le loquet en plastique pour débrancher le câble USB de l'imprimante.

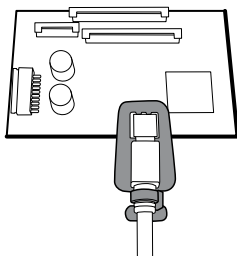

7. Débranchez les câbles USB de la carte mère.
8. Retirez les câbles USB et le séparateur de câbles.

9. Débranchez les éléments suivants avant de les retirer :

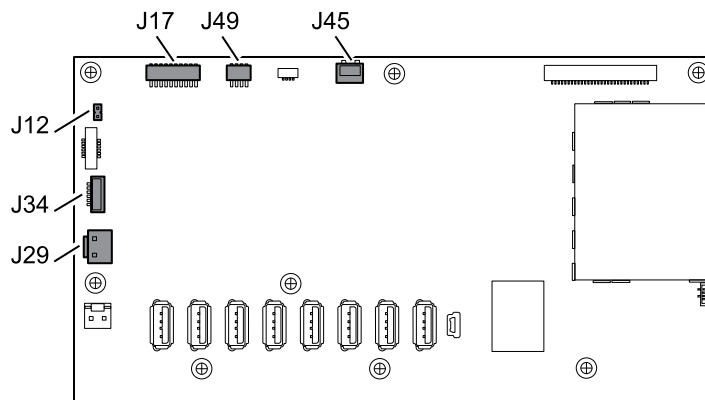


- a. Câble du ventilateur sur le faisceau principal du J45 sur la carte mère
- b. Câble de communication sur le faisceau principal du J49 sur la carte mère
- c. Faisceau d'alimentation de la batterie du J29 sur la carte mère
- d. Faisceau de la batterie intelligente du J34 sur la carte mère
- e. Faisceau de l'imprimante du J17 sur la carte mère
- f. Câble du haut-parleur sur le faisceau principal du J12 de la carte mère




REMARQUE Soyez extrêmement vigilant lorsque vous débranchez le J12 pour éviter toute chute du connecteur depuis la carte.


10. Retirez les deux vis (14) qui fixent l'insert de poignée et retirez l'insert.

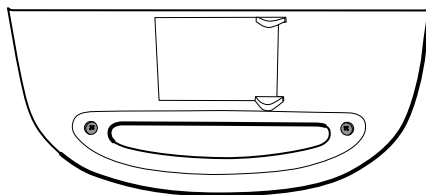

11. Retirez les quatre vis Torx qui fixent la poignée.

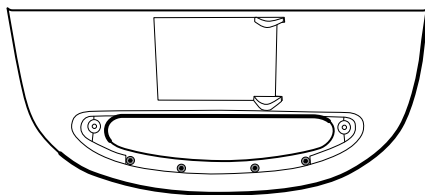

12. Retirez la bande Pro Gaff qui fixe le faisceau de l'imprimante (le cas échéant) et le faisceau de la barre des voyants au châssis LCD. Notez l'emplacement de la bande Pro Gaff pour la repositionner lors du remontage.

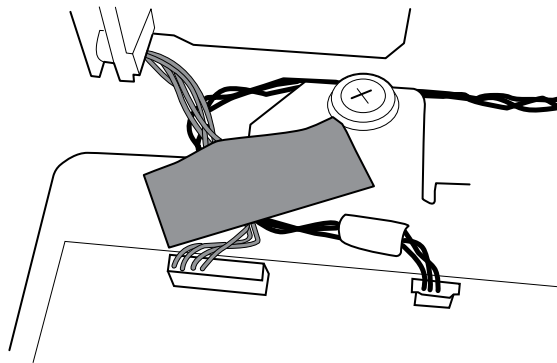

13. Retirez le boîtier supérieur.

Notes concernant le remontage

- Veillez à installer l'imprimante dans le boîtier supérieur. Consultez les notes concernant le remontage pour l'imprimante.
- Pour les appareils équipés d'une imprimante, positionnez le boîtier supérieur près du châssis principal, connectez le faisceau de l'imprimante, puis fixez le faisceau de la barre des voyants et le faisceau de l'imprimante sur le châssis LCD en utilisant environ 5 cm de bande Pro Gaff.
- Avant d'installer les câbles USB, installez ce qui suit :
 - Câble du ventilateur sur le faisceau principal au J45 sur la carte mère
 - Câble de communication sur le faisceau principal au J49 sur la carte mère, en positionnant la perle de ferrite près de la carte mère
 - Faisceau d'alimentation de la batterie au J29 sur la carte mère
 - Faisceau de la batterie intelligente au J34 sur la carte mère
 - Faisceau de l'imprimante au J17 sur la carte mère
 - Câble du haut-parleur sur le faisceau principal au J12 de la carte mère



REMARQUE Commencez par inspecter le J12 pour détecter toute broche pliée avant d'installer le câble du haut-parleur.

- Installez les câbles USB conformément aux instructions ci-dessous.

Emplacements du câble USB - séparateur de câble à 9 trous

- Placez les câbles USB dans le séparateur de câbles.



REMARQUE Si le câble USB n'a pas été retiré du module de température, laissez l'emplacement du J1 libre, comme illustré dans la figure ci-dessous, jusqu'à ce que le séparateur de câbles soit installé dans le boîtier et que d'autres câbles USB aient été connectés à la carte mère. Une fois que le séparateur de câbles est installé dans le boîtier, connectez le câble USB depuis le module de température au J1 sur la carte mère et installez le câble à l'emplacement du J1 dans le séparateur de câbles.




REMARQUE Le câble avec les connecteurs à angle droit aux deux extrémités est à l'emplacement du J14, comme illustré dans la figure ci-dessous.




REMARQUE Si l'option n'est pas incluse, laissez l'emplacement du séparateur vide.

- Positionnez chaque câble à environ 5 cm du séparateur.
- Lors du positionnement du séparateur dans l'appareil, placez les pieds dans les zones marquées de la carte MCE, comme illustré ci-dessous.

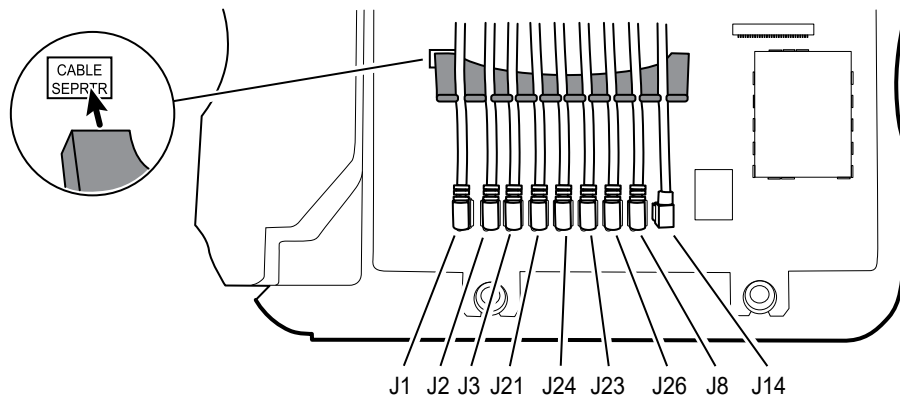


- Branchez les câbles USB sur la carte mère, comme suit :

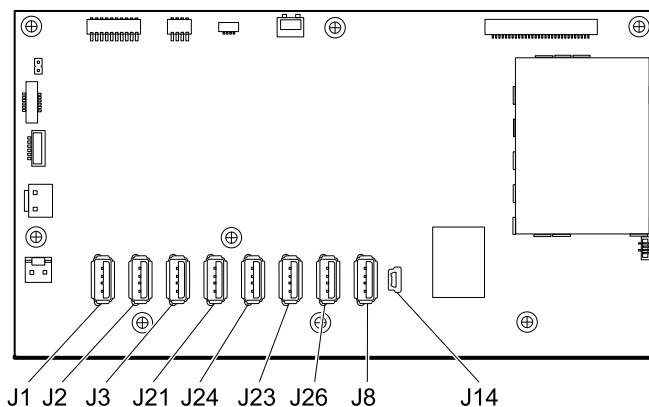


N°	Élément	N°	Élément
J1	Température	J23	SpO2
J2	Imprimante	J26	PNI
J3	EarlySense	J8	COMMS J4
J21	CO2	J14	COMMS J8
J24	CO2		

- Pour les modèles dotés d'un module de température, si vous avez débranché le câble USB du module de température lors du démontage, vous devez remplacer le clip de retenue. (Consultez la section « Remplacement du module de température » pour obtenir des instructions spécifiques.)
- Pour les modèles dotés d'une imprimante, branchez l'autre extrémité du câble USB à l'imprimante, tout en tirant sur le loquet en plastique pour l'éloigner du connecteur. Une fois que le connecteur est installé, poussez le loquet en plastique sur le connecteur pour le fixer.

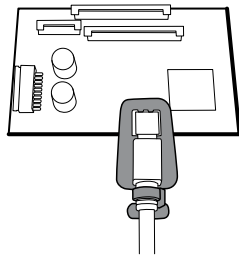

- Vérifiez que le câble Ethernet passe librement entre le boîtier de température et la carte de l'imprimante, et quitte le boîtier entre le haut du boîtier de température et sous le boîtier supérieur.
- Si le câble Ethernet a été retiré, réinstallez-le lors de la remise en place du boîtier inférieur.
- Lors de l'installation du boîtier supérieur sur le châssis, alignez les fentes du boîtier supérieur avec les extrémités des traverses horizontales sur le châssis pour assurer un bon positionnement.

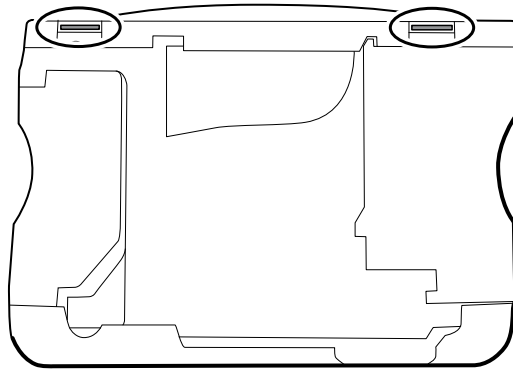

- Lors de l'installation de l'extension du boîtier supérieur (75), vérifiez que le joint du boîtier supérieur est en place. Utilisez une douille de 8 mm et un tournevis dynamométrique étalonné pour 13,8 kg-cm \pm 1,15 kg-cm afin de fixer les entretoises (74).

Remplacement du boîtier supérieur

Pour les modèles sans imprimante, installez le cache du capot de l'imprimante comme suit :


1. Retirez le papier protecteur du joint sur le cache du capot.
2. Installez le cache du capot dans le boîtier supérieur en appuyant dessus pour le fixer.

Retrait de l'imprimante

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur

1. Retirez les deux vis Torx qui fixent le boîtier de l'imprimante au boîtier supérieur.

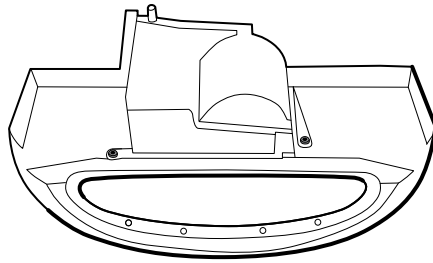

2. Retirez l'imprimante du boîtier supérieur :
 - a. Tenez le boîtier de l'imprimante lorsque vous ouvrez le capot de l'imprimante.
 - b. Éloignez l'imprimante et son capot du boîtier supérieur.


Notes concernant le remontage

1. Vérifiez que le fil de terre sort du côté opposé de la carte de l'imprimante dans la partie encochée.
2. Placez le capot de l'imprimante dans le boîtier supérieur et immobilisez-le tandis que vous exécutez l'étape suivante.
3. Installez l'imprimante dans le boîtier supérieur en faisant glisser les languettes dans les fentes.
4. Appuyez sur le capot pour le fermer et immobiliser l'imprimante, puis fixez-le au boîtier par deux vis.
5. Connectez le câble de terre de l'imprimante au boîtier inférieur. (Consultez les notes concernant le remontage du boîtier inférieur.)

Remplacement de l'imprimante ou ajout d'une imprimante

- Pour l'ajout d'une imprimante, retirez le cache du capot de l'imprimante. Retirez tout matériau d'étanchéité restant et nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique à 70 %.
1. Éloignez le capot du corps de l'imprimante.
 2. Suivez les notes concernant le remontage ci-dessus pour installer l'imprimante.
 3. Connectez le câble de terre de l'imprimante au boîtier inférieur. (Consultez les notes concernant le remontage du boîtier inférieur.)

Démontage du boîtier frontal

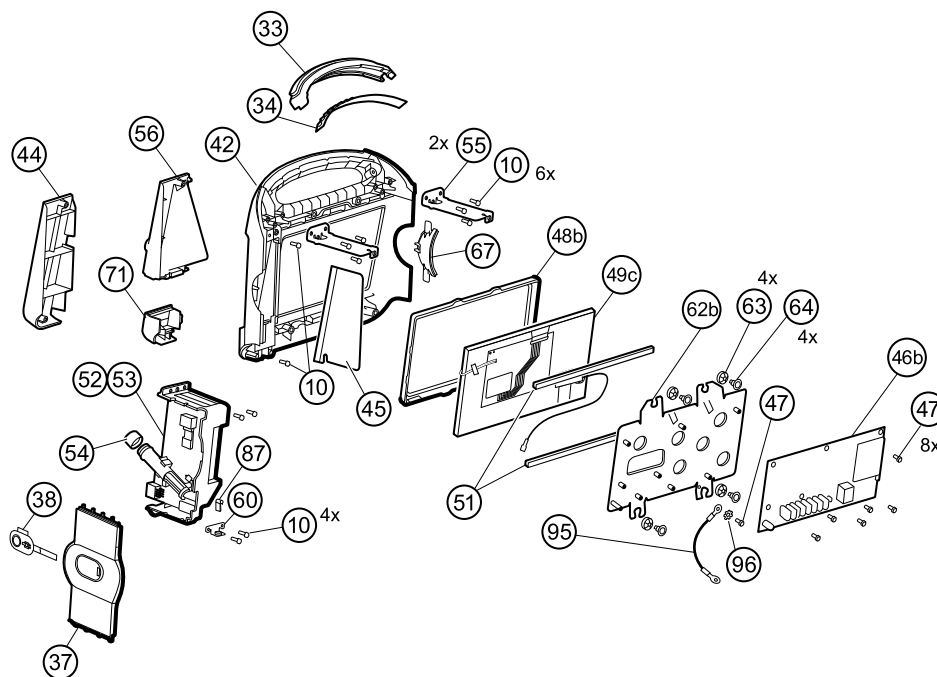

N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	52	Module de température
33	Barre des voyants	53	Boîtier du module de température
34	Carte de la barre des voyants	54	Joint du puits de sonde
37	Panneau latéral droit	55	Traverses horizontales
38	Bouton d'alimentation	56	Couvercle de fixation du module de température
42	Boîtier frontal	60	Bride de fixation du boîtier
44	Volet d'obturation du module de température	62b	Châssis LCD
45	Bouclier thermique	63	Passe-câble, à oreilles - G411-1
46b	Carte mère	64	Vis épaulée, à oreilles G-411-1 métrique


N°	Élément	N°	Élément
47	Vis, M3 x 5, tête cylindrique	67	Insert gauche
48b	Monture LCD	71	Couvercle d'accès à la connexion du module de température
49c	LCD avec écran tactile	95	Fil de terre du châssis LCD
51	Bande de mousse, haut et bas	96	Rondelle de blocage

Retrait de la barre des voyants


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur

1. Retirez les trois vis (10) qui fixent la traverse horizontale (située à droite lorsque vous êtes face à l'appareil par l'arrière) sur le boîtier frontal.

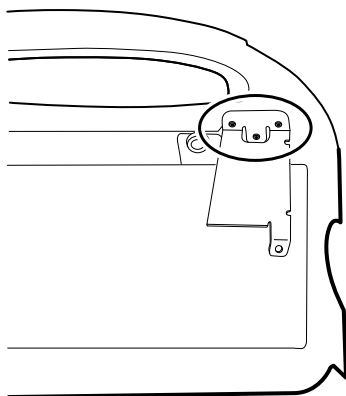

2. Retirez le support.
3. Retirez la bande qui fixe le faisceau de la barre des voyants au châssis LCD.

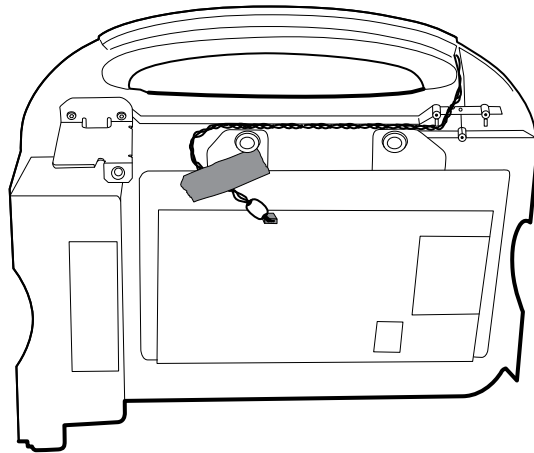

4. Débranchez le faisceau de la barre des voyants du J46 sur la carte mère.
5. Retirez la carte de la barre des voyants (34) et la barre des voyants (33) du boîtier frontal.
6. Retirez la carte de la barre des voyants de la barre.
7. Débranchez le faisceau de la barre des voyants de la carte de la barre des voyants.

Notes concernant le remontage

- Insérez la carte de la barre des voyants comme suit :
 1. Placez l'extrémité sans le connecteur dans l'extrémité fermée de la barre des voyants, avec les voyants orientés vers la barre.
 2. Veillez à glisser l'extrémité sans le connecteur de la carte de la barre des voyants à l'extrémité de la fente dans la barre.
- Utilisez l'extrémité la plus éloignée de la perle de ferrite pour brancher le faisceau de la barre des voyants sur la carte correspondante.
- Acheminez le faisceau de la barre des voyants comme suit :
 - Par la fente du boîtier frontal, sous la traverse horizontale.
 - Dans le canal et entre le haut du boîtier et les entretoises du châssis LCD.
- Fixez le faisceau de la barre des voyants avec une bande en vous assurant que la perle de ferrite se situe entre la carte mère et la bande.

Retrait du module ou du boîtier de température



REMARQUE Ces instructions s'appliquent également au retrait du boîtier de température pour les modèles sans l'option de température.



REMARQUE Ne débranchez pas le câble USB du module de température à moins de vouloir remplacer le module et/ou le câble USB. Débranchez le câble USB sur la carte mère lors du retrait du module.

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation

- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur




REMARQUE Vous pouvez retirer et remplacer le module de température sans débrancher le faisceau principal, les faisceaux de batterie, les câbles USB ou le faisceau de la barre des voyants sur la carte mère.


1. Retirez le puits de la sonde du module de température.




REMARQUE Débranchez le câble Ethernet de la carte MCE ou sectionnez l'attache qui fixe le câble Ethernet au boîtier SureTemp.

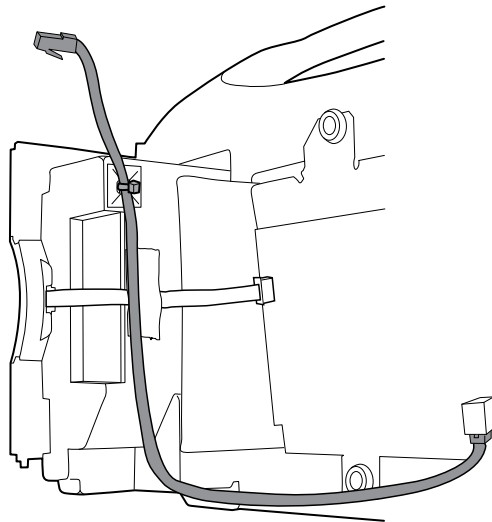

2. Débranchez le câble flexible du bouton d'alimentation du connecteur de verrouillage ZIF J6 sur la carte mère et retirez la bande de fixation.

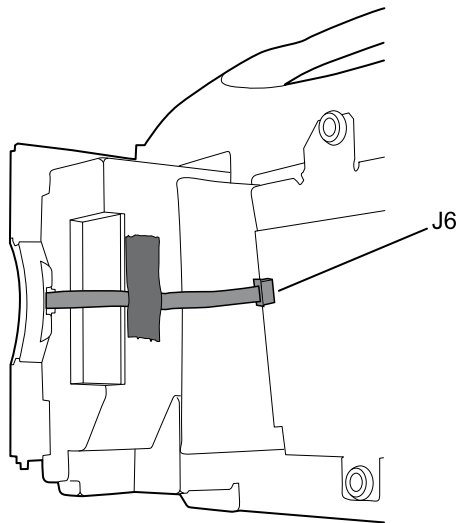

3. Retirez le panneau latéral droit (37).
4. Retirez les deux vis Torx (10) de la bride de fixation du boîtier (60).

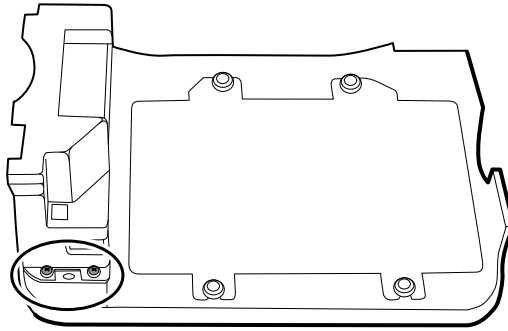


5. Retirez les deux vis Torx (10) qui fixent le haut du module de température ou du boîtier vide.
6. Retirez le module de température ou le boîtier vide.



REMARQUE Si vous remplacez uniquement le module de température sans remplacer le couvercle de fixation, arrêtez-vous ici. Installez le module de rechange dans l'ordre inverse du démontage.


7. Suivez les étapes suivantes qui s'appliquent à votre moniteur :
 - Si votre moniteur est équipé d'un module de température, retirez le couvercle de fixation :
 - a. Retirez la vis qui fixe le couvercle de fixation du module de température sur le boîtier frontal.

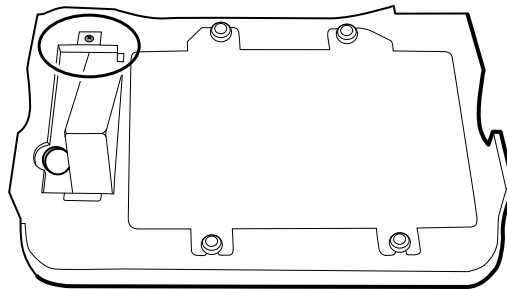

- b. Retirer le couvercle de fixation du module de température (56) du boîtier frontal.
- Si votre moniteur n'est pas équipé d'un module de température, retirez le volet d'obturation du module de température :
 - a. Retirez les deux vis qui fixent le volet d'obturation sur le boîtier frontal.
 - b. Retirez le volet d'obturation (44).

Notes concernant le remontage

- Avant d'installer le module de température sur le boîtier frontal, assurez-vous que le joint du puits de sonde est installé avec la languette le long de la fente ou de l'encoche dans le boîtier à puits de la sonde.

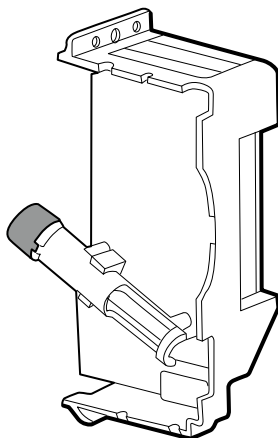


- Acheminez le câble flexible du bouton d'alimentation vers le module de température et au-dessus, puis branchez-le sur le connecteur de verrouillage ZIF J6 dans la carte mère.


Remplacement ou ajout d'un module de température

Suivez ces instructions pour remplacer les modules de température et les installer dans l'appareil pour la première fois.


1. Préparez le boîtier du module de température : fixez le support de l'attache de câble (113P463) avec un carré en mousse de 2 cm (78P567) sur le boîtier SureTemp, dans le coin supérieur comme illustré ci-dessous.

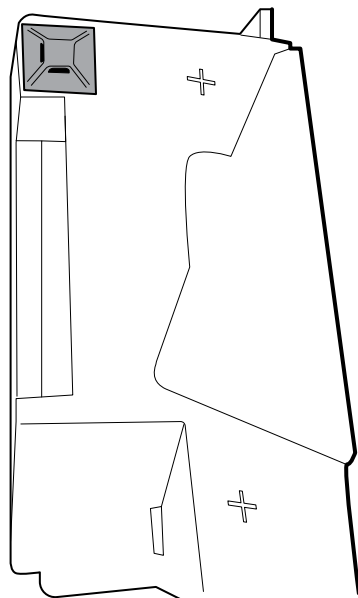

2. Connectez le câble USB au module de température.
3. Positionnez le clip de retenue sur le câble USB contre l'épaule du connecteur mini B, avec le coussin adhésif orienté à l'opposé du module de température et orienté vers le bas.
4. Retirez la protection sur le clip de retenue pour exposer l'adhésif.
5. Faites tourner le clip sur le câble USB pour fixer le clip au boîtier du module de température.

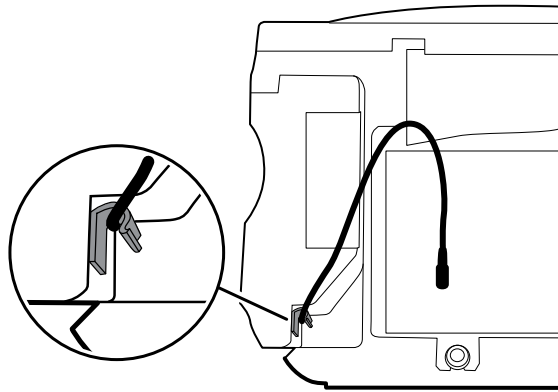


6. Fixez le câble USB avec un morceau de bande, comme illustré ci-dessous.

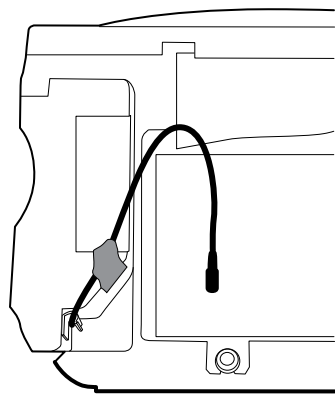

Ajout d'un module de température

Outre l'exécution des étapes décrites dans la section précédente, suivez ces instructions pour installer un module de température dans l'appareil pour la première fois.

1. Suivez les instructions relatives au retrait du boîtier de température, de la carte mère et du LCD.
2. Remplacez le volet d'obturation du module de température (44) par le couvercle de fixation correspondant (56).
3. Installez le bouclier thermique (45) sur le boîtier frontal en alignant l'encoche du bouclier avec le boîtier.

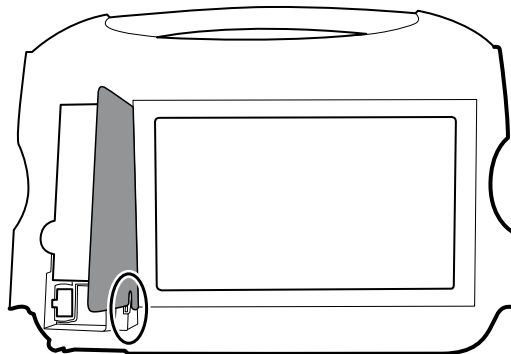

4. Réinstallez le LCD dans l'ordre inverse du démontage.
5. Réinstallez la carte mère dans l'ordre inverse du démontage.
6. Installez le joint du puits sur la sonde, comme décrit dans les notes concernant le remontage pour le module de température.

7. Insérez le module de température dans le boîtier frontal en alignant le puits de la sonde avec l'orifice d'accès dans le boîtier frontal.
8. Fixez le haut du module de température sur le boîtier frontal avec deux vis fournies avec le kit.
9. Placez la bride de fixation du boîtier en bas du module de température et fixez-la à l'aide des deux vis.
10. Connectez le câble USB au module, comme décrit dans les instructions relatives au remplacement du module de température.


Retrait de la carte mère



REMARQUE Si vous remplacez cette carte, vous devez disposer de l'outil d'entretien, édition sous licence Gold, pour saisir à nouveau les numéros de série du moniteur et de la carte mère.



REMARQUE Si vous remplacez l'écran, vous devez aussi remplacer la monture, le LCD avec écran tactile et les bandes de mousse par les pièces de rechange comprises dans le kit d'entretien 106825. La monture et les bandes de mousse sont adaptées à l'écran.

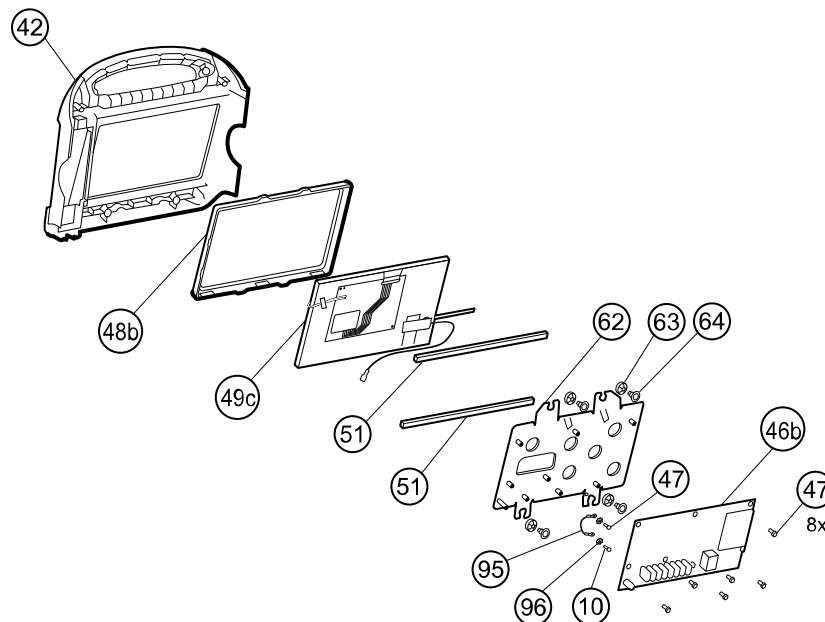

N°	Élément	N°	Élément
10	Vis, plastite n° 4-20 x 0,500, tête cylindrique Torx	51	Bandes de mousse, haut et bas
42	Boîtier frontal	62b	Châssis LCD
46b	Carte mère	63	Passe-câble, à oreilles - G411-1
47	Vis, M3 x 5, tête cylindrique	64	Vis épaulée, à oreilles G-411-1 métrique
48b	Monture LCD	95	Fil de terre

N°	Élément	N°	Élément
49c	LCD avec écran tactile	96	Rondelle de blocage

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur




REMARQUE Vous n'êtes pas obligé de retirer le module de température ou la barre des voyants pour retirer la carte mère ou le LCD.


1. Débranchez les pièces suivantes sur la carte mère :
 - a. Câble flexible du bouton d'alimentation du connecteur de verrouillage ZIF J6
 - b. Faisceau de la barre des voyants du J46
 - c. Faisceau LCD du J19
 - d. Câble flexible LCD du J48




MISE EN GARDE Le joint de soudure du connecteur LCD (J48) est fragile. Lorsque vous insérez ou retirez le câble flexible, n'exercez aucune pression sur le joint de soudure.

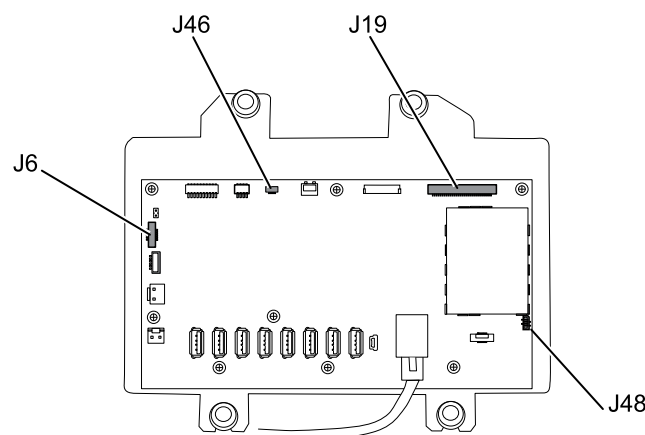

2. Débranchez le câble Ethernet du connecteur Ethernet (J11) sur la carte mère et retirez-le.

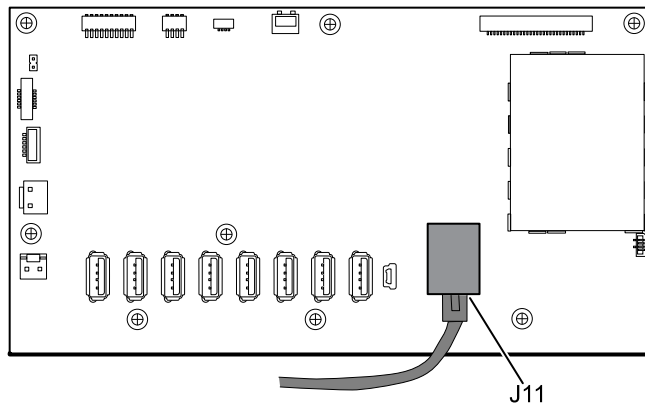

3. Retirez les huit vis qui fixent la carte mère au châssis LCD.

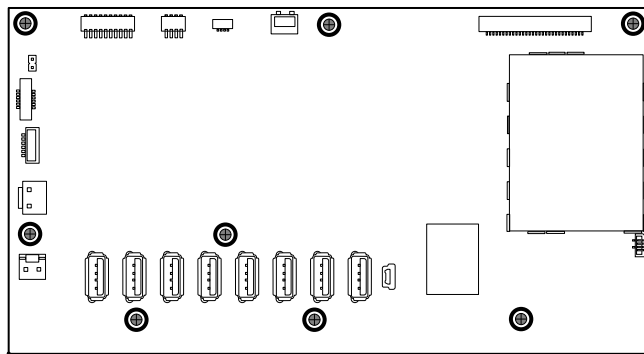

4. Retirez la carte mère.

Notes concernant le remontage

- Veillez à ce que le câble flexible LCD ne se trouve pas sous la carte mère.



MISE EN GARDE Le joint de soudure du connecteur LCD (J48) est fragile. Lorsque vous insérez ou retirez le câble flexible, n'exercez aucune pression sur le joint de soudure.

- Retirez le châssis LCD, comme décrit dans la section « Retrait du LCD ». Une fois le châssis LCD retiré, installez environ 7,5 cm de bande Pro Gaff (M11580) pour recouvrir le fond des deux entretoises, comme illustré (consultez la section « Remplacement du châssis LCD »). Aucune partie des grandes ouvertures ne doit être couverte. Remplacez sur le châssis LCD toute bande Pro Gaff qui affiche des signes d'usure ou qui a été retirée lors du remontage.
- Réinstallez le câble Ethernet (consultez les notes concernant le remontage pour le boîtier inférieur).
- Si la barre des voyants n'est pas installée, installez le faisceau de la barre des voyants dans le boîtier en positionnant la perle de ferrite près de la carte mère.

Remplacement de la carte mère

- Utilisez le kit d'entretien 1068939 sur les appareils conformes à la norme CEI 60601 3e édition.
- Lors de la commande d'une carte mère de rechange, commandez l'édition sous licence standard pour le modèle en cours de maintenance. Vous recevrez un code d'autorisation à entrer dans l'outil d'entretien afin de réactiver les licences faisant partie de la configuration d'origine.

- Après le remontage du moniteur, utilisez l'outil d'entretien pour préparer le moniteur comme suit :
 - Entrez le numéro de série du moniteur. Ce numéro figure en bas du moniteur.
 - Restaurez toutes les fonctions sous licence en entrant le code d'autorisation dans l'outil d'entretien. Utilisez les codes d'autorisation figurant dans la carte de rechange, ainsi que les autres codes d'autorisation sous licence déjà installés. Enregistrez le numéro de série de l'appareil figurant sur les cartes du code d'autorisation sous licence, reçues avec la carte de rechange, et conservez-le à des fins ultérieures. Si la licence est perdue, réutilisez le code d'autorisation sur le même appareil.
 - Mettez à jour le logiciel du contrôleur hôte vers la version actuelle. Si la version actuelle du logiciel hôte n'est pas disponible après la connexion de l'appareil à l'outil d'entretien, contactez l'assistance technique Welch Allyn.

Retrait du LCD


Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur
- Carte mère



REMARQUE Vous n'êtes pas obligé de retirer le module de température ou la barre des voyants pour retirer la carte mère ou le LCD.

1. Débranchez le faisceau LCD du LCD. Pour faciliter l'accès au connecteur, vous pouvez faire glisser la perle de ferrite la plus proche du connecteur vers le faisceau.

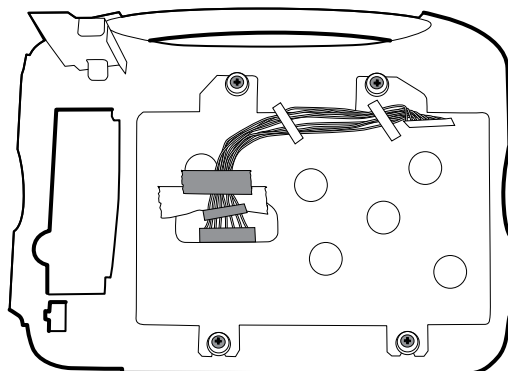

2. Retirez les quatre vis épaulées qui fixent le châssis LCD.
3. Retirez le châssis LCD.



REMARQUE Veillez à soutenir le LCD lorsque vous le retirez de son châssis. Le LCD risque de coller au châssis à cause de ses bandes de mousse.


4. Retirez le LCD.

Notes concernant le remontage




MISE EN GARDE Le joint de soudure du connecteur LCD (J48) est fragile. Lorsque vous insérez ou retirez le câble flexible, n'exercez aucune pression sur le joint de soudure.

- Vérifiez que le câble flexible LCD traverse le dégagement de la monture. Insérez le LCD dans la monture du boîtier frontal avec le câble flexible LCD dans le coin inférieur droit.

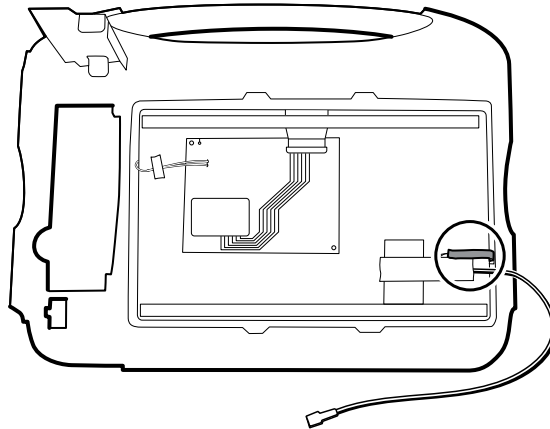

- Positionnez le câble de terre de l'écran juste en dessous du câble flexible LCD.
- Placez le châssis LCD sur le LCD. Vérifiez que le châssis LCD ne recouvre pas le câble flexible LCD.

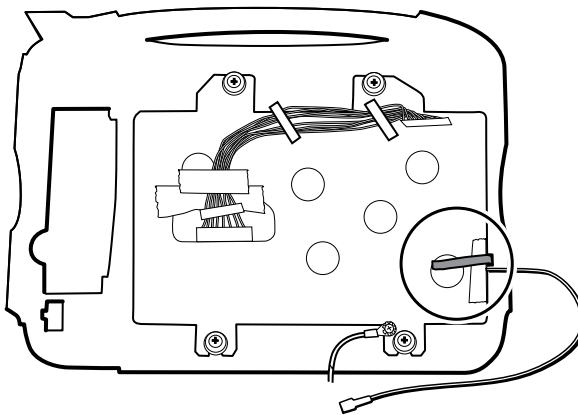


Remplacement du châssis LCD

- Installez le châssis LCD avec des vis et des rondelles épaulées.
- Installez 7,5 cm de bande Pro Gaff sur le haut de l'encoche du faisceau pour protéger le faisceau LCD contre l'abrasion.
- Installez le faisceau LCD. En cas de retrait, utilisez de l'alcool isopropylique pour nettoyer la zone sur les parties découpées, où vous installerez les perles de ferrite du faisceau. Exposez la protection collante sur les perles de ferrite et montez-les dans les rectangles découpés.




REMARQUE Si les perles de ferrite ne sont pas positionnées dans les zones indiquées, elles gêneront les autres composants, comme la carte MCE.

- Collez un morceau de bande en haut du faisceau LCD pour le fixer sur le châssis.
- Installez environ 3,17 cm de bande Pro Gaff (M11580) à l'avant du châssis LCD près du câble flexible LCD.

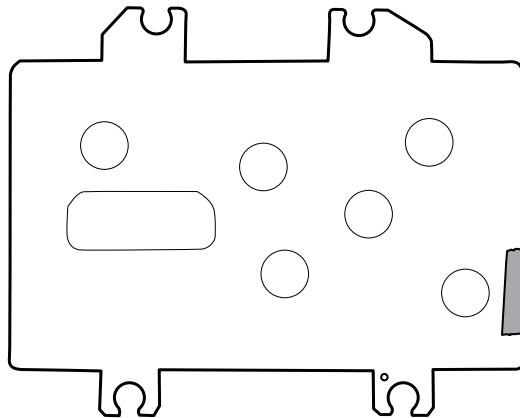


- Fixez le fil de terre sur le châssis LCD.
- Retirez le câble de terre de l'ancien châssis et installez-le sur le nouveau.

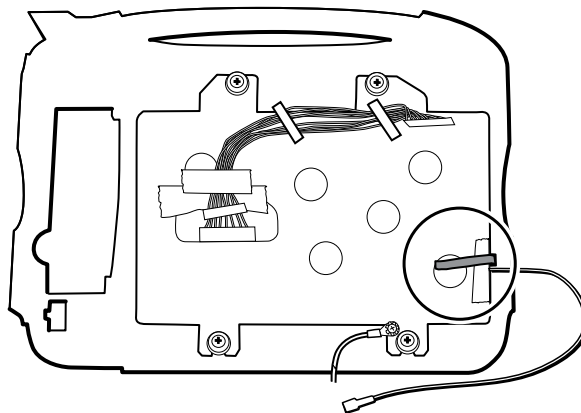


Remplacement du LCD

- Retirez la feuille de protection du LCD.
- Vérifiez que les bandes de mousse sont installées à l'arrière du LCD près des bords supérieur et inférieur.

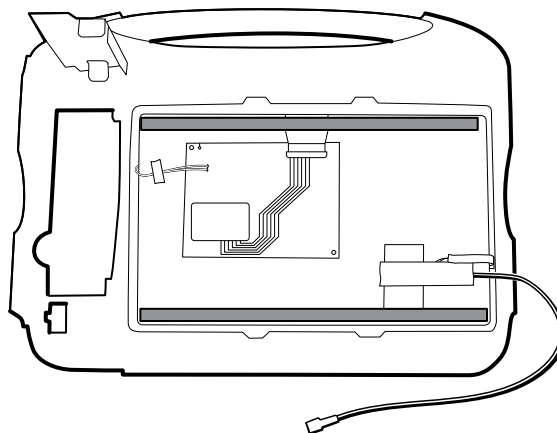

- Vérifiez que le câble de terre LCD est positionné juste en dessous du câble flexible LCD.

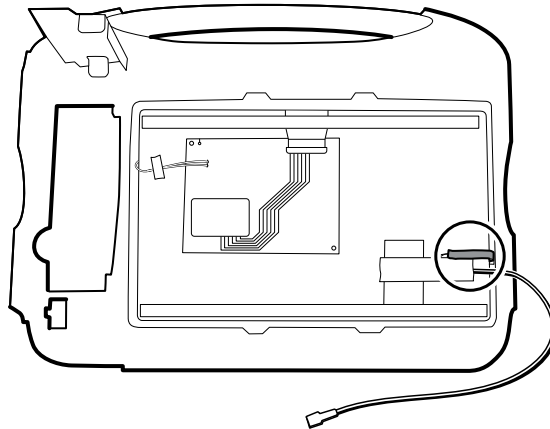

- Vérifiez que le câble flexible LCD traverse le dégagement de la monture.
- Ajoutez une bande de ruban adhésif de 3 cm sur le bord du châssis LCD, où débouchent le câble flexible LCD et le câble de terre.
- Insérez le LCD dans la monture du boîtier frontal avec le câble flexible LCD dans le coin inférieur droit, comme illustré ci-dessous.
- Ajoutez une bande de ruban adhésif de 3 cm sur le bord du châssis LCD traversé par le faisceau pour une connexion au LCD afin d'empêcher l'abrasion du faisceau LCD.
- Lorsqu'une perle de ferrite est ajoutée, alignez-la avec les repères sur le châssis LCD.
- Ajoutez la bande pour fixer le faisceau au châssis LCD traversé par le faisceau.

Retrait du boîtier frontal

Avant de commencer, retirez les éléments suivants comme décrit dans ce manuel :

- Batterie
- Boîtier arrière
- Module CO2 ou façade d'obturation
- Module EarlySense
- Module SpO2 ou façade d'obturation
- Module PNI
- Boîtier inférieur
- Boîtier supérieur
- Barre des voyants
- Module de température et couvercle de fixation
- Carte mère
- LCD

Pour terminer le démontage, retirez le support restant du boîtier frontal.

Remplacement du boîtier frontal

Remplacez le bouclier thermique (45) pour les modèles dotés de l'option de température.

Vérification fonctionnelle et étalonnage

Tests de vérification fonctionnelle

Les tests de vérification fonctionnelle permettent de confirmer le bon fonctionnement de l'appareil et de ses options. Les tests sont utiles par ailleurs comme outil de diagnostic pour identifier un dysfonctionnement. Il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil pour effectuer ces tests.

Pour l'entretien périodique, vous pouvez au moins effectuer les tests de vérification fonctionnelle de base, comme décrit dans ce manuel. Ces tests sont destinés aux clients dotés de l'édition sans licence standard de l'outil d'entretien Welch Allyn. Si vous disposez de l'édition sous licence Gold de l'outil d'entretien, utilisez-la pour effectuer une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil plutôt que de réaliser les tests de base.



REMARQUE Pour documenter les tests de vérification fonctionnelle de base, imprimez les « fiches d'entretien » figurant à la fin de ce manuel et enregistrez les résultats correspondants.

À chaque ouverture du boîtier, vous devez utiliser l'outil d'entretien, édition sous licence Gold, pour effectuer une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil avant de renvoyer l'appareil à des fins de maintenance.



REMARQUE Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'édition sous licence Gold, consultez les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien.

Utilisez l'outil d'entretien Welch Allyn.

L'outil d'entretien est requis pour procéder aux tests de vérification fonctionnelle et d'étalonnage. L'outil d'entretien est disponible dans les éditions suivantes :

- **Édition sans licence standard** : permet d'activer les tests de vérification fonctionnelle de la PNI pour réaliser l'entretien annuel recommandé. Si des tests de l'édition sans licence standard affichent un résultat hors spécifications, utilisez l'édition sous licence Gold pour effectuer un étalonnage complet.
- **Édition sous licence Gold** : permet de vérifier la fonctionnalité et l'étalonnage de l'appareil. Lors de la vérification de l'appareil, l'édition sous licence Gold effectue également tout étalonnage requis pour satisfaire les spécifications de l'appareil. Cet ensemble complet de tests est nécessaire pour effectuer une réparation. À chaque ouverture du boîtier, vous devez utiliser l'édition sous licence Gold pour tester l'appareil avant de le réutiliser comme d'habitude.

Pour plus d'informations sur l'outil d'entretien, consultez ce qui suit :

- Pour obtenir des instructions sur l'installation et l'utilisation de l'outil d'entretien, consultez le *Guide d'installation et de configuration du Welch Allyn Service Tool*.

- Pour utiliser l'édition sans licence standard et tester le module PNI, suivez les instructions de ce manuel d'entretien.
- Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'édition sous licence Gold, consultez les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien.

Tests avec l'outil d'entretien, édition sans licence standard

L'outil d'entretien effectue les fonctions suivantes sur l'appareil hôte et les options installées.

Test	Description	PNI	Temp. p.	SpO2	SpHb	FR	CO2	Capteur	
								Hôte	EarlySense
Lecture du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mise à niveau du micrologiciel	Charge le dernier micrologiciel dans le module	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Test de fuite	Vérifie les fuites avec un volume de 100 cm ³	✓							
Test de précision (PNI)	Vérifie l'exactitude des transducteurs sur toute la gamme de pressions	✓							
Test de surpression	Vérifie la pression maximale du brassard pour les adultes et les nouveau-nés	✓							

Test	Description	PNI	Temp.	SpO2	SpHb	Hôte
Lecture du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel	✓	✓	✓	✓	✓
Mise à niveau du micrologiciel	Charge le dernier micrologiciel dans le module	✓	✓	✓	✓	✓
Test de fuite	Vérifie les fuites avec un volume de 100 cm ³	✓				
Test de précision (PNI)	Vérifie l'exactitude des transducteurs sur toute la gamme de pressions	✓				
Test de surpression	Vérifie la pression maximale du brassard pour les adultes et les nouveau-nés	✓				

Tests avec l'outil d'entretien, édition sous licence Gold

L'outil d'entretien teste l'appareil hôte et les options installées, comme indiqué dans le tableau suivant.

Test	Description	PNI	Temp.	SpO2	SpHb	FR	CO2	Hôte	Capteur
									EarlySense
POST	Effectue l'autotest de mise sous tension (POST) ¹	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Version du micrologiciel	Vérifie la version du micrologiciel	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Mise à niveau du micrologiciel	Charge le dernier micrologiciel dans le module	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Fuite	Vérifie les fuites avec un volume de 100 cm ³	✓							
Bruit AD	Vérifie le bruit sur le canal de pression	✓							
Étalonnage	Étalonne les transducteurs de pression	✓							
Précision (PNI)	Vérifie l'exactitude des transducteurs sur toute la gamme de pressions	✓							
Décharge	Vérifie les vannes de décharge	✓							
Gonflage	Vérifie la pompe pneumatique	✓							
Contrôle de la vanne	Vérifie le contrôle des vannes	✓							
Surpression	Vérifie les limites de la pompe	✓							
Détection de la sonde	Vérifie le fonctionnement du commutateur de détection de la sonde ²		✓						
Précision (Temp.)	Vérifie la précision du thermomètre sur la plage définie		✓						
Vérification fonctionnelle	Vérifie le fonctionnement du module avec la clé d'étalonnage ²		✓						

Test	Description	PNI	Temp.	Capteur				
				SpO2	SpHb	FR	CO2	Hôte EarlySense
Vérification fonctionnelle de MasimoSpO2 et SpHb	Vérifie le fonctionnement du module avec le testeur Rainbow SET			✓	✓			
Calibrage	Étalonne le capteur de CO2						✓	
Imprimante	Imprime le dossier patient de l'échantillon et le motif du test							✓
Écran	Vérifie la sortie vidéo							✓
Interface avec rétroéclairage	Vérifie le rétroéclairage de l'écran							✓
Interface tactile	Vérifie l'étalonnage de l'écran tactile							✓
Voyant	Vérifie les faisceaux ambrés et rouges de la barre des voyants							✓
Interface du ventilateur	Vérifie le fonctionnement du ventilateur							✓
Avertisseur	Vérifie l'avertisseur sonore							✓
Relais de l'appel infirmier	Vérifie le relais de l'appel infirmier							✓
Fonctionnement sur batterie	Vérifie la batterie interne							✓
Haut-parleur	Vérifie le haut-parleur							✓
Communication du port hôte USB	Vérifie les ports USB							✓
Communication Ethernet	Vérifie le port Ethernet							✓

¹ Le test POST vérifie les éléments suivants :

- **PNI** : ROM, RAM, canaux A/D, étalonnage et configuration par l'utilisateur.
- **Température** : ROM, RAM, étalonnage et dispositif de chauffage.
- **Capteur EarlySense** : ROM et RAM, connexion à la carte EarlySense.

- **SpO2** : ROM et RAM, connexion à la carte SpO2.
- **CO2** : RAM, Flash, ADC, validation du biais, EEPROM, flux, optique.
- **Imprimante** : ROM et RAM, connexion à l'imprimante.

² SureTemp Plus uniquement.

³ Mode normal.

Test	Description	PNI	Temp.	SpO2	SpHb	Hôte
POST	Effectue l'autotest de mise sous tension (POST) ¹	✓	✓	✓		✓
Version du micrologiciel	Vérifie la version du micrologiciel	✓	✓	✓		✓
Mise à niveau du micrologiciel	Charge le dernier micrologiciel dans le module	✓	✓	✓		✓
Fuite	Vérifie les fuites avec un volume de 100 cm ³	✓				
Bruit AD	Vérifie le bruit sur le canal de pression	✓				
Étalonnage	Étalonne les transducteurs de pression	✓				
Précision (PNI)	Vérifie l'exactitude des transducteurs sur toute la gamme de pressions	✓				
Décharge	Vérifie les vannes de décharge	✓				
Gonflage	Vérifie la pompe pneumatique	✓				
Contrôle de la vanne	Vérifie le contrôle des vannes	✓				
Surpression	Vérifie les limites de la pompe	✓				
Détection de la sonde	Vérifie le fonctionnement du commutateur de détection de la sonde ²		✓			
Précision (Temp.)	Vérifie la précision du thermomètre sur la plage définie		✓			
Vérification fonctionnelle	Vérifie le fonctionnement du module avec la clé d'étalonnage ²		✓			
Vérification fonctionnelle de MasimoSpO2 et SpHb	Vérifie le fonctionnement du module avec le testeur Rainbow SET			✓	✓	
Écran	Vérifie la sortie vidéo					✓

Test	Description	PNI	Temp.	SpO2	SpHb	Hôte
Interface avec rétroéclairage	Vérifie le rétroéclairage de l'écran					✓
Interface tactile	Vérifie l'étalonnage de l'écran tactile					✓
Voyant	Vérifie les faisceaux ambrés et rouges de la barre des voyants					✓
Interface du ventilateur	Vérifie le fonctionnement du ventilateur					✓
Avertisseur	Vérifie l'avertisseur sonore					✓
Relais de l'appel infirmier	Vérifie le relais de l'appel infirmier					✓
Fonctionnement sur batterie	Vérifie la batterie interne					✓
Haut-parleur	Vérifie le haut-parleur					✓
Communication du port hôte USB	Vérifie les ports USB					✓
Communication Ethernet	Vérifie le port Ethernet					✓

¹ Le test POST vérifie les éléments suivants :

- **PNI** : ROM, RAM, canaux A/D, étalonnage et configuration par l'utilisateur.
- **Température** : ROM, RAM, étalonnage et dispositif de chauffage.
- **SpO2** : ROM et RAM, connexion à la carte SpO2.

² SureTemp Plus uniquement.

³ Mode normal.

Vérifications fonctionnelles de base



REMARQUE L'étalonnage est disponible uniquement avec l'outil d'entretien, édition sous licence Gold.

Le test de vérification fonctionnelle de base est réalisé à l'aide de l'outil d'entretien Welch Allyn (édition standard) et répond aux exigences minimales pour la maintenance préventive de routine. Ce test vérifie la fonctionnalité de base de la PNI, SpO2, SpHb, FR, CO2 et de la thermométrie. Welch Allyn recommande l'utilisation de l'outil d'entretien, édition sous licence Gold, pour vérifier l'appareil en cas de réparation.

Le test de vérification fonctionnelle de base est réalisé à l'aide de l'outil d'entretien Welch Allyn (édition standard) et répond aux exigences minimales pour la maintenance préventive de routine. Ce test vérifie la fonctionnalité de base de la PNI, SpO2, SpHb et de la thermométrie. Welch Allyn

recommande l'utilisation de l'outil d'entretien, édition sous licence Gold, pour vérifier l'appareil en cas de réparation.

Outils de vérification fonctionnelle de base

La liste suivante recense tous les outils requis pour effectuer le test fonctionnel de base.

Référence du matériel	Description	Qté	Composant
407672	Dispositif de remise en état du volume de test BP 113670	1	PNI
N/A	Simulateur de SpO2	1	Masimo et Nellcor SpO2
DOC-10	Câble, extension SpO2, Nellcor	1	Nellcor SpO2
06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1	Module de thermométrie SureTemp Plus
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	Sonde pour thermomètre auriculaire Braun et thermomètre SureTemp
411690	Dispositif d'étalonnage PRO 6000* *À utiliser avec des modèles plus anciens dotés d'une vis cache-poussière au-dessus de la rondelle du joint torique. Les modèles plus récents disposent d'une vis cache-poussière encastrée dans la rondelle.	3	Thermomètre auriculaire Braun
N/A	Manomètre (au moins deux décimales et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	1	PNI
4500-925	Câble mini USB type B 2,0/5 broches, doré, 1,8 m	1	PNI, mises à jour logicielles
6000-30	Tuyau du tensiomètre 1 tube, 1,5 m	1	PNI
N/A	PC exécutant l'outil d'entretien Welch Allyn sur Windows 10	1	TOUS
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/	1	PNI, mises à jour logicielles et étalonnage
N/A	Tube en Y du tensiomètre	1	PNI
4500-30	Tuyau du tensiomètre, 1,5 m	1	PNI
620216	Raccord « Y » 1/8 x 1/8 x 1/8	1	PNI

Référence du matériel	Description	Qté	Composant
N/A	Simulateur de patient ECG étalonné selon les normes ISO/CEI avec des amplitudes définies pour la dérivation I, la dérivation II, la dérivation III et la dérivation IV en cas d'utilisation d'un câble patient 5 dérivations -OU- simulateur de patient ECG avec amplitudes définies pour la dérivation I, la dérivation II et la dérivation III en cas d'utilisation d'un câble patient 3 dérivations.	1	ECG


Outils de vérification fonctionnelle complète et d'étalonnage

Les outils répertoriés ci-dessous sont requis pour une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil. Les outils sont associés à l'outil d'entretien Welch Allyn, édition sous licence Gold, pour étalonner un appareil.

Référence du matériel	Description	Qté	Composant
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	Sonde pour thermomètre auriculaire Braun et thermomètre SureTemp
407672	Dispositif de remise en état du volume de test BP 113670	1	PNI
411690	Dispositif d'étalonnage PRO 6000* *À utiliser avec des modèles plus anciens dotés d'une vis cache-poussière au-dessus de la rondelle du joint torique. Les modèles plus récents disposent d'une vis cache-poussière encastrée dans la rondelle.	3	Thermomètre auriculaire Braun
N/A	Simulateur de SpO2	1	Masimo et Nellcor SpO2
LNCS-DC1	Câble de SpO2 et capteur doigt	1	Masimo SpO2
DS-100A	Capteur doigt SpO2	1	Nellcor SpO2
DOC-10	Câble, extension de câble SpO2, Nellcor	1	Nellcor SpO2
06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1	Module de thermométrie SureTemp
N/A	Manomètre (au moins deux décimales et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	1	PNI
4500-925	Câble mini USB type B 2,0/5 broches, doré, 1,8 m	1	PNI

Référence du matériel	Description	Qté	Composant
106270	Boîte test de service	1	Appel infirmier, ports USB
660-0138-00	Cordon de raccordement, 1,5 m, RJ45, T568B	1	Test Ethernet
407022	Assemblage, câble d'appel infirmier MMF - service	1	Appel infirmier (boîte test de service requise)
N/A	Câble USB de type A/B (0,9 m)	1	Ports USB (boîte test de service requise)
6000-30	Tuyau du tensiomètre 1 tube, 1,5 m	1	PNI
N/A	Routeur sans fil, a/b/g ou équivalent	1	Test avec et sans fil
N/A	PC fonctionnant sous Windows 10	1	Tous
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn (version 1.8 ou ultérieure) Cliquez sur ce lien	1	PNI, mises à jour logicielles
N/A	Tube en Y du tensiomètre	1	PNI
4500-30	Tuyau du tensiomètre, 1,5 m	1	PNI
620216	Raccord « Y » 1/8 x 1/8 x 1/8	1	PNI

Formation d'un tube en Y du tensiomètre

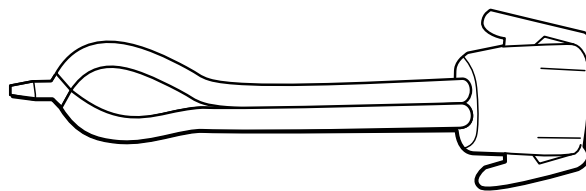


Le tube en Y du tensiomètre est un appareil de contrôle personnalisé qui connecte l'appareil à l'installation test. Le tube en Y est composé d'un tuyau du tensiomètre modifié et d'un raccord de type Y. Suivez les instructions suivantes pour former un tube en Y.

1. Coupez un tuyau du tensiomètre 4500-30 à environ 15 cm du connecteur branché sur l'appareil.
2. Séparez l'extrémité du tuyau à double lumière pour former deux tuyaux distincts. Veillez à ne percer aucun des deux tuyaux.
3. Insérez une extrémité du raccord en Y dans chaque extrémité du tuyau.

Configuration de test de la PNI

Pour procéder au test de fuite, au test de surpression ou à la vérification de la précision de la PNI, branchez l'appareil de contrôle comme illustré ci-dessous. Branchez le collecteur au dispositif de remise en état du volume, comme indiqué par l'outil d'entretien ou la procédure de test.

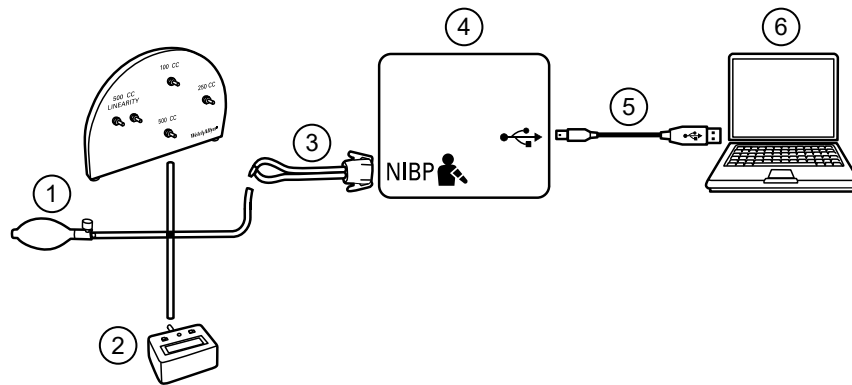

N°	Élément	N°	Élément
1	Dispositif de remise en état du volume avec le collecteur, la poire et la vanne test	4	Appareil
2	Manomètre	5	Câble USB 2,0/5 broches type A vers mini B
3	Tube en Y du tensiomètre	6	Ordinateur

Test de fuite de la PNI (édition sans licence standard)

Le test de fuite de la PNI est automatique en utilisant l'outil d'entretien. Le test de fuite soumet le système à une pression de début (P_s) de 250 mmHg \pm 10 mmHg. La pression de fin (P_e) est mesurée au bout de 15 secondes (T_t). Le débit de fuite est calculé à l'aide de la formule $L = (P_s - P_e) / T_t$. Le test échoue si le débit de fuite est supérieur à 5 mmHg en 15 secondes.

Test de fuite de la PNI

1. Configurez l'appareil de contrôle.
2. Lancez l'outil d'entretien sur l'ordinateur.
3. Si l'interface simplifiée est activée, choisissez l'option Service (Entretien).
4. Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe, ou avec admin comme ID utilisateur et en laissant le champ du mot de passe vide.
5. Mettez l'appareil sous tension.
6. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste disponible.
7. Cliquez sur **NIBP Sensor** (Capteur de la PNI) dans l'onglet Device Information (Informations sur l'appareil).
8. Cliquez sur **Leak Test** (Test de fuite) dans le volet NIBP Sensor (Capteur de la PNI) à droite de la fenêtre.

9. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin du test.
10. Cliquez sur **Fermer**.
11. Pour afficher les résultats, ouvrez le fichier journal actif en sélectionnant **Fichier > View Log File > Active log file > Ok** (Fichier > Afficher le fichier journal > Fichier journal actif > OK).
12. Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

Test de surpression de la PNI (édition sans licence standard)

Le test de surpression de la PNI est automatique en utilisant l'outil d'entretien. Le test de surpression veille à ce que le système de la PNI empêche la pression de dépasser 329 mmHg en mode Adulte et 164 mmHg en mode Nouveau-né. Pour réussir ce test, l'appareil doit arrêter la pompe et ouvrir les vannes lorsque la pression se trouve entre 280 mmHg et 329 mmHg en mode Adulte, ou entre 130 mmHg et 164 mmHg en mode Nouveau-né.

Test de surpression de la PNI



REMARQUE Si vous effectuez ce test après le test de fuite de la PNI, passez à l'étape 7.

1. Configurez l'appareil de contrôle.
2. Lancez l'outil d'entretien sur l'ordinateur.
3. Si l'interface simplifiée est activée, choisissez l'option Service (Entretien).
4. Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe, ou avec admin comme ID utilisateur et en laissant le champ du mot de passe vide.
5. Mettez l'appareil sous tension.
6. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste disponible.
7. Cliquez sur **NIBP Sensor** (Capteur de la PNI) sous l'onglet **Device Information** (Informations sur l'appareil).
8. Dans le volet NIBP Sensor (Capteur de la PNI) à droite de la fenêtre, cliquez sur **Over Pressure Test** (Test de surpression).
9. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin du test.
10. Cliquez sur **Fermer**.
11. Pour afficher les résultats, ouvrez le fichier journal actif en sélectionnant **Fichier > View Log File > Active log file > Ok** (Fichier > Afficher le fichier journal > Fichier journal actif > OK).
12. Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

Vérification de la précision de la PNI (édition sans licence standard)

La vérification de la précision de la PNI est manuelle à l'aide de l'outil d'entretien pour contrôler les vannes. La vérification de la précision compare d'une part le relevé de la pression du transducteur principal, comme indiqué dans la fenêtre de l'outil d'entretien, et d'autre part le relevé d'un manomètre numérique étalonné externe. Les résultats de ce contrôle ne sont pas enregistrés dans le fichier journal de l'outil d'entretien. Pour enregistrer ces résultats, copiez le tableau dans la section d'entretien du manuel correspondant. Si un étalonnage est requis, exécutez l'étalonnage de la PNI inclus avec l'édition sous licence Gold de l'outil d'entretien.



AVERTISSEMENT Risque pour la sécurité du patient. En cas d'échec du transducteur principal, le système risque de ne pas identifier une surpression selon les limites autorisées, ce qui peut entraîner des blessures lorsque l'appareil est reconnecté au patient. Pour assurer la sécurité du patient, Welch Allyn recommande qu'un technicien de service qualifié effectue une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage une fois par an.



MISE EN GARDE Une erreur d'étalonnage des équipements peut se produire. Cette vérification de précision contrôle uniquement la précision du transducteur principal. Si le transducteur de sécurité est mal étalonné, une erreur d'étalonnage peut se produire compte tenu de l'écart de pression entre le transducteur principal et le transducteur de sécurité. Pour éviter de telles erreurs d'étalonnage des équipements, Welch Allyn recommande qu'un technicien de service qualifié effectue une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage une fois par an.

Vérification de la précision de la PNI



REMARQUE Si vous effectuez ce test après une vérification de la PNI précédente, passez à l'étape 7.

1. Configurez l'appareil de contrôle.
2. Lancez l'outil d'entretien sur l'ordinateur.
3. Si l'interface simplifiée est activée, choisissez l'option Service (Entretien).
4. Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe, ou avec admin comme ID utilisateur et en laissant le champ du mot de passe vide.
5. Mettez l'appareil sous tension.
6. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste disponible.
7. Cliquez sur **NIBP Sensor** (Capteur de la PNI) sous l'onglet **Device Information** (Informations sur l'appareil).
8. Cliquez sur **Accuracy Check** (Vérification de la précision) dans le volet NIBP Sensor (Capteur de la PNI) à droite de l'écran.
9. Utilisez le volume 500 cm³.
10. Allumez le manomètre et mettez le compteur à zéro, le cas échéant.
11. Vérifiez la précision à 0 mmHg.
12. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.
13. À l'aide du ballon, mettez le système de la PNI sous pression à 50 mmHg \pm 5 mmHg et patientez 10 secondes pour que la pression se stabilise.
14. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.
15. À l'aide du ballon, mettez le système de la PNI sous pression à 150 mmHg \pm 5 mmHg et patientez 10 secondes pour que la pression se stabilise.
16. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.
17. À l'aide du ballon, mettez le système de la PNI sous pression à 250 mmHg \pm 5 mmHg et patientez 10 secondes pour que la pression se stabilise.
18. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.
19. Cliquez sur **Open valve** (Ouvrir la vanne) pour ouvrir les vannes de la PNI. Vérifiez que la pression sur l'appareil de mesure et l'outil d'entretien est réinitialisée sur zéro.
20. Cliquez sur **Terminé** pour terminer la vérification.
21. Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

Tests de SpO₂, SpHb et RRa

Cette procédure permet de tester les fonctions de SpO₂, SpHb et FR de l'appareil.

Test MasimoSpO₂ et SpHb

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur l'onglet **Settings** (Paramètres).
3. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil).
4. Sélectionnez la commande **Intervals Monitoring** (Monitoring par intervalles).
5. Appuyez sur l'onglet **Home**.
6. Connectez le simulateur de SpO₂ à l'appareil.
7. Vérifiez les éléments suivants sur le simulateur :
 - La fréquence de pouls par défaut est de 61 bpm, tandis que la SpO₂ par défaut est de 81 %.
8. Patientez 30 secondes maximum pour que l'appareil se stabilise, puis vérifiez la fréquence de pouls de 61 bpm \pm 1 bpm et la SpO₂ de 81 % \pm 3 % à l'écran.
9. Si l'option SpHb est activée, vérifiez que le paramètre s'affiche avec une mesure de 14 g/dl \pm 1 g/dl.

Test Masimo RRa

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur l'onglet **Settings** (Paramètres).
3. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil).
4. Sélectionnez la commande **Continuous Monitoring** (Monitoring continu).
5. Appuyez sur l'onglet **Home** (Accueil).
6. Branchez l'outil de simulation Masimo RRa sur l'appareil.
7. Vérifiez que les mesures apparaissent dans le volet de FR. L'outil offre des données de tendances pendant 30 minutes, de sorte que les valeurs changent.
8. Appuyez sur le sélecteur de moyenne dans le volet de FR pour vérifier que vous pouvez basculer d'une option à l'autre : à l'arrêt, lent, moyen, rapide et tendances.

Test NellcorSpO₂

Cette procédure permet de tester uniquement la fonction SpO₂ de l'appareil.

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Branchez le simulateur de SpO₂ au connecteur d'entrée de SpO₂ avec un câble d'extension NellcorDOC-10.



REMARQUE Dans les tests suivants, si les valeurs par défaut sont en dehors des limites d'alarmes de l'appareil, redéfinissez ces limites ou désactivez les alarmes.

3. Vérifiez les éléments suivants sur le simulateur :
 - La fréquence de pouls par défaut est de 60 bpm, tandis que la SpO₂ par défaut est de 90 %.
4. Patientez 30 secondes maximum pour que l'appareil se stabilise, puis vérifiez la fréquence de pouls de 60 bpm \pm 1 bpm et la SpO₂ de 90 % \pm 1 à l'écran.

5. Débranchez le simulateur de SpO2.

Test EarlySense



REMARQUE Le test suivant permet de vérifier que les données peuvent être transmises à l'appareil depuis le capteur. L'appareil procède à un autotest lors de sa mise sous tension. Si des vignettes s'affichent sur l'appareil, le module fonctionne.

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur l'onglet **Settings** (Paramètres).
3. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil).
4. Sélectionnez la commande **Continuous Monitoring** (Monitoring continu).
5. Appuyez sur l'onglet **Home** (Accueil).
6. Connectez le Capteur EarlySense à l'appareil, puis patientez environ 40 secondes pour que le volet des mouvements s'affiche.
7. Vérifiez que le graphique sur la sensibilité de sortie du lit est allumé et actif.

Test du système de température SureTemp

Le système de température SureTemp est testé à l'aide d'une clé d'étalonnage (clé CAL). La clé d'étalonnage teste le système à l'aide d'une résistance fixe pour afficher une température de $36,3 \pm 0,1$ °C ($97,3 \pm 0,2$ °F).

Test du système de température SureTemp

1. Lorsque le système est sous tension et que la sonde de température se trouve dans le puits, débranchez le câble de la sonde du connecteur d'entrée de température à l'avant de l'appareil.
2. Branchez la clé d'étalonnage au connecteur d'entrée de température.
3. Retirez la sonde du puits.
4. Vérifiez que la température affichée est de $36,3 \pm 0,1$ °C ($97,3 \pm 0,2$ °F)

Test de la sonde de température SureTemp et du système

Cette procédure permet de tester la fonction de température lors du contrôle de la sonde de température. Pour obtenir des résultats précis, vous devez effectuer ce test en paramétrant l'appareil sur le mode Direct.

Testez chaque sonde aux points de consigne faibles, moyens et élevés sur le testeur. Répétez la procédure pour chaque thermomètre et température à tester.

Configuration du testeur d'étalonnage 9600 Plus

Placez le testeur sur une surface plane hors des rayons directs du soleil, des courants d'air et d'autres sources de chaleur ou de froid.

Le testeur prend environ 20 minutes pour se réchauffer au plus faible point de consigne.

Pour accélérer le test, Welch Allyn recommande les pratiques suivantes :

- Pour ne plus attendre le réchauffement du testeur jusqu'au prochain point de consigne, utilisez trois testeurs, chacun d'entre eux étant défini sur l'un des trois points de consigne.


- Lorsque vous utilisez un seul testeur pour vérifier plusieurs thermomètres aux trois températures, testez tous les thermomètres à un point de consigne défini avant de passer au point de consigne suivant.
- Pour ne plus attendre le refroidissement du testeur, commencez au point de consigne le plus faible. Étant donné que le testeur est dépourvu d'un ventilateur interne, son réchauffement sera plus rapide que son refroidissement.

Modification du point de consigne 9600 Plus

Pour passer d'un point de consigne à l'autre, appuyez sur le bouton de sélection de température et laissez-le enfoncé jusqu'au bip sonore.

Le nouveau point de consigne apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. La température actuelle de l'appareil apparaît, clignote et continue à clignoter tant que la cavité n'est pas équilibrée au nouveau point de consigne. 9600 Plus émet un bip sonore lorsque le point de consigne est atteint.

Test de la sonde de température SureTemp et du système

1. Définissez le 9600 Plus sur le point de consigne souhaité et attendez que l'écran cesse de clignoter.
2. Insérez la sonde de température, sans l'embout, dans le port de thermistance sur le testeur.
3. Lorsque  apparaît à l'écran, appuyez dessus pour passer en mode Direct.
4. Patientez deux minutes maximum pour que la mesure de la température se stabilise.
5. Enregistrez les résultats dans la fiche d'entretien de température.
6. Reposez la sonde de température dans son puits, sur l'appareil.
7. Répétez la procédure autant de fois que nécessaire pour tester tous les thermomètres à chaque température.

Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

Tests des thermomètres Braun ThermoScan PRO

Explique comment effectuer une vérification fonctionnelle du thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000 à l'aide du testeur 9600 Plus Calibration Tester.



REMARQUE Utilisez cette procédure à la place du test de vérification et d'étalonnage pour le Braun PRO 6000 dans la version 1.0.2.0 de l'outil Welch Allyn Service Tool et les versions antérieures.



MISE EN GARDE Avant le test, placez les thermomètres et le testeur d'étalonnage dans la même pièce pendant environ 30 minutes pour qu'ils s'adaptent à la température ambiante.



MISE EN GARDE Faites concorder les échelles de température sur le testeur 9600 Plus avec l'échelle de température par défaut du thermomètre Braun ThermoScan PRO.



MISE EN GARDE Installez le testeur 9600 Plus hors des rayons directs du soleil, des courants d'air et d'autres sources de chaleur ou de froid. Les variations auront un impact sur le contrôle de l'étalonnage.



MISE EN GARDE La température ambiante doit être stable et se situer entre 18,3 °C (65,0 °F) et 26,7 °C (80,0 °F).

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *mode d'emploi du testeur d'étalonnage 9600 Plus de Welch Allyn*.

Test de vérification fonctionnelle Braun ThermoScan PRO 6000

1. Procédez aux étapes suivantes de vérification préalable :
 - a. Vérifiez l'extrémité de la sonde avec une loupe pour savoir si la lentille a été déplacée. Si vous observez un espace dans le joint entre la monture et la lentille, la lentille a effectivement été déplacée. Si vous observez un espace, l'appareil est endommagé et doit être remplacé.
 - b. Essuyez délicatement l'extrémité de la sonde avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique ou éthylique à 70 % tout en prenant soin de ne pas déplacer la lentille. Retirez l'excès d'alcool avec un coton-tige propre et laissez sécher à l'air pendant 5 minutes. N'utilisez pas de produits chimiques autres que l'alcool pour nettoyer la sonde.
 - c. Assurez-vous que le thermomètre est complètement chargé.
2. Définissez le thermomètre en mode d'étalonnage :
 - a. Lorsque le thermomètre est en mode veille, appuyez sur le bouton **C/F** et relâchez-le.
 - b. Appuyez immédiatement sur les boutons **C/F** et **Mem** (Mémoire) et maintenez-les enfoncés (tandis que tous les segments du LCD s'allument pendant l'autotest).
Patientez 5 secondes ; le thermomètre émet un long bip sonore.
 - c. Au cours de ce bip sonore, relâchez les boutons **Mem** (Mémoire) et **C/F**.
Le thermomètre est désormais en mode de vérification de l'étalonnage. (Le voyant d'étalonnage « CAL » clignote à l'écran pendant 0,25 seconde, chaque seconde.)
3. Reposez le thermomètre sur la base-support ou sur une surface plane. Patientez une minute avant de prendre la première température.



REMARQUE Si vous tenez le thermomètre d'une main, la température risque d'augmenter. Posez le thermomètre en patientant afin que le thermomètre reste à température ambiante.

4. Appliquez un nouvel embout de la sonde.
Lorsque l'embout de la sonde a été appliqué convenablement, l'icône clignotante correspondante disparaît de l'écran et un bref bip sonore retentit.
5. Attendez que l'écran clignote trois tirets (---) en alternance avec le symbole d'étalonnage (« CAL »).
6. Placez la sonde fermement dans le port du dispositif auriculaire ou dans le dispositif d'essai Braun 6000. Appuyez fermement sur l'appareil pour le descendre dans le puits perpendiculairement. La sonde doit être entièrement installée dans le port de l'appareil. Vérifiez visuellement le thermomètre et le dispositif auriculaire ; leur alignement doit être parfait.



REMARQUE Lorsque vous utilisez le dispositif d'essai Braun 6000, suivez les instructions annexes pour positionner le PRO 6000 dans le dispositif d'essai.



REMARQUE Si vous n'utilisez pas le dispositif d'essai Braun 6000, assurez-vous que l'appareil est perpendiculaire au port, qu'il est aligné directement sur le capteur du testeur d'étalonnage, sans aucune inclinaison.



REMARQUE Une fois que l'appareil est parfaitement en place, n'appliquez plus aucune pression. Vous risqueriez de vaciller et d'incliner ou de déplacer l'appareil pendant les tests.

7. Patientez 5 secondes, appuyez sur le bouton de mesure du thermomètre, et observez le voyant vert ExacTemp clignoter.
8. Laissez le thermomètre dans le testeur d'étalonnage 9600 Plus jusqu'à ce que le voyant ExacTemp cesse de clignoter et qu'un bip sonore retentisse.
9. Retirez le thermomètre Braun PRO 6000 du testeur d'étalonnage 9600 Plus et comparez la température affichée sur le testeur avec celle du thermomètre.
Si les températures se situent dans une plage de $\pm 0,2$ °C, le thermomètre est correctement étalonné.
10. Remplacez l'embout de la sonde à réinitialiser, et attendez que l'écran clignote trois tirets (---) en alternance avec le symbole d'étalonnage (« CAL »).



REMARQUE Remplacez l'embout de la sonde avant chaque mesure pour supprimer toute chaleur résiduelle absorbée depuis le testeur d'étalonnage 9600 Plus.

11. Reposez le thermomètre sur la base-support ou sur une surface plane. Patientez une minute avant de prendre une autre mesure avec le même thermomètre.



REMARQUE Les mesures répétées à courts intervalles risquent de causer des mesures supérieures.



REMARQUE Si vous tenez le thermomètre d'une main, la température risque d'augmenter. Posez le thermomètre en patientant afin que le thermomètre reste à température ambiante.

12. Vérifiez l'étalonnage de tous les thermomètres disponibles par rapport à la température de consigne actuelle avant de passer à la température suivante.
13. Consultez le mode d'emploi du testeur d'étalonnage 9600 Plus pour modifier la température de consigne.



REMARQUE L'appareil quitte le mode d'étalonnage au bout de 10 minutes, ou vous pouvez l'y forcer en appuyant simultanément sur les deux boutons **C/F** et **Mem** (Mémoire) pendant 5 secondes. Après avoir quitté le mode de vérification de l'étalonnage, le thermomètre repasse en mode veille.

Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

Étalonnage du CO2 ou vérification de l'étalonnage

Les paramètres avancés d'etCO2 vous permettent de vérifier l'étalonnage du capteur de CO2 et d'étalonner le capteur à échéance. La commande **Check calibration** (Vérifier l'étalonnage) vous permet de vérifier si le module est étalonné lors de la vérification de l'étalonnage. La commande **Calibrate** (Étalonner) démarre le processus d'étalonnage.

Une vérification de l'étalonnage peut être trompeuse, surtout si la date d'échéance du prochain étalonnage est proche. Un capteur, qui est étalonné aujourd'hui, risque de ne pas rester étalonné


au cours des 4 000 heures d'utilisation à venir. Vérifiez l'étalonnage aux intervalles recommandés ici pour garantir son exactitude. Étalonnez d'abord le capteur de CO₂ après 1 200 heures d'utilisation, puis une fois par an ou après 4 000 heures d'utilisation, selon la première éventualité. L'étalonnage initial ne doit pas être réalisé avant 720 heures d'utilisation, à moins qu'une vérification d'étalonnage révèle que le capteur n'est plus étalonné convenablement.



REMARQUE Si l'étalonnage initial est réalisé avant 720 heures d'utilisation, le module est réinitialisé pour imposer le prochain étalonnage après seulement 1 200 heures, au lieu de 4 000 heures.

Le kit d'étalonnage fournit un mélange gazeux approprié (5 % de CO₂, 21 % d'O₂, équilibre N₂) avec une précision de 0,03 % de volume. Le nébuliseur de gaz a un orifice étalonné pour autoriser un débit de gaz à environ 1 litre par minute. Il s'agit du débit requis pour réaliser l'étalonnage.

Avant de commencer, vérifiez l'exactitude de l'heure et de la date pour calculer la date d'échéance du prochain étalonnage. Connectez ensuite le kit d'étalonnage du CO₂ à l'appareil, comme illustré dans ce diagramme :

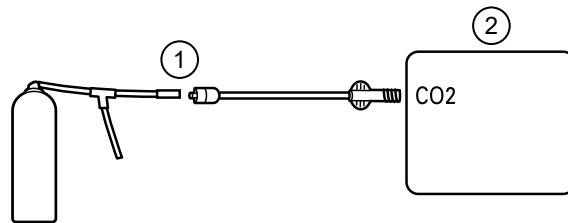

N°	Élément	N°	Élément
1	Kit d'étalonnage du CO ₂	2	Appareil

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
3. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
4. Entrez le code configuré des paramètres avancés et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**.
6. Appuyez sur l'onglet **etCO₂**.
7. Défilez jusqu'au bas de l'écran et appuyez sur **Check calibration** (Vérifier l'étalonnage) ou **Calibrate** (Étalonner).
8. Précisez la concentration de CO₂ étalonnée au dixième de pourcentage près.
9. Ouvrez l'alimentation en gaz et appuyez sur **Start** (Démarrer).
10. Lorsqu'un message du système vous y invite, fermez l'alimentation en gaz.

Si l'étalonnage ou la vérification de l'étalonnage réussit :

- Appuyez sur **OK** pour terminer le processus d'étalonnage.
- Débranchez la ligne d'étalonnage sur l'appareil.
- Mettez au rebut ou stockez le récipient de gaz sous pression étalonné conformément aux réglementations locales en vigueur.

Si l'étalonnage ou la vérification de l'étalonnage échoue :

- Vérifiez que la concentration de CO₂ testée est correcte conformément au certificat d'analyse fourni par le fournisseur.
- Vérifiez l'absence d'occlusions ou de fuites dans la ligne d'échantillonnage.
- Vérifiez que la ligne d'échantillonnage est solidement fixée au connecteur d'entrée.
- Vérifiez que le filtre n'est pas bloqué.
- Relancez la procédure de vérification de l'étalonnage ou d'étalonnage.

Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

Test fonctionnel ECG

Le module ECG ne nécessite pas d'étalonnage ou d'entretien de routine, à l'exception du nettoyage. Ce test fonctionnel est indispensable pour vérifier si le module ECG fonctionne correctement après l'ouverture du boîtier Connex ou si vous soupçonnez un problème.

Équipement nécessaire

- Appareil Connex avec version logicielle 2.30.01 ou ultérieure
- Module ECG des appareils Welch Allyn Connex
- Câbles AHA ou CEI à 5 dérivations
- Chronomètre
- Simulateur de patient AccuSim Clinical Dynamics ou équivalent.

Exigences du simulateur d'ECG :

- Prise en charge des sorties pour les dérivations RA, LA, LL, RL et V avec l'utilisation d'un câble patient à 5 dérivations
- Génération d'une fréquence cardiaque comprise entre 20 et 300, inclusivement
- Génération d'une amplitude ECG comprise entre 0,5 mV et 5,0 mV, inclusivement
- Génération d'une largeur ECG comprise entre 40 ms et 120 ms, inclusivement
- Génère des rythmes irréguliers (asystolie, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire)

Critères d'acceptation généraux

- Fréquence cardiaque : +/- 3 battements par minute ou +/- 3 %, selon la plus élevée des deux valeurs.
- Fréquence respiratoire : +/- 2 respirations par minute ou +/- 2 %, selon la plus élevée des deux valeurs.
- L'alarme d'asystolie se déclenche en 4 secondes ou plus

Configuration du test

Configurez le simulateur ECG

1. Rythme sinusal normal (NSR)
 - a. Fréquence cardiaque 80 battements par minute
 - b. Amplitude 1,00 mV
 - c. Mode continu (simulateurs AccuSim)
2. Respiration
 - a. Fréquence 15 respirations par minute
 - b. ΔR : 1,5 ohm

- c. Impédance de base 250 ohms
- d. Apnée : désactivée

Appareil Connex et module ECG

1. Débranchez tous les capteurs de l'appareil si celui-ci est connecté.
2. Branchez l'appareil Connex sur l'alimentation C.A. et allumez-le.
3. Restaurez les paramètres d'usine par défaut de l'appareil Connex et redémarrez-le.
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Entrez **6345** ou le mot de passe personnalisé pour l'appareil.



REMARQUE La restauration des paramètres d'usine ne réinitialise pas le mot de passe.

- d. Appuyez sur l'onglet **Service** (Entretien).
 - e. Dans le volet Restore factory defaults (Restaurer les valeurs d'usine par défaut), appuyez sur **All settings** (Tous les paramètres).
 - f. Appuyez sur **OK** pour confirmer la modification et redémarrez l'appareil.
4. Si les paramètres avancés ne s'ouvrent pas sur l'appareil après son redémarrage, répétez les sous-étapes 3a. à 3c.
5. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil) et ajustez les paramètres de la manière suivante :
 - a. Définissez la fréquence de la ligne électrique en fonction de votre fréquence d'alimentation C.A. (50 Hz ou 60 Hz).
 - b. Définissez le profil par défaut sur Continuous Monitoring (Monitoring continu).
6. Appuyez sur l'onglet **Paramètres**, puis sur l'onglet vertical **ECG**.
7. Configurez les paramètres ECG comme suit :
 - a. Définissez la sélection du câble sur **5 Lead** (5 dérivation).
 - b. Définissez la configuration de l'électrode en fonction du câble patient utilisé pour ce test.
 - c. Activez le paramètre **Allow impedance respiration** (Autoriser l'impédance respiratoire).
 - d. Activez le paramètre **V-Tach, V-Fib, Asystole detection** (Détection TV, FV, Asystolie).
 - e. Activez le paramètre **Automatic print on ECG alarm** (Impression automatique à l'alarme ECG).
 - f. Définissez la dérivation par défaut sur **II**.
 - g. Définissez le seuil TV sur **120**.
8. Appuyez sur **Sortie** pour quitter les paramètres avancés.
9. Connectez le module ECG à l'un des ports de l'hôte USB sur l'appareil Connex.
10. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**, puis sur l'onglet **Device** (Appareil) et sur l'onglet vertical **Profiles** (Profils).
11. Définissez le profil sur Continuous Monitoring (Monitoring continu).
12. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**, puis sur l'onglet **Configuration** et sur l'onglet vertical **ECG**.
13. Configurez les paramètres ECG comme suit :
 - a. Définissez le gain ECG sur 20 mm/mv.
 - b. Définissez la vitesse de balayage sur 25 mm/s.
 - c. Activez le filtre.
14. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil), puis sur l'onglet vertical **Par défaut**.
15. Appuyez sur **Enreg. en val. P. déf** dans le volet Current settings (Paramètres actuels).
16. Mettez l'appareil Connex hors tension.
17. Utilisez un câble ECG AHA ou CEI à 5 dérivation pour raccorder le module ECG aux connexions AHA ou CEI correspondantes sur le simulateur.

Procédure de test ECG

Inspectez les câbles et le module ECG. Saisissez les résultats dans la fiche de dossier du test ECG et comparez les résultats avec les critères d'acceptation pour déterminer la réussite ou l'échec de cette étape. Si vous constatez que le câble est défectueux, remplacez-le par un câble en bon état et répétez le test.

Inspection des câbles et du module ECG

Avant tout test fonctionnel, inspectez le module et les câbles.

1. Inspectez les câbles patient ECG et les éléments suivants en particulier :
 - a. Coupures d'isolation ou des connecteurs
 - b. Fissures ou décoloration du plastique
 - c. Caoutchouc ou plastique manquant ou desserré
 - d. Étiquettes manquantes ou endommagées
2. Inspectez le câble USB de l'ECG et les éléments suivants en particulier :
 - a. Coupures d'isolation ou des connecteurs
 - b. Fissures ou décoloration du plastique
 - c. Caoutchouc ou plastique manquant ou desserré
 - d. Étiquettes manquantes ou endommagées
3. Inspectez le module ECG, et les éléments suivants en particulier :
 - a. Plastique cassé
 - b. Fissures
 - c. Décoloration
 - d. Attaches manquantes ou endommagées
 - e. Étiquettes manquantes ou endommagées
 - f. Pièces internes cassées, comme confirmé par les cliquetis
 - g. Broches de connecteur cassées, pliées, brûlées, contaminées ou corrodées
 - h. Décoloration autour des broches du connecteur

Test des voyants et du module ECG

1. Vérifiez que le voyant du module ECG est éteint. Enregistrez le résultat.
2. Mettez l'appareil Connex sous tension et observez le voyant sur le module ECG.
3. Vérifiez que le voyant sur le module ECG s'allume tout d'abord en orange, puis qu'il devient vert fixe. Enregistrez le résultat.
4. Dans l'onglet Home (Accueil) de l'appareil Connex, appuyez sur **Start** (Démarrer) dans le volet ECG.
5. Vérifiez que le voyant du module ECG clignote en vert. Enregistrez le résultat.

Courbe et test de fréquence cardiaque

1. Appuyez sur le volet ECG de l'affichage de l'appareil Connex jusqu'à ce que la dérivation sélectionnée soit la Dérivation I.
2. Appuyez sur la touche **Start** (Démarrer) dans le volet ECG.
3. Vérifiez qu'une courbe s'affiche et que la fréquence cardiaque est de 80 battements par minute +/- 3 battements par minute. Enregistrez le résultat.

La courbe NSR de l'ECG pour la dérivation I et la FC/FP doivent s'afficher comme illustré.

Dérivation ECG I



4. Appuyez sur le volet ECG pour modifier la dérivation ECG.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour les dérivation II, III et V.



REMARQUE La courbe varie pour chaque dérivation, comme illustré.

Dérivation ECG II



Dérivation ECG III



Dérivation ECG V



Test d'alarme des dérivation désactivées

1. Retirez une dérivation du simulateur et vérifiez que le moniteur affiche une alerte d'équipement indiquant la dérivation défectueuse. Enregistrez le résultat.
2. Remplacez la dérivation et attendez que la courbe se stabilise à nouveau.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque dérivation (dérivations AHA ou CEI RA/R, LA/L, RL/N, LL/ F, V/C).

Test de respiration

1. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**, puis sur l'onglet **Configuration** et sur l'onglet vertical **ECG**.
2. Configurez les paramètres ECG comme suit :
 - a. Définissez le gain ECG sur **20 mm/mv**.
 - b. Définissez la vitesse de balayage sur **25 mm/s**.
 - c. Activez le paramètre **Filter** (Filtre).
 - d. Désactivez le paramètre **Patient has a pacemaker** (Le patient porte un stimulateur cardiaque).
 - e. Activez le paramètre **Use ECG as an RR source when available** (Utiliser ECG comme source FR si disponible).

3. Appuyez sur l'onglet **Home** (Accueil).
4. Appuyez sur le volet ECG de l'affichage de l'appareil Connex jusqu'à ce que la dérivation bascule sur la Dérivation II.
5. Patientez 3 minutes pour que le signal ECG se stabilise avant d'observer la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.
6. Vérifiez que la fréquence respiratoire est de 15 respirations par minute +/- 2 respirations par minute. Enregistrez le résultat.

Test d'alarme d'arythmie

1. Sur l'affichage de l'appareil Connex, appuyez sur **Stop** (Arrêter) dans le volet ECG.
2. Définissez le simulateur ECG pour déclencher une arythmie.
3. Appuyez sur la touche **Start** (Démarrer) dans le volet ECG.
4. Déclenchez l'asystolie sur le simulateur ECG et démarrez le chronomètre pour capturer le temps écoulé entre le déclenchement de l'asystolie et l'alarme correspondante sur l'appareil Connex.
5. Vérifiez que l'alarme d'asystolie se déclenche après ≥ 4 secondes. Enregistrez le résultat.
6. Appuyez sur la touche **Stop** (Arrêter) dans le volet ECG.
7. Désactivez l'asystolie sur le simulateur ECG et reprenez un rythme sinusal normal.

Test de détection du stimulateur cardiaque

1. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**, puis sur l'onglet **Configuration** et sur l'onglet vertical **ECG**.
 2. Activez le paramètre **Patient has a pacemaker** (Le patient porte un stimulateur cardiaque).
 3. Appuyez sur l'onglet **Home** (Accueil).
 4. Observez l'étiquette PACER DETECTION ON (DÉTECTION DE STIMULATION SUR MARCHE) sur le volet ECG.
 5. Activez le signal du stimulateur cardiaque sur le simulateur ECG.
 6. Définissez les paramètres de stimulation auriculaire suivants :
 - a. Polarité ve+
 - b. Largeur 1 ms
 - c. Amp 5,0 mv
 - d. Stimulateur et ECG synchronisés
 7. Définissez le canal ECG sur la dérivation I.
 8. Appuyez sur la touche **Start** (Démarrer) dans le volet ECG.
 9. Attendez quelques secondes et observez la courbe dans le volet ECG.
 10. Vérifiez que le marqueur de stimulation du stimulateur apparaît avant le complexe QRS dans le volet ECG. Enregistrez le résultat.
 11. Répétez les étapes 7 à 10 pour la dérivation II, la dérivation III et la dérivation V.
- Fin du test.

Test de sécurité électrique

Welch Allyn recommande de tester uniquement la continuité de mise à la terre et le courant de fuite après toutes les réparations en boîtier ouvert. Les tests de rigidité diélectrique ne sont pas recommandés.



REMARQUE Effectuez les tests de rigidité diélectrique uniquement si vous doutez de l'intégrité de l'isolation électrique (par exemple, courant d'ouverture de l'interrupteur de court-circuit ou intrusion de liquides d'une solution saline). Si vous pensez que ce test est indispensable, retournez l'appareil à Welch Allyn à des fins de maintenance.

Ces recommandations sont conformes à la norme EN/CEI 60601-1 - Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles ou la norme EN/CEI 62353 - Appareils électromédicaux - Essais récurrents et essais après réparation d'un appareil électromédical.

Compte tenu de la variabilité des appareils de contrôle sur le terrain, Welch Allyn n'inclut pas d'instructions spécifiques pour des tests de sécurité électrique. Lors des tests de sécurité électrique, consultez les manuels sur les appareils de contrôle pour obtenir des instructions détaillées afin de s'assurer que la configuration de l'équipement de test est conforme à la norme appropriée. Le tableau suivant fournit des connexions et des limites de tests pour vous aider avec ces tests.

Test	Limites
Continuité de mise à la terre (voir remarque ci-dessus)	La continuité de mise à la terre depuis une tige EP (borne équipotentielle)* vers la broche de mise à la terre du connecteur d'alimentation CEI ne doit pas être supérieure à 0,1 ohm.
Courant de fuite (voir remarque ci-dessus)	Le courant de fuite doit être inférieur à 500 μ A de la tige équipotentielle* à l'alimentation secteur (broche de neutre et broche de phase du connecteur d'alimentation CEI).
Résistance d'isolation	La résistance diélectrique est une tige EP* de 500 V (CC) raccordée au secteur CEI (ligne et broches neutres du connecteur d'alimentation CEI) ; la résistance d'isolement est mesurée.

* Pour localiser la borne équipotentielle, voir « Commandes, indicateurs et connecteurs ».

Appareils avec alimentation externe

Les blocs d'alimentation sont certifiés CB et listés UL ; ils remplissent TOUTES les exigences de la norme sur les dispositifs médicaux relatives à l'alimentation électrique. Le fabricant est tenu

d'effectuer tous les tests de sécurité électrique sur l'ensemble de ses blocs d'alimentation avant l'expédition. Welch Allyn n'effectue pas de tests sur ces blocs d'alimentation externes et ne recommande pas de tels tests, car tout test supplémentaire ajouterait une tension excessive sur le système d'isolement et pourrait entraîner des défaillances prématurées sur le terrain. Les réparations en boîtier ouvert des appareils avec alimentation externe sont uniquement destinées aux circuits CC et aux circuits à isolement robuste intégrés aux cartes de circuits imprimés. Aucun autre test d'après entretien n'est nécessaire dans ce cas. Les systèmes d'isolement du patient au sein de l'appareil (capteur de température, capteur de SpO₂, capteur de CO₂, capteur ECG, etc.) ont tous des espaces d'isolement visibles intégrés à la carte de circuits imprimés. Le contrôle de la qualité sur la carte de circuits imprimés et les tests de type approfondis réalisés par l'organisme de test (ETL) suppriment le besoin d'effectuer des tests supplémentaires sur les appareils qui sont en aval de l'appareil d'isolement de l'alimentation secteur.

Appareils avec alimentation interne


Les alimentations internes sont certifiées CB et enregistrées UL. Ces alimentations sont un modèle d'alimentation à cadre ouvert (pas d'enceinte de protection). Par conséquent, les produits qui ont une alimentation interne doivent subir des tests de sécurité électrique. Les réparations en boîtier ouvert des appareils avec une alimentation interne exigent d'effectuer les tests recommandés, car ces appareils présentent une alimentation à cadre ouvert et les tests impliquent la manipulation de câbles qui transportent du 120 ou du 240 volts C.A. Welch Allyn ne recommande pas les tests HiPot / de résistance diélectrique, car cela pourrait provoquer une tension sur le système d'isolement, qui pourrait en retour entraîner des défaillances prématurées.

Connecteur de la tige de terre

Cet appareil est équipé d'une tige de terre (borne équipotentielle) utilisée pour tester la sécurité électrique et connecter une barre d'équipotentialité. Pour veiller à l'utilisation du connecteur approprié et tester la sécurité électrique, la tige de terre est encastrée dans le boîtier du système. N'utilisez pas des pinces ou des connecteurs de type « crocodile ». Le connecteur électrique d'accouplement nécessite un assemblage automatique par sertissage sur les câbles de connexion appropriés.

Le connecteur d'accouplement (GPAO-KBT6DIN, numéro de commande 15.0010) est constitué de la prise à angle droit et de l'isolateur, comme illustré dans la figure suivante. Vous pouvez acheter le connecteur d'accouplement et la pince à sertir auprès du fabricant, Multi-Contact :

<http://www.multi-contact.com>.

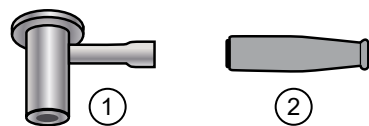

Éléme nt	Description	Type	N° de commande
①	Connecteur électrique d'accouplement, prise à angle droit en laiton nickelé avec Multilam™, alliage de cuivre, dur tréfilé et plaqué or.	POAG-WB6DIN	01.0404
②	Isolateur	T-POAG6	15.5004-24

Éléme nt	Description	Type	N° de commande
	Pinces à sertir avec sertissage à ergot pour des conducteurs flexibles de 4 mm ² et 6 mm ² .	POAG-PZ-N	14.5009

Options, mises à niveau et licences

Welch Allyn prend en charge les mises à niveau des options, logiciels et licences pour tous les modèles.

Un centre de maintenance Welch Allyn doit se charger des mises à niveau des options pour les appareils encore sous garantie et nécessitant une installation interne, à moins que vous participiez au programme de partenariat de soins Biomed. Si vous souhaitez installer des options internes, nous vous recommandons d'assister au cours de formation technique en présentiel ou en ligne. La formation est indispensable pour recevoir l'édition sous licence Gold du Welch Allyn Service Tool. L'édition sous licence Gold est requise pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement après son entretien. Bien que toutes les mises à niveau des options soient étalonnées et testées avant de quitter l'usine, Welch Allyn recommande de réaliser un test fonctionnel complet lorsque l'appareil fait l'objet d'un entretien.

Les éventuelles mises à niveau logicielles peuvent être achetées ou fournies sans frais si vous avez conclu un contrat d'entretien Welch Allyn. Les mises à niveau peuvent être installées par un centre de maintenance Welch Allyn ou avec l'outil d'entretien, édition sans licence standard ou édition sous licence Gold.

Si vous choisissez d'installer les mises à niveau logicielles vous-même, vous recevrez le logiciel via Internet. Lorsque vous commandez le logiciel, précisez le numéro de série de l'appareil sur lequel l'installer.

Vous pouvez acheter des licences pour activer des fonctions logicielles supplémentaires ou des options de communication. Si vous souhaitez installer des licences, vous aurez besoin de l'outil d'entretien, édition sans licence standard ou édition sous licence Gold, et d'une connexion Internet. Si vous achetez une licence, vous recevrez un code à entrer dans l'outil d'entretien exécuté sur un PC connecté à Internet qui communiquera avec un serveur et téléchargera le fichier de licence. L'outil d'entretien se connecte à l'appareil pour installer la licence et activer la fonction avancée. Une description plus détaillée de la licence se trouve dans les fichiers d'aide de l'outil d'entretien.



REMARQUE Lorsqu'un code d'autorisation permet d'activer la licence, il est associé au numéro de série de l'appareil. Enregistrez le code d'autorisation de la licence avec le numéro de série à des fins ultérieures. Si la carte mère est remplacée, vous aurez besoin du code d'autorisation pour réactiver les fichiers de licence.

Options, mises à niveau et licences disponibles

Vous pouvez ajouter les options, les mises à niveau et les licences suivantes à la configuration de base de chaque modèle.



MISE EN GARDE Avant d'installer une option, débranchez le patient du moniteur et mettez l'appareil hors tension.

Options

Modèle	6400	6500	6700	6800
Masimo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nellcor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SureTemp Plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Braun ThermoScan PRO 6000 ¹	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Masimo avec SpHb activée ^{2, 3}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Masimo avec FR activée ^{4, 4, 5, 10}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oridion CO2 ^{5, 6, 6, 10}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EarlySense ^{6, 7, 7, 8, 9}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Capteur EarlySense de sécurité ¹⁰	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECG ^{6, 11, 12}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imprimante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

¹ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.30.00 ou ultérieure.

² Requiert le logiciel de l'hôte version 1.70.03 ou ultérieure.

³ Requiert la licence de l'interface utilisateur applicable.

⁴ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.00.00 ou ultérieure.

⁵ Requiert la licence du profil de monitoring continu.

⁶ Requiert le châssis étendu.

⁷ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.10.00 ou ultérieure.

⁸ Requiert la licence du pouls mouvement/respiration pour afficher le pouls et la respiration.

⁹ Incompatible avec les autres options respiratoires.

¹⁰ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.20.00 ou ultérieure.

¹¹ Requiert la licence LTA pour analyser l'arythmie.

Modèle	6400	6500	6700	6800
¹² Requiert le logiciel de l'hôte version 2.30.01 ou ultérieure.				
Modèle	6400	6500	6700	6800
Masimo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nellcor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SureTemp Plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Braun ThermoScan PRO 6000 ¹	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Masimo avec SpHb activée ^{2, 3}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Masimo avec FR activée ^{4, 4, 5, 10}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oridion CO2 ^{5, 6, 6, 10}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EarlySense ^{6, 7, 7, 8, 9}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Capteur EarlySense de sécurité ¹⁰	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imprimante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

¹ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.30.00 ou ultérieure.

² Requiert le logiciel de l'hôte version 1.70.03 ou ultérieure.

³ Requiert la licence de l'interface utilisateur applicable.

⁴ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.00.00 ou ultérieure.

⁵ Requiert la licence du profil de monitoring continu.

⁶ Requiert le châssis étendu.

⁷ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.10.00 ou ultérieure.

⁸ Requiert la licence du pouls mouvement/respiration pour afficher le pouls et la respiration.

⁹ Incompatible avec les autres options respiratoires.

¹⁰ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.20.00 ou ultérieure.

Standard avec ce modèle.

Mise à niveau matérielle/
logicielle disponible pour ce
modèle.

X Aucune mise à niveau matérielle/
logicielle disponible pour ce modèle.

Éléments accordés sous licence

Modèle	6400	6500	6700	6800
Communication des signes vitaux	●	●	●	●
Lecteur de codes-barres	●	●	●	●
Pèse-personne ¹	○	○	○	○
Hémoglobine totale (Masimo SpHb) ²	○	○	○	○
Fréquence respiratoire acoustique (Masimo RRa) ³	○	○	○	○
Pouls mouvement/respiration ^{4,5}	○	○	○	○
ECG LTA ⁶	○	○	○	○
Profils				
Vérification ponctuelle	●	●	●	●
Office (Consultation) ⁷	●	●	●	●
Triage ⁸	X	X	X	X
Intervals Monitoring (Monitoring par intervalles) ⁹	●	●	●	●
Monitoring continu ³	●	●	●	●

¹ Requiert le logiciel de l'hôte version 1.70.00 ou ultérieure.

² Requiert le logiciel de l'hôte version 1.70.03 ou ultérieure.

³ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.00.00 ou ultérieure.

⁴ Requiert EarlySense ; incompatible avec RRa ou etCO2.

⁵ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.20.00 ou ultérieure.

⁶ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.30.01 ou ultérieure.

⁷ Requiert le logiciel de l'hôte version 1.71.00 ou ultérieure.

⁸ Le profil Triage n'est pas disponible dans le logiciel de l'hôte version 2.30.00 et ultérieure.

⁹ Dans les versions du logiciel de l'hôte 1.X, ce profil a été appelé Monitor (Moniteur).

Modèle	6400	6500	6700	6800
Communication des signes vitaux	●	●	●	●
Lecteur de codes-barres	●	●	●	●

Modèle	6400	6500	6700	6800
Pèse-personne ¹	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hémoglobine totale (Masimo SpHb) ²	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fréquence respiratoire acoustique (Masimo RRa) ³	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pouls mouvement/respiration ^{4,5}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Profils				
Vérification ponctuelle	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Office (Consultation) ⁶	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Triage ⁷	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Intervals Monitoring (Monitoring par intervalles) ⁸	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Monitoring continu ³	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

¹ Requiert le logiciel de l'hôte version 1.70.00 ou ultérieure.
² Requiert le logiciel de l'hôte version 1.70.03 ou ultérieure.
³ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.00.00 ou ultérieure.
⁴ Requiert EarlySense ; incompatible avec RRa ou etCO2.
⁵ Requiert le logiciel de l'hôte version 2.20.00 ou ultérieure.
⁶ Requiert le logiciel de l'hôte version 1.71.00 ou ultérieure.
⁷ Le profil Triage n'est pas disponible dans le logiciel de l'hôte version 2.30.00 et ultérieure.
⁸ Dans les versions du logiciel de l'hôte 1.X, ce profil a été appelé Monitor (Moniteur).

Standard avec ce modèle. Mise à niveau matérielle/logicielle disponible pour ce modèle.

Aucune mise à niveau matérielle/logicielle disponible pour ce modèle.

Vérification de la version logicielle de l'appareil Connex

Vérifiez que la version du micrologiciel prend en charge une option en utilisant l'une des deux méthodes décrites dans cette section.

Vérification de la version du micrologiciel sur l'appareil

1. Si l'appareil n'a pas démarré, mettez-le sous tension.
2. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
3. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
4. Dans le volet de droite, vérifiez le numéro sous la version du logiciel pour identifier la version en cours d'exécution sur l'appareil.

Vérification de la version du micrologiciel à l'aide de l'outil d'entretien

1. Connectez l'appareil Connex à un ordinateur doté de l'outil d'entretien avec un câble USB de type A vers mini B.
2. Lancez l'outil d'entretien Welch Allyn.
3. Dans l'écran de démarrage, cliquez sur **Service** (Entretien).
4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur ADMIN sans mot de passe ou utilisez n'importe quel compte existant.
5. Sélectionnez le modèle de l'appareil dans l'onglet répertoriant les appareils.
L'onglet Device Information (Informations sur l'appareil) s'affiche.
6. Localisez le contrôleur hôte dans la colonne Device Name (Nom de l'appareil) et suivez la ligne jusqu'à la colonne des micrologiciels disponibles pour identifier la version en cours d'exécution sur votre appareil.

Options d'installation

Installation d'options internes

Toutes les installations d'options internes supposent l'ouverture du boîtier et un démontage. À chaque réparation, remplacement ou installation de composants internes, Welch Allyn exige que l'appareil soit soumis à un test fonctionnel complet et à un test de sécurité électrique avant sa réutilisation.

Avant d'installer une option interne, veuillez lire les informations sur sa suppression dans la section « Démontage et réparation ». Après avoir pris connaissance du processus, suivez les instructions énoncées dans la section Démontage pour retirer les composants actuels ou les boîtiers vides, le cas échéant, puis procédez à l'installation des nouvelles options.

Installation d'options externes

Les options externes sont les suivantes : ECG, thermomètres Braun, lecteurs de codes-barres et balance. Procédez aux mises à niveau logicielles requises et aux licences correspondantes avant d'installer les options sur l'appareil Connex. Suivez les instructions relatives aux options pour les configurer avant de les installer sur l'appareil Connex.

Les options externes sont les suivantes : thermomètres Braun, lecteurs de codes-barres et balance. Procédez aux mises à niveau logicielles requises et aux licences correspondantes avant d'installer les options sur l'appareil Connex. Suivez les instructions relatives aux options pour les configurer avant de les installer sur l'appareil Connex.

1. Mettez l'appareil Connex hors tension et retirez le cordon d'alimentation.
2. Accédez au panneau arrière de l'appareil Connex.
3. Repérez la porte du connecteur USB.
4. Desserrez la vis captive pour ouvrir la porte d'accès.
5. Branchez le connecteur USB des options externes du module (p. ex., lecteurs de codes-barres) à un port USB disponible. Vérifiez que le connecteur est entièrement inséré.
6. Alignez le câble USB des options externes avec la fente correspondante dans la porte d'accès USB, puis fermez la porte.
7. Serrez la vis captive pour fixer la porte d'accès.

8. Branchez le cordon d'alimentation à l'appareil.
9. Mettez l'appareil sous tension.
10. Après le démarrage de l'appareil, suivez les instructions du *Mode d'emploi* de l'appareil et/ou des options pour configurer l'option si nécessaire.

Mise à niveau logicielle

Si la version actuelle du logiciel n'est pas conforme à la version minimale requise, mettez à jour le micrologiciel de l'appareil Connex en choisissant la dernière version prenant en charge l'option souhaitée. Pour mettre à jour le logiciel, vous aurez besoin de la dernière version de l'outil d'entretien Welch Allyn, disponible sur <https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>. Suivez les instructions du Guide de configuration et d'installation de l'outil d'entretien Welch Allyn, disponible sur <https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>. Contactez l'assistance technique Hillrom à l'adresse [hillrom.com/en-us/about-us/locations/](https://www.hillrom.com/en-us/about-us/locations/) pour obtenir la dernière version du logiciel de l'appareil Connex. Suivez ces étapes pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil Connex en utilisant l'outil d'entretien Welch Allyn :

1. Connectez l'appareil Connex à un ordinateur doté de l'outil d'entretien avec un câble mini-USB de type A vers B.
2. Branchez le cordon électrique à une prise secteur et mettez l'appareil Connex sous tension.
3. Lancez l'outil d'entretien Welch Allyn.
4. Si l'écran de démarrage s'affiche avec les boutons « Add new features » (Ajouter de nouvelles fonctionnalités) et « Service » (Entretien), cliquez sur **Service** (Entretien).
5. Connectez-vous en tant qu'utilisateur ADMIN sans mot de passe ou utilisez n'importe quel compte existant.
6. Sélectionnez votre appareil Connex dans l'onglet Device list (Liste des appareils).
L'onglet Device Information (Informations sur l'appareil) s'affiche.
7. Cliquez sur l'onglet **Mise à niveau**.
8. Localisez le contrôleur hôte dans la colonne des appareils et suivez la ligne jusqu'à la colonne des micrologiciels disponibles.
 - Si un numéro de version apparaît, cliquez dessus pour le sélectionner.
 - Si aucune mise à niveau disponible ne s'affiche, cliquez sur **Check for upgrades** (Rechercher les mises à niveau).
 - Si aucune mise à niveau ne s'affiche, contactez l'assistance technique Hillrom : [hillrom.com/en-us/about-us/locations/](https://www.hillrom.com/en-us/about-us/locations/).
9. Cliquez sur **View release notes** (Afficher les notes de publication) pour plus d'informations sur cette version.
10. Cliquez sur **Mettre tout à niveau**.
11. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui** pour continuer ou sur **Non** pour revenir à l'onglet Upgrade (Mise à niveau).



REMARQUE Après le démarrage de la mise à niveau, ne déconnectez pas l'appareil ou n'interrompez pas le processus tant qu'il n'est pas terminé. L'appareil redémarrera et lancera la procédure de mise à niveau. Le logiciel du contrôleur hôte et les micrologiciels des sous-systèmes seront mis à niveau avec les versions disponibles. L'appareil redémarrera plusieurs fois selon le nombre de sous-systèmes exigeant une mise à jour. Pour chaque sous-système, la barre de progression ira de 0 à 100 %.

Une fois la mise à niveau terminée, l'appareil revient à l'onglet Upgrade (Mise à niveau) et la colonne des micrologiciels disponibles affiche NA (S/O) pour le contrôleur hôte.

Si les polices de caractères chinois et les tables IME s'affichent dans la liste des éléments à ajouter sur l'appareil, vous devez les installer pour imprimer des graphiques comme suit :

1. Suivez les étapes 1 à 6 au début de cette rubrique.
2. Sélectionnez les polices de caractères chinois et les tables IME dans la liste des éléments à ajouter sur l'appareil.
3. Cliquez sur **Add selected**.
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui** pour continuer ou sur **Non** pour revenir à l'onglet Upgrade (Mise à niveau).

Une fois l'installation terminée, l'appareil revient à l'onglet Upgrade (Mise à niveau).

Activation des licences

Les fonctions sous licence sont activées à l'aide de l'application de licences de l'outil d'entretien Welch Allyn. Lorsque vous achetez une mise à niveau sous licence pour l'appareil Connex, vous recevez un code d'autorisation du service à la clientèle Welch Allyn. Ce code vous permet d'activer les nouvelles fonctionnalités en utilisant la fonction d'installation de la licence accessible depuis l'outil d'entretien.

1. Connectez l'appareil Connex à un ordinateur doté de l'outil d'entretien avec un câble USB de type A vers mini B.
2. Lancez l'outil d'entretien Welch Allyn.
3. Si l'écran de démarrage s'affiche avec les boutons « Add new features » (Ajouter de nouvelles fonctionnalités) et « Service » (Entretien), cliquez sur **Add new features** (Ajouter de nouvelles fonctionnalités).
4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur ADMIN sans mot de passe ou utilisez n'importe quel compte existant.
5. Cliquez sur le menu **Administration** et sélectionnez **Install license** (Installer la licence).
6. Sélectionnez **Medical device license** (Licence du dispositif médical) pour le type de licence que vous souhaitez activer.
7. Entrez votre code d'autorisation.
8. Sélectionnez l'appareil dans la liste disponible.



REMARQUE Pour que l'appareil s'affiche, il doit être connecté ou figurer dans la liste des appareils faisant l'objet d'un entretien.

9. Cliquez sur **Activer**.



REMARQUE Si la licence, que vous activez, concerne un appareil connecté, son installation est immédiate. Si la licence concerne un appareil hors ligne (soumis à un entretien), son installation surviendra lors de la prochaine connexion de l'appareil à l'outil d'entretien. Une nouvelle activation de licence sera ajoutée à votre liste de travail.

10. Après l'installation de la licence, éteignez et redémarrez l'appareil Connex pour charger la licence et activer ses nouvelles fonctionnalités.



REMARQUE Si un arrêt forcé est survenu immédiatement après l'installation de la licence, vous serez peut-être amené à réinstaller la licence.

11. Si vous constatez des problèmes ou des erreurs lors de l'activation, vérifiez que vous avez entré le bon code d'autorisation, vérifiez votre connexion Internet, puis répétez le processus d'installation. Vérifiez auprès de l'administrateur système que les ports 5093 et 5094 sur votre pare-feu sont ouverts pour des communications TCP/IP. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez l'assistance technique Hillrom : hillrom.com/en-us/about-us/locations/.



REMARQUE Le paramètre Masimo SpHb exige une licence supplémentaire installée lors d'une mise à niveau logicielle avec l'outil d'entretien. Vous trouverez des instructions supplémentaires sur l'installation des licences Masimo dans les kits de mise à niveau Masimo.

Configuration requise du micrologiciel de l'hôte

Cette section détaille la configuration requise du micrologiciel de l'hôte pour chaque paramètre. Si votre appareil n'est pas conforme à la configuration minimale, vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel de l'hôte avec le Welch Allyn Service Tool.

- Paramètre SpHb : micrologiciel de l'hôte version 1.70.03 ou ultérieure
- Paramètre FR : micrologiciel de l'hôte version 2.00.00 ou ultérieure
- Paramètre CO2 : micrologiciel de l'hôte version 2.00.00 ou ultérieure
- Paramètre EarlySense : micrologiciel de l'hôte version 2.10.00 ou ultérieure
- Paramètre Braun ThermoScan PRO 6000 : micrologiciel de l'hôte version 2.30.00 ou ultérieure
- Paramètre ECG : micrologiciel de l'hôte version 2.30.01 ou ultérieure



REMARQUE Le logiciel du module Capteur EarlySense ne prend pas en charge les rétrogradations. Le message d'erreur suivant apparaît dans le fichier journal NAK de l'appareil : « FmFLASH/GnSTATUS/1 ».

Cette section détaille la configuration requise du micrologiciel de l'hôte pour chaque paramètre. Si votre appareil n'est pas conforme à la configuration minimale, vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel de l'hôte avec le Welch Allyn Service Tool.

- Paramètre SpHb : micrologiciel de l'hôte version 1.70.03 ou ultérieure
- Paramètre Braun ThermoScan PRO 6000 : micrologiciel de l'hôte version 2.30.00 ou ultérieure
- Paramètre ECG : micrologiciel de l'hôte version 2.30.01 ou ultérieure

Mises à niveau de paramètres Masimo

Des mises à niveau de paramètres Masimo sont disponibles pour les modèles 6400, 6500, 6700 et 6800. Les mises à niveau disponibles sont les suivantes :

- Hémoglobine (SpHb)
- Respiration acoustique (FR)



REMARQUE SpHb et FR ne sont pas compatibles avec le Capteur EarlySense. Le paramètre RRa n'est pas compatible avec le paramètre CO2.

Une mise à niveau du paramètre Hémoglobine est disponible pour les modèles 8400 et 8500 avec Masimo SpO2.

Mise à niveau des appareils configurés sans Masimo SpO2

Vous pouvez mettre à niveau les appareils configurés sans Masimo SpO2 en ajoutant le module Masimo SpO2 ou en remplaçant le module Nellcor SpO2 par le module Masimo SpO2.

Si vous participez à un programme SmartCare™ Biomed, vous pouvez acheter un kit de mise à niveau et procéder à l'installation par vos propres moyens. Les kits de mise à niveau contiennent un module Masimo aux paramètres souhaités, un code d'autorisation de la licence utilisateur et des instructions d'installation et d'autorisation sous licence pour la mise à niveau. Pour terminer l'installation, vous aurez également besoin des outils énumérés dans la section « Démontage et réparation » de ce manuel.

Si vous ne participez pas à un programme SmartCare™ Biomed, contactez Welch Allyn pour commander une mise à niveau matérielle Masimo et demandez à Welch Allyn d'effectuer la mise à niveau. Les clients qui procèdent aux mises à niveau matérielles sans participer à un programme SmartCare™ Biomed annulent la garantie de l'appareil.

Mise à niveau des appareils configurés avec Masimo SpO2

Si votre appareil est équipé d'un module Masimo SpO2, vous pouvez activer de nouveaux paramètres en mettant à niveau le micrologiciel du module. Tous les clients peuvent mettre à niveau le micrologiciel à l'aide de l'outil d'entretien. Pour mettre à niveau le module, achetez un kit de mise à niveau du micrologiciel et suivez les instructions fournies avec le kit.

Chaque mise à niveau du micrologiciel est propre à un appareil ; elle n'est pas transférable à un autre appareil.

Configuration des options

En cas de connexion ou de mise sous tension, le moniteur détecte toutes les options. Lorsque l'option réussit le test POST, toutes les commandes logicielles de l'interface utilisateur du moniteur sont activées, ce qui vous permet de configurer les paramètres des options.

Les paramètres sont initialement définis sur des valeurs réglées en usine. Pour modifier ces paramètres, accéder aux paramètres avancés. Les écrans de configuration pour les paramètres IPI, SpO2, SpHb, Pulse rate (Pouls), etCO2, NIBP (PNI), FR, Temperature (Température) et Manual (Manuel) se trouvent dans l'onglet Parameters (Paramètres). Les écrans de configuration pour la radio se trouvent dans l'onglet Network (Réseau). Pour plus d'informations sur le menu Advanced Settings (Paramètres avancés), consultez le mode d'emploi de l'appareil.

Les paramètres sont initialement définis sur des valeurs d'usine par défaut. Pour modifier ces paramètres, accédez aux paramètres avancés. Les écrans de configuration pour les paramètres SpO2, SpHb, Pulse rate (Pouls), NIBP (PNI), Temperature (Température) et Manual (Manuel) se trouvent dans l'onglet Parameters (Paramètres). Les écrans de configuration pour la radio se trouvent dans l'onglet Network (Réseau). Pour plus d'informations sur le menu Advanced Settings (Paramètres avancés), consultez le *mode d'emploi* de l'appareil.

Polices de caractères chinois et tables (IME) d'éditeur de méthode de saisie

Polices de caractères chinois

Les polices de caractères chinois nécessitent beaucoup de mémoire car chaque taille de police comprend des milliers de caractères chinois. Les polices sont chargées séparément sur l'appareil Connex afin de réduire la taille de l'image binaire (le fichier *.pim). Les polices sont stockées dans la mémoire non volatile pour préserver leur intégrité lors des redémarrages et des mises à niveau logicielles.

IME pour le chinois

L'IME est un composant du logiciel de l'appareil qui permet aux utilisateurs de saisir du texte en chinois à l'aide d'un clavier standard. Le logiciel convertit plusieurs frappes en caractères qui ne peuvent pas être représentés individuellement sur les claviers.

La technologie IME libère les utilisateurs de l'obligation de se souvenir de toutes les valeurs de caractères idéographiques. En effet, l'IME convertit les frappes de l'utilisateur lorsqu'il tape des sons de caractères chinois en anglais phonétique et anticipe les caractères chinois que l'utilisateur pourrait vouloir. Lorsque plusieurs choix similaires sont disponibles, l'éditeur présente une liste de caractères, donnant à l'utilisateur la possibilité de choisir le bon caractère.

Charger la police de caractères chinois et les tables IME

1. Ouvrez l'outil d'entretien Welch Allyn sur votre PC.
2. Connectez un câble mini-USB sur le PC et sur l'appareil Connex.
3. Dans l'onglet Device list (Liste des appareils), cliquez sur le nom de l'appareil pour le sélectionner puis cliquez sur Select (**Sélectionner**).

Un nouvel onglet présentant l'appareil en détail apparaît avec le sous-onglet Device Information (Informations sur l'appareil) sélectionné.

4. Cliquez sur le sous-onglet Upgrade (**Mise à niveau**).

Le sous-onglet Upgrade (Mise à niveau) s'affiche avec deux volets d'options de mise à jour.

5. Dans le volet de droite, cliquez sur **Chinese Fonts and IME Tables** (Polices de caractères chinois et tables IME), puis sur **Add selected** (Ajouter la sélection).

Un message apparaît vous demandant si vous voulez continuer le processus de mise à niveau.

6. Cliquez sur Yes (**Oui**) et attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel.

Une boîte de dialogue apparaît vous demandant de patienter et reste affichée à l'écran jusqu'à la fin de l'installation. Puis la boîte de dialogue se ferme et le volet à droite du sous-onglet de mise à niveau disparaît (en supposant que ce volet ne comportait aucun autre élément au préalable).

Unités remplaçables sur site

Ce chapitre du manuel traite uniquement des pièces remplaçables sur site. Les accessoires de produits, y compris les capteurs patient, les sondes, les câbles, les batteries, les embouts de sonde, le papier d'imprimante et autres consommables, sont répertoriés séparément dans la liste des accessoires dans la documentation utilisateur. Les pièces de rechange et les kits de réparation peuvent être achetés via les canaux de vente Hillrom. Vous pouvez également visiter la [boutique de pièces détachées Hillrom](#) en ligne pour acheter des pièces de rechange et des accessoires pour votre appareil Welch Allyn.

Tableau des kits d'entretien

Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des kits d'entretien.

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹ Numéros de série antérieurs à 100043244817	3e édition ² Numéros de série 100043244817 à 100072205218	4e édition ³ Numéros de série 100072205218 et supérieurs
103573	Châssis LCD VSM 6000	X	X	X
104269	Kit d'entretien, châssis	X	X	X
105362	Kit d'entretien, VSM 6000, étiquettes, modèles 6700, 6800	X	X	X
105480	Kit d'entretien, module EarlySense	X	X	X
105504	Kit d'entretien, mise à niveau du châssis étendu	X	X	X
105611	Kit d'entretien, VSM 6000, module ES avec capteur de lit	X	X	X
105792 (ENTRETIEN N	Kit de mise à niveau du châssis étendu Oridion CO2	X	X	X

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹ Numéros de série antérieurs à 100043244817	3e édition ² Numéros de série 100043244817 à 100072205218	4e édition ³ Numéros de série 100072205218 et supérieurs
UNIQUEMENT)				
105793	Kit de mise à niveau SpO2 Nellcor du châssis étendu Oridion CO2	X	X	X
106821	Kit d'entretien, alimentation CVSM, 3e édition		X	X
106822	Kit d'entretien, module d'imprimante CVSM, 3e édition		X	X
106823	Kit d'entretien, faisceau d'alimentation C.A. CVSM, 3e édition		X	X
106824	Kit d'entretien, châssis LCD du CVSM vers faisceau du châssis, 3e édition		X	X
106825	Kit d'entretien, affichage LCD CVSM 3e édition		X	X
106831	Kit d'entretien, séparateur de câbles USB du CVSM/CIWS, 3e édition		X	X
106832	Kit d'entretien, câble Ethernet du CVSM/CIWS 20", 3e édition		X	X
106835	Kit d'entretien, CVSM, boîtier inférieur étendu, 3e édition		X	X
106838	Kit d'entretien, CVSM, module EarlySense, 3e édition	X	X	X
106839 ⁴	Kit d'entretien, CVSM/ CIWS, carte mère MCE 3e édition		X	X
106840	Kit d'entretien, CVSM, boîtier arrière, 3e édition		X	X
107123	Kit d'entretien, protection			X

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹ Numéros de série antérieurs à 100043244817	3e édition ² Numéros de série 100043244817 à 100072205218	4e édition ³ Numéros de série 100072205218 et supérieurs
	d'alimentation contre les DES			
107124 ⁵	Kit d'entretien, CVSM, module SpO2, Nellcor, 4e édition	X	X	X
107166	Kit d'entretien, PLFM, carte PCBA de communication, Newmar		X	X
107167	Kit d'entretien, CVSM, antenne Newmar		X	X
107169	Kit d'entretien, CVSM, radio Newmar		X	X
107171	Kit d'entretien, CVSM, mise à niveau de la radio Newmar (radio et carte de communication)		X	X
107231 ⁶	Kit d'entretien, CVSM, carte mère MCE avec entrée		X	X
107256	Kit d'entretien, CVSM, panneau latéral D avec bouton d'alimentation, 4e édition	X	X	X
107258	Kit d'entretien, CVSM, module SureTemp, 4e édition	X	X	X
107281	Kit d'entretien, CVSM, module MODPG, 4e édition	X	X	X
107282	Kit d'entretien, CVSM, module SpO2, Masimo, 4e édition	X	X	X
107283	Kit d'entretien, CVSM, module Masimo SpHb, 4e édition	X	X	X
107285	Kit d'entretien, CVSM, réparation du module Masimo SpHb, 4e édition	X	X	X

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹ Numéros de série antérieurs à 100043244817	3e édition ² Numéros de série 100043244817 à 100072205218	4e édition ³ Numéros de série 100072205218 et supérieurs
107288	Kit de mise à niveau, module Masimo SpO2 et RRa, 4e édition	X	X	X
107289	Kit d'entretien, réparation du module Masimo SpO2 et RRa, 4e édition	X	X	X
107290 ⁷	Kit d'entretien, module CO2 Oridion, 4e édition	X	X	X
103388 (ENTRETIEN UNIQUEMENT)	Kit d'entretien, module SpO2, Nellcor	X	X	
108610	Kit d'entretien, ensemble pompe PNI ROHS3	X	X	X
103995	Kit d'entretien, VSM 6000, vis et attaches	X	X	X
106193 (ENTRETIEN UNIQUEMENT)	Kit d'entretien, boîtier CVSM sans module de température	X	X	X
106194 (ENTRETIEN UNIQUEMENT)	Kit d'entretien, boîtier CVSM SureTemp	X	X	X
103550	Carte de barre des voyants PLFM	X	X	X
103551	Kit d'entretien, affichage PLFM	X	X	X
103569	Faisceau de la barre des voyants VSM 6000	X	X	X
104027	Anneau de la base- support Braun	X	X	X
103557	Couvercle d'accès à la connexion du module de température VSM 6000	X	X	X

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹ Numéros de série antérieurs à 100043244817	3e édition ² Numéros de série 100043244817 à 100072205218	4e édition ³ Numéros de série 100072205218 et supérieurs
104028	Socle Braun	X	X	X
104912	Kit d'entretien, façade du module CO2 Oridion	X	X	X
103545	Boîtier de température VSM 6000 (sans module de température)	X	X	X
105637	Kit d'entretien, câble EarlySense	X	X	X
105948	Kit d'entretien, thermomètre Braun PRO 6000	X	X	X
106320	Kit d'entretien, porte de communication VSM 6000	X	X	X
106462	Monture LCD VSM 6000 pour affichage 9"	X	X	X
106512	Kit d'entretien, module ECG, câble USB	X	X	X
106743	Base-support Braun PRO 6000	X	X	X
106834	Kit d'entretien, VSM 6000, boîtier inférieur 3e Éd.		X	X
103353	Kit d'entretien, VSM 6000, barre des voyants LED	X	X	X
6000-CBL3A	Kit d'entretien, câble patient 3L, AHA	X	X	X
6000-CBL3I	Kit d'entretien, câble patient 3L, CEI	X	X	X
6000-CBL5A	Kit d'entretien, câble patient 5L, AHA	X	X	X
6000-CBL5I	Kit d'entretien, câble patient 5L, CEI	X	X	X

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹ Numéros de série antérieurs à 100043244817	3e édition ² Numéros de série 100043244817 à 100072205218	4e édition ³ Numéros de série 100072205218 et supérieurs
6000- ECG3A	Kit d'entretien, module ECG, USB, câble patient 3L, AHA	X	X	X
6000- ECG3I	Kit d'entretien, module ECG, USB, câble patient 3L, CEI	X	X	X
6000- ECG5A	Kit d'entretien, module ECG, USB, câble patient 5L, AHA	X	X	X
6000- ECG5I	Kit d'entretien, module ECG, USB, câble patient 5L, CEI	X	X	X
105294 (version du logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	Licence du profil Office	X	X	X
105363 (version du logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	Licence du profil Continu	X	X	X
105364 (version du logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	CVSM 6700/6800, licence standard	X	X	X
105870 (version du logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	Licence Mouvement, Pouls et Respiration	X	X	X

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹ Numéros de série antérieurs à 100043244817	3e édition ² Numéros de série 100043244817 à 100072205218	4e édition ³ Numéros de série 100072205218 et supérieurs
103910	CVSM 6300, licence (version du standard logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	X	X	X
103371	Licence du lecteur de (version du code-barres logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	X	X	X
103372	Licence standard du (version du profil Spot logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	X	X	X
103373	Licence standard du (version du profil Triage logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	X	X	X
103911	CVSM 6400/6500, licence (version du standard logiciel 2.42 activée automatiq uement requis)	X	X	X
104560	Kit d'entretien, PLFM, radio	X	X	

¹CVSM et CIWS de 3e édition ont été modifiés pour être conformes à la 3e édition de la norme CEI 60601. Tous les logiciels CVSM et CIWS seront harmonisés à partir de la version 2.30.01 du logiciel hôte.

²CVSM et CIWS de 3e édition ont été modifiés pour être conformes à la 3e édition de la norme CEI 60601. Tous les logiciels CVSM et CIWS seront harmonisés à partir de la version 2.30.01 du logiciel hôte.

³ Tous les appareils conformes à la 4e édition de la norme CEI 60601-1-1-2 doivent être entretenus avec des produits conformes à la 4e édition de la norme. Tous les CVSM dont le numéro de série est 100072205218 ou ultérieur et tous les

Référénc e	Description Produit	Compatibilité CEI 60601		
		2e édition ¹	3e édition ²	4e édition ³
		Numéros de série antérieurs à 100043244817	100043244817 à 100072205218	100072205218 et supérieurs

CIWS dont le numéro de série est 100025445218 ou ultérieur seront entretenus comme des appareils conformes à la 4e édition de la norme.

⁴ Requiert le remplacement du micrologiciel 2.41.01 ou d'un module de communication supérieur par 410389-04, du boîtier par 106835, un kit d'écran LCD 106825, un kit d'imprimante (nouveau câblage) (si le périphérique était équipé d'une imprimante) 411695-01 et un module Nellcor 412896 lors du remplacement de la carte mère sur un appareil de deuxième édition.

⁵ Requiert le micrologiciel hôte 2.41.01 pour fonctionner avec les cartes mères plus récentes.

⁶ Requiert le remplacement du micrologiciel 2.41.01 ou d'un module de communication supérieur par 410389-04, du boîtier par 106835, un kit d'écran LCD 106825, un kit d'imprimante (nouveau câblage) (si le périphérique était équipé d'une imprimante) 411695-01 et un module Nellcor 412896 lors du remplacement de la carte mère sur un appareil de deuxième édition.

⁷ Cartes MCE 407574/407574-02 de 2e édition uniquement

Licences

Référence du matériel	Élément	Remarques
103371	Lecteur de codes-barres	
103372	Profil Spot (Vérification ponctuelle)	6300 uniquement
103373	Profil Triage	6300 uniquement
105294	Profil Office	Requiert la version logicielle 1.71.03 ou 2.20.XX et ultérieure
105363	Profil Continuous Monitoring (Monitoring continu)	6400, 6500, 6700 et 6800 uniquement
103910	CVSM 6300, licence standard	6300 uniquement
103911	CVSM 6400/6500, licence standard	6400 et 6500 uniquement
105364	CVSM 6700/6800, licence standard	6700 et 6800 uniquement
104197	Pèse-personne	
105870	Pouls mouvement et respiration	6400, 6500, 6700 et 6800 avec Capteur

Référence du matériel	Élément	Remarques
		EarlySense uniquement ; incompatible avec RRA ou etCO2
106553	Licence tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, asystolie	Module ECG uniquement

Référence du matériel	Élément	Remarques
103371	Lecteur de codes-barres	
103372	Profil Spot (Vérification ponctuelle)	6300 uniquement
103373	Profil Triage	6300 uniquement
105294	Profil Office	Requiert la version logicielle 1.71.0 3 ou 2.20.XX et ultérieure
105363	Profil Continuous Monitoring (Monitoring continu)	6400, 6500, 6700 et 6800 uniquement
103910	CVSM 6300, licence standard	6300 uniquement
103911	CVSM 6400/6500, licence standard	6400 et 6500 uniquement
105364	CVSM 6700/6800, licence standard	6700 et 6800 uniquement
104197	Pèse-personne	
105870	Pouls mouvement et respiration	6400, 6500, 6700 et 6800 avec Capteur EarlySense uniquement ; incompatible avec RRA ou etCO2

Services SmartCare pour la maintenance et la réparation

Plans de protection SmartCare

Référence	Élément
S1-CVSM-PRO-1	Protection SmartCare CVSM 1 an
S1-CVSM-PRO-3	Protection SmartCare CVSM 3 ans
S1-CVSM-PRO-PS	Protection SmartCare CVSM 3 an POS

Plans de protection SmartCare plus

Référence	Élément
S9-CVSM-PROPLUS-1	Protection SmartCare CVSM Plus 1 an
S9-CVSM-PROPLUS-3	Protection SmartCare CVSM Plus 3 ans
S9-CVSM-PROPLUS-PS	Protection SmartCare CVSM Plus 3 an POS

Plans SmartCare Biomed

Référence	Élément
S2-6000	CVSM, programme de partenariat Bio-Med 1 an
S2-6000-2	CVSM, programme de partenariat Bio-Med 2 ans
S2-6000-5	CVSM, programme de partenariat Bio-Med 5 ans
S2-6000-ES	CVSM ES, programme de partenariat Bio-Med 1 an
S2-6000-ES-2	CVSM ES, programme de partenariat Bio-Med 2 ans
S2-6000-ES-5	CVSM ES, programme de partenariat Bio-Med 5 ans
S2-6000-O2	CVSM, programme de partenariat Bio-Med avec CO2
S2-6000-O2-2	CVSM, programme de partenariat Bio-Med 2 ans avec CO2
S2-6000-O2-5	CVSM, programme de partenariat Bio-Med 5 ans avec CO2

Autres plans d'entretien

Référence	Élément
PRV-001	Banc SVC WA préventif par unité
PRV-002	SVC préventif planifié sur place par unité
PRV-ESS	Contrat de remplacement annuel préventif de capteur
S4-6000	CVSM, extension de garantie 1 an

Référence	Élément
S4-6000- 5	CVSM, extension de garantie 5 ans
S4-6000-2	CVSM, extension de garantie 2 ans
S4-6000ES	CVSM ES, extension de garantie 1 an
S4-6000ES-2	CVSM ES, extension de garantie 2 ans
S4-6000ES-5	CVSM ES, extension de garantie 5 ans
S4-6000-O2	CVSM, extension de garantie 1 an avec CO2
S4-6000-O2-2	CVSM, extension de garantie 2 ans avec CO2
S4-6000-O2-5	CVSM, extension de garantie 5 ans avec CO2

Formation sur l'entretien et la réparation



REMARQUE Indispensable pour recevoir l'édition sous licence Gold de l'outil d'entretien.

Référence du matériel	Élément
VSM6000SERREP-TRN	VSM 6000, formation sur la réparation
VSM6000SERREPW-TRN	VSM 6000, formation Web sur la réparation
VSM6000REPRCW-TRN	VSM 6000, formation Web sur la recertification/réparation

Outils d'entretien

Référence du matériel	Élément	Qté
103396	Outil d'entretien Welch Allyn Clé de licence Gold (VSM6000)	1
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn	1

Annexe

Conditions de décontamination et de nettoyage en cas de retour

Par mesure de précaution, l'appareil Connex doit être décontaminé avant d'être renvoyé au Welch Allyn à des fins de maintenance, de réparation, d'inspection ou de mise au rebut.



REMARQUE Les pièces contaminées ne doivent pas être retournées sans accord écrit préalable.



REMARQUE Décontaminez l'appareil conformément aux procédures de votre établissement et aux réglementations locales.

Le nettoyage est une condition préalable essentielle pour assurer une désinfection ou une décontamination efficace.

Nettoyage du moniteur



AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Avant de nettoyer l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation (CA) de la prise d'alimentation et de l'appareil.



AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. NE PAS stériliser en autoclave l'appareil ou les accessoires. L'appareil et les accessoires ne sont pas résistants à la chaleur.



AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Ne pas ouvrir le moniteur et ne pas tenter de le réparer. Seules les procédures de nettoyage et de maintenance de routine décrites dans ce manuel sont autorisées. L'inspection et l'entretien des composants internes doivent être effectués par un technicien qualifié.



AVERTISSEMENT Les liquides peuvent endommager les composants électroniques présents à l'intérieur de l'appareil. Éviter la projection de liquides sur l'appareil.

En cas de projection de liquides sur l'appareil :

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Débrancher la fiche d'alimentation.
3. Retirer la batterie de l'appareil.
4. Essuyer l'excédent de liquide présent sur l'appareil.



REMARQUE En cas de pénétration de liquides dans l'appareil, cesser de l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait été correctement séché, contrôlé et testé par un technicien qualifié.

5. Réinstaller la batterie.
6. Mettre l'appareil sous tension et s'assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

En cas de pénétration de liquides dans le boîtier de l'imprimante (Connex VSM uniquement) :

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Débrancher la fiche d'alimentation.
3. Retirer la batterie de l'appareil.
4. Enlever et jeter le rouleau de papier.
5. Nettoyer et sécher l'intérieur du boîtier de l'imprimante.



REMARQUE Le boîtier de l'imprimante est doté d'un tube d'écoulement qui permet aux liquides de s'écouler vers l'extérieur de l'appareil. En cas de pénétration de liquides par d'autres ouvertures dans l'appareil, cesser de l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait été correctement séché, contrôlé et testé par un technicien qualifié.

6. Installer un nouveau rouleau de papier.
7. Mettre l'appareil sous tension et s'assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.



MISE EN GARDE La stérilisation du moniteur peut endommager l'appareil.



REMARQUE Désinfecter conformément aux normes et protocoles de l'établissement ou aux réglementations locales en vigueur.



REMARQUE Consulter les instructions fournies séparément pour nettoyer les accessoires.

Préparation du nettoyage de l'équipement



MISE EN GARDE Certains agents nettoyants ne sont pas compatibles avec tous les composants de l'appareil. Utilisez exclusivement des agents nettoyants approuvés. L'utilisation de produits nettoyants non autorisés risque d'endommager les composants.



MISE EN GARDE N'utilisez aucune solution à base d'eau de Javel pour nettoyer les contacts électriques métalliques. Ceci endommagerait l'appareil.



MISE EN GARDE N'utilisez pas de solutions ou de chiffons incompatibles imbibés de composés d'ammonium quaternaire (chlorures d'ammonium) ou de désinfectants à base de glutaraldéhyde pour nettoyer l'appareil.

Sélectionnez un agent nettoyant approuvé dans le tableau suivant.

Approuvé pour les boîtiers principaux du moniteur de signes vitaux Connex et du système mural intégré Connex, sauf mention contraire contenue dans les Informations supplémentaires

Agent nettoyant	Informations supplémentaires
Lingettes Clorox HP	
Lingettes désinfectantes et nettoyantes hospitalières Dispatch avec eau de Javel (Clorox Healthcare®)	Non compatibles avec la base-support Braun
Lingettes CleanCide (Wexford Labs)	
Solution d'alcool isopropylique à 70 %	Appliquée sur un chiffon propre
Solution d'eau de Javel à 10 %	(hypochlorite de sodium à 0,5 % - 1 %) appliquée sur un chiffon propre



REMARQUE Pour consulter la liste actuelle des agents nettoyants testés et identifiés comme non compatibles et non approuvés, consultez le bulletin du service client « CSM/ CVSM Cleaning and Disinfection Compatibility » (Compatibilité relative au nettoyage et à la désinfection), DIR 80023964.

Nettoyage des accessoires

1. Essuyez le tuyau de tensiomètre et les brassards réutilisables à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution douce à base de détergent.
2. Essuyez la sonde de température avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool, d'eau tiède ou d'une solution désinfectante antitache diluée dans les proportions adéquates.
3. Nettoyez les capteurs d'oxymétrie de pouls avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 70 % ou d'une solution chlorée à 10 %.
4. Nettoyez le câble de FR et le câble double de SpO2/RRa à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 70 %.
5. Nettoyez le capteur EarlySense en l'essuyant doucement à l'aide d'un chiffon ou de lingettes légèrement imbibés de substances antiseptiques (alcool, chlorhexidine et eau de Javel à une concentration maximale de 5 %). Veillez à bien sécher le capteur avant de le réutiliser. Évitez l'excès de liquides.
6. Pour nettoyer le module ECG, suivez les instructions fournies dans le mode d'emploi de ce module.
7. (Connex IWS uniquement) Pour nettoyer les têtes d'instrument Welch Allyn 3,5 V attachées aux manches d'examen physique, suivez les instructions fournies dans leur mode d'emploi.




MISE EN GARDE N'immergez jamais les accessoires du moniteur.

Nettoyage du connecteur d'entrée de CO2

Si une nouvelle ligne d'échantillonnage est correctement connectée à l'appareil, mais que la pompe n'est pas activée, nettoyer le connecteur d'entrée de CO2 sur l'appareil lors du dépannage.

1. Retirez la ligne d'échantillonnage de l'appareil.
2. Avec de l'air comprimé dans un récipient doté d'un bec, nettoyer le filetage de la surface interne du connecteur d'entrée de CO2 (zone grise dans la figure ci-dessous). Ne nettoyez pas l'anneau interne et l'intérieur de l'anneau interne.

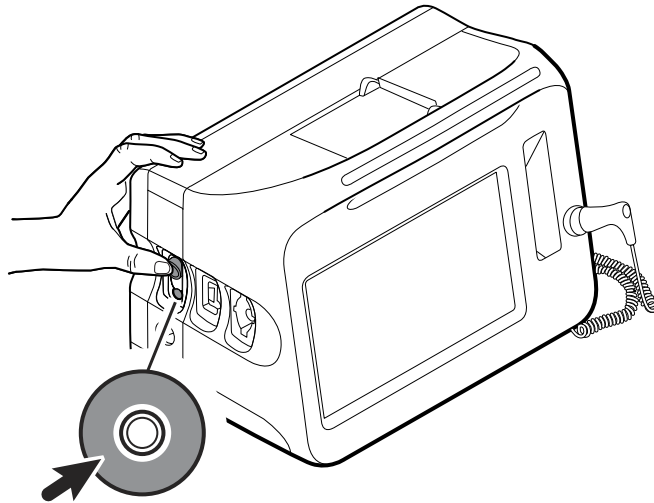


Identification du moniteur et des sous-systèmes

Cette explication sur l'étiquetage du moniteur est fournie pour vous aider à identifier ces pièces par numéro de série. Les numéros de référence figurant sur les étiquettes sont internes. Ils ne se trouveront pas dans la liste des unités remplaçables sur site incluses dans ce manuel.

Il est possible que les futures révisions d'une pièce ne soient pas toujours rétrocompatibles avec une pièce existante. Pour déterminer la pièce de rechange appropriée pour l'unité, précisez toujours le numéro de série et le modèle lors de la commande.

Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur

Le numéro du modèle et le numéro de série figurent sur l'étiquette située en bas et à droite du moniteur.

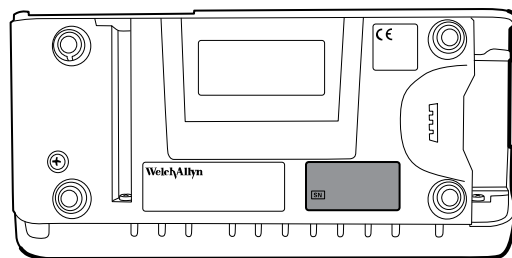

Numéro de série et code de format

Numéro de série	MMMMXXXWWYY
MMMM	Usine de fabrication
XXX	Numéro séquentiel
WW	Semaine de fabrication
YY	Année de fabrication

Format et code du numéro de modèle

Configurations du modèle



REMARQUE Pour découvrir plus d'options de configuration, y compris les accessoires approuvés, consultez la liste des accessoires dans le *Mode d'emploi* ou consultez la [boutique de pièces détachées Hillrom](#).



REMARQUE Si des options ont été ajoutées à l'appareil, la configuration réelle ne correspondra pas à la description du modèle.



REMARQUE Un moniteur avec un **R** (FR) est toujours configuré avec un **M** pour l'oxymétrie.



REMARQUE La FR est une fonction sous licence vendue avec les nouvelles configurations ou dans le cadre d'une mise à niveau. Les mises à niveau comprennent une nouvelle licence IU (interface utilisateur) et l'ajout du profil CM (Continuous Monitoring) (MC [Monitoring continu]).



REMARQUE Le modèle 6300 a été supprimé.

L'appareil est disponible dans plusieurs configurations. Le tableau suivant permet de déterminer les configurations disponibles des modèles 6400, 6500, 6700 et 6800 :

Modèle	Paramètre				
Un composant dans chaque colonne, selon le numéro de modèle					
Exemples : 64MTPE-B (Amérique du Nord) ; 67NSTP-4 (Royaume-Uni)					
64 = 6400, modèle standard	N = Nellcor M = Masimo	T = SureTemp X = Aucun	P = Imprimante X = Aucun	E = Braun X = Aucun	A = Danemark B = Amérique du Nord C = Chine G = Argentine K = Corée du Sud
65 = 6500, modèle sans fil	H = Hémoglobine / Masimo X = Aucun				N = Inde / EAU P = Thaïlande T = Taiwan Y = Italie Z = Brésil 2 = Europe 3 = Israël 4 = Royaume-Uni 5 = Suisse 6 = Australie / Nouvelle- Zélande
67 = 6700, modèle standard	N = Nellcor M = Masimo	C = CO2 R = RRa	T = SureTemp E = Braun	P = Imprimante X = Aucun	
68 = 6800, modèle sans fil	H = Hémoglobine / Masimo	X = Aucun S = ES F = ES Safety	X = Aucun D = Les deux		

Modèle	Paramètre
	66 = Australie / Nouvelle-Zélande (orange)
	7 = Afrique du Sud
	B2 = Canada
	2R = Russie
	2T = Turquie
	4S = Singapour

Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur

Étiquettes de la carte à circuit imprimé et des options internes	
Identifiant de la plate-forme PCBA	XXXXXX BOM Y DWG Z
XXXXXX	Référence Welch Allyn
Y	Révision de la nomenclature
Z	Version du plan de montage issue de la version actuelle

Étiquettes de la carte à circuit imprimé et des options internes	
Numéro de série	XXXWYYID
XXX	Numéro séquentiel
WW	Semaine de fabrication
YY	Année de fabrication
ID	Identifiant unique du fournisseur

Étiquettes des modules PNI, Capteur EarlySense et SpO2

Étiquettes de la carte à circuit imprimé et des options internes	
Identificateur du module	XXXXXX
XXXXXX	Référence Welch Allyn
Numéro de série du module	XXXWYYID

XXXX	Numéro séquentiel
WW	Semaine de fabrication
YY	Année de fabrication
ID	Identifiant unique du fournisseur

Valeurs d'usine par défaut

Alarme d'ordre général

Paramètres	Valeur par défaut
Généraux	
Limites d'alarmes affichées	Activé
Son de l'alarme activé	Activé
Son de l'alarme désactivé	Désactivé
Volume	Moyenne
Mode repos du patient activé	Arrêt
Avancés	
Généraux	
Autoriser l'utilisateur à désactiver les alarmes	Activé
Seuil de l'appel infirmier	Moyenne
Son	
Autoriser l'utilisateur à désactiver le son général	Activé
Volume d'alarme minimum	Faible
Durée de pause du son	2 minutes
Permettre à l'utilisateur d'activer le mode repos du patient	Activé
Permettre à l'hôte d'activer le mode repos du patient	Activé
Délais	
Délai condition alarme SpO2	10 secondes
Délai condition alarme fréquence de pouls SpO2	3 secondes

Paramètres	Valeur par défaut
Délai condition alarme fréquence de pouls mouvement	3 secondes
Délai condition alarme mouvement respiration	180 secondes
Délai condition alarme FR/FP mouvement peu fiable	3 minutes
Délai condition alarme etCO2	15 secondes
Délai condition alarme respiration	10 secondes
Délai alarme absence de souffle	Adulte : 30 secondes Enfant : 20 secondes Nouveau-né : 15 secondes
Délai condition alarme SpHb	10 secondes

Paramètres	Valeur par défaut
Généraux	
Limites d'alarmes affichées	Activé
Son de l'alarme activé	Activé
Son de l'alarme désactivé	Désactivé
Volume	Moyenne
Mode repos du patient activé	Arrêt
Avancés	
Généraux	
Autoriser l'utilisateur à désactiver les alarmes	Activé
Seuil de l'appel infirmier	Moyenne
Son	
Autoriser l'utilisateur à désactiver le son général	Activé
Volume d'alarme minimum	Faible
Durée de pause du son	2 minutes
Permettre à l'utilisateur d'activer le mode repos du patient	Activé
Permettre à l'hôte d'activer le mode repos du patient	Activé
Délais	

Paramètres	Valeur par défaut
Délai condition alarme SpO ₂	10 secondes
Délai condition alarme fréquence de pouls SpO ₂	3 secondes
Délai condition alarme respiration	10 secondes
Délai alarme absence de souffle	Adulte : 30 secondes Enfant : 20 secondes Nouveau-né : 15 secondes
Délai condition alarme SpHb	10 secondes

PNI

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes pour les mesures systoliques et diastoliques	Activé
Mesure systolique : limite supérieure	Adulte : 220 mmHg (29,3 kPa) Enfant : 145 mmHg (19,3 kPa) Nouveau-né : 100 mmHg (13,3 kPa)
Mesure systolique : limite inférieure	Adulte : 75 mmHg (10,0 kPa) Enfant : 75 mmHg (10,0 kPa) Nouveau-né : 50 mmHg (6,7 kPa)
Mesure diastolique : limite supérieure	Adulte : 110 mmHg (14,7 kPa) Enfant : 100 mmHg (13,3 kPa) Nouveau-né : 70 mmHg (9,3 kPa)
Mesure diastolique : limite inférieure	Adulte : 35 mmHg (4,7 kPa) Enfant : 35 mmHg (4,7 kPa) Nouveau-né : 30 mmHg (4,0 kPa)
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes pour la pression artérielle moyenne (PAM)	Désactivé
PAM : limite supérieure	Adulte : 120 mmHg (16 kPa) Enfant : 110 mmHg (14,7 kPa)

Paramètres	Valeur par défaut
	Nouveau-né : 80 mmHg (10,7 kPa)
PAM : limite inférieure	Adulte : 50 mmHg (6,7 kPa) Enfant : 50 mmHg (6,7 kPa) Nouveau-né : 35 mmHg (4,7 kPa)
Intervalles	
Intervalle	Automatique
Minutes	15 minutes
Impression automatique dans intervalle	Désactivé
Avancés	
PAM affichée	Activé
SYS/DIA comme contenu principal	Activé
PAM comme contenu principal	Désactivé
Type de tube	2 tubes
Unité de mesure	mmHg
Algorithme par défaut	SureBP
Cible de gonflage du brassard (algorithme par palier)	
Adulte	160 mmHg (21,3 kPa)
Enfant	140 mmHg (18,7 kPa)
Nouveau-né	90 mmHg (12,0 kPa)
Autoriser les modifications du programme d'intervalles	Activé
Programmes (moyennage de la PNI)	Programmes 1 à 6 (les paramètres par défaut sont vides)

SpO2

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé

Paramètres	Valeur par défaut
Limite supérieure	Adulte : 100 % Enfant : 100 % Nouveau-né : 100 %
Limite inférieure	Adulte : 90 % Enfant : 90 % Nouveau-né : 90 %
SatSeconds™ (Nellcor uniquement)	0
Avancés	
Vue par défaut	% SpO2
Réponse par défaut	Normal
Vitesse de balayage par défaut	25 mm/s
Permettre alarme faible perfusion	Activé

SpHb

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé
Limite supérieure	17,0 g/dl (11,0 mmol/l)
Limite inférieure	7,0 g/dl (4,0 mmol/l)
Configuration	
Période tendances	1 h
Avancés	
Vue par défaut	Numérique
Référence	Veineuse
Unité de mesure	g/dl
Moyennage par défaut	Moyenne

Température

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Désactivé
Limite supérieure	101 °F (38,3 °C)
Limite inférieure	94 °F (34,4 °C)
Avancés	
Unité de mesure	°F (Fahrenheit)
Conversion de température affichée	Activé
Site SureTemp Plus par défaut	Oral
Braun 6000	
Interruption anti-vol	Désactivé
Mode	Technique de compensation
Activer minuterie d'impulsions	Activé
Activer sélection Celsius uniquement	Désactivé

Fréquence de pouls

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé
Limite supérieure	Adulte : 120 bpm Enfant : 150 bpm Nouveau-né : 200 bpm
Limite inférieure	Adulte : 50 bpm Enfant : 50 bpm Nouveau-né : 100 bpm
Configuration	
Volume du son	Désactivé
Avancés	

Paramètres	Valeur par défaut
Source affichée	Activé

Capteur EarlySense

Paramètres	Valeur par défaut
Généraux, mouvements du patient	
Patient non admis, délai	15 minutes
Patient non mesuré, délai	12 heures
Temps d'alerte, faible mouvement	23 400 secondes
Sélection du Capteur EarlySense	Lit
Intervalle de rotation du patient	Arrêt
Alarmes, mouvements du patient	
Sensibilité de sortie activée	Activé
Sensibilité de sortie	3
Alarme mouvement activée	Activé

etCO₂

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes pour l'etCO ₂	Activé
etCO ₂ : limite supérieure	Adulte : 60 mmHg (8,0 kPa) Enfant : 60 mmHg (8,0 kPa) Nouveau-né : 50 mmHg (6,7 kPa)
etCO ₂ : limite inférieure	Adulte : 15 mmHg (2,0 kPa) Enfant : 15 mmHg (2,0 kPa) Nouveau-né : 20 mmHg (2,7 kPa)
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes pour l'FiCO ₂	Activé
FiCO ₂ : limite supérieure	Adulte : 8 mmHg (1,1 kPa) Enfant : 8 mmHg (1,1 kPa)

Paramètres	Valeur par défaut
	Nouveau-né : 5 mmHg (0,7 kPa)
Délai alarme élevé	15 secondes
Configuration	
Durée de veille pompe	15 minutes
Avancés	
Vue par défaut etCO ₂	Numérique
FICO ₂ affichée	Activé
Échelle courbes par défaut	50 mmHg
Unité de mesure	mmHg
Activer boîte de dialogue ligne d'échant.	Activé
Vitesse de balayage par défaut	6,25 mm/s
Compensation BTPS	Activé

FR

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé
Limite supérieure (etCO ₂)	Adulte : 30 respirations par minute Enfant : 40 respirations par minute Nouveau-né : 65 respirations par minute
Limite supérieure (ECG)	Adulte : 30 respirations par minute Enfant : 40 respirations par minute
Limite inférieure (etCO ₂)	Adulte : 5 respirations par minute Enfant : 10 respirations par minute Nouveau-né : 25 respirations par minute
Limite inférieure (ECG)	Adulte : 5 respirations par minute Enfant : 10 respirations par minute

Paramètres	Valeur par défaut
Délai alarme élevé pour le CO2	10 secondes
Délai alarme pouls respiration du patient	180 secondes
Alarme absence de souffle	Adulte : 30 secondes Enfant : 20 secondes Nouveau-né : 15 secondes

FR

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé
Limite supérieure (ECG)	Adulte : 30 respirations par minute Enfant : 40 respirations par minute
Limite inférieure (ECG)	Adulte : 5 respirations par minute Enfant : 10 respirations par minute
Alarme absence de souffle	Adulte : 30 secondes Enfant : 20 secondes Nouveau-né : 15 secondes

IPI

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé
Limite inférieure	Adulte : 4 Enfant : 4 Nouveau-né : sans objet
Avancés	
IPI affiché	Activé
Vue par défaut IPI	Numérique

Paramètres	Valeur par défaut
Période tendances par défaut	30 minutes

RRa

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé
Limite supérieure	30 respirations par minute
Limite inférieure	6 respirations par minute
Délai alarme	10 secondes
Alarme absence de souffle	30 secondes
Avancés	
Moyennage RRa par défaut	Lent
Délai de reprise	5 minutes

ECG

Paramètres	Valeur par défaut
Alarmes	
Contrôle activé/désactivé des limites d'alarmes	Activé
Limite supérieure	120
Limite inférieure	50
Configuration	
Gain ECG	10 mm/mV
Vitesse de balayage	25 mm/s
Filtre	Activé
Détection du stimulateur cardiaque	Désactivé
Utiliser ECG comme source FR si disponible	Désactivé

Paramètres	Valeur par défaut
Avancés	
Activer tonalité cardiaque de priorité élevée	Activé
Sélection du câble	3 dérivations
Configuration de l'électrode	AHA
Autoriser l'impédance respiratoire	Activé
Activer la détection TV, FV, Asystolie	Activé
Impression automatique à l'alarme ECG	Activé
Dérivation par défaut	II
Seuil TV	120

Notations personnalisées

Paramètres	Valeur par défaut
Avancés	
Default score summary view (Vue récapitulative de la notation par défaut)	Condensed (Condensée)
Incomplete score save options (Options de sauvegarde d'une notation incomplète)	Allow (Autoriser)

Paramètres manuels du patient



REMARQUE Les valeurs par défaut apparaissent dans les versions logicielles antérieures à 2.30.00, à l'ouverture du clavier ou lors de l'utilisation des touches fléchées Haut/Bas pour vos saisies. Dans les versions logicielles 2.30.00 et ultérieures, les champs pour les paramètres manuels sont vides (aucun réglage par défaut).

Paramètres	Valeur par défaut
Taille	70 po (177,8 cm)
Poids	150 lb (68,0 kg)
Douleur	0
Respiration	12
Température	98,6 °F (37 °C)

Paramètres	Valeur par défaut
Avancés¹	
Taille affichée	Activé
Poids affiché	Activé
Douleur affichée	Activé
Respiration affichée	Activé
Température affichée ²	Désactivé
IMC affiché	Désactivé
Unités de la taille	cm (po)
Unités du poids	kg (lb)
Activer l'annulation manuelle de la PNI par défaut	Activé
Activer l'annulation manuelle de la fréquence de pouls	Activé
Activer l'annulation manuelle de la température par défaut	Activé
Activer l'annulation manuelle de la FR par défaut	Activé
Activer l'annulation manuelle de la SpO2 par défaut	Activé

¹ Vous pouvez activer uniquement quatre paramètres manuels.

² Si un module de température est disponible, la sélection manuelle de la température n'est pas disponible.

Paramètres manuels du patient



REMARQUE Dans les versions logicielles 2.30.00 et ultérieures, les champs pour les paramètres manuels sont vides (aucun réglage par défaut).

Paramètres	Valeur par défaut
Taille	
Poids	
Douleur	
Respiration	
Température	
Avancés¹	

Paramètres	Valeur par défaut
Taille affichée	Activé
Poids affiché	Activé
Douleur affichée	Activé
Respiration affichée	Activé
Température affichée ²	Désactivé
IMC affiché	Désactivé
Unités de la taille	cm (po)
Unités du poids	kg (lb)
Activer l'annulation manuelle de la PNI par défaut	Activé
Activer l'annulation manuelle de la fréquence de pouls	Activé
Activer l'annulation manuelle de la température par défaut	Activé
Activer l'annulation manuelle de la FR par défaut	Activé
Activer l'annulation manuelle de la SpO2 par défaut	Activé

¹ Vous pouvez activer uniquement quatre paramètres manuels.

² Si un module de température est disponible, la sélection manuelle de la température n'est pas disponible.

Appareil

Paramètres	Valeur par défaut
Pause temporaire du monitoring patient ¹	10 minutes
Luminosité de l'écran	6
Autoriser le délai de verrouillage de l'affichage	Activé
Profils	Vérification ponctuelle
Avancés	
Langue	English
Date/Heure	
Format de date	mm/jj/aaaa
Fuseau horaire	UTC

Paramètres	Valeur par défaut
Passage automatique à l'heure d'été, rapporté par l'hôte	Désactivé
Utilisateur autorisé à modifier date/heure	Activé
Date et heure affichées	Activé
Écran	
Verrouillage de l'affichage	Jamais
Économiseur d'écran	2 minutes
Mise hors tension de l'appareil	20 minutes
Appareil	
Activer enreg. comme valeur par défaut	Activé
Dép. délai du mode veille	10 minutes
Autoriser la modification du profil	Activé
Fréquence de la ligne électrique	60 Hz
Démo	
Type	Valeurs normales
¹ Mode continu uniquement	

Gestion des données

Paramètres	Valeur par défaut
Avancés	
Patient	
Type de patient par défaut	Adulte
Format du nom	Nom et prénom
Étiquette principale	Nom
Étiquette secondaire	ID patient
Printout label (Étiquette d'impression)	Nom et ID du patient
Demander l'ID patient pour enregistrer les mesures	Désactivé
Rechercher par ID patient	Désactivé

Paramètres	Valeur par défaut
Effacer les informations du patient en cas d'enregistrement manuel	Activé
Extraire la liste	Désactivé
Médecin	
Étiquette	ID médecin
Demander l'ID médecin pour enregistrer les mesures	Désactivé
Rechercher par ID médecin	Désactivé
Demander le mot de passe	Désactivé
Effacer les informations du médecin en cas d'enregistrement manuel	Désactivé
Données cliniques	
Envoyer automatiquement en cas d'enregistrement manuel	Désactivé
Supprimer les mesures après leur envoi	Désactivé
Émuler Spot Vital Signs LXI	Activé
Connexion à Connex CS	Activé

Réseau



REMARQUE Sauf indication contraire, les chiffres entre parenthèses présentés dans la colonne Options indiquent le nombre maximal de caractères alphanumériques que vous pouvez saisir dans le champ pour ce paramètre.

Radio (Newmar)

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
Radio	n/a	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Activé
Radio alarms (Alarmes radio)	n/a	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Désactivé
Radio ESSID selection (Sélection radio ESSID)	n/a	(32)	com.welchallyn
Radio band (Bande radio)	n/a	a, a/n, a/b/g, a/b/g/n, b/g/n	a/b/g/n

Radio (Newmar)

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
Dynamic frequency selection (Sélection de fréquence dynamique)	n/a	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Activé
Authentication/ Encryption (Authentification/ chiffrement)	n/a	Open, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WEP 64, WEP 128	WPA2-Personal
Pre-shared key method type (Type de clé pré-partagée)	Uniquement disponible lorsque WPA-Personal ou WPA2-Personal est sélectionné.	Network Key (Clé réseau), Passphrase (Phrase secrète)	Network Key (Clé réseau)
Method (Méthode)	Uniquement disponible lorsque WPA-Personal ou WPA2-Personal est sélectionné. Si le type de clé pré-partagée est une phrase secrète, l'interface utilisateur doit seulement autoriser 8 à 63 caractères ASCII. Si le type de clé pré-partagée est une clé réseau, l'interface utilisateur doit exiger exactement 64 caractères hexadécimaux.	(64)	1234567890ABCDEF 1234567890ABCDEF 1234567890ABCDEF 1234567890ABCDEF
EAP type (Type EAP)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée.	TLS, TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, PEAP-TLS, EAP-FAST	PEAP-MSCHAPv2
EAP identity (Identité EAP)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée.	(32)	vitalsigns
EAP password (Mot de passe EAP)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée et lorsque le type EAP n'est PAS TLS ou PEAP-TLS.	Jusqu'à 32 caractères ASCII imprimables, U+0020 à U+007E	password
Roam type (Type d'itinérance)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée.	PMK Caching (Mise en cache PMK), OKC, CCKM	OKC
Server validation (Validation du serveur)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée et lorsque le type EAP n'est PAS EAP-FAST.	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Désactivé
Allow anonymous identity (Autoriser anonyme)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée et lorsque le type EAP n'est PAS TLS ou TTLS.	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Désactivé

Radio (Newmar)

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
PAC provisioning field (Champ fourniture PAC)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée et lorsque le type EAP est EAP-FAST.	Auto, Manual (Manuel)	Auto
Inner EAP setting (Paramètre EAP interne)	Disponible uniquement lorsque la clé WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise est sélectionnée et lorsque le type EAP est EAP-FAST.	Auto, PAP	Auto
WEP 64 Key number (Numéro de clé WEP 64)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. Gamme de 0 à 3 dans l'objet présenté comme 1-4 sur l'interface utilisateur.	1, 2, 3, 4	1
WEP 64 Key 1 (WEP 64 clé 1)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789
WEP 64 Key 2 (WEP 64 clé 2)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789
WEP 64 Key 3 (WEP 64 clé 3)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789
WEP 64 Key 4 (WEP 64 clé 4)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789
WEP 128 Key number (Numéro de clé WEP 128)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. Gamme de 0 à 3 dans l'objet présenté comme 1-4 sur l'interface utilisateur.	1, 2, 3, 4	1
WEP 128 Key 1 (WEP 128 clé 1)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789

Radio (Newmar)

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
WEP 128 Key 2 (WEP 128 clé 2)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789
WEP 128 Key 3 (WEP 128 clé 3)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789
WEP 128 Key 4 (WEP 128 clé 4)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789
FIPS mode (Mode FIPS)	Uniquement disponible lorsque (WPA2-Personal) ou (WPA2-Enterprise et TLS EAP type (Type EAP TLS) et Roam Type (Type d'itinérance) != CCKM) est sélectionné.	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Activé

Radio (Lamarr)

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
Radio	n/a	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Activé
Radio alarms (Alarmes radio)	n/a	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Désactivé
Radio ESSID selection (Sélection radio ESSID)	Ce paramètre peut être contrôlé via l'interface utilisateur uniquement lorsque la valeur fait partie de la liste et prendra effet lors d'un redémarrage.	(32)	com.welchallyn
Radio band (Bande radio)	n/a	a, b/g	b/g
Authentication/ Encryption (Authentification/ chiffrement)	n/a	Open, WPA2-PSK, WPA2-AES, WEP 64, WEP 128	WPA2-PSK

Radio (Lamarr)

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
Pre-shared key method type (Type de clé pré-partagée)	Uniquement disponible lorsque WPA2-PSK est sélectionné.	Network Key (Clé réseau), Passphrase (Phrase secrète)	Network Key (Clé réseau)
Method (Méthode)	Uniquement disponible lorsque WPA2-PSK est sélectionné. Si le type de clé pré-partagée est une phrase secrète, l'interface utilisateur doit seulement autoriser 8 à 63 caractères ASCII. Si le type de clé pré-partagée est une clé réseau, l'interface utilisateur doit exiger exactement 64 caractères hexadécimaux.	(64)	1234567890ABCDEF 1234567890ABCDEF 1234567890ABCDEF 1234567890ABCDEF
Security protocol (Protocole de sécurité)	Uniquement disponible lorsque WPA2-PSK ou WPA2-AES est sélectionné.	CCMP, CCMP et TKIP	CCMP
EAP type (Type EAP)	Uniquement disponible lorsque WPA2-AES est sélectionné.	TLS, TTLS, PEAP, Auto (TLS, TTLS ou PEAP)	TLS
EAP identity (Identité EAP)	Uniquement disponible lorsque WPA2-AES est sélectionné.	(32)	vitalsigns
EAP password (Mot de passe EAP)	Uniquement disponible lorsque WPA2-AES est sélectionné.	Jusqu'à 32 caractères ASCII imprimables, U+0020 à U+007E	password
WEP 64 Key number (Numéro de clé WEP 64)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. Gamme de 0 à 3 dans l'objet présenté comme 1-4 sur l'interface utilisateur.	1, 2, 3, 4	1
WEP 64 Key 1 (WEP 64 clé 1)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789
WEP 64 Key 2 (WEP 64 clé 2)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789
WEP 64 Key 3 (WEP 64 clé 3)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789

Radio (Lamarr)

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
WEP 64 Key 4 (WEP 64 clé 4)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 64 est sélectionnée. La clé WEP 64 nécessite 10 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(10)	0123456789
WEP 128 Key number (Numéro de clé WEP 128)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. Gamme de 0 à 3 dans l'objet présenté comme 1-4 sur l'interface utilisateur.	1, 2, 3, 4	1
WEP 128 Key 1 (WEP 128 clé 1)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789
WEP 128 Key 2 (WEP 128 clé 2)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789
WEP 128 Key 3 (WEP 128 clé 3)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789
WEP 128 Key 4 (WEP 128 clé 4)	Uniquement disponible lorsque la clé WEP 128 est sélectionnée. La clé WEP 128 nécessite 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F).	(26)	0123456789ABCDEF 0123456789

Serveur

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
Server determination type (Type de détermination du serveur)	n/a	Saisie manuelle, adresse IP du serveur NRS, serveur DNS, protocole DHCP43	Lamarr : Manual Entry (Entrée manuelle) Newmar : DNS

Serveur

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
Network Rendezvous Server IP (IP du serveur Network Rendezvous)	Utilisé uniquement si le type de détermination du serveur est NRS IP (IP NRS).	Adresse IP Série de 4 chiffres, chaque série d'octets allant de 0 à 255	0.0.0.0
Port du serveur Network Rendezvous	Utilisé uniquement lorsque le type de détermination du serveur est Broadcast (Diffusion), NRS IP (IP NRS), DNS ou DHCP43.	Nombre entier (0 à 65535)	7711
DNS hostname (Nom d'hôte DNS)	Utilisé uniquement si le type de détermination du serveur est DNS. Activé uniquement sur l'interface utilisateur si la version radio prend en charge le DNS.	(128)	WANRS
DHCP option 60 vendor string (chaîne fournisseur de l'option 60 DHCP)	Utilisé uniquement si le type de détermination du serveur est DHCP43. Activé uniquement sur l'interface utilisateur si la version radio prend en charge l'option 43 DHCP. Visible actuellement mais non configurable à partir de l'interface utilisateur ; seule la valeur par défaut est utilisée.	(128)	welchallyn-nrs
Call home enable (Fonction d'appel à domicile activée)	N'a aucun effet si la fonction d'appel à domicile est désactivée suite à la mise à niveau. N'affecte pas la capacité de lancer manuellement une session d'appel à domicile.	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Activé
Data encryption enable (Cryptage des données activé)	n/a	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Désactivé
Server authentication enable (Authentification du serveur activée)	n/a	Enabled (Activé), Disabled (Désactivé)	Désactivé
Episodic WACP server address (Adresse du serveur WACP ponctuel)	Utilisée lorsque le type de détermination du serveur est Manual entry (Saisie manuelle)	(128)	hostname

Serveur

Paramètres	Commentaires	Options / Type de données / Longueur	Valeur par défaut
Episodic WACP server port (Port du serveur WACP ponctuel)	Utilisé lorsque le type de détermination du serveur est Manual entry (Saisie manuelle)	Nombre entier (0 à 65535)	281
Continuous WACP server address (Adresse du serveur WACP continu)	Utilisée lorsque le type de détermination du serveur est Manual entry (Saisie manuelle)	(128)	hostname
Continuous WACP server port (Port du serveur WACP continu)	Utilisée lorsque le type de détermination du serveur est Manual entry (Saisie manuelle)	Nombre entier (0 à 65535)	291
Service WACP server address (Adresse du serveur WACP de service)	Utilisée lorsque le type de détermination du serveur est Manual entry (Saisie manuelle)	(128)	hostname
Service WACP server port (Port du serveur WACP de service)	Utilisée lorsque le type de détermination du serveur est Manual entry (Saisie manuelle)	Nombre entier (0 à 65535)	283

Service

Paramètres	Valeur par défaut
Avancés	
General (Généraux)	
PartnerConnect enable auto sync (PartnerConnect permet la synchronisation automatique)	Activé
Enable external USB ports (Activer les ports USB externes)	Activé

Mot de passe

Paramètres	Valeur par défaut
Avancés	
Change password (Modifier le mot de passe)	6345

Paramètres	Valeur par défaut
Enable failed attempt lockout (Activer le blocage après un échec de tentative de connexion)	Désactivé
Enable password expiration (Activer l'expiration du mot de passe)	Désactivé
Password expiration (Expir. mot de passe)	730 days (730 jours)

Référence au démontage et à la réparation

Vis

Quantité	Emplacement	Type	Taille / Long	Couple	Type d'embout
2	Panneau d'accès connexion carte de communication	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
1	Couvercle du module	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
2	Boîtier ou bouchon d'extrémité Braun	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
4	Plaque de retenue du module	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
10	Boîtier du module de poignée	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
3	Carte PCBA du contrôleur 767	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
2	Extension du boîtier supérieur	Entretoise hexagonale de 8 mm	M4x0.7	13,8 kg-cm ± 1, 15 kg-cm	Douille de 8 mm
6	Boîtier principal	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
4	Alimentation	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
4	Carte PCBA de communication	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
4	Carte radio (Lamar)	Machine à tête cylindrique	M3x0.5x8	6,9 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 1
3	Carte radio (Newmar)	Machine à tête cylindrique	M2x6	2,9 kg-cm ± 0, 29 kg-cm	Petite, Phillips
2	Couvercle de la barre des voyants	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
2	Panneau d'alimentation	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
2	Carte de batterie	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
1	Pince P, câble Ethernet	Machine à tête cylindrique	M3x0.5x8	6,9 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 1

Quantité	Emplacement	Type	Taille / Long	Couple	Type d'embout
			ueur		
7	Carte mère	Machine à tête cylindrique	M3x0.5x8	6,9 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 1
4	Châssis LCD	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
2	Puits du module	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
2	Pince P, faisceau de câbles USB	Machine à tête cylindrique	M4x10	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Phillips n° 2
4	Rails du module	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
2	Insert bleu	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10
2	Câble client USB	Plastite	n° 4-20 x 0,500	8,6 kg-cm ± 0,6 kg-cm	Torx T10

Connecteurs

Types de connecteur

Les procédures de démontage et de réparation nécessitent de débrancher et de rebrancher les types de connecteur suivants :

- **Verrouillage (pression-libération)** : les connecteurs de verrouillage utilisent un mécanisme d'encliquetage pour empêcher toute déconnexion accidentelle lors de l'assemblage et de l'utilisation. Le verrou est situé à une extrémité de la languette, ainsi il peut fléchir et s'enclencher lorsqu'il est combiné à son connecteur correspondant. La languette fournit un levier de libération du verrou. Lors du débranchement, appliquez une pression sur la languette pour la déverrouiller. Certains connecteurs ont plusieurs verrous. Vous êtes alors obligé d'appuyer sur plusieurs languettes pour libérer les verrous.

Pour retirer un connecteur de verrouillage, appuyez sur le levier de libération et retirez le câble.

Pour brancher un connecteur de verrouillage, appuyez sur les pièces d'accouplement tant que le verrou ne s'enclenche pas.

- **Pression** : les connecteurs de pression utilisent la friction pour éviter tout risque de déconnexion.

Pour retirer une prise de pression, saisissez chaque moitié d'accouplement du connecteur et séparez les deux moitiés.



MISE EN GARDE Ne faites pas usage de force excessive pour débrancher le connecteur. En effet, une force excessive peut déloger le connecteur monté de la carte à circuit imprimé.

Pour connecter un connecteur de pression, saisissez chaque moitié d'accouplement du connecteur et insérez une moitié sur l'autre.

- **USB** : les connecteurs USB assurent la communication et la connectivité entre la carte mère et les sous-systèmes ou les appareils externes. Les connecteurs USB utilisent la friction pour

maintenir la connexion, mais leur branchement ou leur débranchement nécessite rarement de la force. Vous pouvez retirer le câble USB du connecteur monté en toute sécurité. Il vous suffit de le tirer du connecteur. Deux types de connecteur USB sont utilisés : USB de type A et USB de type mini B.

Pour retirer un connecteur USB, saisissez le connecteur et tirez dessus.

Pour brancher un connecteur USB, saisissez le connecteur et insérez-le.

- **ZIF (zero insertion force)** (force d'insertion nulle) : l'appareil utilise des câbles flexibles et des connecteurs de câbles flexibles ZIF. Les câbles flexibles et les connecteurs ZIF exigent des soins particuliers lors de leur manutention.

Les connecteurs ZIF utilisent une pièce extérieure coulissante, qui se verrouille et se déverrouille pour fixer et libérer le câble flexible. Vous ne pouvez pas connecter ou déconnecter des câbles ZIF correctement sans avoir déverrouillé et verrouillé convenablement la pièce extérieure coulissante.




MISE EN GARDE Ne faites pas usage de force excessive pour relâcher la pression sur le connecteur. Vous risqueriez de casser la pièce extérieure coulissante.

Pour retirer un connecteur ZIF



MISE EN GARDE Retirez un câble flexible uniquement *après* l'ouverture du verrou ZIF.


1. Faites glisser la pièce d'encliquetage du connecteur en l'éloignant du boîtier du connecteur à l'aide d'un outil adapté (par exemple, un trombone, un petit tournevis à tête plate ou des pinces à long bec).

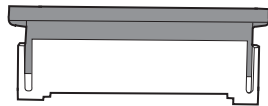

2. Retirez le câble.


Pour brancher un connecteur ZIF

1. Faites glisser la pièce d'encliquetage du connecteur en l'éloignant du boîtier du connecteur.
2. Insérez le câble flexible dans le connecteur. Vous aurez peut-être besoin d'un outil adapté pour conserver la pièce d'encliquetage surélevée.
3. Faites glisser la pièce d'encliquetage vers le boîtier du connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille.

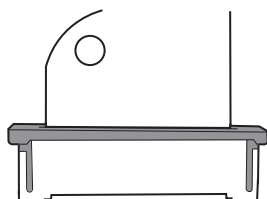

Connecteurs


Connecteurs de la carte mère

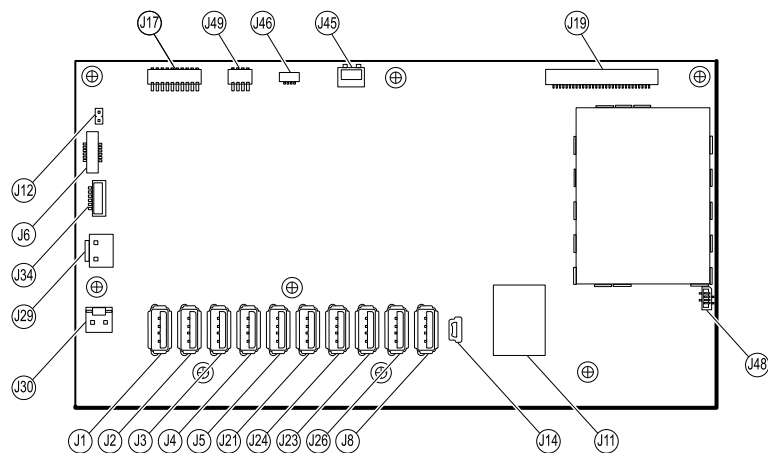

Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
J1	USB	MCE vers modules—Braun si nécessaire	USB
J2	USB	MCE vers modules	USB
J3	USB	MCE vers modules	USB
J4	USB	MCE vers modules	USB
J5	USB	MCE vers modules	USB
J6	Bouton d'alimentation	Bouton d'alimentation et état des voyants	ZIF
J8	USB	MCE vers carte PCBA de la poignée	USB
J11	Ethernet	Carte de communication	Verrouillage
J12	Faisceau principal	Haut-parleur	Pression
J14	Client USB	Carte de communication J8	Mini USB
J17	Non utilisé	Non utilisé	Pression
J19	LCD	Carte LCD	Pression
J21	USB	MCE vers SpO2	USB
J23	USB	Carte de communication J4	USB
J24	USB	MCE vers PNI	USB
J26	USB	Réservé à des fins ultérieures	USB
J29	Alimentation par batterie	Carte du connecteur de la batterie J2	Verrouillage
J30	Faisceau principal	Carte d'alimentation J2	Pression
J34	Batterie	Carte du connecteur de la batterie J3	Verrouillage



Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
J45	Faisceau principal	Connecteur du ventilateur sur le capot du bloc d'alimentation	Verrouillage
J46	Barre des voyants DEL	Carte de la barre des voyants J1	Pression
J48	Câble flexible LCD	LCD	Pression
J49	Faisceau principal	Alimentation de la carte de communication	Pression

Connecteurs de la carte du connecteur batterie

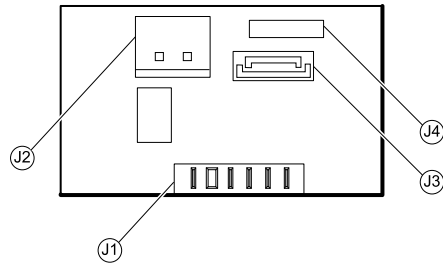

Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
J1	N/A	Batterie	Pression
J2	Alimentation par batterie	Carte mère J29	Verrouillage
J3	Batterie	Carte mère J34	Verrouillage
J4	N/A	Usage interne uniquement	N/A

Connecteurs de la carte de communication

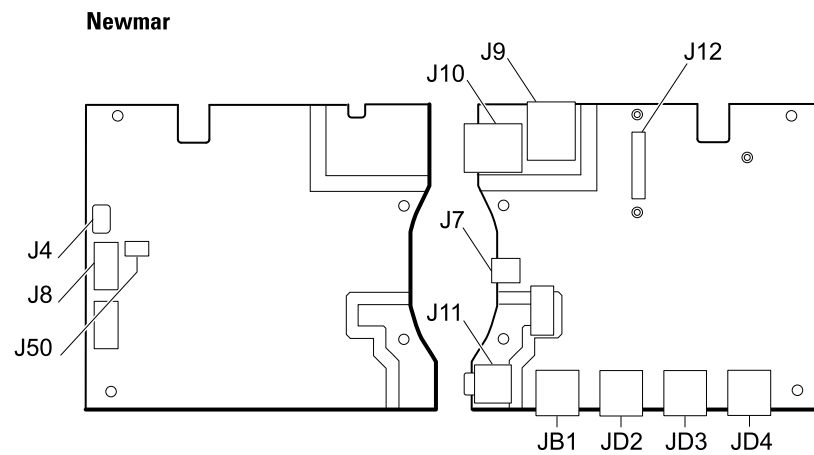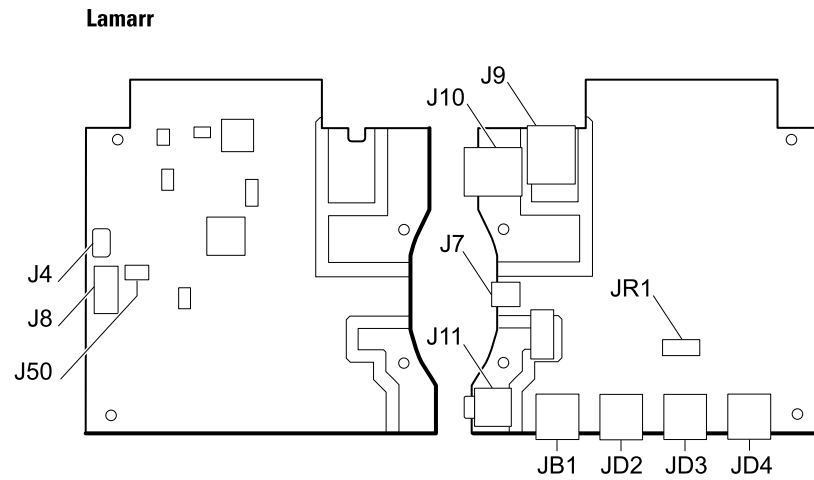


Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
J4	USB	Carte mère J23	Mini USB
J7	USB	(Client) externe	Mini USB
J8	USB	Carte mère J14	USB
J9	Ethernet	Carte mère J11	Verrouillage (RJ45)
J10	Ethernet	Externe	Verrouillage (RJ45)
J11 *	Appel de l'infirmier	Externe	Mini stéréo

Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
J12	N/A	Radio (Newmar)	Pression
J50	Principal	Carte mère J49	Pression
JB1	USB	Externe	USB
JD2 *	USB	Externe	USB
JD3 *	USB	Externe	USB
JD4 *	USB	Externe	USB
JR1 *	N/A	Radio (Lamarr)	Pression


* Non disponible sur la carte de communication de base.

Connecteurs de la carte radio

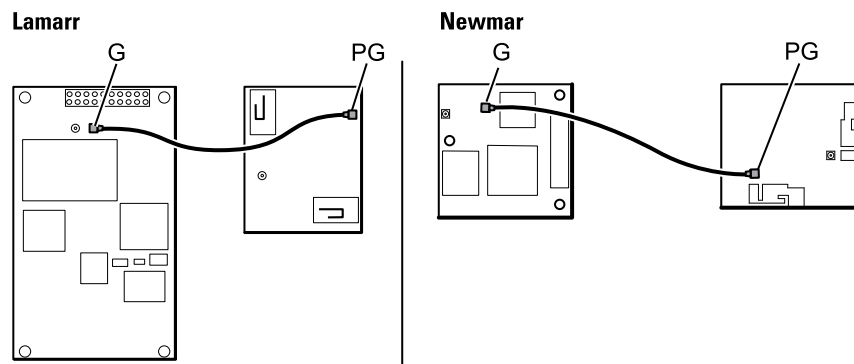


Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
B	Non utilisé	Non utilisé	Pression
G	Câble de l'antenne	PG de la carte de l'antenne	Pression
A (sans étiquette)	N/A	JR1 de la carte de communication standard (Lamarr) J12 de la carte de communication standard (Newmar)	Pression

Connecteurs de la carte de l'antenne

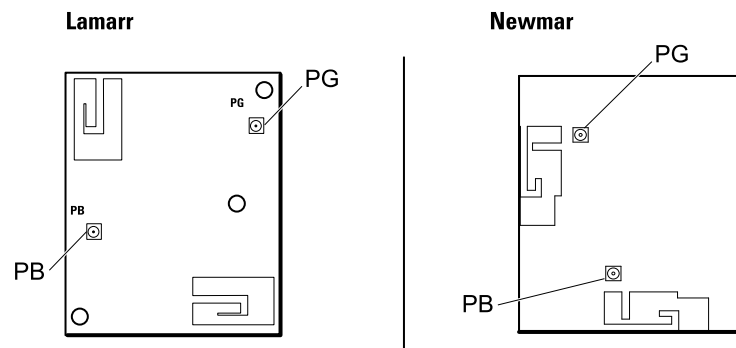


Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
PG	Câble de l'antenne	Carte radio G	Pression
PB	Non utilisé	Non utilisé	Pression

Connecteurs de la carte du contrôleur 767

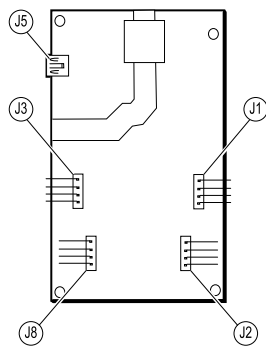

Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
J1	Système optique	Support de la poignée	Pression
J2	Ensemble poignée	Poignée	Pression
J3	Système optique	Support de la poignée	Pression
J5	USB	Carte mère J8	USB (mini)
J8	Ensemble poignée	Poignée	Pression


Connecteurs de la carte d'alimentation

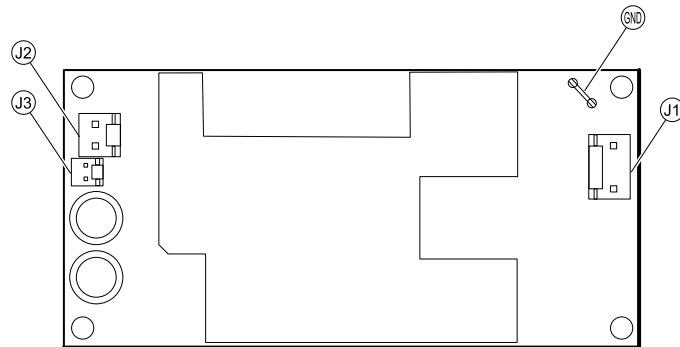


Connecteur	Faisceau de câbles	Connexion avec	Connecteur
J1	Courant alternatif à l'alimentation électrique	Connecteur CEI (bleu : neutre ; marron : phase)	Pression
J2	Faisceau principal	Carte mère J30	Pression
J3	S/O	Usage interne uniquement	N/A
GND	Courant alternatif à l'alimentation électrique	Connecteur CEI (vert : terre) via la tige de terre	Pression

Schéma d'interconnexion


Ce schéma concerne les appareils avec un séparateur de câbles USB à 6 trous.

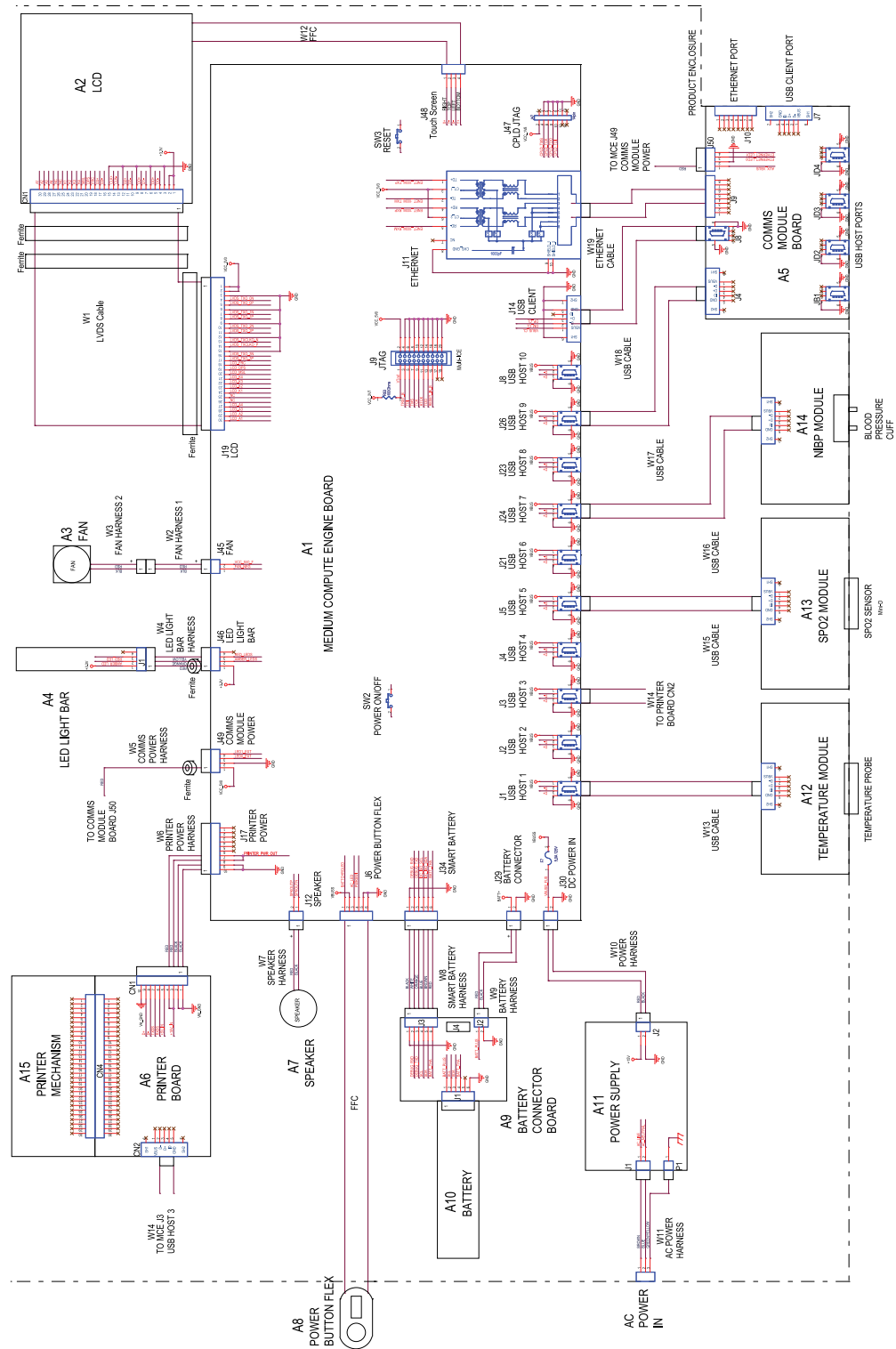

Ce schéma concerne les appareils avec un séparateur de câbles USB à 11 trous.

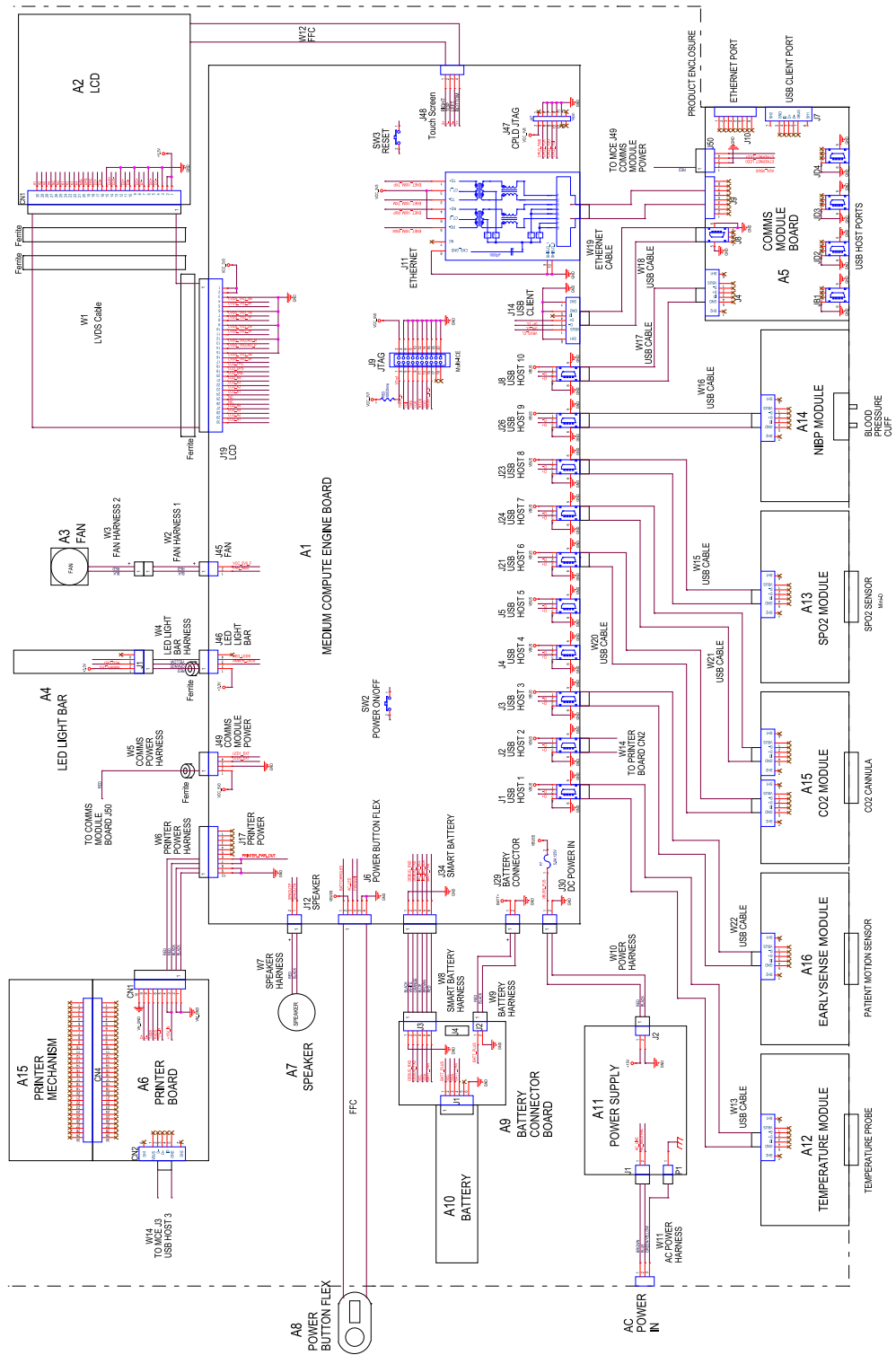

Ce schéma concerne les appareils conformes à la norme CEI 60601 3e édition et équipés d'un séparateur de câbles USB à 9 trous.

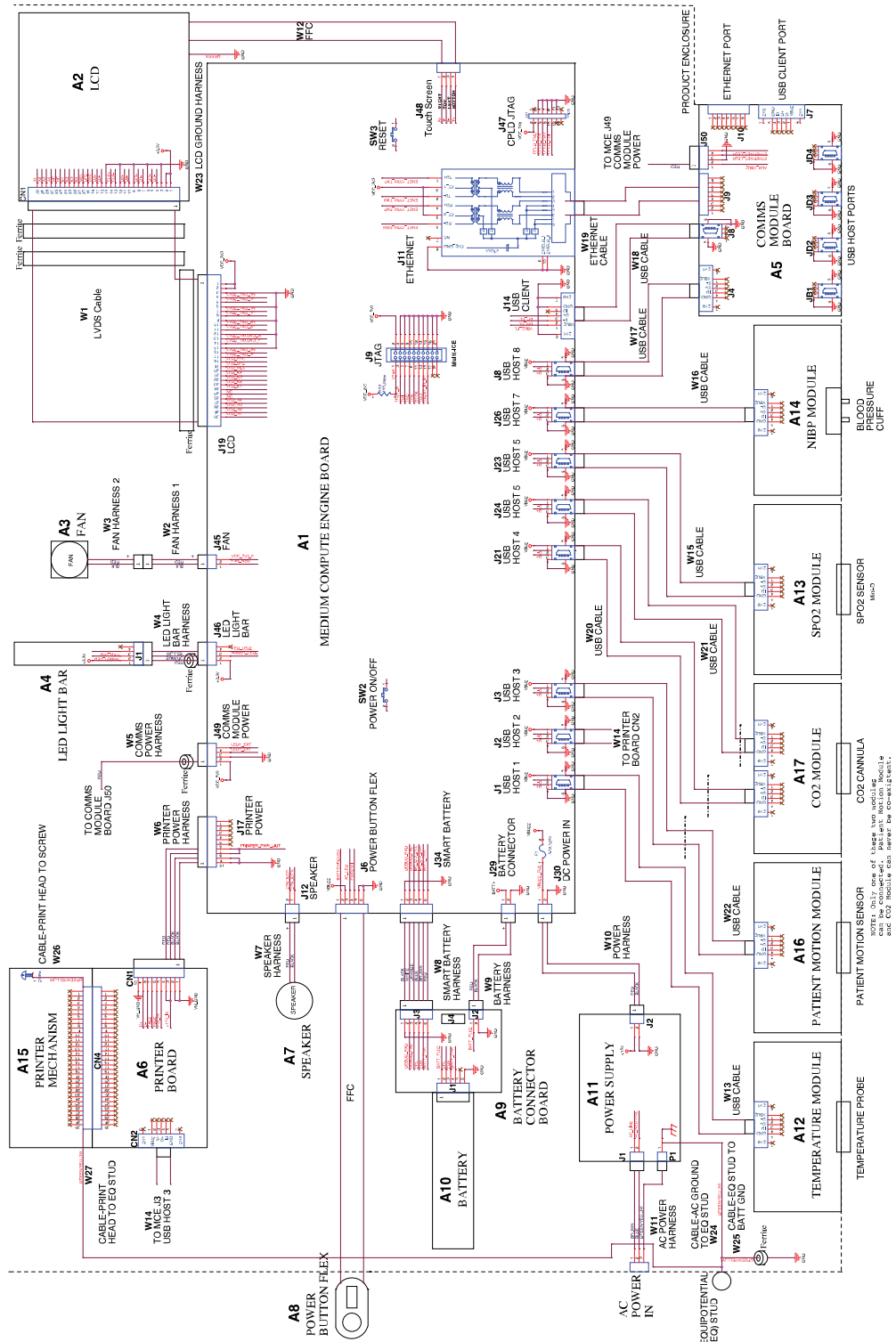

Trousse à outils d'entretien et de maintenance

Appareils connexes

Voici la liste des outils et des appareils de contrôle requis pour procéder à la vérification fonctionnelle de base, à la vérification fonctionnelle complète et à l'étalonnage, ainsi qu'à l'entretien et à la maintenance des appareils Connex (CVSM et CIWS) de Welch Allyn.



REMARQUE Les outils et les appareils de contrôle doivent être immédiatement disponibles pour dispenser une formation sur l'entretien technique Welch Allyn pour cet appareil.

Référence	Description	Qté	Utilisation	
			Complète	De base
Équipement de test général				
106270	Boîte test de service	1	X	
S/O	Routeur sans fil, a/b/g ou équivalent	1	X	
S/O	Câble Ethernet	1	X	
660-0138-00	Cordon de raccordement, 1,5 m, RJ45, T568B	1	X	
407022	Assemblage, câble d'appel infirmier MMF - service	1	X	
4500-925	Câble mini USB type B 2,0/5 broches, doré, 1,8 m	1	X	X
S/O	PC fonctionnant sous Windows 10	1	X	X
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn (version 1.8 ou ultérieure)	1	X	X
103396	Outil d'entretien Welch Allyn, licence Gold	1	X	
Test de la PNI				
407672	Dispositif de remise en état du volume de test BP 113670	1	X	X
S/O	Manomètre (au moins une décimale et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	1	X	X
S/O	Tube en Y du tensiomètre	1	X	X
6000-30	Tuyau du tensiomètre 1 tube, 1,5 m	1	X	X
4500-30	Tuyau du tensiomètre, 1,5 m	1	X	
620216	Raccord « Y » 1/8 x 1/8 x 1/8	1	X	X

Référence	Description	Qté	Utilisation	
			Complète	De base
Test de configuration Nellcor SpO2				
S/O	Simulateur de SpO2	1	X	X
DOC-10	Câble d'extension Nellcor SpO2	1	X	X
Test de configuration Masimo SpO2				
S/O	Simulateur de SpO2	1	X	X
Test de configuration SureTemp Plus				
06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1	X	X
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	X	
Test de configuration Braun ThermoScan PRO 4000 / PRO 6000				
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	X	
Test de configuration Braun ThermoScan PRO 6000				
411690	Dispositif d'étalonnage Braun PRO 6000	3	X	X
Test de configuration Masimo RRa				
105460	Testeur Masimo RRa	1	X	
Test de configuration CO2				
S/O	Kit d'étalonnage CO2 (T46530RF-2BD)	1	X	X

Remarques :

- Tous les articles avec la mention « S/O » dans la colonne Référence sont des outils et des équipements OEM ou standard non disponibles auprès de Welch Allyn. Les autres articles sont disponibles auprès de Welch Allyn ou d'un de ses distributeurs.
- Tous les articles cochés dans la colonne (Full) Complète sont requis pour procéder à la vérification fonctionnelle complète et à l'étalonnage. Le logiciel de l'outil d'entretien Welch Allyn et une licence active Gold sont également requis pour effectuer ces contrôles. La licence Gold est obtenue à l'issue de la formation sur l'entretien technique Welch Allyn.
- Tous les articles cochés dans la colonne Basic (De base) sont requis pour procéder à la vérification fonctionnelle de base. L'édition sans licence standard du logiciel de l'outil d'entretien Welch Allyn permet d'effectuer des contrôles de la PNI et des mises à niveau / mises à jour logicielles.

Référence	Description	Qté	Utilisation	
			Complète	De base
Équipement de test général				
106270	Boîte test de service	1	X	
S/O	Routeur sans fil, a/b/g ou équivalent	1	X	
S/O	Câble Ethernet	1	X	
660-0138-00	Cordon de raccordement, 1,5 m, RJ45, T568B	1	X	
407022	Assemblage, câble d'appel infirmier MMF - service	1	X	
4500-925	Câble mini USB type B 2,0/5 broches, doré, 1,8 m	1	X	X
S/O	PC fonctionnant sous Windows 10	1	X	X
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn (version 1.8 ou ultérieure)	1	X	X
103396	Outil d'entretien Welch Allyn, licence Gold	1	X	
Test de la PNI				
407672	Dispositif de remise en état du volume de test BP 113670	1	X	X
S/O	Manomètre (au moins une décimale et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	1	X	X
S/O	Tube en Y du tensiomètre	1	X	X
6000-30	Tuyau du tensiomètre 1 tube, 1,5 m	1	X	X
4500-30	Tuyau du tensiomètre, 1,5 m	1	X	
620216	Raccord « Y » 1/8 x 1/8 x 1/8	1	X	X
Test de configuration Nellcor SpO2				
S/O	Simulateur de SpO2	1	X	X
DOC-10	Câble d'extension Nellcor SpO2	1	X	X
Test de configuration Masimo SpO2				
S/O	Simulateur de SpO2	1	X	X
Test de configuration SureTemp Plus				
06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1	X	X
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	X	

Référence	Description	Qté	Utilisation	
			Complète	De base
Test de configuration Braun ThermoScan PRO 4000 / PRO 6000				
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	X	
Test de configuration Braun ThermoScan PRO 6000				
411690	Dispositif d'étalonnage Braun PRO 6000	3	X	X

Remarques :

- Tous les articles avec la mention « S/O » dans la colonne Référence sont des outils et des équipements OEM ou standard non disponibles auprès de Welch Allyn. Les autres articles sont disponibles auprès de Welch Allyn ou d'un de ses distributeurs.
- Tous les articles cochés dans la colonne (Full) Complète sont requis pour procéder à la vérification fonctionnelle complète et à l'étalonnage. Le logiciel de l'outil d'entretien Welch Allyn et une licence active Gold sont également requis pour effectuer ces contrôles. La licence Gold est obtenue à l'issue de la formation sur l'entretien technique Welch Allyn.
- Tous les articles cochés dans la colonne Basic (De base) sont requis pour procéder à la vérification fonctionnelle de base. L'édition sans licence standard du logiciel de l'outil d'entretien Welch Allyn permet d'effectuer des contrôles de la PNI et des mises à niveau / mises à jour logicielles.

Outils divers

- Embout Phillips n° 1
- Embout Phillips n° 2
- Embout Torx n° 10
- Douille de 8 mm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 2,9 kg-cm ± 0,29 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 6,9 kg-cm ± 1,15 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 8,6 kg-cm ± 0,57 kg-cm
- Tournevis dynamométrique étalonné pour 13,8 kg-cm ± 1,15 kg-cm
- Tournevis pour écrous à fente
- Pincette
- Pince à long bec
- Spudger
- Outil pour attache
- Pince coupante pour attache
- Lingettes nettoyantes douces pour optique
- Ciseaux ou autre outil de coupe
- Air comprimé pour supprimer la poussière et les débris
- Pièce de monnaie pour ouvrir la trappe de la batterie (choisir un format parfaitement adapté à la fente)
- Bande Pro Gaff

Connex Direct

Introduction

Suivez les étapes suivantes pour :

- configurer une connexion à Active Directory pour l'authentification du médecin
- configurer une connexion NTP pour la synchronisation de la date et de l'heure
- installer les certificats radio du réseau sans fil
- configurer une connexion directe HL7® pour permettre à un appareil Welch Allyn d'envoyer directement des requêtes patient et des signes vitaux à un EMR

Les fonctionnalités d'Active Directory et HL7 (connexion EMR directe) sont utilisées pour identifier, authentifier et autoriser les utilisateurs/médecins par l'intermédiaire d'une requête du médecin à partir de l'appareil.

Ces instructions s'appliquent aux dispositifs suivants :

- Moniteur Connex® Spot (CSM), version 1.32.01 ou supérieure
- Moniteur Connex® Vital Spot (CVSM), version 2.43.00 ou supérieure
- Système mural intégré Connex®, 2.43.00 ou version supérieure

Documents associés

Lors de l'utilisation de ce manuel, consultez ce qui suit :

- *Meilleures pratiques d'installation Welch Allyn réseau 80018745*
- *Interface 60080809 du dispositif de paramètres vitaux HL7 IDS Welch Allyn*
- *Welch Allyn® Guide de référence de l'outil de configuration 80027311*
- Outil d'entretien Welch Allyn :
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- *Guide de configuration et d'installation de l'outil d'entretien Welch Allyn :*
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- Site Web Hillrom : hillrom.com


Définitions

Acronyme/terme	Description
AD	Service d'annuaire développé par Microsoft pour fournir des informations structurées en arborescence. Utilisé pour authentifier et autoriser les utilisateurs de l'appareil.
Clinician Authentication (Authentification du médecin)	Fonctionnalité de flux de travail dans laquelle un médecin est requis pour se connecter à l'appareil. L'appareil garantit la validité des informations d'identification d'un médecin en fournissant une interface dans laquelle le médecin se connecte à l'appareil à l'aide de son ID et de son mot de passe. L'ID et le mot de passe sont validés par un système d'autorité sur le réseau (par exemple, Active Directory).
Clinician Identification (Identification du médecin)	Fonctionnalité de flux de travail dans laquelle le médecin saisit son ID dans l'appareil de façon à ce que le Clinician ID (ID de médecin) puisse être enregistré avec les signes vitaux.
Clinician Identifier (Identifiant du médecin)	Peut être configuré de façon à être le User name (Nom d'utilisateur), l'Account name (Nom de compte), ou l'Employee ID (ID d'employé) du médecin.
CSM	Connex Spot Monitor (Moniteur Connex Spot) : appareil Welch Allyn prenant en charge la PNI ; la température (SureTemp Plus et Braun) ; la SpO2 (Nellcor, Masimo et Nonin) ; le poids, la taille, et le BMI ; la douleur et d'autres paramètres configurés.
CVSM et CIWS	Connex Vital Signs Monitor (Moniteur de signes vitaux Connex) et Connex Integrated Wall System (Système mural intégré Connex) : appareils Welch Allyn qui prennent en charge la PNI ; la température (SureTemp Plus et Braun) ; la SpO2 (Nellcor, Masimo et Nonin) ; la fréquence respiratoire, le poids, la taille et l'IMC ; la douleur ; le CO2 ; et d'autres paramètres configurés.
DC	Domain Component (Composante de domaine) : dans les serveurs LDAP et Active Directory, un nom de domaine en pointillés est divisé en composantes de domaine formant des paires « dc=component » séparées par des virgules. Exemple : ad.welchallyn.com dans un serveur AD sera « dc=ad,dc=welchallyn,dc=com »
FQDN	Fully Qualified Domain Name (Nom de domaine complètement qualifié). Nom de domaine complet d'un ordinateur sur Internet. Contient le nom d'hôte et le domaine complet.
Gateway Software (Logiciel de passerelle)	Application logicielle qui peut recevoir des données d'un appareil et les convertir en messages HL7, puis transmettre lesdites données via une interface de connexion TCP/IP.

Acronyme/terme	Description
HL7	Health Level 7 (Niveau de santé 7) : cadre d'échange, d'intégration, de partage et de récupération des informations de santé électroniques.
Host HL7 System (Système hôte HL7) ou Host Application (Application hôte)	Système logiciel qui reçoit les données HL7 en provenance de l'appareil.
IDS	Interface Design Specification (Spécification de conception d'interface)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (Protocole allégé d'accès annuaire) : protocole standard de l'industrie de gestion des informations d'annuaire distribuées. Souvent utilisé pour les noms d'utilisateur et les informations de mot de passe.
NTP	Network Time Protocol (Protocole de synchronisation réseau) est un protocole réseau permettant la synchronisation de l'horloge entre les systèmes informatiques. Il est utilisé par les appareils pour maintenir une date/heure précise dans les appareils.
Patient Confirmation (Confirmation du patient)	Action de la configuration et/ou du comportement de l'appareil garantissant que le dossier des signes vitaux contient le contexte du patient.
Patient Identification (Identification du patient)	Action de la configuration et/ou du comportement de l'appareil qui affiche le contexte du patient sur l'appareil et qui permet au médecin de s'assurer que les signes vitaux appropriés sont bien adaptés au patient.
SSL	Secure Sockets Layer (Couche de sockets sécurisés) : ensemble de protocoles de chiffrement assurant la sécurité des communications sur un réseau. SSL est un prédécesseur de TLS.
Vitals Device (Dispositif de signes vitaux)	Noms génériques pour CSM, CVSM et CIWS.
X.509 Certificate (Certificat X.509)	Un certificat X.509 est un certificat numérique qui utilise la norme d'infrastructure à clé publique (PKI) X.509 internationale largement acceptée pour vérifier qu'une clé publique appartient à l'identité de l'utilisateur, de l'ordinateur ou du service contenue dans le certificat.

Architecture

*Paramètre facultatif au sein de l'appareil.

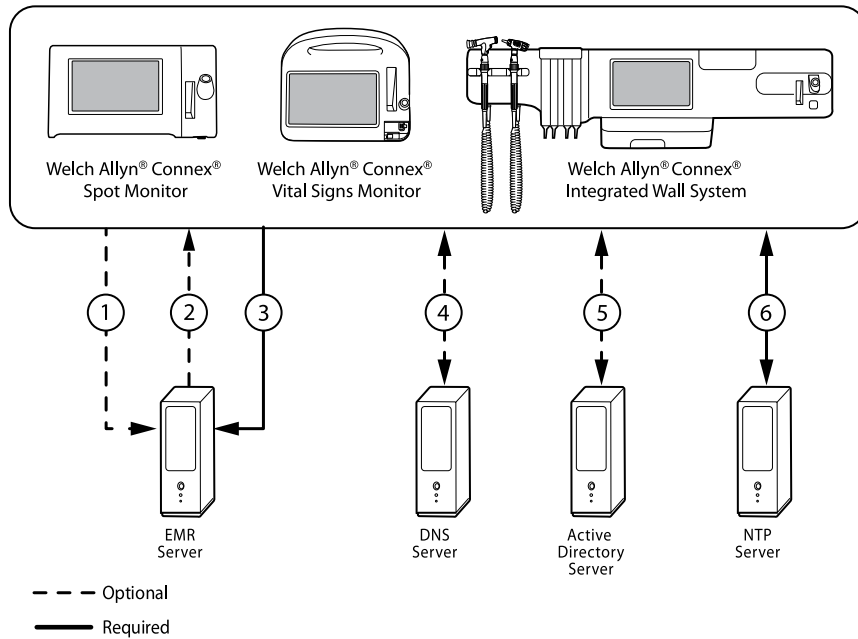

Serveur

Serveur EMR

- 1 Requête patient HL7 (QRY^A19) AES-128*
- 2 Données démographie du patient HL7 (RSP^K22) AES-128*
- 3 Paramètres vitaux HL7 (ORU^R01) AES-128*

Serveur DNS

- 4 Recherche DNS

Serveur Active Directory

- 5 Authentification du médecin

Serveur NTP

- 6 Synchronisation date/heure
-

Caractéristiques techniques

Ports

Port(s) d'écoute	Un port d'écoute TCP/IP unique sur l'EMR (ou le serveur externe) doit être disponible pour recevoir des connexions de plusieurs périphériques.
------------------	--

Configuration requise

Fréquence des messages NTP	La ou les solutions d'hôte NTP doivent être aptes à traiter les demandes de synchronisation toutes les 36 secondes (consultez l'IDS pour plus de détails sur les calculs).
Fréquence des messages Active Directory	La ou les solutions d'hôte doivent être aptes à traiter les demandes d'authentification de médecin toutes les 36 secondes (consultez l'IDS pour plus de détails sur les calculs).
Recherche de patient et/ou envoi de signes vitaux	La ou les solutions d'hôte doivent être aptes à traiter les demandes de recherche de patient toutes les 1,2 seconde (consultez l'IDS pour plus de détails sur les calculs).

Réseau

Connexion Internet	Une connexion Internet peut être nécessaire en fonction de la configuration du NTP. Si le NTP est configuré pour utiliser un serveur de synchronisation externe (par exemple, time.nist.gov), le périphérique doit pouvoir se connecter à Internet.
--------------------	---

Prise en charge des appareils

Quantité	Certains systèmes peuvent aller jusqu'à 400 appareils, voire plus, selon l'environnement clinique.
Appareil(s)	Moniteur Connex Spot (CSM) avec la version logicielle 1.30 ou supérieure Moniteur Connex Vital Spot (CVSM), 2.43.00 ou supérieur Connex Integrated Wall System

Configuration d'Active Directory

Conditions préalables :

- Vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées sur l'appareil.



REMARQUE Cela permet de garantir que la date et l'heure de l'appareil se situent dans la période de validité du Certificate Authority (CA) Root Certificate (Certificat racine de l'autorité de certification [CA]), permettant une connexion réussie.

- Chargez le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil et le Server Certificate (Certificat de serveur) sur le serveur Active Directory.



REMARQUE La connexion au serveur Active Directory peut échouer en raison d'un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) manquant sur l'appareil et d'un Server Certificate (Certificat de serveur) manquant sur le serveur AD. (Consultez : « Importer/ installer un certificat de serveur Active Directory sur le serveur Active Directory » et « Importer/installer une autorité de certification (Certificat racine de CA sur le serveur Active Directory »). Une CA peut être : un tiers (GoDaddy, Symantec, Comodo), ou une Self-Signed - Internal CA (CA interne autosignée) (AD CS)

- Vérifiez l'affectation de l'IP du serveur DNS sur l'appareil par l'intermédiaire d'une configuration DHCP ou statique.
 - Assurez-vous que le ou les serveurs DNS affectés sur l'appareil peuvent correctement interroger le Domain Name (Nom de domaine) saisi sur l'interface utilisateur d'Active Directory.

Format du CA Root Certificate (Certificat racine de CA)

- Le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) peut être au format PEM ou DER et avoir les extensions « .pem », « .der », « .crt » ou « .cer ».
- Ces fichiers de certificat sont convertis au format PEM pendant le processus de chargement sur l'appareil.

Spécification des paramètres d'Active Directory

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter Password**.
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Réseau**.
3. Appuyez sur l'onglet **Active Directory**.

Paramètres d'Active Directory

- Activez Active Directory (activez ou désactivez la fonction).



REMARQUE L'appareil utilise toujours le TLS pour chiffrer les communications entre le serveur Active Directory et l'appareil. Si une connexion chiffrée ne peut pas être établie, l'appareil ne communiquera pas avec le serveur.



REMARQUE Dans le cadre de l'établissement de la connexion TLS, le logiciel de l'appareil demande un certificat X.509 au serveur Active Directory et le valide par rapport à un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) mémorisé. Si le serveur AD ne peut pas être validé, l'appareil ne poursuivra pas les communications avec le serveur Active Directory.

Host name or IP address (Nom d'hôte ou adresse IP)

Utilisez le FQDN ou l'adresse IP d'Active Directory.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Host name* (Nom d'hôte) ou *IP address* (Adresse IP).
2. Saisissez un Host name (Nom d'hôte) (FQDN) ou une IP address (Adresse IP) du serveur Active Directory dans la zone de texte.



REMARQUE Le FQDN se compose de l'Host name (Nom d'hôte) et d'un Domain name (Nom de domaine).

Exemple : <Hostname>.<DomainName>

Exemple : SomeActiveDirectoryhost.someDomain.com

Port

Le port LDAP « 389 » standard est utilisé pour authentifier et autoriser les médecins

1. Appuyez sur le pavé numérique dans la zone de texte *Port*.
2. Saisissez le Port Number (Numéro de port) à l'écoute de la connexion LDAP sur le serveur Active Directory.



REMARQUE Conservez l'entrée de port « 389 » par défaut.

Domain Name (Nom de domaine)

Domain Name (Nom de domaine) représente l'espace de noms de domaine du serveur.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Domain name* (Nom de domaine).

Le FQDN se compose de l'Host name (Nom d'hôte) et d'un Domain name (Nom de domaine).

Exemples :

<DomainName>

someDomain.com

hillrom.com

service.hillrom.com

Group (Groupe)

Sélectionnez le groupe auquel le médecin doit appartenir pour être authentifié.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Group* (Groupe).
- Si le champ Group (Groupe) est vide, aucun groupe ne sera coché.
 - S'il y a une valeur, la requête vérifiera une mise en correspondance du Group (Groupe). Il s'agit d'une chaîne alphanumérique.

Exemples :

ServiceGroup (Groupe de service)

Service Group 1 (Groupe de service 1)

Clinician ID type (Type d'ID de médecin)

Le Clinician ID type (Type d'ID de médecin) est sélectionné dans le menu déroulant des 3 options répertoriées. (User name [Nom d'utilisateur], Account name [Nom de compte], ou Employee ID [ID d'employé]). Ces options correspondent aux champs communs d'Active Directory.

1. Appuyez sur le menu déroulant dans le champ *Clinician ID type* (Type d'ID de médecin).
- L'appareil effectue une mise en correspondance à l'aide de l'option sélectionnée lorsque le médecin se connecte à l'appareil.
 - Le réglage du Clinician ID type (Type d'ID de médecin) est basé sur la politique de l'établissement. La politique de l'établissement détermine la manière dont les employés sont censés se connecter à un appareil et ce qui est codé dans un code-barres si des codes-barres sont utilisés.

Exemples :

« userPrincipalName » (**User name** [Nom d'utilisateur])

« SAMAccountName » (**Account name** [Nom de compte])

« employeeid » (**Employee ID** [ID d'employé])

User name (Nom d'utilisateur) Attribut de chaîne contenant l'Account name (Nom de compte) d'utilisateur et le Domain name (Nom de domaine) DNS combinés.

Exemples :

Account name (Nom de compte)	<UserAccountName>@<DomainName> serviceUser@hillrom.com
	Attribut À VALEUR UNIQUE qui correspond au nom de compte d'utilisateur uniquement.
	Exemples :
	<UserAccountName> serviceUser (Utilisateur de service)
Employee ID (ID d'employé)	Représente l'ID d'employé de l'utilisateur indiqué sur le serveur Active Directory.
	Exemples :
	<employeeID> 1234567890

Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification)

L'Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification) représente le nom d'un utilisateur autorisé à effectuer des recherches de médecins sur le serveur Active Directory. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Authentication user name* (Nom d'utilisateur d'authentification).

Exemples : UserName@DomainName.com
Administrator@hillrom.com

Authentication password (Mot de passe d'authentification)

L'Authentication password (Mot de passe d'authentification) représente le mot de passe de l'Authentication Username (Nom d'utilisateur d'authentification). Il s'agit d'une chaîne alphanumérique sensible à la casse.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Authentication password* (Mot de passe d'authentification).

Exemple : P@SSW@RD!23

Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence)

Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence) recherche un médecin dans une « Organizational Unit » (OU) (Unité organisationnelle). Une Organizational Unit (OU) (unité organisationnelle) représente une sous-division d'Active Directory dans laquelle vous pouvez placer des Users (Utilisateurs), des Groups (Groupes), des Computers (Ordinateurs) et d'autres Organizational Units (Unités organisationnelles).

Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence) doit être vide si vous recherchez simplement un médecin dans le Group (Groupe) ou les Domain/SubDomain Users (Utilisateurs de domaine/sous-domaine).

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Search subtree* (Rechercher dans la sous-arborescence).

Exemples : OU=OUname (OU = nom d'OU), DC=DomainPrefix (DC = Préfixe de domaine), DC=DomainSuffix (DC = Suffixe de domaine)

OU=someOU (OU = certaines OU), DC=someDomain (DC = certains domaines), DC=com

OU=serviceOU (OU = OU de service), DC=hillrom, DC=com

OU=serviceOU (OU = OU de service), DC=eastcoast (DC = côte Est), DC=hillrom, DC=com

Test network connection (Tester la connexion réseau)

Effectuez une recherche du Default Naming Context (Contexte de dénomination par défaut) pour tester la connexion réseau au serveur Active Directory et pour tester l'utilisation du nom d'utilisateur administrateur et du mot de passe administrateur, ainsi que la recherche de domaine.

1. Appuyez sur **Test network connection** (Tester la connexion réseau) pour tester la connexion de l'appareil au serveur Active Directory.

Test

Effectuez une recherche du Default Naming Context (Contexte de dénomination par défaut) pour tester la connexion réseau au serveur Active Directory et pour tester l'utilisation du nom d'utilisateur administrateur et du mot de passe administrateur, ainsi que la recherche de domaine.

1. Appuyez sur **Test** (Tester) pour tester la connexion de l'appareil au serveur Active Directory.

CVSM

Pour des détails spécifiques sur le processus de chargement du certificat racine de l'AC, consultez la section « *Chargement d'un fichier waclientcert.pim dans le CVSM avec une radio Newmar via une clé USB flash* »

Active Directory - Détails de la configuration (meilleures pratiques)

Conditions préalables

Configurez les serveurs DNS et Active Directory et assurez-vous que votre version prend en charge cette fonctionnalité.

Les sections suivantes décrivent la façon de configurer et d'utiliser la fonction Active Directory de l'appareil pour l'authentification du médecin.

Prise en charge de la configuration d'Active Directory

Installez les certificats requis

Pour que l'appareil se connecte à Active Directory, vous devez inclure Active Directory CA (Certificate Authority) Root Certificate (Certificat racine de CA [autorité de certification] de répertoire actif) dans la configuration de l'appareil.



REMARQUE La connexion au serveur Active Directory peut échouer pour les raisons suivantes : un **CA Root Certificate** (Certificat racine de CA) manquant sur l'appareil, un certificat de format incorrect sur l'appareil (les certificats cacert.cer ne sont pas reconnus par la radio sans fil de CSM) ou un **certificat de serveur** manquant sur le serveur Active Directory. Pour s'authentifier auprès du serveur Active Directory, le CSM doit disposer d'un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) de la même autorité de certification (CA) qui a émis un certificat de serveur vers le serveur Active Directory.



REMARQUE Le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) doit être au format PEM ou DER. Si vous ne respectez pas ces restrictions, l'appareil ignorera le certificat.

Exemples d'autorité de certification (CA) :

- Tiers (GoDaddy, Symantec, Comodo, etc.)

ou

- CA interne (AD CS) - certificats autosignés

Importez ou installez des certificats tiers ou d'autorité de certification AD CS

Demandez et importez/installez les certificats d'autorité de certification AD CS suivants :

- Server certificate (Certificat de serveur) sur le serveur Active Directory via le **Windows Certificate Store** (Magasin de certificats Windows)
- CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur le serveur Active Directory via le **Windows Certificate Store** (Magasin de certificats Windows)
- CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil de CSM via le **Config File** (Fichier de configuration) généré par le Configuration Tool (Outil de configuration)
- CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur les appareils de CVSM/CIWS via **une clé USB dans le dossier CA_CERTIFICATES** (CERTIFICATS_CA)

Installez les certificats radio du réseau sans fil

Authentification du réseau sans fil – certificats radio

Hillrom prend en charge le téléchargement de vos certificats sans fil sur les appareils de signes vitaux. Le téléchargement des certificats peut être effectué à l'aide de différentes méthodes en fonction de la conception du produit, toutefois les certificats doivent être dans un format spécifique et nommés correctement pour le déploiement sur un appareil. Ce document ne spécifie pas les instructions pour un serveur spécifique, cependant il fournit des informations sur la prise en charge des certificats de client sans fil et des certificats de client sans fil prenant en charge l'authentification du serveur. Cette prise en charge concerne les produits Hillrom utilisant la carte radio Newmar 802.11 a/b/g/n et la carte radio Lamarr 802.11 a/b/g.



REMARQUE Les certificats client qui sont téléchargés sur les appareils Hillrom doivent être conformes à la norme x.509.

Formats de certificat radio pris en charge

La radio 802.11 a/b/g/n prend en charge le format de fichier **DER** ou **PEM** contenant la chaîne de **certificats racine de CA** : cacert.der ou cacert.pem.

La radio 802.11 a/b/g/n prend également en charge les formats de fichier **P12**, **PFX**, ou **PEM** contenant le **certificat client** et la clé privée de l'appareil : client.p12, client.pfx ou client.pem.



REMARQUE Si un fichier P12 or PFX est fourni, la radio Newmar le convertira automatiquement au format PEM lors de l'installation.

Pas de validation du serveur – pas de certificats

Les appareils n'ont pas besoin de charger le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) correspondant pour s'authentifier.

Il n'est pas nécessaire de créer un certificat pour la validation du serveur (par exemple EAP-PEAP avec l'option Enable Server Validation [Activer la validation du serveur] - désactivée).

Aucun certificat n'a besoin d'être chargé sur les appareils pour que l'authentification PEAP réussisse. Seules les entrées suivantes sont requises :

- Username (Nom d'utilisateur)
- Password (Mot de passe)

Fichier « waclientcert.pim »


Pour un certificat à charger sur la radio 802.11 a/b/g/n à l'aide de l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST), le certificat doit être formaté au format de fichier « waclientcert.pim ». Ce fichier « .pim » est un système de stockage spécifique à Hillrom qui contient les certificats client, les commandes et les informations sur la façon dont les certificats sont chargés. Il indique également les dossiers sur lesquels les certificats sont écrits sur le système du fichier radio.

Vous ne pouvez pas renommer un certificat client existant ou un certificat CA en tant que « waclientcert.pim » ou le télécharger car il manque au certificat des informations sur l'endroit où le certificat doit être déployé sur la radio et sur la façon dont le produit doit traiter le fichier. Le fichier « waclientcert.pim » doit être créé à l'aide d'une procédure Welch Allyn.


Création d'un fichier waclientcert.pim à l'aide de l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST)

L'outil d'entretien Welch Allyn (WAST) peut créer le fichier « **waclientcert.pim** » en utilisant un « ca cert » (vérification de serveur) uniquement ou un « ca cert » et un « client cert » (pour l'authentification du client).


1. Créez un dossier sur le PC ou sur une clé USB et placez le certificat CA et, si nécessaire, le certificat client dans le même dossier.
2. Connectez un appareil au PC qui exécute le WAST et attendez que l'appareil soit utilisable.
3. Cliquez sur **Sélectionner** pour choisir l'appareil souhaité dans la « Device list » (Liste d'appareils) du WAST.

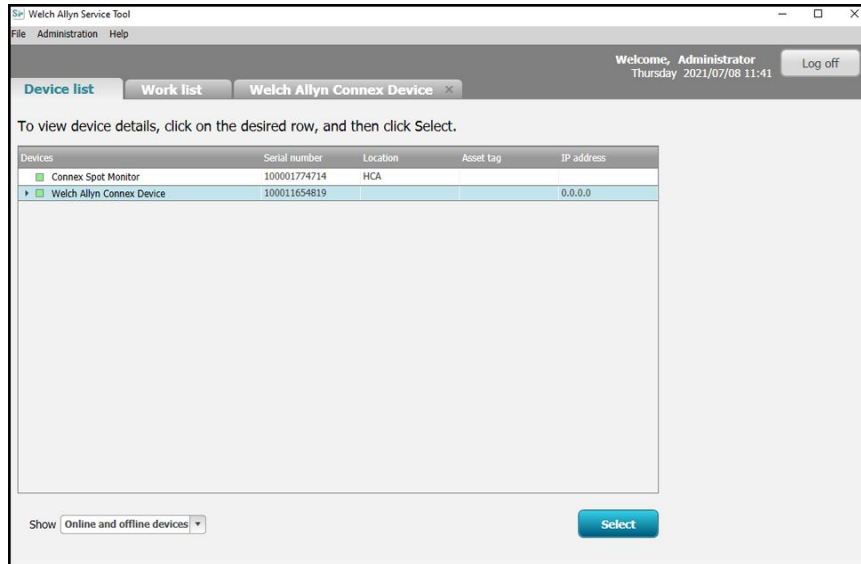


4. Cliquez sur l'onglet *Configure* (Configurer), puis cliquez sur **Change...** (Modifier...) dans le volet Current settings (Paramètres actuels).

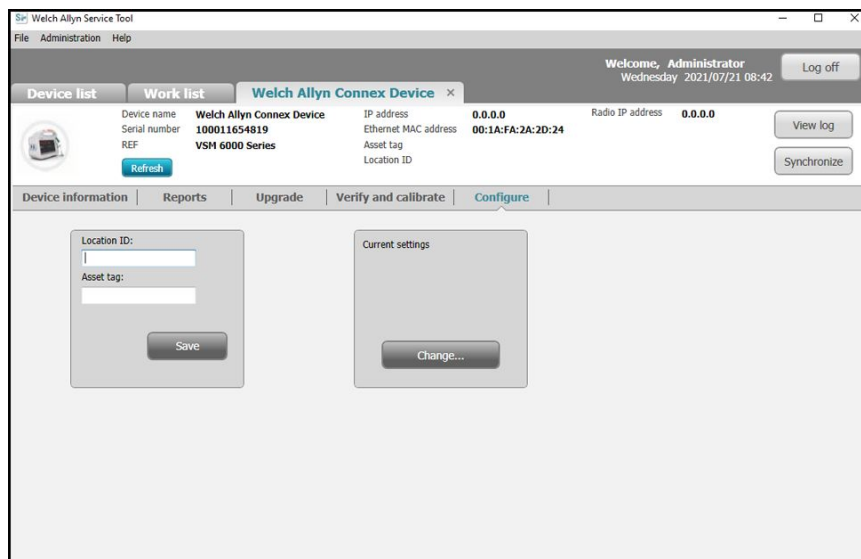

5. Sélectionnez l'onglet *Network Policy Server Certificate* (Certificat du serveur de politique réseau).

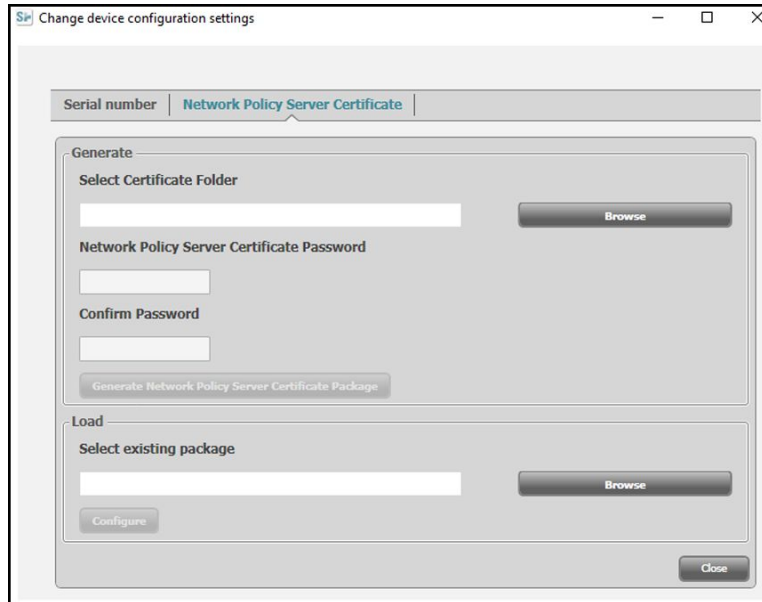

- Utilisez le bouton **Browse** (Parcourir) pour sélectionner le dossier dans lequel les certificats client sont conservés, ce qui entraînera le remplissage du champ *Select Certificate Folder* (Sélectionner un dossier de certificats) avec un chemin d'accès aux certificats client.

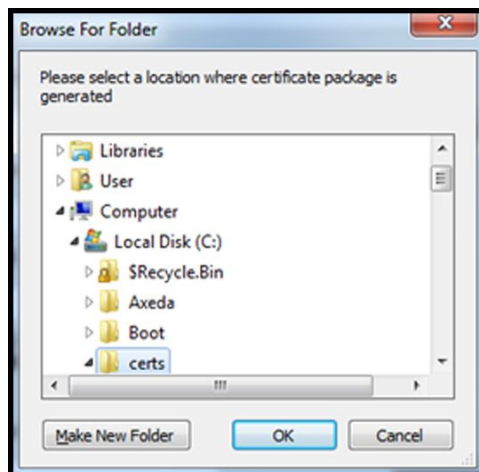

Certificat unique de validation du serveur

Si le certificat a été créé pour la validation du serveur (par exemple EAP-PEAP avec la case **Enable Server Validation** [Activer la validation du serveur] cochée), le dossier créé doit uniquement contenir un « ca cert » (certificat CA). Un certificat client n'est pas requis.

Les champs Network Policy Server Certificate Password (Mot de passe de certificat du serveur de politique réseau) et Confirm Password (Confirmer le mot de passe) sont inactifs pour être modifiés. Toutefois, l'appareil doit charger le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) correspondant pour s'authentifier.

Le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) doit être chargé sur les deux appareils pour que l'authentification PEAP réussisse.


- Username (Nom d'utilisateur)
- Password (Mot de passe)
- CA Root Certificate (Certificat racine de CA) (installé via WAST)(installé via une clé USB)

Certificat d'authentification du client


Si le certificat à créer sert à l'authentification du client (par exemple EAP-TLS), le dossier créé doit contenir un « ca cert » (certificat CA) et un « client certificate » (certificat client). Les champs *Network Policy Server Certificate Password* (Mot de passe de certificat du serveur de politique réseau) et *Confirm Password* (Confirmer le mot de passe) doivent être renseignés avec le mot de passe créé pour le certificat client au moment de la création.



REMARQUE Le WAST ne vérifie pas que le mot de passe du client est correct, il se charge uniquement sur la radio CSM pour l'authentification. Ce mot de passe doit être connu pour que le client puisse s'authentifier sur le réseau.

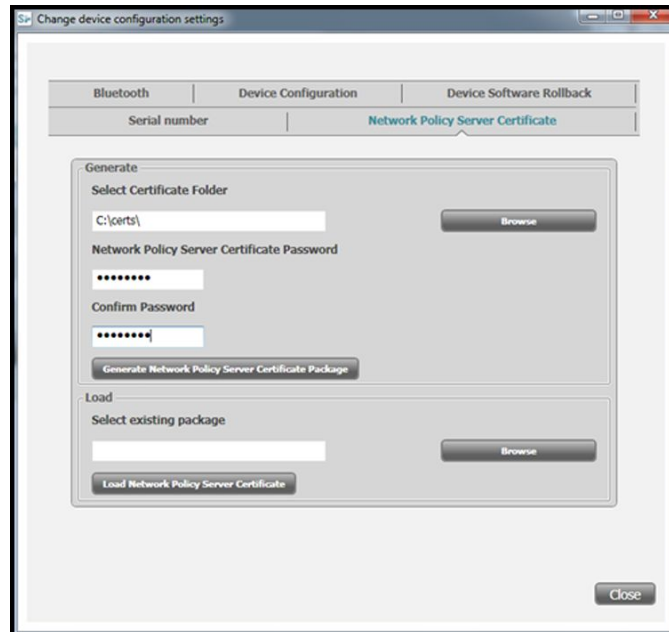

1. Une fois le chemin d'accès aux certificats saisi (et Server Verification Only [Vérification du serveur uniquement] ou Client Authentication [Authentification du client] sélectionné), cliquez sur **Generate Network Policy Server Certificate Package** (Générer le package du certificat du serveur de politique réseau) et naviguez jusqu'au dossier de destination où le fichier « waclientcert.pim » écrit apparaît.

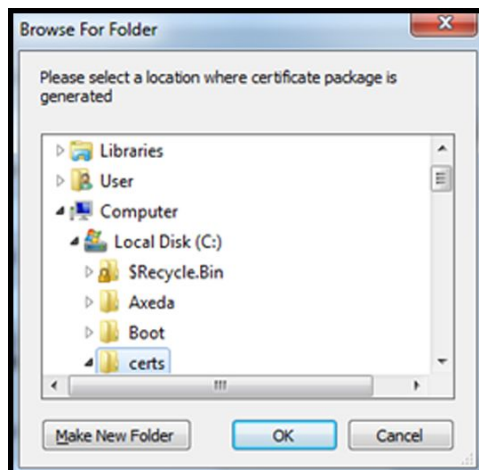


Pour plus de commodité, nous vous conseillons d'enregistrer le fichier « waclientcert.pim » dans le même répertoire que les fichiers de certificat.

- Après avoir sélectionné l'emplacement de destination et cliqué sur OK, les fenêtres d'état « Compressing » (Compression), « Generating » (Génération) et « Success » (Réussite) s'affichent.


Le dossier de destination comprend à présent le fichier « waclientcert.pim » ainsi que les fichiers de certificat.

Charger un fichier waclientcert.pim sur l'appareil à l'aide d'une radio Newmar via le WAST (Welch Allyn Service Tool)


- Débranchez la connexion USB entre l'ordinateur et l'appareil.
- Lancez l'outil d'entretien WAST (Welch Allyn Service Tool) sur le PC.
- Redémarrez l'appareil et laissez-le revenir à un état utilisable.
- Branchez la connexion USB entre l'ordinateur et l'appareil.
- Cliquez sur **Sélectionner** pour choisir le périphérique souhaité dans la « Liste de périphériques » du WAST.

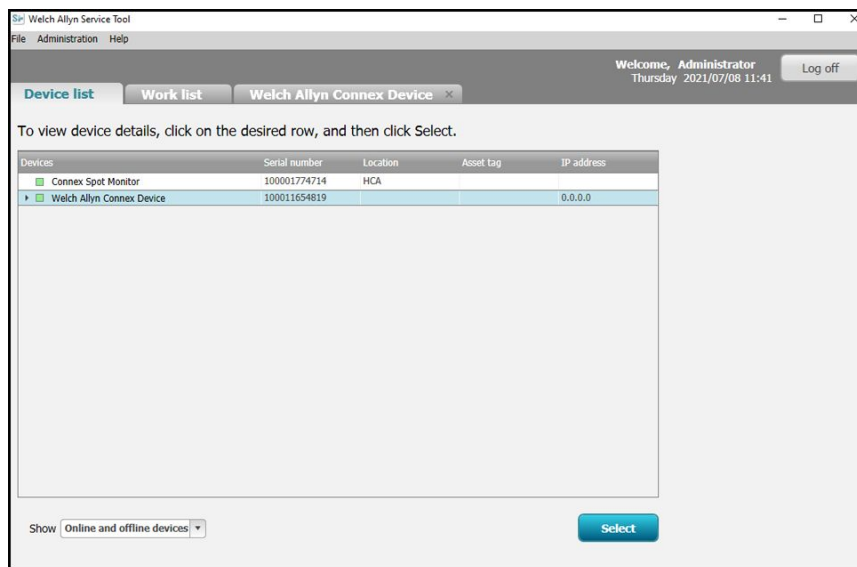

- Cliquez sur l'onglet *Configure* (Configurer), puis cliquez sur **Change...** (Modifier) dans le volet Current settings (Paramètres actuels).

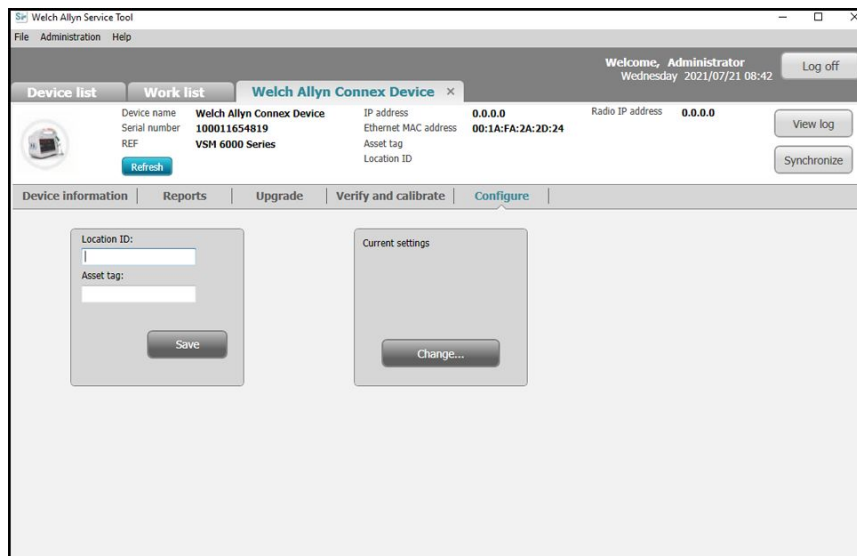


- Sélectionnez l'onglet *Network Policy Server Certificate* (Certificats de serveur NPS).

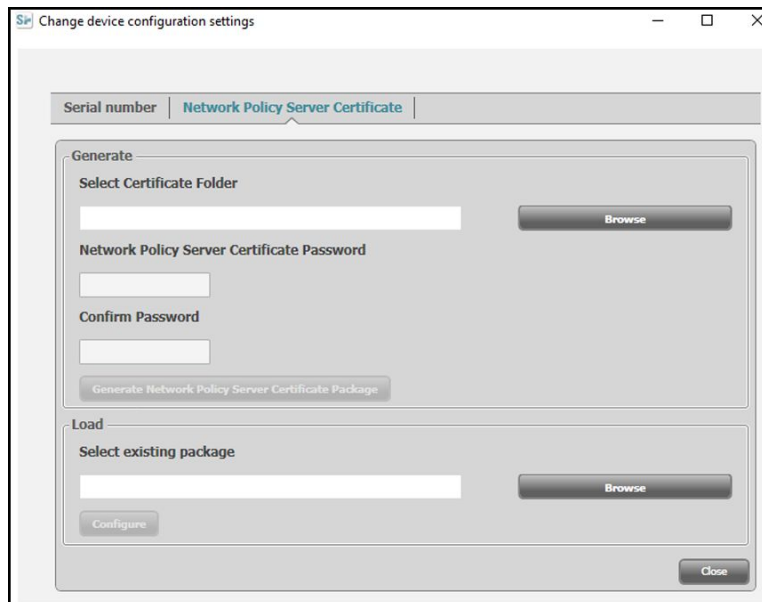


- Cliquez sur **Browse** (Parcourir) dans le volet *Load* (Chargement) et naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier 'waclientcert.pim'.

Le champ *Select existing package* (Sélectionner le package existant) affiche le chemin d'accès au fichier waclientcert.pim.

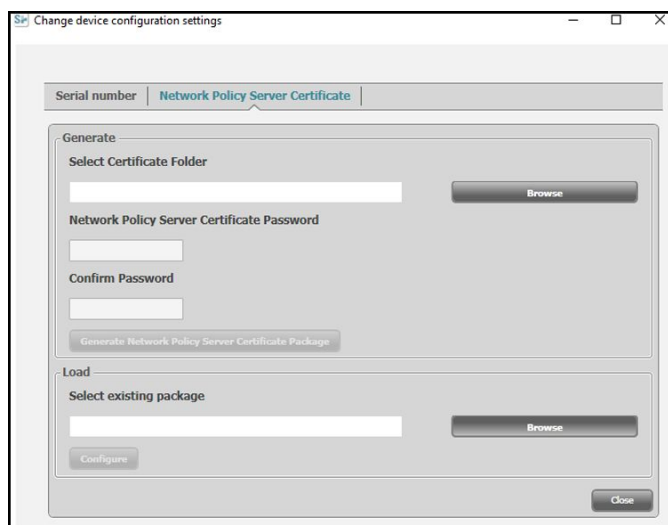

- Cliquez sur **Configure** (Configurer) pour charger le certificat dans la radio de l'appareil.

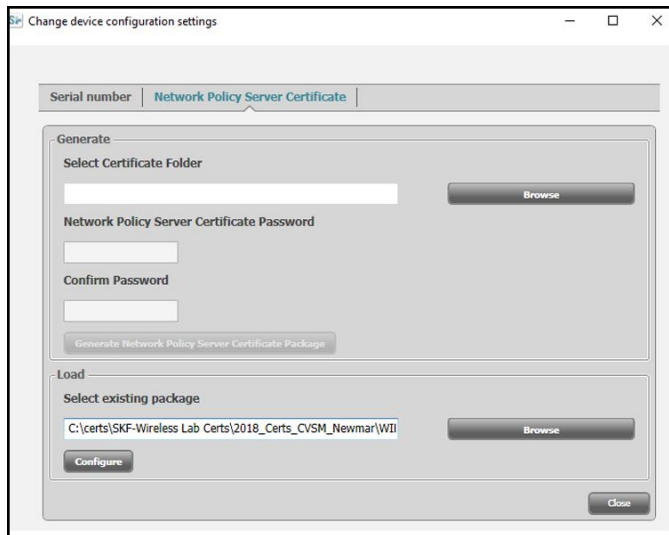


Une boîte de message affiche la progression de l'installation. Le processus doit prendre trois minutes maximum.



REMARQUE Si le processus dépasse la limite de 6 minutes, déconnectez l'appareil du port USB, redémarrez-le et recommencez.

- Si la boîte de message affiche le message : *Network certificate package is loaded on device (Le package de certificat réseau est chargé sur l'appareil)*, cliquez sur **OK**.

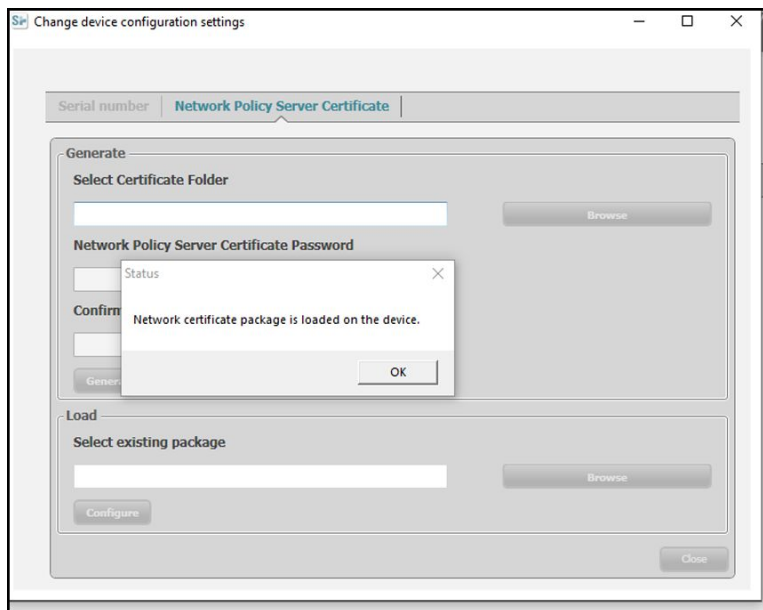


- Fermez l'application Welch Allyn Service Tool.
- Débranchez le câble USB.
- Redémarrez l'appareil.

Vous pouvez maintenant configurer l'appareil pour utiliser des certificats sur le réseau sans fil.

Charger un fichier waclientcert.pim dans le CVSM (avec une radio Newmar) via une clé USB

Le chargement des certificats dans le CVSM s'effectue actuellement à l'aide des ports USB situés dans le panneau de communication.

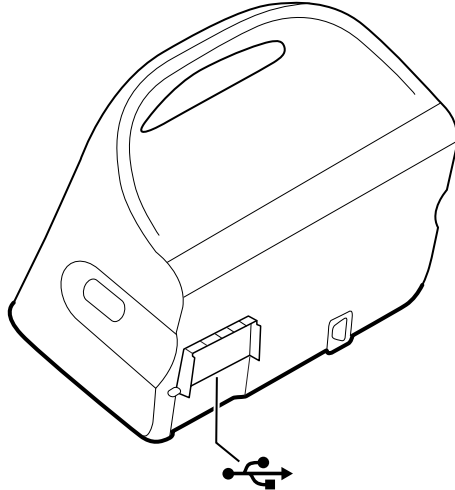


- La clé USB doit être formatée en FAT ou FAT32.
- Les certificats doivent être au format « waclientcert.pim », mais renommés « WIRELESS_CERT.pim » dans le répertoire racine de la clé USB.




REMARQUE Ne pas placer WIRELESS_CERT.pim dans le dossier CA_CERTIFICATES. Le dossier CA_CERTIFICATES n'est pas utilisé pour les certificats radio sans fil.

Les mêmes exigences s'appliquent également pour l'authentification du client et la validation du serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement d'un fichier waclientcert.pim sur l'appareil à l'aide d'une radio Newmar via le WAST (Welch Allyn Service Tool) ».


1. Insérez la clé USB contenant les certificats.
2. Accédez à l'écran **Settings (Paramètres) > Avancé > Enter Password > General > Service**.
3. Appuyez sur **Configure from USB**.

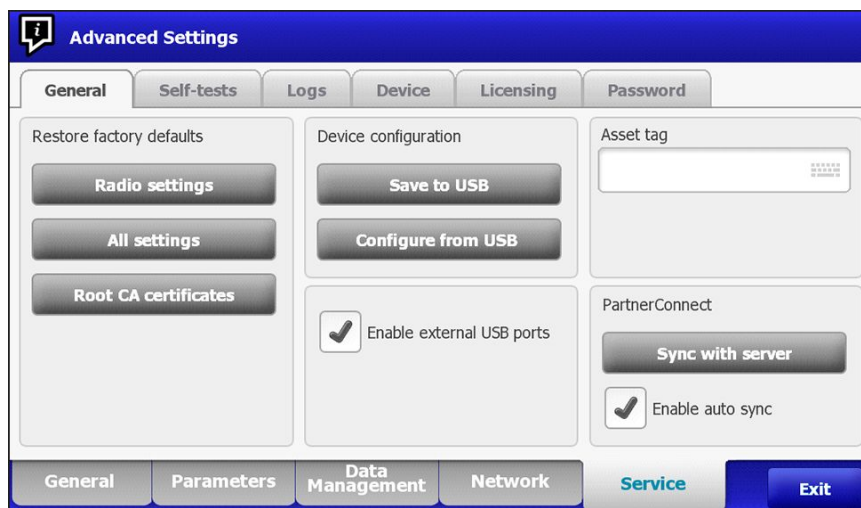

- Si le format des certificats est correct et que la clé USB est correctement formatée, cochez la case **Wireless certificate** (Certificat sans fil) et appuyez sur **OK**.

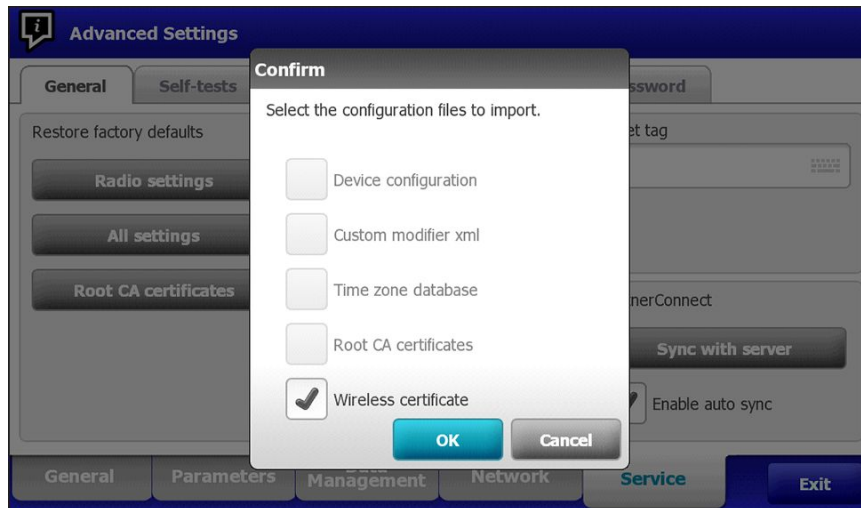

- Appuyez sur **OK** à l'invite : "Select OK to confirm overwrite of existing device configuration or cancel." (Cliquez sur OK pour confirmer le remplacement de la configuration actuelle de l'appareil ou annuler).
- Le CVSM affiche le message "Device will be restarted" (L'appareil va redémarrer) et le système redémarre.
- Après le redémarrage du CVSM, accédez à l'écran **Settings (Paramètres) > Avancé > Réseau > Radio**.
- Réglez les paramètres de réseau en fonction de vos besoins.
- Si le réseau requiert une authentification du serveur, cochez la case **Server validation** (Validation du serveur).

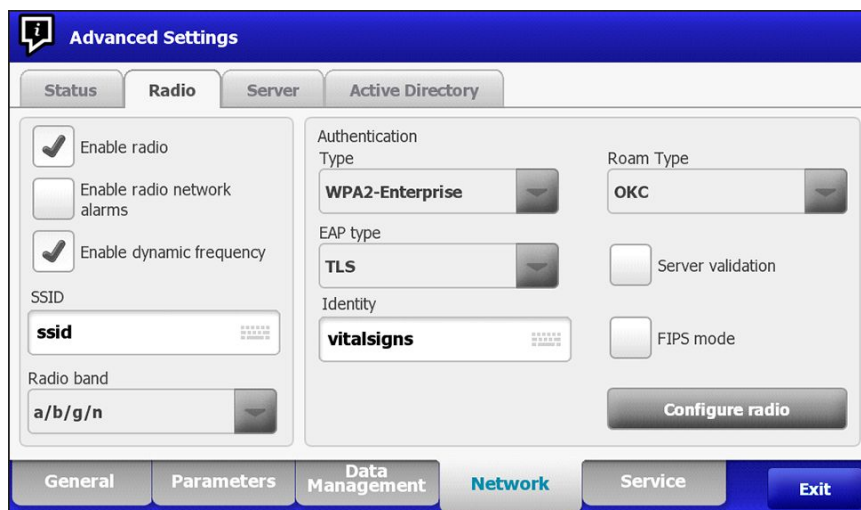

- Appuyez sur **Configure radio**. Si les paramètres de réseau sont corrects, l'appareil s'authentifie sur le réseau.

Le CVSM (Newmar) peut désormais être configuré pour utiliser des certificats sur le réseau sans fil.



REMARQUE Pour le CVSM (Newmar), la fonction « Restore Factory Defaults » (Restaurer les valeurs d'usine par défaut) (« Radio Settings » (Paramètres radio) ou « All Settings » (Tous les paramètres)) supprime les certificats radio sans fil de l'appareil.

Charger des certificats sans fil sur le CVSM/CIWS (avec une radio Lamarr) via l'interface Web

- Pour charger des certificats radio sans fil sur un CVSM/CIWS (Lamarr), le CVSM/CIWS (Lamarr) doit d'abord être connecté à un WLAN WPA2-PSK.
- Assurez-vous que le format des certificats est valide et que leur nom est adéquat :
 - Certificat racine de l'AC : cacert.pem
 - Certificat client : client.p12

À l'aide du navigateur Mozilla Firefox, saisissez l'adresse IP de l'appareil CVSM/CIWS (Lamarr) connecté avec le WLAN WPA2-PSK comme URL :

Exemple: **http://xxx.xxx.xxx.xxx**

Nom d'utilisateur : superadm

Password: Generated via the Password Generator with Lamarr Radio MAC address as input.




REMARQUE To check the status of the wireless radio certificates:
Under the Authentication and Encryption section:


- a. Select the **Certificate status tab**.
- b. Verify that **Customer CA Certificate Chain > Not Present**.
- c. Verify that **Customer Device Certificate and Private Key > Not Present**.

Chargement du certificat racine de l'AC dans la radio Lamarr

1. Chargez le certificat racine de l'AC en sélectionnant l'onglet **Customer CA certificate chain** (Chaîne de certificat de l'AC du client).

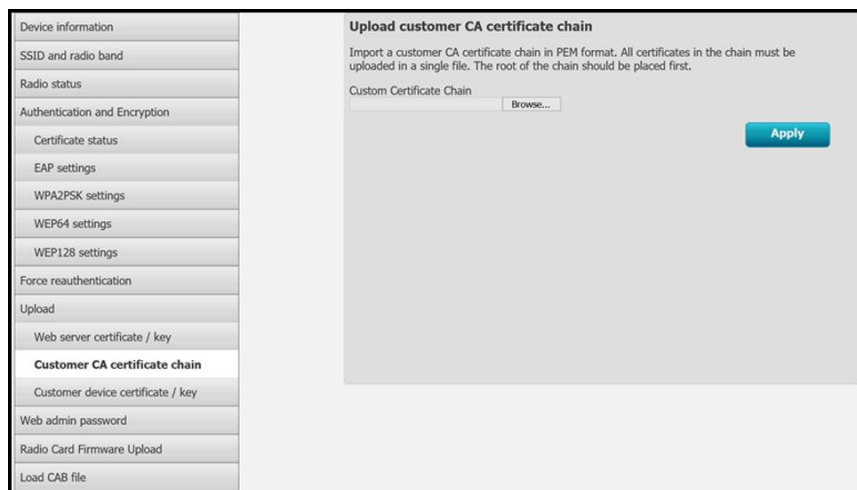


2. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour accéder à l'emplacement du fichier du certificat racine de l'AC sur le PC.
3. Cliquez sur **Appliquer** pour charger les certificats racines de l'AC sur l'appareil.
4. Chargez le certificat client sur la radio Lamarr.
5. Sous l'onglet *Upload* (Charger), cliquez sur l'onglet **Customer device certificate / key** (Certificat de l'appareil du client/clé) pour charger le certificat client.

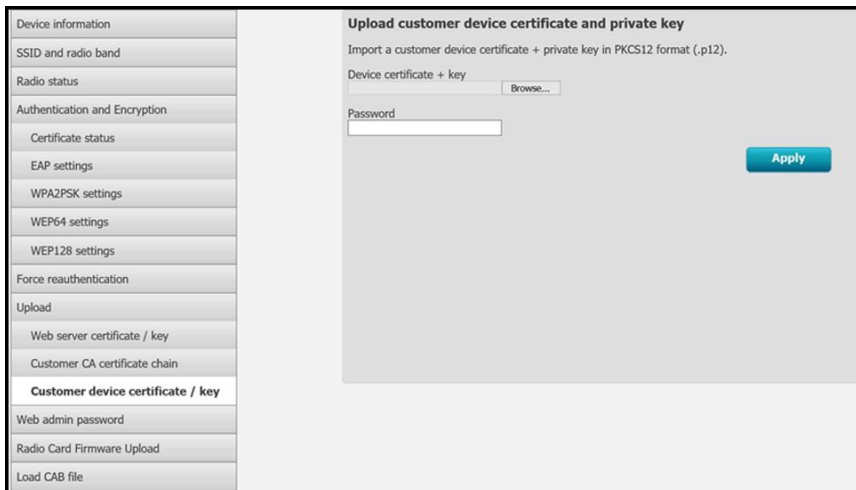


6. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour accéder à l'emplacement du fichier de certificat client sur le PC.
7. Saisissez le **Mot de passe** pour le certificat client.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour charger le certificat client sur l'appareil.

Pour vérifier l'état des certificats radio sans fil :

1. Dans la section Authentication and Encryption (Authentification et chiffrement), cliquez sur l'onglet **Certificate status** (État du certificat) pour afficher Customer CA Certificate Chain (Chaîne de certificats de l'AC du client) > CA Root Certificate (Certificat racine de l'AC), Customer Device Certificate (Certificat de l'appareil du client) et Private Key (Clé privée) > Client Certificate details (Détails du certificat client).

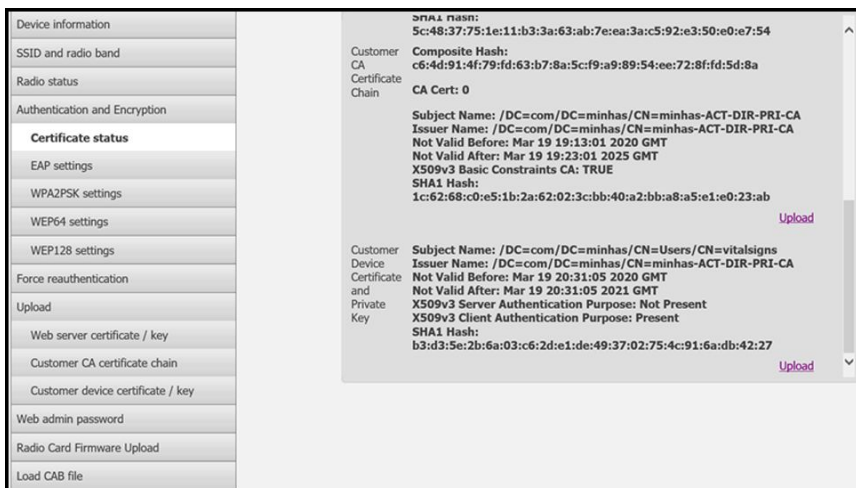

2. Pour confirmer la présence de certificats valides sur l'appareil CVSM/CIWS (Lamarr), configurez la radio sur un SSID avec le type d'authentification EAP-TLS.
Une connexion sans fil réussie avec le SSID confirme la validité des certificats sans fil.

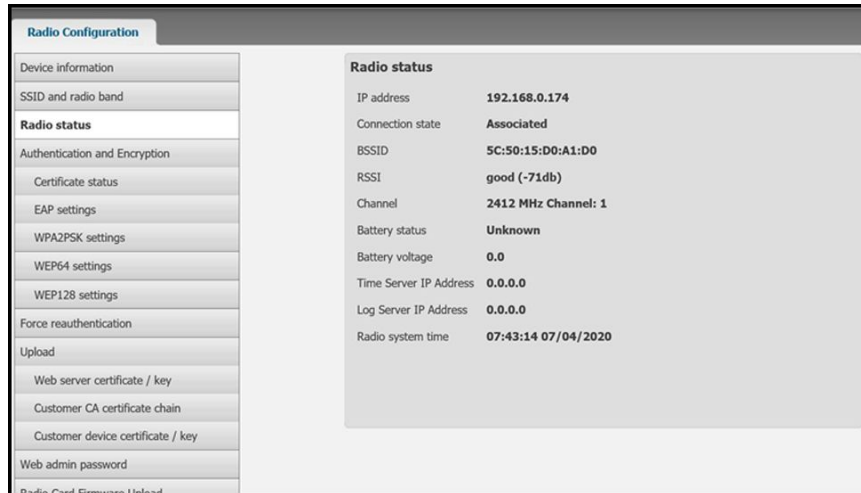

Le CVSM/CIWS (Lamarr) peut désormais être configuré pour utiliser des certificats sur le réseau sans fil.




REMARQUE Pour le CVSM/CIWS (Lamarr), la fonction « Restore Factory Defaults » (Restaurer les valeurs d'usine par défaut) (« Radio Settings » (Paramètres radio) ou « All Settings » (Tous les paramètres)) *ne supprime pas* les certificats radio sans fil de l'appareil.


Importation/installation d'un certificat de serveur Active Directory sur le serveur Active Directory

Ces instructions s'appliquent aux serveurs Active Directory dotés du système d'exploitation Windows Server 2012 et supérieur :

1. Appuyez sur **Windows key + R** (Touche Windows + R) pour afficher la commande Run (Exécuter).
2. Tapez **mmc** et appuyez sur **Enter** (Entrer) pour ouvrir la console de gestion Microsoft.

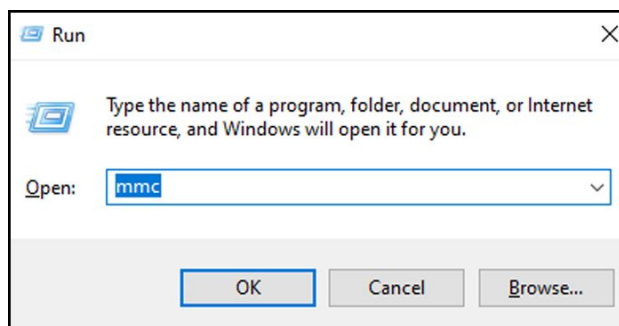


3. Cliquez sur le menu **File** (Fichier) et sélectionnez ensuite **Add/Remove Snap-in...** (Ajouter/Supprimer un outil intégrable...).
4. Sélectionnez **Certificates** (Certificats) dans la liste d'outils intégrables, puis cliquez sur **Ajouter**.

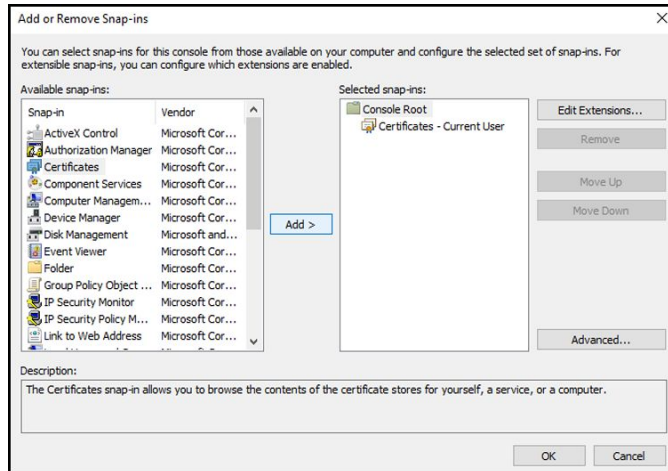


5. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez **Computer account** (Compte d'ordinateur) et cliquez sur **Next** (Suivant).
6. Sélectionnez l'ordinateur local et cliquez sur **Terminer**.
7. Dans la fenêtre « Add or Remove Snap-ins » (Ajouter ou supprimer des outils intégrables), cliquez sur **OK**.

Cliquez sur > pour afficher le dossier de certificats. Lorsque vous ouvrez un dossier de certificats, les certificats s'affichent dans le volet de droite.

8. Importez/installez l'AD Server Certificate (Certificat de serveur AD) dans le dossier suivant : Certificates (Local Computer) > Personal > Certificates (Certificats [Ordinateur local] > Personnel > Certificats).

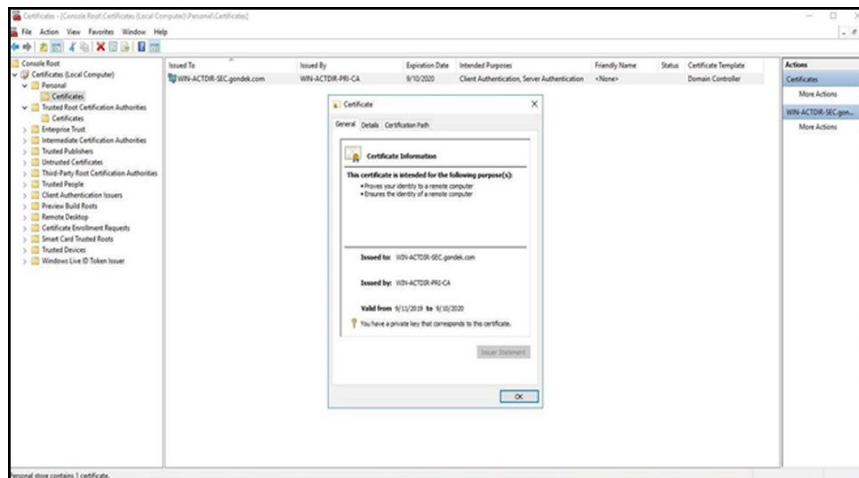


9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Certificates (Certificats) sous Personal (Personnel) et choisissez **All Tasks > Import** (Toutes les tâches > Importer).

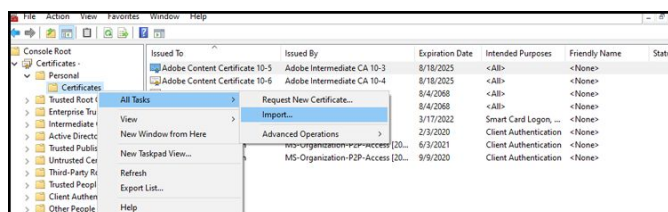

10. Suivez le Certificate Import Wizard (Assistant d'importation de certificat) et indiquez le chemin d'accès à l'Active Directory Server Certificate (Fichier de certificat du serveur Active Directory).




REMARQUE Un exemple de certificat de serveur Active Directory est présenté ci-dessous.

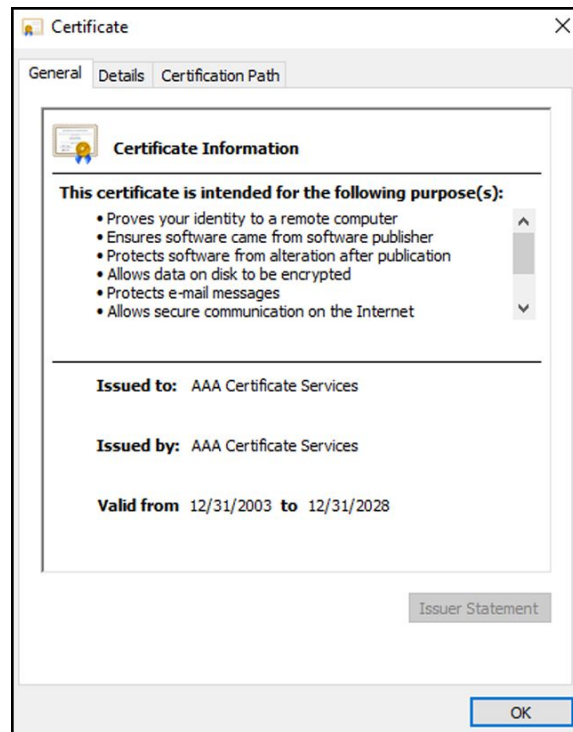


Importation/installation d'un Certificate Authority (CA) Root certificate (Certificat racine d'autorité de certification [CA]) sur le serveur Active Directory

Ces instructions s'appliquent aux serveurs Active Directory dotés du système d'exploitation Windows Server 2012 et supérieur :

1. Appuyez sur **Windows key + R** (Touche Windows + R) pour afficher la commande Run (Exécuter).
2. Tapez **mmc** et appuyez sur **Enter** (Entrer) pour ouvrir la console de gestion Microsoft.

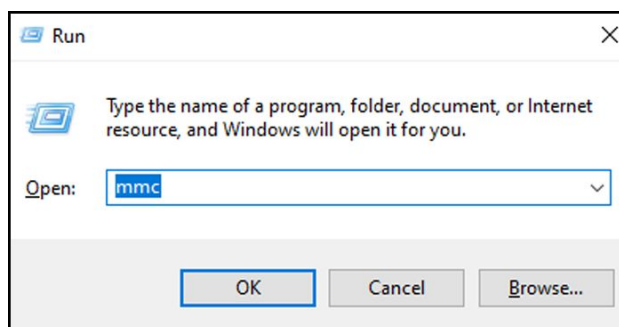


3. Cliquez sur le menu **File** (Fichier) et sélectionnez **Add/Remove Snap-in...** (Ajouter/Supprimer un outil intégrable...).
4. Sélectionnez **Certificates** (Certificats) dans la liste d'outils intégrables, puis cliquez sur **Ajouter**.

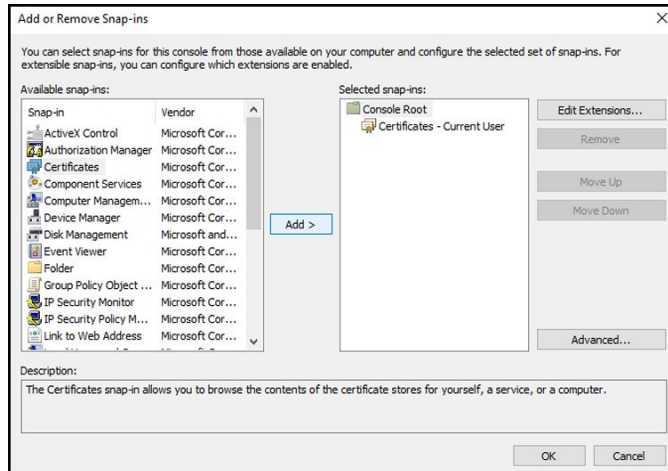


5. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez **Computer account** (Compte d'ordinateur) et cliquez sur **Next** (Suivant).
6. Sélectionnez l'ordinateur local et cliquez sur **Terminer**.
7. Dans la fenêtre « Add or Remove Snap-ins » (Ajouter ou supprimer des outils intégrables), cliquez sur **OK**.

Cliquez sur > pour afficher le dossier de certificats. Lorsque vous ouvrez un dossier de certificats, les certificats s'affichent dans le volet de droite.

8. Importez/installez le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) dans le dossier suivant : Certificates (Local Computer) > Trusted Root Certification Authorities > Certificates (Certificats [ordinateur local] > Autorités de certification racine fiables > Certificats).

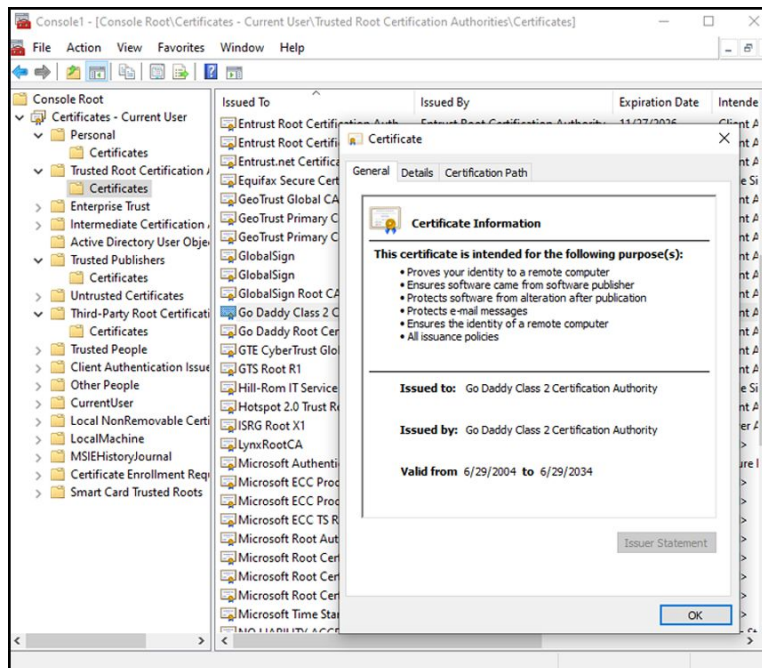


9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Certificates (Certificats) sous Trusted Root Certification Authorities (Autorités de certification racine fiables) et choisissez **All Tasks > Import** (Toutes tâches > Importer).

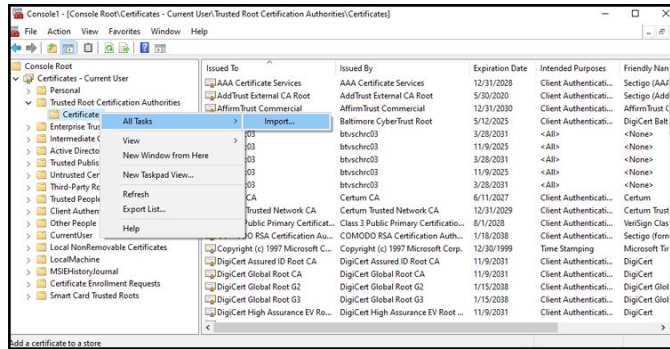

10. Suivez le Certificate Import Wizard (Assistant d'importation de certificats) et indiquez le chemin d'accès au fichier de CA Root Certificate (Certificat racine de CA).



REMARQUE Un exemple de CA Root Certificate (Certificat racine de CA) est présenté ci-dessous.

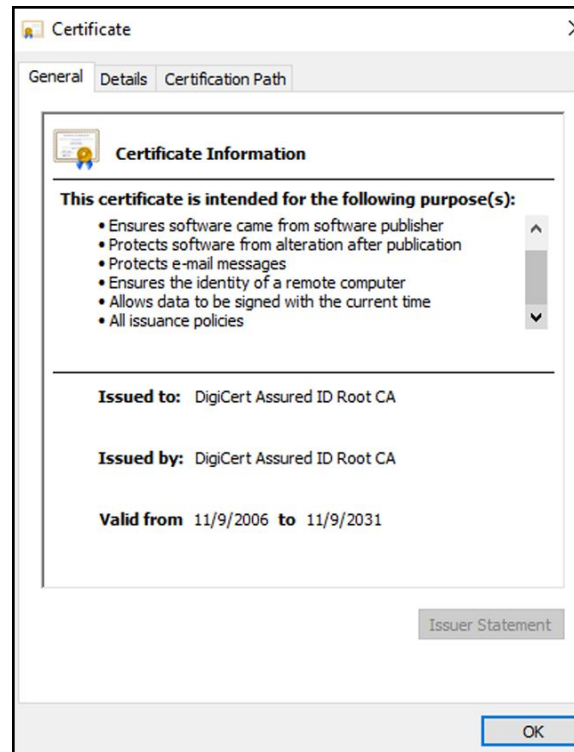

Importation/installation d'un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil (y compris CSM, CVSM et CIWS)

Utilisez l'application Web de l'outil de configuration WA CSM pour installer ou importer un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil. Le Config file (Fichier de configuration) (*-signed.waconfig) est généré par l'outil de configuration. Reportez-vous aux sections « Connexion à l'outil de configuration » et « Configuration d'un certificat racine de CA à l'aide de l'outil de configuration ».

Créations de certificats d'autorité de certification AD CS tiers

Les Third Party Certificates (Certificats tiers) (AD Server [Serveur AD] et CA Root [Racine CA]) doivent être demandés à l'autorité de certification tierce avec les informations requises sur le serveur Active Directory.

Les AD CS Certificates (Certificats AD CS) (AD Server [Serveur AD] et CA Root [Racine CA]) sont générés automatiquement lors de l'installation et de la configuration de l'AC CS Role (Rôle AC CS) sur le serveur AD. Aucun processus spécifique n'est requis après l'installation et la configuration de l'AC CS Role (Rôle AC CS) sur le serveur AD pour générer ces certificats.

HL7 prêt à l'emploi - Détails de la configuration

Configuration HL7 (connexion directe à l'EMR)

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter Password**.
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Réseau**.
3. Appuyez sur l'onglet **Serveur**.
4. Sélectionnez **Entrée manuelle** dans la liste déroulante de la Méthode de connectivité.
5. Sélectionnez **Direct EMR Connection** (Connexion directe à l'EMR) dans la liste déroulante Serveur.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' dialog box with the 'Active Directory' tab active. It contains the following fields and controls:

- Episodic server host name or IP address:** WIN-MIRTH-SRV.swtest.com
- Port:** 6201
- Data encryption:**
- Authentication:**
- Continuous server host name or IP address:** (empty)
- Port:** 291
- Data encryption:**
- Authentication:**
- Service server host name or IP address:** (empty)
- Port:** 283
- Data encryption:**
- Authentication:**
- Connectivity:** Manual entry
- Server:** Direct EMR connection
- Buttons:** Restore defaults, Test
- Bottom Navigation:** General, Parameters, Data Management, Network (selected), Service, Exit

6. Sélectionnez **Data encryption** (Chiffrement des données) pour activer ou désactiver l'option de sécurité

Si le chiffrement des données est activé, l'authentification du serveur peut être activée ou désactivée. Le chiffrement des données est destiné à assurer la sécurité des données pendant leur transfert sur un réseau.



REMARQUE Cochez ou décochez le chiffrement des données en fonction de la connexion prévue : sécurisée (TLS) ou non sécurisée.

7. Sélectionnez **Authentication** (Authentification) pour activer ou désactiver l'option d'authentification du serveur.



REMARQUE L'authentification du serveur consiste à confirmer l'identité du serveur EMR en recevant un certificat de serveur depuis le serveur et en le comparant aux certificats racine de l'AC installés sur l'appareil.

- Si cette case est cochée, confirmez que le certificat racine de l'AC est chargé sur l'appareil et que le certificat de serveur est chargé sur le serveur EMR pour que la connexion soit établie.
 - Si cette case n'est pas cochée, le certificat racine de l'AC sur l'appareil et le certificat de serveur sur le serveur EMR ne sont pas requis pour que la connexion soit établie.
8. Appuyez sur le clavier pour entrer une **IP Address** (Adresse IP), un **Episodic server host name** (Nom d'hôte de serveur ponctuel) ou un **FQDN** (Nom de domaine pleinement qualifié) du serveur EMR dans le champ *Episodic server host name or IP address (Nom d'hôte ou adresse IP du serveur ponctuel)*.
 9. Appuyez sur le clavier pour entrer une **IP Address** (Adresse IP), un **Continuous server host name** (Nom d'hôte de serveur continu), ou un **FQDN** (Nom de domaine pleinement qualifié) dans le champ *Continuous server host name or IP Address (Nom d'hôte ou adresse IP du serveur continu)* qui est en attente d'une connexion.
 10. Appuyez sur le clavier pour entrer une **IP Address** (Adresse IP), un **Service server host name** (Nom d'hôte de serveur de service) ou un **FQDN** (Nom de domaine pleinement qualifié) du serveur de service dans le champ *Service server host name or IP address (Nom d'hôte ou adresse IP du serveur de service)*.
 11. Si nécessaire, appuyez sur le clavier pour entrer un numéro de **Port** dans le champ *Port* pour le serveur ponctuel, continu ou de service qui est en attente d'une connexion.
 12. Appuyez sur **Test** pour tester la connexion de l'appareil au serveur EMR.

Serveur NTP - Détails de la configuration


Configurer le serveur NTP

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
 - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
 - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
 - c. Appuyez sur **Enter password**.
 - d. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Date/Heure**.
3. Cochez la case **Enable NTP** pour activer le NTP.




REMARQUE Cochez l'option *Enable NTP (Activer NTP)* comme première étape de connexion au serveur NTP pour synchroniser l'horloge Date/heure de l'appareil sur le réseau interne ou externe (Internet).

4. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur NTP.
Pour saisir ces informations, appuyez sur le clavier dans le champ Nom d'hôte ou adresse IP et entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur NTP.
5. Appuyez sur **Test** pour tester la connexion de l'appareil au serveur NTP et pour synchroniser la date et l'heure de l'appareil.

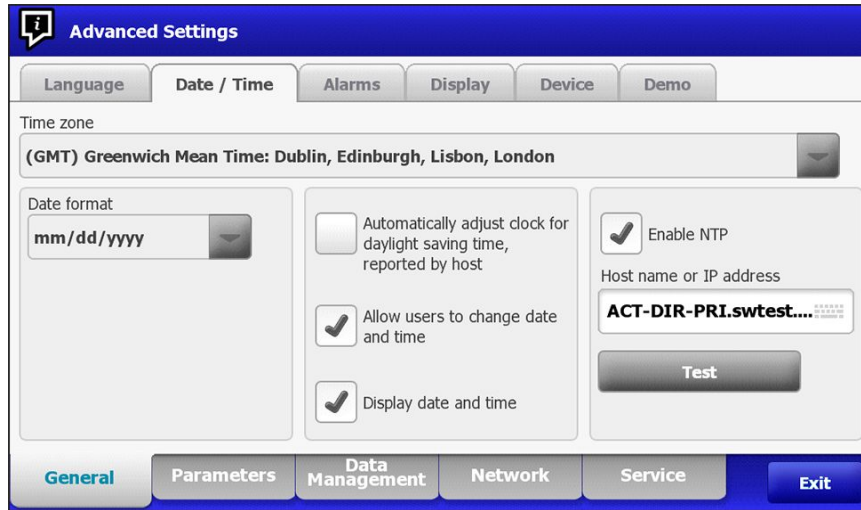

Flux de travail du projet

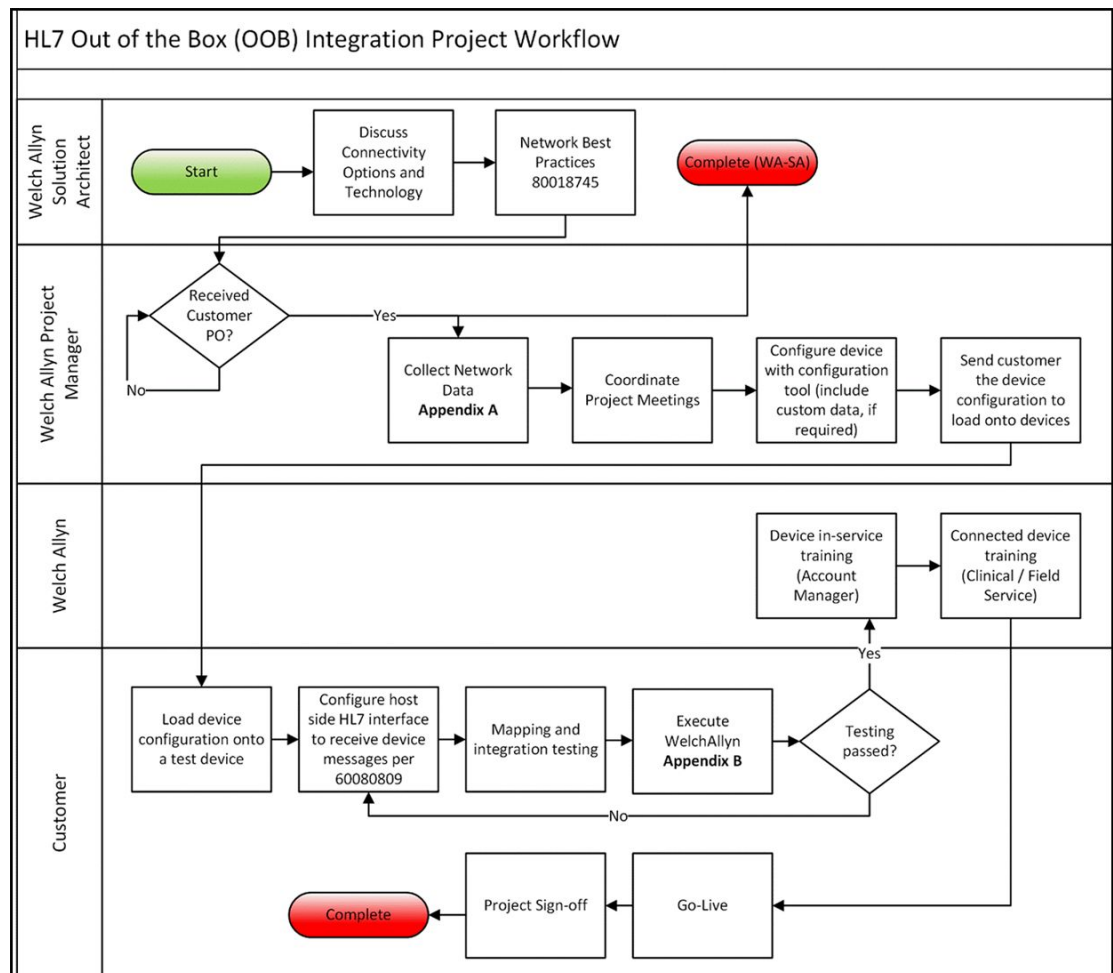

Dépannage

Problème	Cause possible	Action recommandée
Échec Date/Time « Test network connection » (« Tester la connexion réseau » Date/heure)	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > « IP address » (Paramètres > Avancé > « Adresse IP »).
	L'appareil ne dispose pas d'un serveur NTP correctement configuré	Vérifiez la configuration du serveur NTP et assurez-vous que le NTP est correctement configuré.
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion NTP correctement configurée	Vérifiez la configuration de Date/Time (Date/Heure) sur l'appareil : Settings > Advanced > General > Date/Time (Paramètres > Avancé > Général > Date/heure) : a. « Enable NTP » (Activer NTP) est cochée. b. L'adresse de serveur NTP appropriée apparaît dans le champ « Domain » (Domain [Domaine], FQDN ou IP Address [Adresse IP]).
	L'appareil n'est pas connecté à Internet	Connectez l'appareil à Internet. (Une connexion Internet est requise lorsque le serveur NTP se trouve hors du réseau local.)
	Votre pare-feu réseau bloque le port UDP 123	Vérifiez que le port NTP du réseau est ouvert : généralement, UDP 123.
	Le chemin d'accès au serveur NTP ne peut pas être atteint	Le chemin d'accès au serveur NTP ne peut pas être atteint
Échec Server « Test network connection » (« Tester la connexion réseau » Serveur)	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur HL7 correctement configurée	Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings > Advanced > Network > Server (Paramètres > Avancé > Réseau > Serveur) : a. Server connectivity (Connectivité serveur) = Direct EMR Connection (Connexion EMR directe). b. Host IP (IP hôte) est sélectionné.

Problème	Cause possible	Action recommandée
		<p>c. L'adresse correcte apparaît dans le champ Host Address (Adresse d'hôte) (FQDN ou adresse IP).</p> <p>d. Le port approprié apparaît dans le champ Host Port (Port hôte).</p>
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
	Votre pare-feu réseau bloque le port TCP utilisé pour la connexion hôte HL7	Vérifiez que le port hôte TCP du réseau est ouvert.
	Impossible d'accéder au chemin d'accès au serveur EMR	Vérifiez la topologie du réseau pour vous assurer qu'il existe un chemin valide entre l'appareil et le serveur EMR.
Échec Active Directory « Test network connection » (« Tester la connexion réseau » Active Directory)	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur Active Directory correctement configurée	<p>Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings > Advanced > Network > Active Directory (Paramètres > Avancé > Réseau > Active Directory :</p> <p>a. « Enable Active Directory » (Activer Active Directory) est sélectionné.</p> <p>b. Le nom de domaine approprié apparaît dans le champ « Domain Name » (Nom de domaine).</p> <p>c. Le nom de groupe approprié apparaît dans le champ « Group » (Groupe).</p> <p>d. Vous utilisez le bon Clinician ID type (Type d'ID de médecin), il correspond à ce que vous scannez et le médecin se trouve dans Active Directory.</p> <p>e. Vous utilisez le bon Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification).</p>

Problème	Cause possible	Action recommandée
		f. Vous utilisez le bon Authentication password (Mot de passe d'authentification).
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
	Le chemin d'accès au serveur Active Directory ne peut pas être atteint	Vérifiez la topologie du réseau pour vous assurer qu'il existe un chemin valide entre l'appareil et le serveur Active Directory.
La date/heure sur l'appareil est incorrecte	Le fuseau horaire n'est pas configuré correctement	Vérifiez que la configuration du fuseau horaire de l'appareil est réglée sur le bon fuseau horaire.
	Le réglage DST n'est pas configuré correctement	Configurez le paramètre DST de manière appropriée (activez ou désactivez le réglage DST en fonction de l'emplacement).
	L'appareil synchronise l'heure avec une source différente de celle du reste du réseau	Configurez l'appareil pour configurer sa date et son heure sur la même source que le reste du réseau.
Échec pour identifier un patient	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur HL7 correctement configurée	Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings > Advanced > Network > Server (Paramètres > Avancé > Réseau > Serveur) : a. « Server connectivity » (Connectivité serveur) = Direct EMR Connection (Connexion EMR directe). b. « Host IP » (IP hôte) est sélectionné. c. L'adresse correcte apparaît dans le champ « Host Address » (Adresse d'hôte) (FQDN ou adresse IP). d. Le port approprié apparaît dans le champ « Host Port » (Port hôte).

Problème	Cause possible	Action recommandée
	L'ID du patient scanné ne représente pas le bon code-barres	Vérifiez que l'ID du patient scanné représente un code-barres d'ID patient valide.
	L'ID patient scanné est introuvable dans la base de données hôte contenant le recensement du patient	Vérifiez que l'ID patient scanné se trouve dans la base de données hôte.
	L'hôte HL7 n'est pas correctement configuré pour recevoir les demandes de requête de recensement	Vérifiez que l'hôte est configuré pour recevoir des demandes de requêtes de recensement sur le port configuré.
	Votre pare-feu réseau bloque le port TCP utilisé pour la connexion hôte HL7	Vérifiez que le port hôte TCP du réseau est ouvert.
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
Échec de l'authentification d'un utilisateur	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'ID de médecin scanné ne représente pas le bon code-barres	Vérifiez que le Clinician ID (ID de médecin) scanné représente un code-barres valide.
	Le Clinician ID (ID de médecin) scanné ne figure pas dans la base de données d'authentification des utilisateurs	Vérifiez que le Clinician ID (ID de médecin) scanné se trouve dans la base de données d'authentification des utilisateurs.
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur Active Directory correctement configurée	Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings > Advanced > Network > Active Directory (Paramètres > Avancé > Réseau > Active Directory : a. « Enable Active Directory » (Activer Active Directory) est sélectionné. b. Le nom de domaine approprié apparaît dans le champ « Domain Name » (Nom de domaine).

Problème	Cause possible	Action recommandée
		<p>c. Le nom de groupe approprié apparaît dans le champ « Group » (Groupe).</p> <p>d. Vous utilisez le bon Clinician ID type (Type d'ID de médecin), il correspond à ce que vous scannez et le médecin se trouve dans Active Directory.</p> <p>e. Vous utilisez le bon Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification).</p>
	L'ID d'utilisateur saisi n'est pas valide	Vérifiez que l'ID d'utilisateur saisi est correct et qu'il est valide dans l'Active Directory.
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
Échec de l'envoi des paramètres vitaux	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur HL7 correctement configurée	<p>Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings > Advanced > Network > Server (Paramètres > Avancé > Réseau > Serveur) :</p> <p>a. Server connectivity (Connectivité serveur) = Direct EMR Connection (Connexion EMR directe).</p> <p>b. Host IP (IP hôte) est sélectionné.</p> <p>c. L'adresse correcte apparaît dans le champ Host Address (Adresse d'hôte) (FQDN ou adresse IP).</p> <p>d. Le port approprié apparaît dans le champ Host Port (Port hôte).</p>
	Votre pare-feu réseau bloque le port TCP utilisé pour la connexion hôte HL7	Vérifiez que le port hôte TCP du réseau est ouvert.
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur

Problème	Cause possible	Action recommandée
		le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
	Les données personnalisées configurées ne peuvent pas être importées dans l'EMR	Vérifiez la configuration des données personnalisées et assurez-vous que les champs destinés à l'EMR correspondent aux attentes de l'EMR.
	La réponse de l'EMR ne correspond pas à l'interface de l'appareil	Vérifiez la réponse de l'EMR à la spécification d'interface HL7 de l'appareil.
	L'EMR a rejeté le Clinician ID (ID de médecin)	Vérifiez que le Clinician ID (ID de médecin) envoyé par l'appareil représente un Clinician ID (ID de médecin) valide pour l'EMR.
	L'EMR ou le moteur d'interface est hors service	Appelez votre administrateur système ou d'EMR.
	Les données ont été rejetées pour l'une des raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Patient ID (ID patient) introuvable • Clinician ID (ID de médecin) introuvable • date/heure des paramètres vitaux dans le futur • l'appareil a reçu une notification de « message timeout » (délai d'attente de message) 	Vérifiez l'EMR ou les journaux de messages du moteur d'interface pour déterminer la cause principale.

Dépannage du CVSM/CIWS (Newmar et Lamarr)

Le CVSM/CIWS ne dispose pas d'une connexion directe à la radio via une connexion de débogage, tous les dépannages seront donc effectués sur l'appareil.

Vérifier si un certificat racine de l'AC est chargé sur la radio

Pour vérifier si le certificat racine de l'AC est chargé, accédez à : Avancé > Réseau > Radio

- Activez la radio sélectionnée
- ESSID = Entrez un SSID WPA2-Enterprise
- Définissez le type d'authentification sur WPA2-Enterprise (Newmar) ou WPA2-AES (Lamarr)
- Définissez le type EAP sur PEAP-MSCHAPv2 (Newmar) ou PEAP (Lamarr)
- Cochez la case Validation du serveur

(Newmar uniquement - Lamarr ne dispose pas de l'option de validation du serveur)

- Entrez une identité et un mot de passe valides
- Appuyez sur **Configure radio**

Newmar

Si le message « *Configuration non valide sans certificats. Installez les certificats et réessayez.* » s'affiche dans la bannière, le certificat racine de l'AC n'est pas chargé.

Lamarr

Si le CVSM/CIWS ne se connecte pas au WLAN, le certificat racine de l'AC n'est pas chargé.

Vérifier si un certificat client est chargé

Pour vérifier si le certificat client est chargé, accédez à : Avancé > Réseau > Radio

- Activez la radio sélectionnée
- ESSID = Entrez un SSID WPA2-Enterprise
- Définissez le type d'authentification sur WPA2-Enterprise (Newmar) ou WPA2-AES (Lamarr)
- Définissez le type EAP sur TLS
- Cochez la case Validation du serveur

(Newmar uniquement - Lamarr ne dispose pas de l'option de validation du serveur)

- Entrez une identité valide
- Appuyez sur **Configure radio**

Newmar

Si le message « *Configuration non valide sans certificats. Installez les certificats et réessayez.* » s'affiche dans la bannière, le certificat client n'est pas chargé.

Lamarr

Si le CVSM/CIWS ne se connecte pas au WLAN, le certificat racine de l'AC n'est pas chargé.



REMARQUE La radio Newmar version 2.00.02 encode le fichier de mot de passe stocké dans : /etc/welchallyn/clientpassword ou /pacpassword.

Fiche d'entretien

Imprimez les pages *Fiche d'entretien* pour y consigner les résultats de vos tests.

Date :	Heure :
Nom de l'appareil :	Numéro de série :
Technicien :	Version de l'outil d'entretien :

Test de fuite

Test de fuite	Spécification	Mesure réelle	Réussi te	Échec
Test de fuite :	Max : 5			

Test de surpression

Test de surpression	Spécification	Mesure réelle
Test de surpression :	Mode adulte : 280 ... 329	
	Mode nouveau-né : 130 ... 164	

Vérification de la précision de la PNI

Pression cible ± 5 mmHg	Manomètre	Outil d'entretien	Spécification	Réussi te	Échec
0 mmHg	mmHg	mmHg	± 1 mmHg		

50 mmHg	mmHg	mmHg	± 3 mmHg
150 mmHg	mmHg	mmHg	± 3 mmHg
250 mmHg	mmHg	mmHg	± 3 mmHg

Tests Masimo SpO₂, SpHb, de fréquence cardiaque et FR

Test	Spécification	Mesure réelle	Résultat	
			ite	Échec
Fréquence cardiaque SpO ₂ 61 bpm	Fréquence de pouls 61 ± 1 bpm 59 à 61 bpm	bpm		
Saturation du sang artériel en oxygène SpO ₂ 81 %	Saturation 81 % ± 3 % 78 à 84 %	%		
SpHb g/dl 14 g/dl	SpHb 14 g/dl ± 1 g/dl 13 g/dl à 15 g/dl	g/dl		
FR	Mesure entre 5 et 16 respirations par minute	respirations par minute		

Nellcor SpO₂ et test de fréquence cardiaque

Test	Spécification	Mesure réelle	Résultat	
			ite	Échec
Fréquence cardiaque SpO ₂ 60 bpm	Fréquence de pouls 60 ± 1 bpm 59 à 61 bpm	bpm		
Saturation du sang artériel en oxygène SpO ₂ 90 %	Saturation 90 % ± 1 89 à 91 %	%		

Test de température avec la clé d'étalonnage pour SureTemp Plus

Test de température	Spécification $\pm 0,1$ °C		Mesure réelle	Réussite	Échec
97,3 °F (36,3 °C)	97,1 à 97,5 °F	36,2 à 36,4 °C	°F ou °C		

Test du module de thermométrie SureTemp Plus

N° d'identification du testeur d'étalonnage 9600 Plus	Date d'étalonnage	Date d'échéance du prochain étalonnage

Température testée	Spécification	Plage	Mesure réelle	Réussite	Échec
96,8 °F (36,0 °C)	$\pm 0,3$ °F ($\pm 0,2$ °C)	96,5 °F à 97,1 °F 35,8 °C à 36,2 °C	°F ou °C		
101,3 °F (38,5 °C)	$\pm 0,2$ °F ($\pm 0,1$ °C)	101,1 °F à 101,5 °F 38,4 °C à 38,6 °C	°F ou °C		
105,8 °F (41,0 °C)	$\pm 0,3$ °F ($\pm 0,2$ °C)	105,5 °F à 106,1 °F 40,8 °C à 41,2 °C	°F ou °C		

Test du thermomètre Braun ThermoScan PRO 4000 ou PRO 6000

N° d'identification du testeur d'étalonnage 9600 Plus	Date d'étalonnage	Date d'échéance du prochain étalonnage

Température testée	Spécification $\pm 0,2$ °C		Mesure réelle	Réussite	Échec
96,8 °F (36,0 °C)	96,4 °F à 97,2 °F	35,8 °C à 36,2 °C	°F ou °C		
101,3 °F (38,5 °C)	100,9 °F à 101,7 °F	38,3 °C à 38,7 °C	°F ou °C		
105,8 °F (41,0 °C)	105,4 °F à 106,2 °F	40,8 °C à 41,2 °C	°F ou °C		

Dossier du test fonctionnel ECG

Inspection du module et des câbles

Étape	Critères d'acceptation	Réussite	Échec
1	Absence de pièces manquantes, coupures, fissures ou décoloration des câbles patient de l'ECG		
2	Absence de pièces manquantes, coupures, fissures ou décoloration du câble USB		
3	Absence de débris de plastique, fissures, décoloration, pièces manquantes, ou cliquetis du module		

Test des voyants du module ECG

Étape	Critères d'acceptation	Réussite	Échec
1	Le voyant du module ECG est éteint		
3	Le voyant du module ECG est orange puis vert fixe		
5	Le voyant du module ECG clignote en vert		

Courbe et test de fréquence cardiaque

Étape	Critères d'acceptation	Fréquence cardiaque affichée	Réussite	Échec
3	Courbe présente (rythme sinusal normal)	Dérivation I FC	♥/min	
5	Fréquence cardiaque 80 ♥/min +/- 3 ♥/min	Dérivation II FC	♥/min	
5		Dérivation III FC	♥/min	
5		Dérivation V FC	♥/min	

Test d'alarme des dérivations désactivées

Étape	Critères d'acceptation	Dérivation	Réussite	Échec
1	L'appareil Connex affiche les messages suivants :	RA ou R		
3	Alerte : impossible d'analyser l'ECG.	LA ou L		
	Alarme technique : dérivation désactivée			

3	RL ou N
3	LL ou F
3	V1 ou C1

Test de respiration

Étape	Critères d'acceptation	FR	Réussite	Échec
6	La fréquence respiratoire est de 15 BPM +/- 2 BPM		BPM	

Test d'alarme d'arythmie

Étape	Critères d'acceptation	Retard	Réussite	Échec
5	Alarme d'asystolie déclenchée ≥ 4 secondes		secondes	

Test de détection du stimulateur cardiaque

Étape	Critères d'acceptation	Dérivation	Réussite	Échec
10	Le marqueur du pic de stimulation apparaît avant chaque complexe QRS	Dérivation I		
11		Dérivation II		
11		Dérivation III		
11		Dérivation V		

Étalonnage du CO2 ou vérification de l'étalonnage

	CO2 mesuré	Réussite	Échec
CO2 _____ %			
Étalonnage du CO2 réussi sur :			

Vérification du Capteur EarlySense

	Présent	Absent
Volet Mouvement		
Sensibilité de sortie		

